




Gracias por adquirir el brazalete HEM-CL24 de Omron®. Este brazalete es un accesorio opcional usado con los monitores de presión arterial Omron vendidos con brazalete con anillo D. El HEM-CL24 se adapta a un rango circunferencia de brazo adulto tamaño grande de 32 cm a 42 cm (13" - 17").

CÓMO COLOCAR EL BRAZALETE

1. Asegúrese de que el enchufe macho del aire esté correctamente colocado en el monitor de presión arterial.
2. Qítense la vestimenta ajustada de la parte superior del brazo izquierdo.
3. Coloque el brazalete en la parte superior del brazo izquierdo de modo que la flecha quede centrada en la parte interna del brazo y alineada con el dedo medio. El tubo de aire baja por la parte interna del brazo. La parte inferior del brazalete debe quedar aproximadamente a 1 - 2 cm (1/2") por encima del codo.

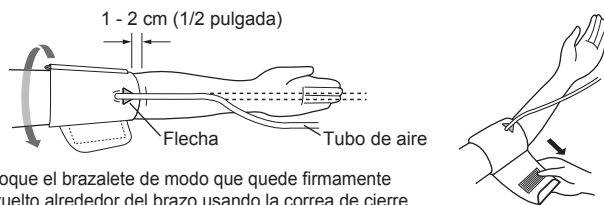

4. Coloque el brazalete de modo que quede firmemente envuelto alrededor del brazo usando la correa de cierre.

NOTA: Consulte el manual de instrucciones provisto con el monitor de presión arterial para instrucciones completas sobre la operación del dispositivo.

ANTES DE TOMAR UNA MEDICIÓN

A fin de garantizar una lectura confiable, siga las recomendaciones que se enumeran a continuación:

1. Evite comer, tomar bebidas alcohólicas, fumar, hacer ejercicio y bañarse 30 minutos antes de tomar una medición. Descanse durante al menos 15 minutos antes de tomar la medición.
2. El estrés eleva la presión arterial. Evite tomar mediciones en momentos de estrés.
3. Las mediciones se deben llevar a cabo en un lugar tranquilo.
4. Qítense la vestimenta ajustada del brazo.
5. Siéntese en una silla con los pies apoyados sobre el piso. Coloque su brazo sobre una mesa de modo que el brazalete quede al mismo nivel que su corazón.
6. Quédese quieto y no hable durante la medición.

7. Lleve un registro de las lecturas de presión arterial y del pulso para que las vea su médico. Una sola medición puede no brindar una indicación precisa de su verdadera presión arterial. Es necesario tomar varias mediciones y registrarlas durante un período de tiempo. Trate de medir su presión arterial todos los días casi a la misma hora para obtener medidas consistentes.
8. Espere 2-3 minutos entre cada medición. El tiempo de espera permite que las arterias vuelvan a la condición en la que estaban antes de tomar la medición de la presión. Es posible que sea necesario aumentar el tiempo de espera según sus características fisiológicas particulares.

GARANTÍA LIMITADA

Su brazalete para brazo con anillo D HEM-CL24, está garantizada como libre de defectos en materiales y mano de obra que se presenten dentro de 1 año de la fecha de compra, si se usa de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con su brazalete para brazo con anillo D HEM-CL24. La garantía arriba mencionada se extiende únicamente al comprador original.

A consideración nuestra, repararemos o reemplazaremos, sin costo alguno, cualquier equipo cubierto por la antedicha garantía. La reparación o el reemplazo son nuestra única responsabilidad y su único recurso bajo la garantía provista.

Si su equipo requiere servicio dentro del plazo de la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado de Omron en su país.

LA GARANTÍA ANTES MENCIONADA ES LA ÚNICA GARANTÍA PROVISTA POR OMRON EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE OMRON NIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA PROPÓSITOS PARTICULARES. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y OTROS TÉRMINOS IMPUESTOS POR LEY, SI EXISTIERAN, SE LIMITAN AL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA.

OMRON NO ES RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO, NI POR NINGÚN OTRO COSTO, GASTO O DAÑO ESPECIAL, FORTUITO, CONSECUENTE O INDIRECTO.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varíen por jurisdicción. Debido a especiales requisitos locales, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones antes mencionadas no apliquen en su caso.

Póngase en contacto con su distribuidor local de Omron Healthcare u oficina local de Omron Healthcare (solamente Brasil y México) para servicios de garantía y reparación.

Distribuido por:
OMRON HEALTHCARE, INC.
U.S.A.

www.omronhealthcare.com


© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.
Hecho en China



Obrigado por ter comprado a braçadeira Omron® HEM-CL24. Esta braçadeira é um acessório opcional usado com os monitores de pressão arterial com braçadeira de anel D. A HEM-CL24 se adapta a braços de adultos, com circunferências de 32 cm a 42 cm (13 pol. a 17 pol.).

COMO COLOCAR A BRAÇADEIRA

1. Certifique-se de que o plugue de ar esteja inserido firmemente no monitor de pressão arterial.
2. Afrouxe a manga da roupa no braço esquerdo.
3. Coloque a braçadeira na parte superior do braço esquerdo de modo que a seta fique centralizada na parte interna do braço e alinhada com seu dedo médio. O tubo de ar corre ao longo da parte interna do seu braço. A parte inferior da braçadeira deve ficar cerca de 1-2 cm acima do cotovelo.

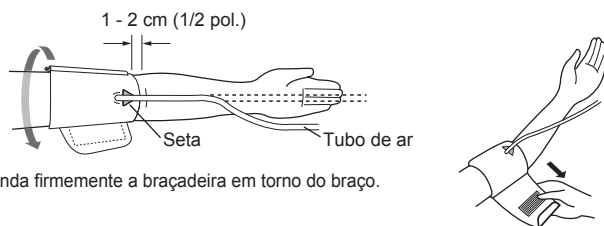

4. Prenda firmemente a braçadeira em torno do braço.

OBSERVAÇÃO: Consulte o manual de instruções fornecido com o monitor de pressão arterial para obter as instruções completas sobre os cuidados e o funcionamento do dispositivo.

ANTES DE MEDIR A PRESSÃO

Para assegurar uma leitura confiável, siga estas recomendações:

1. Evite comer, tomar bebidas alcoólicas, fumar, exercitar-se e tomar banho 30 minutos antes de fazer a medição. Descanse por ao menos 15 minutos antes de realizar uma medição.
2. O estresse aumenta a pressão arterial. Evite medições durante períodos de estresse.
3. As medições devem ser feitas em um local calmo.
4. Afrouxe a manga da roupa no braço esquerdo.
5. Sente-se em uma cadeira e mantenha os pés apoiados no chão. Repouse o braço sobre uma mesa para que a braçadeira fique no mesmo nível do coração.

6. Permaneça imóvel e não fale durante a medição.
7. Mantenha um registro das leituras de sua pressão arterial e de seus batimentos cardíacos para seu médico. Uma única medição não fornece uma indicação precisa de sua verdadeira pressão arterial. É necessário realizar e registrar várias medições ao longo de um período. Tente medir sua pressão arterial diariamente nos mesmos horários para obter consistência.
8. Aguarde 2 a 3 minutos entre medições. O tempo de espera permite que as artérias retornem à condição anterior à medição da pressão arterial. Pode ser necessário aumentar o tempo de espera, dependendo das suas características físicas individuais.

GARANTIA LIMITADA

A sua braçadeira grande para adultos com anel D HEM-CL24, está garantida como livre de defeitos de material e de mão-de-obra que venham a surgir dentro de 1 ano a partir da data de compra, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra ou Cupom Fiscal, quando usada de acordo com as instruções fornecidas com a braçadeira grande para adultos com anel D HEM-CL24 e no manual de instruções do monitor de pressão arterial. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor inicial, que adquire o produto no varejo.

O conserto ou a substituição do dispositivo coberto pela garantia descrita acima serão realizados sem custos, se assim for decidido pela Omron. O conserto ou a substituição é nossa responsabilidade e única solução prevista conforme a garantia acima.

Se o seu dispositivo necessitar de assistência dentro do período de garantia, entre em contato com Omron.

ESTE DOCUMENTO É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA PELA OMRON EM CONJUNTO COM ESTE PRODUTO, E A OMRON SE DECLARA ISENTA DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E OUTROS TERMOS QUE POSSAM SER IMPOSTOS POR LEI, SE HOUVER, SÃO LIMITADOS AO TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO ACIMA.

A OMRON NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA PERDA DE USO OU QUALQUER OUTRO CUSTO, DESPESA OU DANOS CASUAIS, DECORRENTES, INDIRETOS OU ESPECIAIS. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos; você pode também ter outros direitos que variam de acordo com a jurisdição. Devido aos requisitos especiais locais, algumas das limitações e exclusões acima podem não ser aplicáveis ao seu caso.

Contate seu distribuidor Omron Healthcare ou o escritório da Omron para sua região (Brasil Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-771-6907/ www.omronbrasil.com) para obter cobertura de garantia e serviços de reparos.

Distribuído por:
OMRON HEALTHCARE, INC.
U.S.A.

www.omronhealthcare.com

© 2012 OMRON HEALTHCARE, INC.
Fabricado na China

5334616-7A