

ACCU-CHEK® Aviva Nano

Des tests en douceur, en quelques étapes faciles

Avec Accu-Chek Multiclix



1

POUSSEZ

Enfoncez le bouton d'armement comme lorsque vous utilisez un stylo; le bouton de déclenchement devient jaune.



2

CLIQUEZ

Cliquez sur le bouton de déclenchement jaune.



Besoin d'une nouvelle lancette?

TOURNEZ

Faites un double tour. Les barres blanches indiquent le nombre de lancettes qu'il vous reste.

Avec Accu-Chek Aviva Nano



Pour mettre le glycomètre en marche, insérez une bandelette.



Confirmez le code.



Appliquez l'échantillon de sang jusqu'à ce que le symbole  clignote. Les résultats apparaissent en 5 secondes.

Pour plus d'informations, appelez le service Accu-Chek Soins aux Patients au 1 800 363-7949, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HNE). Pour des instructions plus détaillées, consultez le manuel d'utilisateur. L'autopiqueur Accu-Chek Multiclix est conçu pour être utilisé par une seule personne.

accu-chek.ca

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO et ACCU-CHEK MULTICLIX sont des marques de commerce de Roche. © 2009 Roche Diagnostics. Tous droits réservés.



ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.