

# ACCU-CHEK® Smart Pix

## Des flots de données transmises en toute simplicité

1



### Installation et connexion

- Brancher le câble USB du système Accu-Chek Smart Pix sur une prise USB de votre ordinateur. L'Accu-Chek Smart Pix est automatiquement reconnu par votre ordinateur et une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec les fichiers de l'Accu-Chek Smart Pix.
- Cliquer deux fois sur le document *START.htm* afin de faire apparaître le programme Accu-Chek Smart Pix dans une nouvelle fenêtre.

3



### Transfert des données

- Placer le lecteur de glycémie ou la pompe à insuline Accu-Chek à une distance d'environ 10 cm de la fenêtre infrarouge de l'Accu-Chek Smart Pix. Les deux fenêtres infrarouges doivent se trouver face à face. Cliquer sur *Transférer les données*.
- La transmission des données vers l'Accu-Chek Smart Pix a maintenant démarré. Après quelques instants, les différents rapports sont visibles à l'écran.


2



### Installation

- Cliquer sur le bouton *Réglages* (Settings) dans le haut de l'écran. Avec les options situées dans le menu de gauche, vous pouvez programmer les paramètres suivants: la langue, les options d'affichage, les paramétrages personnels et les paramétrages liés aux rapports.
- Après avoir effectué les réglages désirés, sauvegarder ceux-ci en cliquant sur le bouton *Enregistrer* (Save). L'Accu-Chek Smart Pix prendra dorénavant en compte les réglages que vous avez sélectionnés.


4

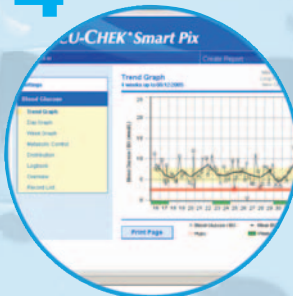

### Graphiques et rapports

- Le menu de navigation à gauche vous permet de choisir entre différents graphiques et tableaux.
- Cliquer dans le haut de l'écran sur le bouton *Créer un rapport* afin de générer un rapport qui regroupe un ou plusieurs graphiques et/ou tableaux. Sélectionner les graphiques et/ou tableaux de votre choix.
- Cliquer ensuite dans le bas de l'écran sur le bouton *Créer un rapport*. L'Accu-Chek Smart Pix ouvre une nouvelle fenêtre avec le rapport demandé que vous pouvez ensuite imprimer.

5

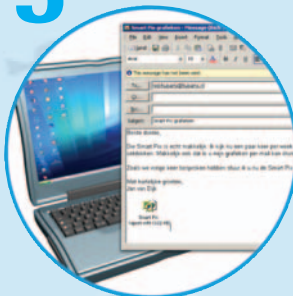

### Imprimer et envoyer des rapports

- Avec l'Accu-Chek Smart Pix, vous avez la possibilité d'imprimer et d'envoyer des rapports par e-mail.
- Pour plus d'informations, consultez le verso de cette fiche pas-à-pas.



Roche

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.

# ACCU-CHEK® Smart Pix

## Questions fréquemment posées

### Quels lecteurs de glycémie et pompes à insuline Accu-Chek sont compatibles avec l'Accu-Chek Smart Pix ?

- Accu-Chek Aviva
- Accu-Chek Compact Plus
- Accu-Chek Compact
- Accu-Chek Sensor (avec Accu-Chek IR-key)
- Accu-Chek Comfort (avec Accu-Chek IR-key)
  
- Accu-Chek Spirit
- Accu-Chek D-TRONplus
- D-TRONplus

### Comment puis-je envoyer les rapports Accu-Chek Smart Pix par e-mail ?

Les rapports peuvent être envoyés par e-mail de différentes manières.

- Pour envoyer un seul rapport, sauvegarder d'abord celui-ci sur le disque dur de votre ordinateur. Pour ce faire, sélectionner dans la barre d'outil "Fichier"\*, puis "sauvegarder sous"\* et choisir le rapport de type (\*.mht). Vous pourrez par la suite attacher ce document.mht dans un courriel et l'envoyer à votre professionnel de la santé.
- Pour envoyer la totalité des rapports, copier d'abord le fichier "REPORT" situé sous le driver de l'Accu-Chek Smart Pix (par exemple E:\) et sauvegarder le sur le disque dur de votre ordinateur. Compresser ensuite ce fichier afin d'obtenir un fichier de type REPORT.zip. Vous pourrez par la suite attacher ce document REPORT.zip dans un courriel et l'envoyer à votre professionnel de la santé.

\* La structure du menu et les options peuvent changer si le logiciel utilisé n'est pas Microsoft® Internet Explorer.


### Ai-je besoin d'un logiciel ou d'un câble supplémentaire pour utiliser l'Accu-Chek Smart Pix ?

Non, l'Accu-Chek Smart Pix se suffit à lui-même et ne nécessite aucun autre accessoire.

### Comment transférer les données enregistrées dans mon lecteur de glycémie Accu-Chek ou dans ma pompe à insuline Accu-Chek ?


#### ACCU-CHEK® Aviva

Assurez-vous que le lecteur soit éteint. Appuyez ensuite simultanément sur les 2 boutons centraux jusqu'à ce que 2 flèches clignotantes apparaissent à l'écran. La transmission des données démarre automatiquement.

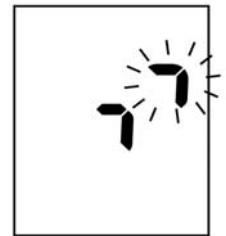

#### ACCU-CHEK® Compact Plus

Le lecteur est éteint. Appuyez simultanément sur les touches S et M jusqu'à ce que 2 flèches apparaissent à l'écran.

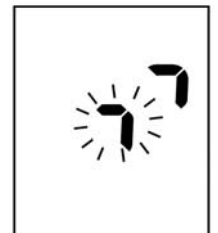

#### ACCU-CHEK® Spirit

Assurez-vous que la pompe se trouve en mode STOP. Appuyez 4 fois sur la touche *Menu* et validez le transfert avec la touche de confirmation. Le message *Transfert donnée* vous indique que la transmission des données est en cours. Lorsque celle-ci est terminée, appuyez à nouveau sur la touche de confirmation pour retourner à l'écran principal.



#### ACCU-CHEK® D-TRONplus

Assurez-vous que la pompe se trouve en mode STOP. Appuyez 4 fois sur la touche *Menu* et validez le transfert avec la touche de confirmation. Lorsque la transmission des données est terminée, appuyez à nouveau sur la touche de confirmation pour retourner à l'écran principal.

