

Des mesures fiables, tout en douceur

L'Accu-Chek® Aviva Nano. La rencontre d'un design superbe et de la fiabilité technologique de l'Accu-Chek® Aviva. Mesurez ainsi votre glycémie en toute discrétion. Résultat? Performances maximales en format mini.

La simplicité même!



1. Insérer la puce de sécurité

- Prenez la puce de sécurité qui se trouve dans l'emballage des bandelettes. Insérez-la dans la loquette qui lui est destinée. Cette puce contient des informations importantes qui permettent notamment au système de signaler quand les bandelettes arrivent à expiration. Remplacez-la à chaque nouvel emballage de bandelettes.



2. Insérer la bandelette

- Insérez la bandelette dans le lecteur dans le sens de la flèche. Le lecteur Accu-Chek® Aviva Nano s'allume automatiquement.



3. Comparer les codes

- Contrôlez si le numéro de code à l'écran correspond bien à celui mentionné sur le flacon des bandelettes.
- Le symbole de la bandelette ainsi que le symbole clignotant de la goutte de sang apparaissent à l'écran.



4. Mesurer le glucose sanguin

- A l'aide de l'Accu-Chek® Multiclix, piquez le côté latéral du bout de votre doigt.
- Mettez la goutte de sang en contact avec le bord de la zone réactive jaune située à l'extrémité de la bandelette. Le sang est aspiré.



5. Lire le résultat

- Le résultat apparaît après environ 5 secondes.
- Retirez la bandelette du lecteur qui s'éteindra automatiquement.



Plus de détails?

Consultez le manuel d'utilisation du lecteur de glycémie Accu-Chek® Aviva Nano.

Pour se piquer en un tour de main, tout en douceur

1.



PRESSER pour armer l'autopiqueur

- Pressez le bouton d'armement à l'extrémité de l'Accu-Chek® Multiclix, comme si vous vouliez utiliser un stylo à bille. Le bouton transparent devient jaune.



2.



DECLANCHER pour piquer

- Placez l'Accu-Chek® Multiclix contre le côté latéral du bout du doigt et appuyez sur le bouton jaune pour piquer.




3.



Une nouvelle lancette en UN TOUR DE MAIN

- Pour changer de lancette, tournez le bouton d'armement dans le sens de la flèche 1 jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Ensuite, tournez le même bouton en sens inverse (flèche 2).
- Le nombre de lignes blanches sur le bouton d'armement indique le nombre de lancettes encore disponibles.
- Il est recommandé de changer de lancette à chaque piqûre.

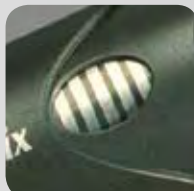

Plus d'infos?

Appelez gratuitement l'Accu-Chek® Service au:
Ou surfez sur www.accu-chek.be



Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
1800 Vilvoorde

ACCU-CHEK®