

LECKEY[®]

Easysseat

Guide d'utilisateur





Le siège Easy Seat de Leckey a été conçu pour offrir une solution d'assise attrayante sans compromettre les besoins positionnels du jeune enfant handicapé. Ce manuel vous montre comment utiliser toutes les fonctions de façon simple, rapide et sûre. En respectant les consignes de sécurité et d'entretien, vous profiterez d'une utilisation prolongée de ce produit.

Sommaire

1. Usage prévu
2. Déclaration de conformité
3. Conditions de garantie
4. Carnet d'entretien du produit
5. Formation au produit
6. Consignes de sécurité
7. Comment déballer et assembler le siège
8. Réglage clinique pour un alignement postural et un usage quotidien
9. Ajustements fréquents pour un usage quotidien
10. Consignes de nettoyage et d'entretien
11. Inspection journalière du produit
12. Inspection annuelle du produit
13. Réutilisation des produits Leckey
14. Maintenance du produit
15. Informations techniques

1 Usage prévu

Le siège EasySeat de Leckey est un système de siège simple, conçu pour être utilisé à la maison ou en classe.

Le siège est disponible en quatre grandeurs et répond aux besoins de jeunes handicapés âgés de 1 à 10 ans. Les grandeurs 1 et 2 acceptent un poids maximal de 30 kg et les grandeurs 3 et 4 de 40 kg. Quelques secondes suffisent pour transformer le siège EasySeat de Leckey en siège de toilette, offrant la possibilité d'utiliser le siège comme soutien au développement postural ou à l'apprentissage de la propreté.

2 Déclaration de conformité

James Leckey Design Ltd., en sa qualité de fabricant et sous sa propre responsabilité, déclare que le système de siège EasySeat est conforme aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE EN 12182, relative aux aides techniques pour personnes handicapées et méthodes d'essai.

3 Conditions de garantie

La garantie est valable uniquement si le produit est utilisé conformément aux conditions spécifiées et pour les besoins prévus, suivant l'ensemble des recommandations du fabricant (consulter également les conditions générales de vente, de livraison et de paiement). Tous les produits et composantes de fabrication Leckey sont garantis pour une période de deux ans.

4 Carnet d'entretien du produit

Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel doit être prescrit, assemblé et révisé seulement par un technicien compétent, qui a obtenu une formation spécifique pour l'utilisation de ce produit. Leckey suggère de tenir à jour un carnet d'entretien détaillant toutes les interventions d'assemblage, de révision et les inspections annuelles effectuées sur ce produit.

5 Formation technique sur ce produit (parents, éducateurs et personnel soignant)

Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel Leckey suggère que les parents, éducateurs et personnel soignant qui devront utiliser l'équipement, lisent attentivement les sections suivantes de ce manuel d'utilisation:

Section 6

Consignes de sécurité

Section 8

Ajustements fréquents pour un usage quotidien

Section 10

Inspection quotidienne du produit.

Leckey suggère de garder une liste de toutes les personnes qui ont obtenu une formation spécifique sur l'utilisation de ce produit.

6 Consignes de sécurité



6.1 Toujours lire les consignes avant d'utiliser le produit pour la première fois.



6.2 Ne jamais laisser une personne utilisant l'équipement Leckey sans surveillance.



6.3 N'utiliser que des composantes approuvées par Leckey avec ce produit. Ne jamais tenter de modifier quoique ce soit sur ce produit. Le non respect des consignes peut mettre l'utilisateur ou le personnel soignant en danger et annuler la garantie du produit.



6.4 En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre produit Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez l'utilisation du produit et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou avec votre représentant local dès que possible.



6.5 Effectuez tous les ajustements de positionnement et assurez-vous qu'ils soient bien sécuritaires, avant de placer l'utilisateur sur ce siège.



6.6 Pour des raisons sécuritaires et pour un positionnement optimal, la ceinture pelvienne doit toujours être bouclée en premier.



6.7 Si vous avez commandé un siège EasySeat/PottyTrainer avec roulettes, nous déconseillons les déplacements sur surfaces inégales quand l'enfant occupe le siège. Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires au moment de placer l'utilisateur dans le siège ou pour le sortir du siège.

8. En cas de déplacement nécessaires du siège EasySeat/PottyTrainer sur roulettes

d'un endroit à l'autre, utiliser la poignée pour pousser ou le haut du dossier pour diriger le siège. Ne jamais utiliser le plateau dans ce but.



6.9 Ne jamais laisser le produit sur une surface présentant une pente supérieure à 5 degrés. N'oubliez jamais de verrouiller les roues.



6.10 l'ensemble de ce produit contient des composantes qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Toujours vérifier que les poignées de verrouillage et les boulons qui sont à la portée des enfants soient fermement serrés et sécuritaires en tout temps.



6.11 Les produits Leckey répondent aux exigences de la norme EN12182 relative à la réglementation sécurité incendie. Toutefois, le produit contient des composantes en plastique et doit par conséquent être tenu à l'écart de toutes sources de chaleur directe, notamment des flammes nues, les cigarettes et les éléments chauffants électriques et au gaz.



6.12 Ne déposer aucun article très chaud, (plus de 40 degré Celsius) sur le plateau.




6.13 Nettoyer régulièrement ce produit. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Effectuer un entretien régulier du produit afin d'assurer qu'il soit en bon état de fonctionnement.



6.14 Ce produit est conçu pour un usage intérieur et, en cas d'inutilisation, il doit être rangé dans un endroit sec, éloigné des températures extrêmes. La portée de température opérationnelle conseillée pour ce produit est de +5 à +40 degrés Celsius.

Comment déballer et assembler

Quand vous recevez votre siège EasysSeat/ PottyTrainer, il est emballé dans une boîte et entouré d'une pellicule à bulles. Vous devez d'abord vous assurer de bien avoir retiré toutes les pièces du carton avant de les déballer en vue de leur assemblage. Veuillez vérifier que vous êtes en possession de toutes les pièces commandées. Une clé Allan sera peut-être nécessaire pour assembler et ajuster le siège EasySeat / PottyTrainer. Celle-ci est fournie avec chaque siège.

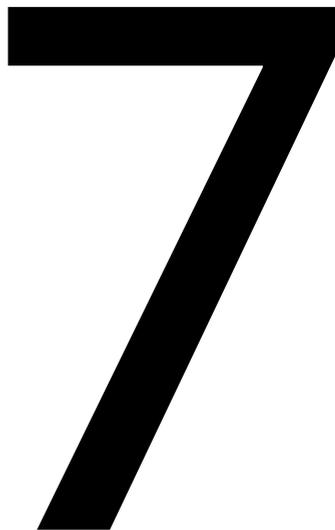

7.1 Installation des pattes

Le siège EasySeat / PottyTrainer est livré avec votre choix de pattes avec ou sans roulettes, dossier, soutiens latéraux, ceinture aux genoux et plusieurs accessoires. Pour mettre votre choix de pattes en position, il est important d'identifier le côté gauche et le côté droit des pattes. Quand elles sont en bonne position, la roulette et la vis de fixation à la base des pousoirs devraient être alignées et dirigées vers l'avant. Pour mettre les pattes en place, enfoncer les pousoirs (s), les glisser dans le tube récepteur et relâcher les pousoirs dès que le trou de positionnement désiré est atteint, et vérifiez qu'ils soient bien engagés. Il est conseillé de placer toutes les pattes au même niveau pour l'ajustement du EasySeat.



Prenez toujours les précautions nécessaires pour éviter de vous blesser les doigts.



7.2 Installation du dossier

Pour assembler le dossier sur le siège, vous devez d'abord retirer les deux vis à tête creuse et les rondelles qui sont déjà installées de chaque côté du dossier. Le dossier peut alors être mis en position. Pour garder le dossier bien en place, les rondelles doivent être alignées sur les récepteurs de vis à tête creuse, et les deux vis à tête creuse de chaque côté du dossier doivent être ensuite repositionnées. Il est important de positionner les rondelles sur l'extérieur du siège, comme indiqué sur l'illustration.



7.3 Installation de l'appui-pieds

Pour installer l'appui-pieds au siège, vous aurez besoin des quatre vis à tête creuse et quatre rondelles fournies. Il suffit d'aligner le support de l'appui-pieds sur les fentes situées de chaque côté des pattes avant. Pour enlever l'appui-pieds il suffit d'effectuer l'opération inverse.



Toujours s'assurer que l'appui-pieds est fermement fixé.

7.4 Installation du plateau

Pour installer le plateau au siège, placer d'abord celui-ci sur les appuis-bras puis tourner la poignée située sous les appuis-bras, pour le garder en place. Pour enlever le plateau du siège, il suffit de tourner dans l'autre sens la manette sous l'appui-bras et de le soulever.



Prenez toujours les précautions nécessaires pour éviter de blesser les mains ou les bras de l'enfant en insérant le plateau.



Ne jamais utiliser le plateau pour diriger ou pousser la chaise.



Ne déposez aucun article très chaud, (plus de 40 degré Celsius) sur le plateau. Veuillez noter que le plateau est uniquement réservé à l'usage de l'enfant.



Ne pas s'appuyer sur le plateau ni y déposer d'objets lourds dont le poids est supérieur à 8kg.



7.5 Installation des soutiens latéraux flexibles

Les soutiens latéraux flexibles sont installés à l'aide des vis à tête creuse fournies et en les sécurisant dans les glissières, à l'arrière du siège.



7.6 Installation du pommeau

Le pommeau est installé avec une vis à tête creuse (a) ou avec une poignée située sous la base de l'assise.



Toujours enlever le pommeau avant de placer l'enfant dans le siège ou de le retirer du siège.



7.7 Siège de toilette

Le siège EasySeat de Leckey peut se convertir en siège de toilette. Il suffit de soulever et d'enlever la base de l'assise pour la remplacer par le pot à insérer.

7.8 Installation de la poignée à pousser

Si vous avez commandé une poignée à pousser, un support pour installer la poignée sera déjà installé. Si la poignée à pousser est commandée séparément, le support doit être attaché à l'arrière du siège avec les deux vis à tête creuse fournies.


La poignée à pousser peut alors être insérée dans les tubes récepteurs en desserrant les vis à tête creuse "a" et "b", en sélectionnant la position requise, puis en resserrant les vis à tête creuse.



7.9 Installation de l'appui-tête

Si vous avez commandé un appui-tête, un support pour l'appui-tête sera déjà installé. Si l'appui-tête est commandé séparément, le support doit être attaché à l'arrière du siège avec les deux vis à tête creuse fournies.

L'appui-tête peut ensuite être inséré dans le support récepteur en desserrant la vis à tête creuse "a", en sélectionnant la position désirée et en resserrant la vis à tête creuse.

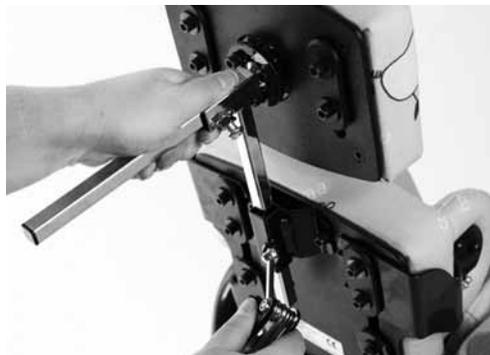


7.10 Installation des soutiens latéraux de l'appui-tête

Les soutiens latéraux de l'appui-tête sont installés ent à l'arrière de l'appui-tête à l'aide des vis à tête creuse fournies. Elles restent en place dans les glissières situées à l'arrière de l'appui-tête.



Ajustement pour la gestion clinique du positionnement

L'ajustement clinique du siège doit être effectué une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et qui a obtenu une formation spécifique sur l'utilisation du produit. Leckey suggère de tenir à jour un carnet de tous les ajustements effectués sur ce produit.

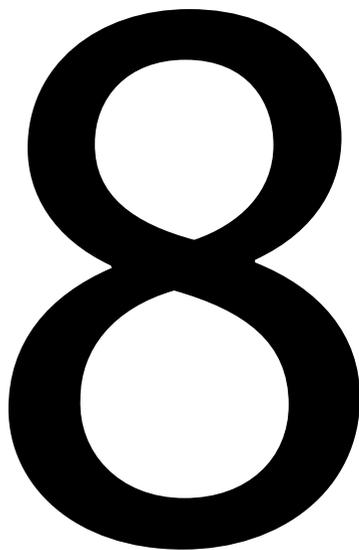

8.1 Ajustement de la profondeur de l'assise et de l'angle d'inclinaison du dossier

L'ajustement de la profondeur de l'assise peut être adapté à la croissance de l'enfant et contribue à offrir un soutien fémoral précis. Le dossier peut également être ajusté selon l'angle d'inclinaison désiré. Pour modifier l'ajustement, desserrer les vis à tête creuse (a) d'un côté ou l'autre du siège et ajustez le dossier selon la profondeur d'assise et l'angle d'inclinaison requis. Gardez cette position en resserrant les vis à tête creuse (a).



Ne jamais effectuer un ajustement si l'enfant est installé dans le siège.

8.2 Ajustement de la hauteur du dossier

Pour ajuster la hauteur du dossier, desserrez les vis à tête creuse (a), et ajustez la hauteur du dossier à la hauteur d'épaule de l'utilisateur et bien resserrer les vis à tête creuse (a).



8.3 Appui-pieds

L'appui-pied peut être ajusté en hauteur selon la hauteur de jambes et pour une plus grande maniabilité. Pour régler l'appui-pieds en hauteur, desserrez les quatre vis à tête creuse (a) ajustez l'appui-pieds de haut en bas à la position désirée, puis resserrez bien les quatre vis à tête creuse.

Un appui-pieds avec ceinture est aussi disponible. Pour positionner les pieds de l'enfant, il suffit de les garder en place à l'aide des bandes Velcro.



8.4 Soutiens latéraux flexibles

Pour ajuster en hauteur et en largeur les soutiens latéraux flexibles, desserrez les vis à tête creuse (a), sélectionnez la position la plus appropriée pour l'utilisateur, puis bien resserrez les vis à tête creuse pour les garder en place. La ceinture peut être attachée devant pour offrir un positionnement idéal à l'enfant.



8.5 Ajustement du pommeau


Pour un ajustement de profondeur sur le pommeau desserrer la vis à tête creuse ou la poignée, positionner le pommeau et resserrer.



Ajustements fréquents pour un usage quotidien

(thérapeutes, parents et
personnel soignant)

Il est conseillé qu'une personne ayant les compétences techniques et cliniques nécessaires et qui a obtenu une formation spécifiques sur l'utilisation du produit montre aux parents et au personnel soignant comment effectuer de fréquents réglages ainsi que les contrôles de sécurité détaillés en Section 6. Leckey suggère de garder une liste de tout le personnel soignant et de l'entourage familial qui ont obtenu une formation spécifique sur l'utilisation de ce produit.

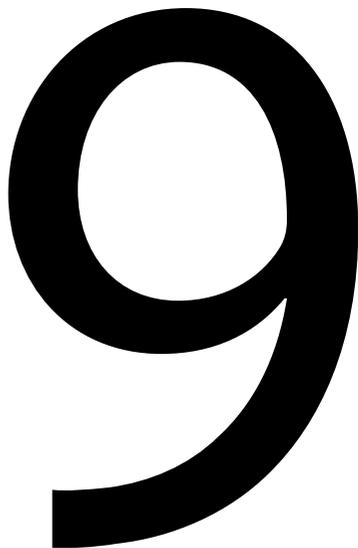

9.1 Transférer votre enfant dans et hors du siège

Avant de placer l'utilisateur dans le siège, assurez-vous d'effectuer l'inspection quotidienne du produit en suivant la procédure détaillée à la section 9 de ce manuel d'utilisation.

Verrouillez les roues et assurez-vous qu'elles soient tournées vers l'extérieur afin d'optimiser la stabilité du siège.

Assurez-vous que la boucle sur les soutiens latéraux flexible soit dégagée et rangée pour faciliter le transfère. Détachez la ceinture pelvienne et laissez la tomber de chaque côté pour faciliter le transfère. Finalement, si les sandales ont été installées, détachez les ceintures.



Toujours boucler la ceinture pelvienne en premier. Ajustez le harnais de façon à ce que l'enfant ne puisse pas glisser dans le siège ni basculer vers l'avant.

9.2 Ajustement de la ceinture Pelvienne

La ceinture pelvienne se boucle en insérant le clip plastique (a) dans le récepteur, puis en l'ajustant à la longueur requise.



9.3 Ajustement de la hauteur du siège

Le siège peut être ajusté en hauteur pour adapter à des jambes plus longues ou plus courtes, pour faciliter un transfert autonome ou pour le glisser plus aisément sous une table à la garderie. Il suffit d'ajuster chaque patte individuellement en appuyant sur les boutons poussoirs (a) et de les positionner au niveau de la hauteur requise.

Dès que les pattes sont au niveau de requis, s'assurer que les boutons poussoirs soient bien enclenchés et que les pattes soient sécuritaires.



Ne jamais ajuster la hauteur quand l'utilisateur est installé dans le siège.

9.4 Ajustement des soutiens latéraux

Ajustez les soutiens latéraux en repositionnant les bandes Velcro. Les soutiens latéraux sont disponibles en plusieurs longueurs et largeurs.



9.5 Ajustement de la hauteur des appuis-bras et du plateau

La hauteur des appuis-bras et par conséquent du plateau, peut être ajustée en desserrant les vis à tête creuse (a) de l'appui-bras, en les positionnant à la hauteur requise, et en resserrant bien les vis à tête creuse(a).

9.6 Ajustement de la profondeur du plateau

Placer le plateau sur les appui-bras, le glisser en poussant à la profondeur requise et tourner les poignées (a) situées sous le plateau pour le verrouiller en place.



9.7 Ajustement de l'appui-tête

Pour ajuster la hauteur de l'appui-tête, desserrer la vis à tête creuse (a), positionner à la hauteur requise, puis resserrer. Pour ajuster la profondeur, desserrer la vis à tête creuse (b), positionner selon la profondeur requise, puis resserrer. Pour ajuster l'angle de positionnement de l'appui-tête, desserrez les trois vis à tête creuse (c), repositionnez et resserrer les vis.



Un bouton poussoir s'enclenche dès que la longueur maximale d'ajustement du tube en métal est atteinte. Ne pas dépasser cette limite d'ajustage.



10 Consignes de nettoyage et d'entretien

Comment entretenir le produit

Lors du nettoyage du produit, nous vous suggérons d'utiliser uniquement de l'eau tiède et un détergent sans abrasif. Ne jamais utiliser de solvants organiques ni de produits liquides pour le nettoyage à sec.

Recouvrements de coussin et

Recouvrement protectifs

1. Les recouvrements de coussins et recouvrements protectifs peuvent être nettoyés à la main tout en restant en place.

Lors du nettoyage du produit, nous vous recommandons d'utiliser uniquement de l'eau tiède et un détergent sans abrasif.

2. La meilleure méthode de nettoyage est la technique 'essuyer & sécher'.

3. Il est conseillé d'enlever les taches, le plus rapidement possible avec un chiffon absorbant, une serviette ou une éponge. Éponger avec de l'eau tiède et du savon est efficace pour enlever les salissures courantes et de petites éclaboussures. Prendre soin de ne pas trop humidifier le tissu car cela risquerait d'élargir la tache.

4. Des nettoyeurs antiseptiques peuvent être utilisés sur les taches difficiles à enlever. L'alcool isopropylique et l'alcool minéral sont des solvants appropriés dans ce cas. Une demi-tasse de javellisant dans 5 litres d'eau peut également servir de solution désinfectante.

5. Toujours assurer que le produit soit sec avant de l'utiliser.

Composantes en plastique, en bois et en métal

1. Pour un nettoyage quotidien, utiliser de l'eau avec du savon ou un vaporisateur antibactérien.

2. Pour un nettoyage en profondeur, il est possible d'utiliser un nettoyeur à vapeur, basse pression.

3. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les composantes en métal, en bois ou en plastique.

4. S'assurer que le produit soit sec avant de l'utiliser.

5. Vérifier régulièrement que toutes les composantes en bois ne présentent aucun signe de fissure.

11 Inspection quotidienne du produit

(thérapeutes, parents et
personnel soignant)

Nous suggérons qu'une inspection visuelle du produit soit effectuée tous les jours par les thérapeutes, les parents ou le personnel soignant afin de garantir l'utilisation sécuritaire du produit. Les vérifications quotidiennes suggérées sont détaillées ci-dessous.

1. Assurez-vous que tous les boulons et poignées d'ajustement soient en place et sécuritaires.
2. Vérifier que les recouvrements protectifs et les ceintures Velcro ne présentent aucun signe d'usure excessive.
3. Vérifier que les roues tournent librement et peuvent être verrouillées en toute sécurité.
4. Assurez-vous que l'appui-pieds soit fermement installé.



En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre produit Leckey ou de risque de pièces défailantes, cessez l'utilisation du produit et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou votre représentant local dès que possible.

12 Inspection annuelle du produit

(thérapeute, technicien, conseiller produit
Leckey, représentant)

Leckey suggère que chaque produit soit soumis à une inspection détaillée au moins une fois par an et chaque fois que le produit est révisé en vue d'une réutilisation par un nouvel utilisateur. Cette inspection doit être effectuée par une personne ayant les compétences techniques appropriées et qui a obtenu une formation spécifique sur l'utilisation de ce produit. Elle doit comprendre au moins les vérifications suivantes.

. Vérifier que l'ensemble des poignées, écrous, boulons et boucles en plastique soient en place et assurer le remplacement de toutes les pièces manquantes. Une attention particulière doit être portée aux éléments suivants:

- Vis de verrouillage de l'appui-tête
- boulons d'ajustement de l'angle d'inclinaison et de la hauteur du dossier.
- Boulons d'ajustement de la profondeur de l'assise
- Harnais pelvien
- Ajustement vertical de l'appui-pieds

2. Vérifier que le mécanisme d'ajustement vertical du châssis fonctionne correctement.

3. Soulever la base pour inspecter chaque roue individuellement. Vérifier qu'elles tournent librement et enlever toute trace de saleté sur le caoutchouc des roues. Vérifier que les freins puissent verrouiller les roues fermement.

4. Effectuer une inspection visuelle de la structure du produit en portant une attention particulière aux points de soudure du châssis et vous assurez qu'il n'y ait aucune trace d'usure ou de fissure autour des soudures.

5. Leckey suggère de tenir un carnet de toutes les inspections annuelles sur le produit.



En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre produit Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez l'utilisation de l'appareil et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou avec votre représentant local dès que possible.

13 Réutilisation des produits Leckey par un nouvel utilisateur

Avant la réutilisation d'un produit Leckey par un nouvel utilisateur, nous suggérons que le Thérapeute prescrivait, effectue une vérification de la compatibilité de l'équipement avec les besoins du nouvel utilisateur. Il doit notamment s'assurer que le produit destiné au nouvel utilisateur n'est subit aucune modifications ou installation d'accessoires spéciaux.

Une inspection technique et détaillée du produit doit être effectuée avant sa réutilisation par un nouvel utilisateur (se reporter à la section 12).

S'assurer que le produit a été minutieusement nettoyé, en respectant les consignes de la section 10 de ce manuel.

S'assurer qu'une copie du manuel d'utilisation soit fournie avec le produit. Celle-ci peut être téléchargée de notre site Web; www.leckey.com

Leckey suggère de tenir à jour un carnet de toutes les inspections effectuées sur ce produit, durant la réutilisation du produit par le nouvel utilisateur.



En cas de doute concernant l'utilisation sécuritaire de votre produit Leckey ou de risque de pièces défectueuses, cessez l'utilisation du produit et communiquez avec notre département du service à la clientèle ou votre représentant local dès que possible.

14 Entretien / Réparation du produit

L'entretien / réparation de tous les produits Leckey doit être effectué exclusivement par un personnel techniquement compétent, qui a obtenu une formation spécifique sur ce produit.

Au Royaume Uni et en République d'Irlande, veuillez communiquer avec le Centre de service Leckey au 0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Rép. D'Irlande). Et notre département du service à la clientèle sera heureux de satisfaire tous vos besoins d'entretien/réparation.

Toutes les demandes de nature technique internationales, doivent être adressées par un distributeur Leckey approprié qui se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples informations sur les distributeurs Leckey, visitez notre site Web www.leckey.com

15 Informations techniques

Codes de produit

Siège Easy Seat avec pattes fixes	LES/#/FL/*
Siège Easy Seat avec pattes à roulettes	LES/#/CL/*
Siège Toilette avec pattes fixes	LPT/#/FL/*
Siège Toilette avec pattes à roulettes	LPT/#/CL/*

Accessoires

Plateau d'activités	LES/#/A
Coussins latéraux (prix pour coussins latéraux supplémentaires)	LES/#/B.*
Pommeau	LAS/#/C.*
Soutiens latéraux flexibles	LES/#/D.*
Appui-pieds	LES/#/F
Pattes fixes	LES/#/G
Pattes à roulettes	LES/#/H
Élévateur d'appui-pieds 1"	LES/#/K
Dossier haut plat	LAS/#/L -*
Soutiens latéraux pour dossier haut plat	LAS/#/M.*
Plate-forme avec sandale ceinturée	LES/#/N
Barre d'appui / Barre porteuse	LES/#/I
Montants d'appuis	LES/#/P
Poignée à pousser	LES/#/Q
Coussin de l'assise pour le siège Toilette Leckey	LES/#/R.*
Siège Toilette pour le siège Easy Seat de Leckey	LES/#/R.*

*Veuillez préciser la couleur du tissu au moment de la commande.

16 Données techniques

Dimensions du produit				
Taille	1	2	3	4
Âge	1 - 5	2 - 5	3 - 8	5 - 10
Codes	LES/1	LES/2	LES/3	LES/4
	LPT/1	LPT/2	LPT/3	LPT/4
	mm	mm	mm	mm
Longueur	400	480	570	620
Largeur	350	370	450	490
Poids du produit	12kg	15kg	20kg	22kg
Taille de l'utilisateur				
min	760	930	1000	1150
max	1000	1150	1300	1450
Poids max de l'utilisateur	30kg	30kg	40kg	40kg
Hauteur de dossier (hauteur d'épaule, assis)				
min	225	265	325	400
max	285	340	425	500
Profondeur de base d'assise (dossier à arrière du genou)				
min	175	225	250	300
max	250	300	350	400
Largeur de base d'assise (largeur hanche)				
min	125	150	225	275
max	225	250	325	375
Longueur mollet (plante du pied à arrière du genou)				
min	150	220	250	300
max	230	300	350	420
Hauteur de plateau (siège à dessus plateau)				
min	135	135	180	180
max	225	225	325	325
Hauteur d'accoudoir (base d'assise à coude)				
min	110	120	160	190
max	150	160	210	240
Degré de réglage angulaire du dossier				
En pronation	5°	5°	5°	5°
Incliné	10°	10°	10°	10°
Taille des roulettes	75	75	75	75
Dimensions du plateau	450 x420	450 x420	590 x520	590 x520

LECKEY^o

Leckey
19A Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

T: 028 9060 2277
F: 028 9060 0795
E: info@leckey.com
W: www.leckey.com

24 hour postural
care for babies,
kids & adults.
Sleeping, Sitting,
Standing, Walking,
Moving, Bathing,
Toileting.



LS251-02