

## DIMENSIONS

DIMENSIONS	10 2002040	10 2002042
Poids déambulateur	2.9 kg	3.6 kg
Largueur maximum	55 cm	60 cm
Longueur maximum	51 cm	72 cm
Hauteur min/max	50/68 cm	73/91
Diamètre de rotation min	71 cm	89 cm
Diamètre roues	12.5 cm	12.5 cm
Taille déambulateur	3	5

Hauteur max utilisateur	130 cm	180 cm
Poids max utilisateur	50 kg	100 kg

102002040 Déambulateur 2 roues ø125 pliable. Petit  
102002042 Déambulateur 2 roues ø125 pliable. Standard

SERVICE APRÈS-VENTE  
[sat@virmedic.com](mailto:sat@virmedic.com)

Virmedic fabrique et distribue d'autres types d'aide technique pour les personnes handicapées. Vous pourrez obtenir de plus amples informations chez votre fournisseur habituel ou dans les magasins spécialisés du secteur.

  
LICENCIA SANITARIA Nº 5191 P.S.  
**Fabricación y Distribución de Material Médico, Ortopedia y Ayudas Técnicas**

CI Perellonet 1  
E 46909 TORRENT (Valencia)  
Tel 961 565 521  
Fax 961 560 383  
[www.virmedic.com](http://www.virmedic.com)

Rev: 01



# DÉAMBULATEUR

## MANUEL D'UTILISATION



Les déambulateurs fabriqués par Virmedic sont à la fois légers et robustes et sont conformes à la norme européenne en vigueur (pr EN 11199-2) comme l'indique son marquage CE. Ce produit est conforme à la directive européenne des produits sanitaires 93/42/CEE.

### INSTRUCCIONES DE USO

Ces déambulateurs ont été conçus pour une utilisation intérieure.

#### DÉPLIAGE


Pour déplier le déambulateur appuyer sur les 2 bouchons en caoutchouc au sol puis exercer une légère pression vers le bas au niveau des poignets jusqu'à ce que les charnières soient étendues.

#### PLIAGE

Pour plier le déambulateur, appuyer sur les bouchons en caoutchouc au sol puis soulever les roues et exercer une légère pression sur les poignets.

#### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Pour régler la hauteur de la poignée au sol retirer la goupille et faire glisser le tube de la poignée vers le haut ou vers le bas pour obtenir la hauteur désirée puis remettre la goupille. Vérifier que la hauteur des poignées au sol est la même des deux côtés.

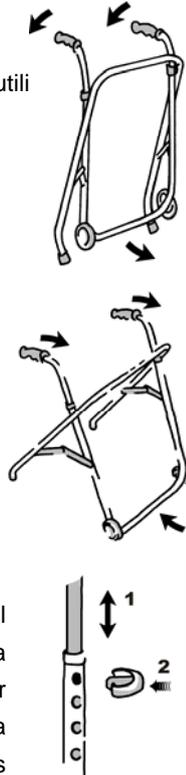

### UTILISATION

Une fois la hauteur des poignées ajustée, soulever la partie postérieure du déambulateur en séparant légèrement les bouchons en caoutchouc, l'avancer, appuyer de nouveau sur les bouchons en caoutchouc puis avancer d'un pas en appuyant sur les poignées. L'adaptation au déambulateur devra se réaliser à l'aide d'un spécialiste.

### NETTOYAGE ET CONSERVATION

Pour le nettoyage du déambulateur, utiliser un chiffon humidifié avec un produit destiné au nettoyage des meubles qui ne contient pas de solvants qui pourraient endommager son revêtement. Les poignées devront être nettoyées de façon régulière. Vérifier l'usure des bouchons de caoutchouc en les remplaçant si nécessaire.

### ELIMINATION

Le déambulateur est composé de tube en acier donc lorsque le moment de s'en débarrasser sera venu vous devrez suivre les conditions de recyclage ou les recommandations locales du recyclage.

### GARANTIE

Ce produit est **garantie 2 ans** à partir de la date d'achat, dans les conditions normales d'utilisation, et en respectant le manuel d'utilisation sans modifier ni manipuler aucun de ses composants. Si vous détectez un défaut du produit, vous devrez vous mettre en contact avec votre distributeur qui vous l'a vendu, en présentant la facture ou le justificatif d'achat, pour que celui-ci puisse réaliser 1 inspection et s'il estime opportun (toujours en accord avec le fabricant) il décidera d'une réparation ou d'une substitution. (en accord avec les particularités indiquées dans la garantie.