

Manuel d'utilisation

Pilulier électronique semainier 4 alarmes (réf. 111500)



Ce pilulier électronique propose 4 alarmes journalières et vous permet de ranger vos médicaments pour la semaine. Chaque module journalier (4 cases) est détachable et l'alarme se transforme en porte-clés ce qui est très pratique quand vous voulez sortir de la maison.

A noter : les inscriptions sur les cases et sur le semainier sont en anglais. Les cases en blanc transparent, mais en écrivant dessus avec un crayon ou un autocollant, vous pourrez l'utiliser facilement.

Réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que le symbole de la pendule clignote.

Appuyer sur le bouton HR (heure) pour régler l'heure. L'heure s'affiche au format 12H (Le Symbole AM signifie Matin et PM signifie Après midi). Appuyer sur le bouton MIN pour régler les minutes.

Appuyer sur le bouton SET pour valider les réglages.

Réglage des alarmes

Appuyer sur le bouton SET pour jusqu'à ce que le numéro de l'alarme choisie clignote (Les numéros vont de 1 à 4 car il y a 4 alarmes possibles). Appuyer sur le bouton HR (heure) pour régler l'heure. L'heure s'affiche au format 12H (Le Symbole AM signifie Matin et PM signifie Après midi). Appuyer sur le bouton MIN pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton SET pour valider les réglages. Un petit point noir situé au dessus du numéro de l'alarme indique que l'alarme est active.

Annulation d'une alarme active (point noir au dessus du numéro de l'alarme)

Appuyer sur le bouton SET pour jusqu'à ce que le numéro de l'alarme choisie clignote (Les numéros vont de 1 à 4 car il y a 4 alarmes possibles). Appuyer sur les boutons HR et MIN en même temps. L'alarme va afficher 00 :00

Appuyer sur le bouton SET pour valider les réglages. Le point noir au dessus du chiffre disparaît ce qui signifie que l'alarme n'est pas active.

Activation d'une alarme inactive (pas de point noir au dessus du numéro de l'alarme)

Vous pouvez la ré-activer un alarme sans avoir à re-régler l'heure d'alarme. Appuyer sur le bouton SET pour jusqu'à ce que le numéro de l'alarme choisie clignote (Les numéros vont de 1 à 4 car il y a 4 alarmes possibles).

Appuyer sur les boutons HR et MIN en même temps. L'alarme va afficher la valeur que vous avez définie avant et un point noir va s'afficher au dessus du numéro de l'alarme. Appuyer sur le bouton SET pour valider les réglages.

Le point noir au dessus du chiffre disparaît ce qui signifie que l'alarme n'est pas active.

Rétro-éclairage

En affichage de l'heure, si vous appuyez sur le bouton MIN/LT, un rétro-éclairage de 20s environ va vous permettre de regarder l'écran et de connaître l'heure par exemple.


Changement de la pile

L'appareil utilise 2 piles AAA (fournie). Il suffit de faire glisser le capot du compartiment à pile au dos de l'appareil puis de remplacer les piles par deux piles neuves en faisant attention à la polarité.

Garantie

Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).

Dépannage

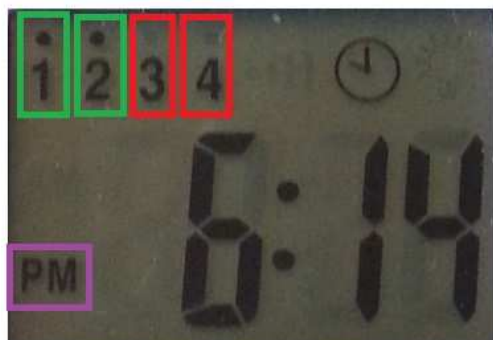

□ PM :
heures de
l'après midi

□ Alarme active
(avec point noir) □ Alarme inactive
(pas de point noir)

Si une alarme ne fonctionne pas

Vérifier que l'alarme est active

Sur l'écran, est ce qu'alarme affiche un point noir au dessus du numéro de l'alarme ?

Vérifier que l'alarme est conforme au format d'affichage 12h

Le pilulier affiche l'heure et les alarmes au format 12h. Pour les heures de l'après midi, il y a un symbole PM qui s'affiche en bas à gauche de l'écran.

Remarque : le son du pilulier n'est pas amplifié, si vous avez des difficultés d'audition ou si l'environnement est bruyant, il est possible que vous n'entendiez pas la sonnerie.