

IMPORTANT > À lire en premier lieu !

ÉTAPE UN >>>

Assemblage de votre ambulateur:

1. Lorsque vous recevez votre ambulateur, vérifiez soigneusement le contenu. Signalez immédiatement à votre concessionnaire ou à Evolution tout article manquant:
2. Le contenu de tous les ambulateurs « Evolution » est le suivant:
 - a. Ambulateur complet replié avec siège et poignées préinstallés
 - b. Un panier souple pliable
 - c. Dossier
 - d. Carte d'enregistrement de la garantie
 - e. Manuel d'utilisation

ÉTAPE DEUX >>>

Vérification des freins et des roues:

1. Le système de freinage d'Evolution est sécuritaire et simple d'utilisation. Tenez (en tirant) les poignées de frein pour stationner.
2. Vérifiez le système de freinage. Les roues devraient rester verrouillées lorsque les freins de stationnement sont enclenchés.
3. N'enclenchez pas les freins de stationnement lorsque l'ambulateur est en mouvement. Ceci pourrait endommager les roues de manière permanente.
4. Enclenchez toujours les freins de stationnement avant d'utiliser le siège.

ÉTAPE TROIS >>>

Entretien et soins de votre ambulateur Xpresso:

1. Vérifiez l'herméticité de l'écrou et des boulons régulièrement.
2. Vérifiez l'intégrité du cadre et des pneus au moins une fois par mois.

Pliage, dépliage et transport de votre ambulateur:

Pour REPLIER votre ambulateur Evolution, tirez sur la poignée centrale sur siège et

l'ambulateur restera debout.

Pour DÉPLIER l'ambulateur Xpresso, poussez simplement la poignée vers le bas au milieu du siège en vous assurant que l'ambulateur est verrouillé complètement en position ouverte. **Précaution: Assurez-vous que la poignée centrale du siège est au même niveau que le siège avant de vous assoir.**

Pour transporter l'ambulateur lorsque celui-ci est replié, prenez simplement la poignée centrale et soulevez l'ambulateur en le transportant de côté comme une valise.

Freins:

Enclenchez les freins en tirant les deux poignées de frein vers le haut. Ne marchez pas lorsque les freins sont enclenchés.

Freins de stationnement:

Pressez les deux freins vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Assurez-vous toujours que les deux freins sont bien enclenchés. Tirez vers le haut pour relâcher les freins de stationnement. Lorsque vous utilisez le siège, les deux freins DOIVENT être verrouillés pour votre sécurité.

Ajustement des freins:

1. Pour assurer un freinage adéquat, ajustez de temps en temps les patins de freins situés au-dessus des roues arrière. Pour régler le frein, enlevez l'enjoliveur arrière ou le frein de ralentissement s'il est installé en enlevant les 2 vis Philips à l'avant de la fourche arrière, voir A.
2. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, desserrez la vis installée et déplacez le patin de frein vers le bas afin d'obtenir une meilleure force de freinage. Testez les freins en vous assurant que lorsque vous enclenchez le frein de stationnement, les roues arrière sont en position verrouillée, voir B.
3. Réinstallez l'enjoliveur de fourche arrière ou le frein de ralentissement s'il est installé.

Réglage de la hauteur de poignée:

Pour régler les poignées à la hauteur désirée, placez-vous derrière l'ambulateur à hauteur des épaules. Les poignées devraient se trouver à la même hauteur ou légèrement plus haut que le poignet de

l'utilisateur. Un thérapeute pourrait conseiller une hauteur de poignée différente selon les besoins particuliers de l'utilisateur.

Pour régler les poignées, enlevez la poignée et tirez le boulon hexagonal, ajustez la poignée à la hauteur désirée ou prescrite et insérez le boulon hexagonal en vous assurant que la partie hexagonale du boulon soit ajustée adéquatement au trou hexagonal sur le cadre de l'Xpresso et serrez la poignée convenablement. **Précaution: Ne serrez pas trop fort.**

Installation du panier:

Pour installer le panier souple pliable, repliez la partie de l'Xpresso en tirant sur la poignée centrale du siège et insérez les supports noirs du panier sur les rails au niveau des deux cadres intérieurs, poussez au milieu du siège pour ouvrir l'ambulateur. Précaution: Assurez-vous d'entendre le « clic » pour que le panier soit en position adéquate.


Assistance:

Votre concessionnaire Evolution le plus proche sera heureux de vous aider pour l'assemblage et l'entretien de votre ambulateur.

Informations sur les réparations en usine >>>

La devise d'Evolution est de « s'engager à fournir une qualité et un service inégalés ». Notre but est de vous offrir le meilleur service du secteur. Si vous rencontrez des problèmes avec votre ambulateur Evolution ou que vous avez besoin d'aide, veuillez:

1. **Examinez votre documentation:** Des documents imprimés seront envoyés avec votre ambulateur Evolution Xpresso. Ils contiennent les guides d'entretien et les informations d'installation.
2. **Appelez ou rendez visite à votre concessionnaire Evolution:** Il pourra vous aider et déterminer si la garantie de votre ambulateur est admissible.
3. **Communiquez avec le service à la clientèle d'Evolution au:** 1-800-556-2558 (États-Unis et Canada)

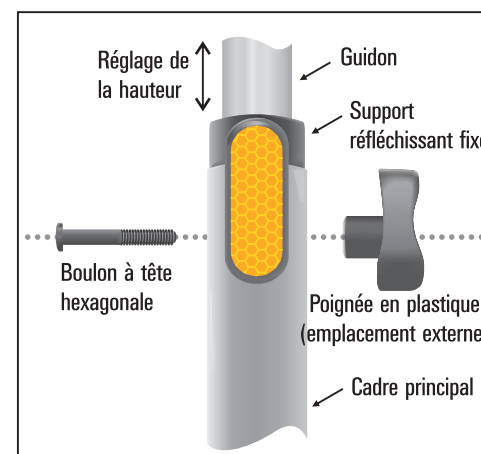

Pour le service de garantie, des réparations ou un remplacement:

Si vous devez présenter votre ambulateur sous garantie à Evolution pour un service, vous aurez besoin de nous fournir plusieurs choses. Premièrement, l'ambulateur doit comprendre un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM). Vous pouvez obtenir un numéro d'ARM en appelant le service à la clientèle d'Evolution au numéro indiqué ci-dessus. Préparez-vous à fournir 1) le numéro de modèle de l'appareil, 2) le numéro de série et 3) une description du problème.

Pour les services et réparations hors garantie:

Si votre ambulateur n'est plus sous garantie ou si la garantie n'est pas admissible, nous vous donnerons une estimation par téléphone.

Renvoyez l'ambulateur à:

Demandez l'adresse de l'atelier de réparation le plus proche à votre représentant du service à la clientèle d'Evolution.

Plusieurs choses à ne pas oublier:

Si les problèmes rencontrés avec votre ambulateur sont considérées comme étant le résultat d'une utilisation inappropriée, comme heurter les bordures de trottoir, heurter les portes pour les ouvrir, etc., il ne sera pas couvert par la garantie. Nous nous réservons le droit de déterminer si votre ambulateur a été utilisé de façon inappropriée. Lorsque vous renvoyez votre ambulateur, n'oubliez pas d'écrire le numéro d'ARM sur le côté extérieur de la boîte. Assurez-vous d'indiquer l'adresse de retour. Nous savons que vous avez grandement besoin de votre ambulateur, aussi nous assurerons les réparations de l'ambulateur dans un délai de 2 jours ouvrables suivant sa réception et nous vous le renverrons. Si nous ne pouvons pas réparer votre ambulateur dans un délai de 2 jours après sa réception, nous vous enverrons un nouveau!

Accessoires optionnels pour plus de commodité >>>



MONTE-TROTTOIR >
Permet de franchir les trottoirs et autres obstacles plus facilement.



FREIN DE RALENTISSEMENT >
Sécurité et protection supplémentaires pour les pentes, les descentes et les côtes.

Xpresso Walker Manual Manuel de l'ambulateur Xpresso

