

# Manuel d'utilisation

# Phénix + 630



# VISIOLE

4 rue Léon Blum  
ZAE les Glaises  
91120 Palaiseau  
01 69 19 14 60

[www.visiole.fr](http://www.visiole.fr)

[info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)



# HIMS

139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon,  
KOREA 305-350 [www.himsintl.com](http://www.himsintl.com)

T. +82 42 864 4460 F. +82 42 864 4462

---


## Table des matières

1 Le Phénix 630 +.....	3
2 Précautions de sécurité.....	4
3 Contenu du colis.....	5
4 Vue d'ensemble.....	6
5 Installation.....	8
6 Utilisation.....	9
7 Fonctions avancées.....	12
8 Utilisation du plateau de lecture.....	15
9 Eclairage on/off.....	16
10 Défauts.....	17
11 Spécifications techniques.....	18
12 Garantie.....	19


# 1 Le Phénix 630 +

---


Le phénix 630 + est un vidéo agrandisseur destiné aux déficients visuels et aux personnes âgées afin de faciliter la lecture de livres, magazines, notices médicales, tout cela, en les grossissant sur un grand écran.

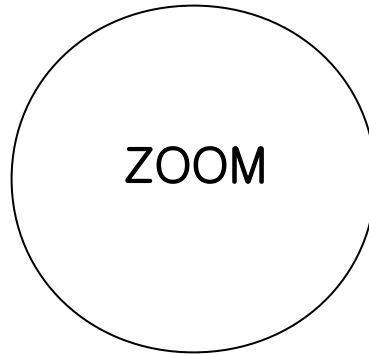

Le grossissement est ajustable à votre vue et à la taille des caractères imprimés.

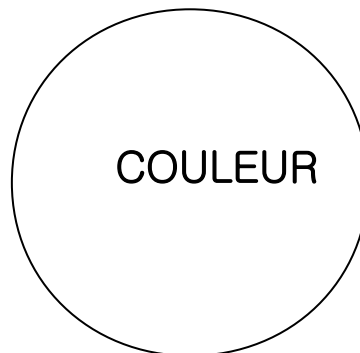

Le document s'affiche en couleurs naturelles (photos, livre de cuisine, etc) ou avec un fort contraste pour faciliter la lecture de texte.

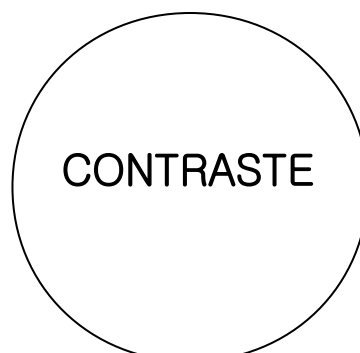

Le contraste est ajustable afin d'obtenir une image claire, contrastée, très lisible, indépendamment des objets ou documents regardés.

---


## 2 Précautions de sécurité

※ Afin de vous protéger ainsi que le produit, lisez attentivement les précautions de sécurité ci dessous :


1. N'utilisez pas de rallonge ou de prise secteur défectueuse ainsi qu'une alimentation électrique non conforme.
2. Ne touchez pas la prise secteur avec des mains mouillées afin d'éviter les chocs électriques.
3. Ne pas ouvrir le produit pour essayer de le réparer. La garantie s'arrête de fait et le produit peut être endommagé.
4. Poser le produit sur une surface plane, stable et suffisamment solide en rapport avec le poids du produit.
5. Ne pas descendre l'écran trop brusquement ce qui risquerai de le faire tomber ou d'endommager certaines parties.
6. Ne vous appuyez pas fortement sur le bas du plateau de lecture lorsque ce dernier est tiré vers vous. Cela pourrait faire chavirer votre appareil et le faire tomber.
7. Ne pas débrancher les câbles lorsque le produit est en fonctionnement.
8. Ne pas utiliser le vidéo agrandisseur dans un environnement trop humide ou trop chaud (>40 °C)

### 3 Contenu du colis


Votre colis du Phénix 630 + est composé de:

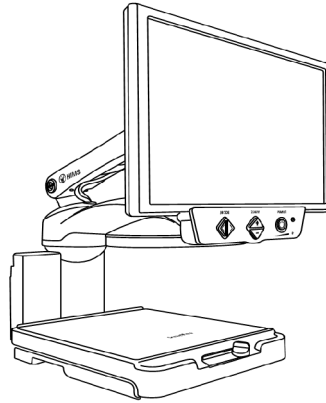

**Phénix 630 +**

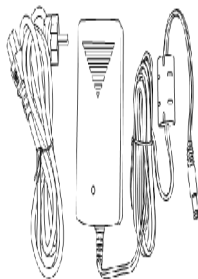


**Alimentation secteur**

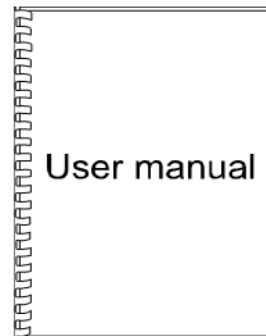

**Manuel  
d'utilisation**


## 4 Vue d'ensemble

### 4.1 Vue de devant

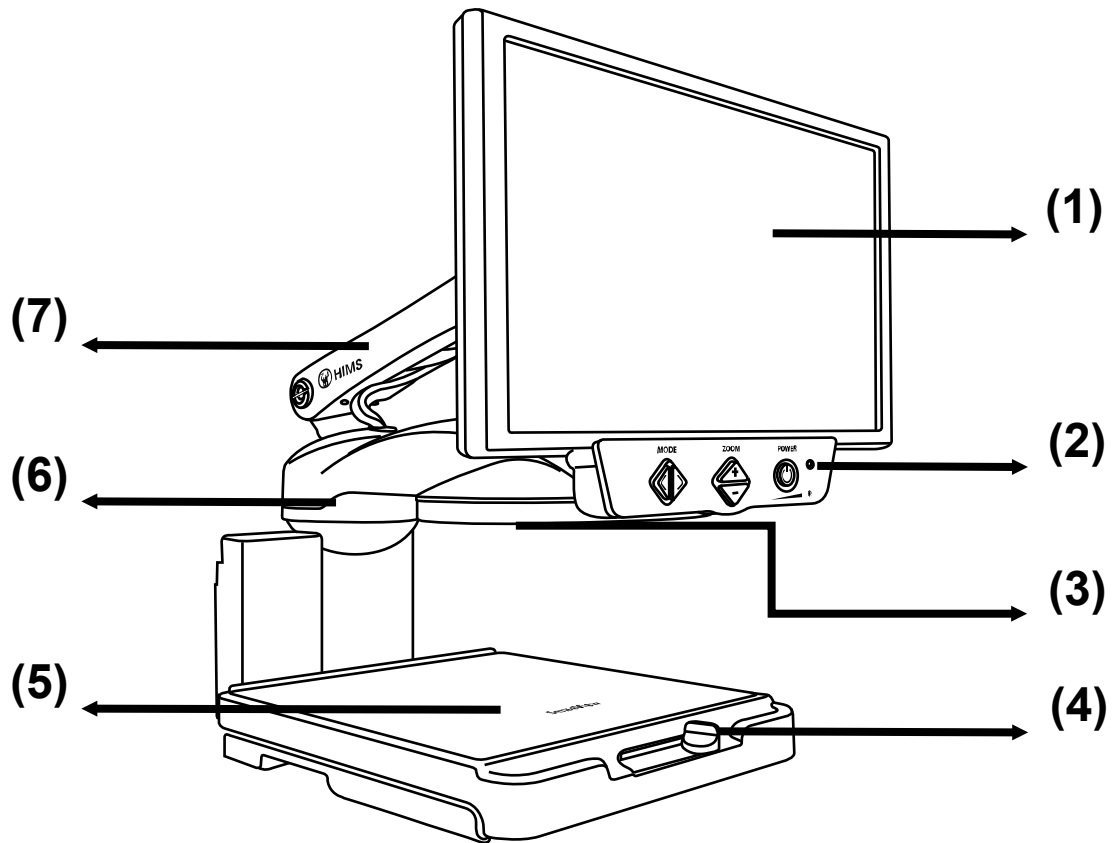

- (1) Ecran LCD
- (2) Panneau de contrôle
- (3) Camera
- (4) Verrouillage du plateau
- (5) Plateau de lecture X-Y
- (6) Potence de la caméra
- (7) Bras de l'écran

## 4.2 Vue arrière

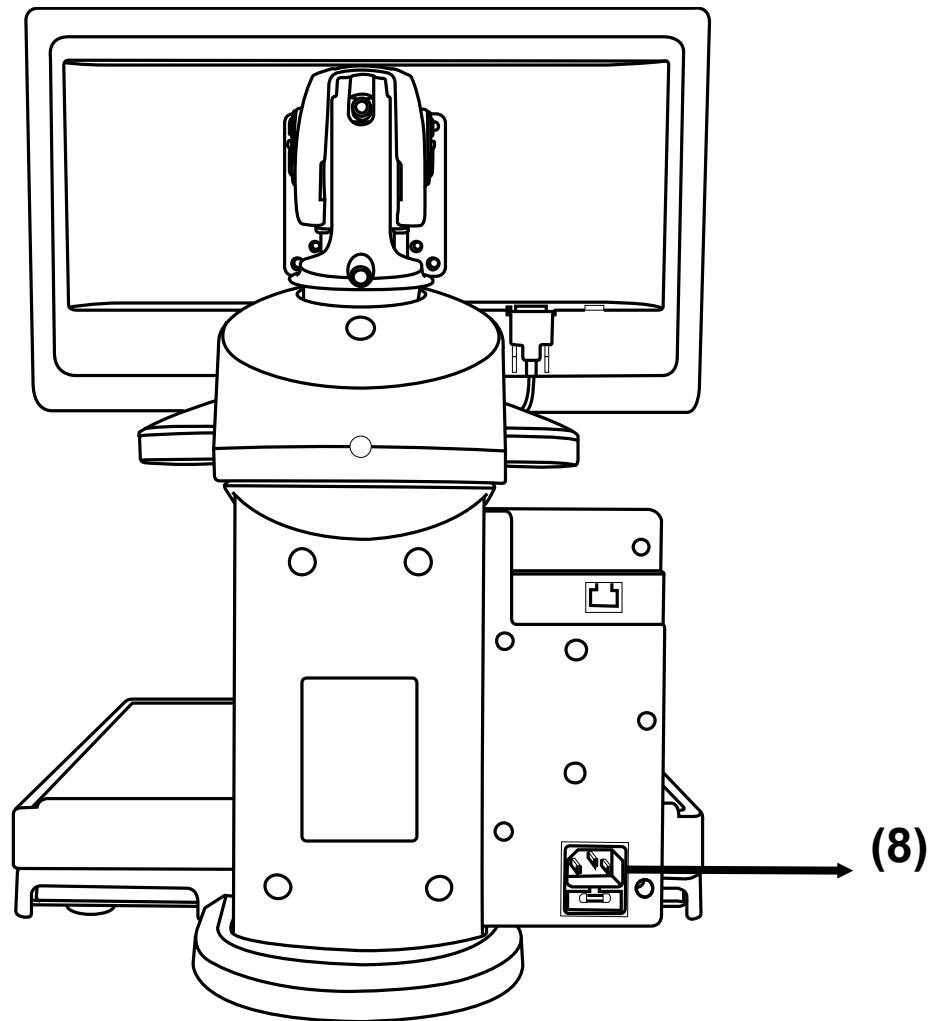


(8) Prise pour le câble secteur


## 5 Installation

### 5.1 Câble d'alimentation

- 1) Afin d'utiliser le Phénix 630 + il suffit de connecter le câble d'alimentation à la prise située à l'arrière
- 2) Puis connectez l'extrémité du câble à une prise secteur murale

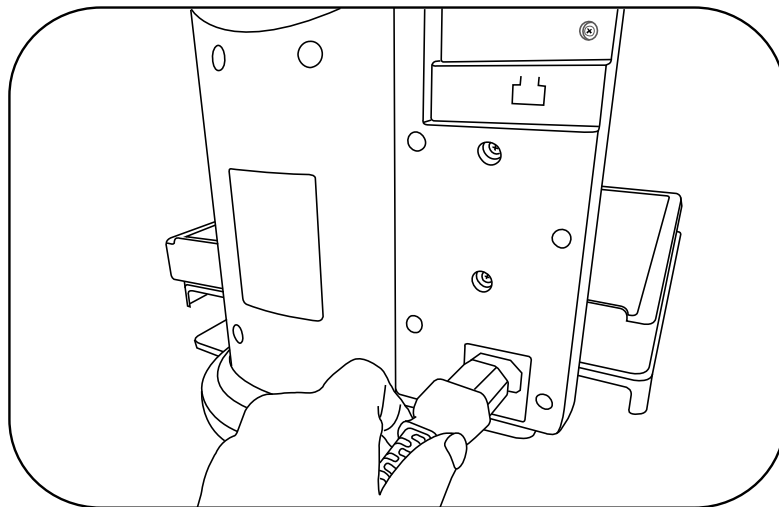

<Picture 1> Avant d'avoir connecté le câble

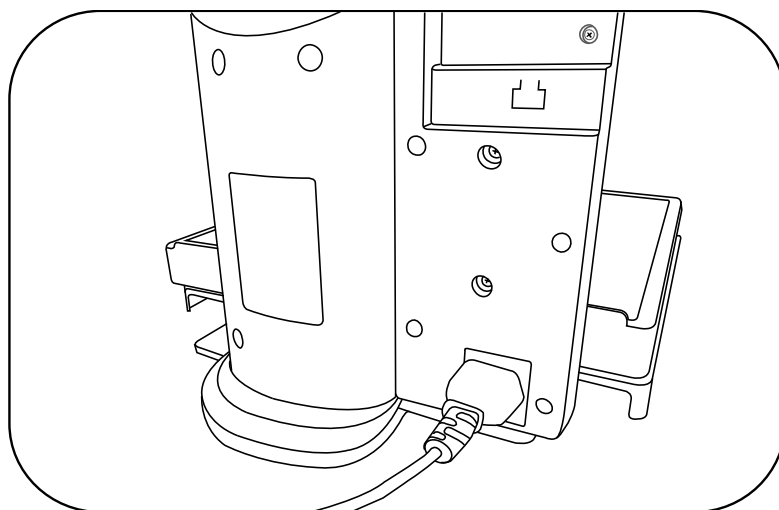


<Picture 2> Le câble une fois connecté



## 6 Utilisation

### 6.1 Boutons

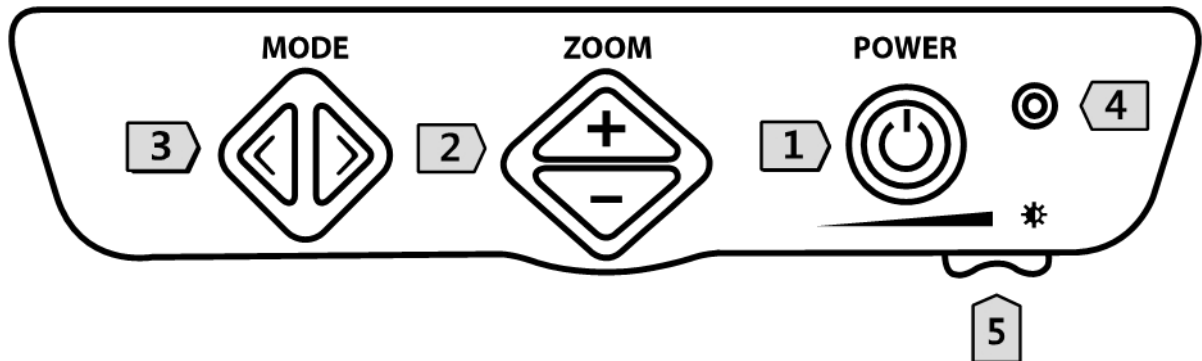

**1- Mise en marche / arrêt**

**2- Zoom + et Zoom -**

(+): Zoom + (grossissement plus important)

(-): Zoom -

**3- Mode couleurs**

Gauche: Mode couleur précédent

Droite: Mode couleur suivant

**4- Indicateur LED de fonctionnement**

**5- Bouton coulissant de contraste**


## 6.2 Description des boutons

### 1) Bouton de mise en marche



Le bouton de mise en marche (nombre 1 sur le schéma) est le premier en partant de la droite sur le panneau de commande. Après un appui sur ce bouton, une led verte (nombre 4) située à proximité s'illumine. Un nouvel appui, éteint le vidéo agrandisseur.

### 2) Ajuster le grossissement

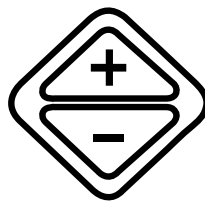


Le grossissement peut être ajusté en appuyant sur le bouton de Zoom situé au centre du panneau de commandes. Trouvez le meilleur grossissement pour vos besoins en fonction du document à lire ou de la photo à regarder.

Le + augmente le grossissement tandis que le - le diminue.

Les grossissements sont de 3X à 50X avec un écran de 19" et de 3.6X à 58X avec l'écran de 22".

Un appui prolongé sur le + ou le - agit alors de façon continue sur le grossissement.

### 3) Mode de couleurs

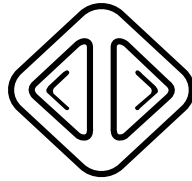

Le bouton du choix du mode de couleurs est situé à gauche du panneau de contrôle.

Un appui sur la partie gauche ou droite permet de choisir un mode parmi :

1. Couleurs naturelles
2. Texte Blanc sur fond Noir
3. Texte Noir sur fond Blanc
4. Texte Jaune sur fond Noir
5. Texte Jaune sur fond Bleu

### 4) **Contraste**



Le bouton coulissant est situé à droite et en dessous du panneau de contrôle. Ajustez le contraste pour obtenir la meilleure image possible

- Poussez le bouton vers la gauche pour diminuer le contraste.
- Inversement vers la droite pour augmenter le contraste.

---

## 7 Fonctions avancées

### 7.1 Choix de couleurs spécifiques pour les modes de couleurs

D'origine le vidéo agrandisseur est livré avec les modes de couleurs suivants :

1. Couleurs naturelles
2. Texte Blanc sur fond Noir
3. Texte Noir sur fond Blanc
4. Texte Jaune sur fond Noir
5. Texte Jaune sur fond Bleu

Les modes d'affichages 1 à 3 ne sont pas modifiables alors que les modes 4 et 5 peuvent être choisis parmi les modes listés dans la section 2.

#### 1) Changer un mode de couleur

La manière de modifier un mode de couleur est décrite ci dessous par un exemple :

- (1) Pour changer le mode "Texte Jaune sur fond Noir", choisissez ce mode avec les touches de "choix de mode".
- (2) Appuyez alors sur les 2 boutons de choix de mode simultanément pendant plus de 2 secondes afin de rentrer dans **[MODE SETUP]**.
- (3) **[MODE SETUP]** (Ajustement du Mode) s'affiche brièvement puis **[SELECT COLOR]** (Sélection couleurs) s'affiche sur l'écran.
- (4) Allez jusqu'à **[RED ON WHITE]** (Rouge sur Blanc) en appuyant plusieurs fois sur un des boutons du mode de couleur.
- (5) Appuyez alors de nouveau simultanément sur les 2 boutons de choix de mode. Puis **[SAVE? YES]** (Sauvegarder Oui) est alors affiché.

- (6) Appuyez de nouveau sur les 2 boutons pour accepter. [**CONFIRM**] (confirmé) s'affiche alors pendant quelques secondes.
- (7) Si vous ne désirez pas sauvegarder ce choix, appuyez sur un des boutons du choix de mode lorsque [**SAVE? YES**] est affiché. Alors [**SAVE? NO**] est affiché. Appuyez sur les 2 boutons de choix de mode pour confirmer, [**EXIT**] (Sortie) s'affiche alors sur l'écran quelques secondes.

## 2) Tableau des couleurs

Ce tableau décrit toutes les combinaisons de couleurs pouvant être choisies comme décrit ci-dessus.

<b>Text</b>	<b>Background</b>
Jaune	Bleu
Bleu	Jaune
Jaune	noir
noir	Jaune
Vert	Blanc
Blanc	Vert
Rouge	Blanc
Blanc	Rouge
Jaune	Blanc
Blanc	Jaune
Rouge	noir
noir	Rouge
noir	Vert
Vert	noir
noir	Bleu
Bleu	noir
Bleu	Blanc
Blanc	Bleu

---

## 7.2 Blocage de la mise au point

Par défaut le Phénix 630 est en mode auto-focus. Afin de désactiver cette fonctionnalité, par exemple lorsque vous écrivez sur le plateau, la mise au point automatique peut être désactivée.

- (1) Appuyez simultanément sur le ZOOM + et ZOOM – pendant plus de 2 secondes.
- (2) **[FOCUS LOCK]** (Mise au point bloquée) s'affiche à l'écran
- (3) Pour annuler, appuyez simultanément sur le ZOOM + et ZOOM – pendant plus de 2 secondes.
- (4) **[FOCUS AUTO]** (Mise au point automatique) s'affiche alors.

Lors de la prochaine mise ne marche, le mode "mise au point automatique" est de nouveau activé.

## 7.3 Initialisation


Le vidéo agrandisseur peut être ré-initialisé aux valeurs par défaut (celles programmées à sa sortie d'usine). Pour cela:

- (1) Eteignez le vidéo agrandisseur
- (2) Appuyez et maintenez appuyé le bouton de "mode couleur précédent" tout en allumant le produit.
- (3) Relâchez le bouton de mode une fois le message **[INITIALIZATION]** présent à l'écran. Le vidéo agrandisseur redémarre alors.
- (4) De nouveau éteignez puis rallumez le vidéo agrandisseur pour finir la procédure d'Initialisation.

## 8 Utilisation du plateau de lecture

### 8.1 Déplacement du plateau de lecture


Le plateau se déplace dans toutes les directions :

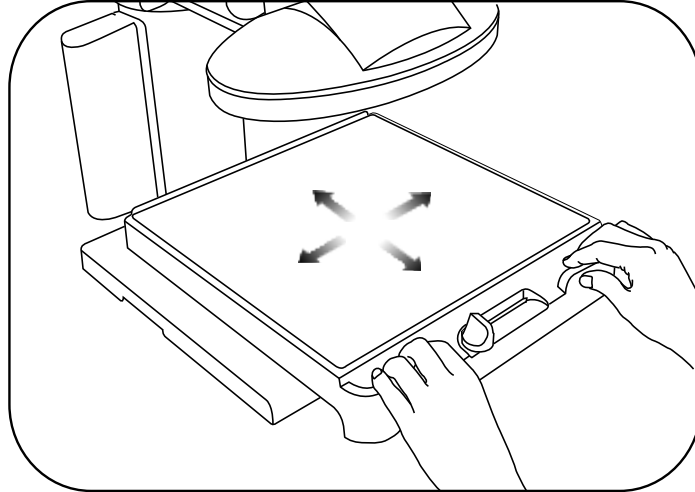

### 8.2 Blocage / déblocage du plateau de lecture X-Y


Le levier bleu situé sur le devant du plateau permet de le bloquer dans la position désirée.

Pour cela, poussez le levier bleu vers la droite jusqu'à ressentir un verrouillage. Pour débloquer le plateau poussez le levier vers la gauche.

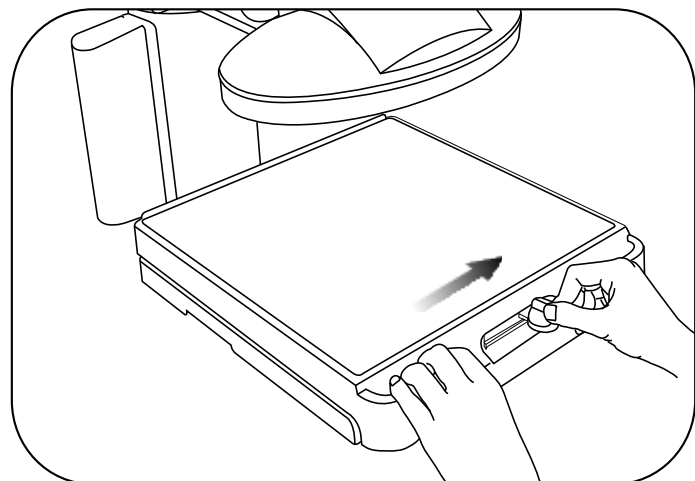

## 9 Eclairage on/off

A la mise en marche du Phénix 630, la lumière s'allume automatiquement. Si besoin, par exemple lors de la lecture de papier brillant ou si la lumière vous est trop forte, vous pouvez éteindre l'éclairage en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face inférieure de la potence de la caméra.

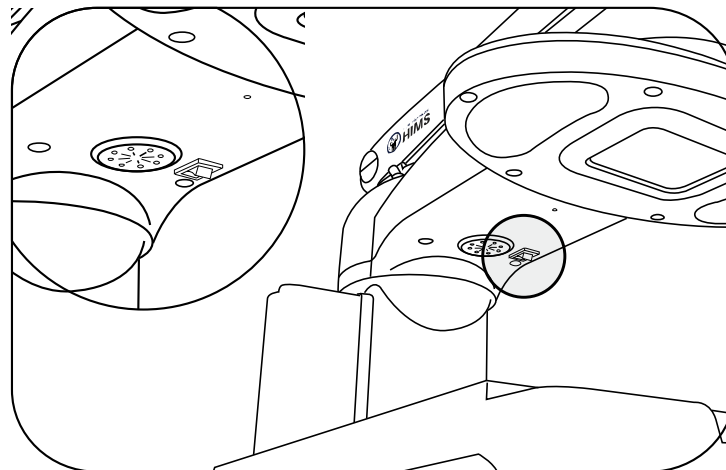



---

## **10 Défauts**

### **10.1 L'image affichée n'est pas correcte**

- Si la mise au point automatique est désactivée, la mise au point ne s'effectue pas automatiquement. Commencez par activer la "mise au point automatique"
- Ajustez le contraste grâce au bouton coulissant.

### **10.2 Impossibilité de paramétrer le mode de couleur**

- Vérifiez le mode d'affichage courant. Uniquement les modes 4 et 5 peuvent être modifiés dans le menu de paramétrages.

### **10.3 Le plateau de lecture est bloqué**

- Assurez vous que le levier de blocage ne soit pas poussé à droite.


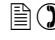
## 11 Spécifications techniques

<b>Dénomination</b>	D630
<b>Grossissement</b>	3X~50X (Ecran 19") 3.6X~58X(Ecran 22")
<b>Alimentation</b>	100~240V~, 50/60Hz, 2A
<b>Taille</b>	modèle 19" : 48cm (H) x 44cm(L)x 51cm(P) modèle 22" : 49cm(H) x 55cm(L) x 53cm(P)
<b>Mode d'affichage par défaut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Couleurs naturelles</li> <li>2. Fort contraste, texte noir / fond Blanc</li> <li>3. Fort contraste, texte Blanc / fond noir</li> <li>4. Fort contraste, texte Jaune / fond Noir (modifiable)</li> <li>5. Fort contraste, texte Jaune / fond Bleu (modifiable)</li> </ol>
<b>Choix des modes d'affichage</b>	<p>- 9 combinaisons possibles (Bleu/Jaune, Jaune/Noir, Vert/Blanc, Rouge/Blanc , Jaune/Blanc, Rouge/Noir, Vert/Noir, Noir/Bleu, Bleu/Blanc)</p> <p>- Toutes les combinaisons en fort contraste peuvent être en positif ou négatif.</p>
<b>Poids</b>	16.5 Kg(modèle 19" ) 18.2 Kg(modèle 22" )
<b>Résolution</b>	Standard

※ (NOTE) Ce manuel peut contenir des informations différentes de celles présentes sur votre produit du à des améliorations sur le produit. Ce manuel peut également être modifié à tout moment.

---

## 12 Garantie

-  (1) La garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat.
-  (2) La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisateur.

Note: La garantie peut être différente selon les pays.

## AVERTISSEMENT

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes CE pour un appareil numérique.

Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, use et peut émettre des fréquences radio et par conséquent être nuisible aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors d'atteinte, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- ✧ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ✧ Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- ✧ Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- ✧ Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement et sa garantie.