

FR Manuel d'utilisation



PUPITRE DE DOUCHE avec désinfection sécurisée

OPALE SENSE

3011.01

SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES	PAGES
PLANS D'ENSEMBLE	2

DIMENSIONS	2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3

DOMAINE D'APPLICATION	3


UTILISATION	
FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR SENSITIF	4
DOUCHETTE DE LAVAGE	4
SECURITE ANTI-BRULURES	5
DESINFECTION DES APPAREILS	5

ENTRETIEN	
AJOUT DE DESINFECTANT	6
NETTOYAGE DU PUPITRE	6


CARNET DE BORD	7

MANUEL D'UTILISATION DU MITIGEUR « SENSE DOUCHE »	8 et +

PLANS D'ENSEMBLE

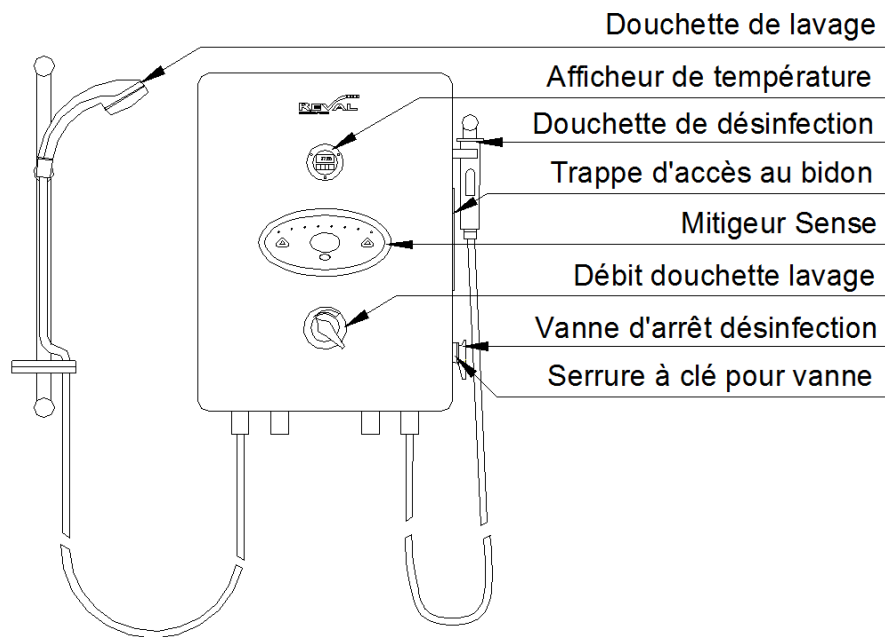

DIMENSIONS

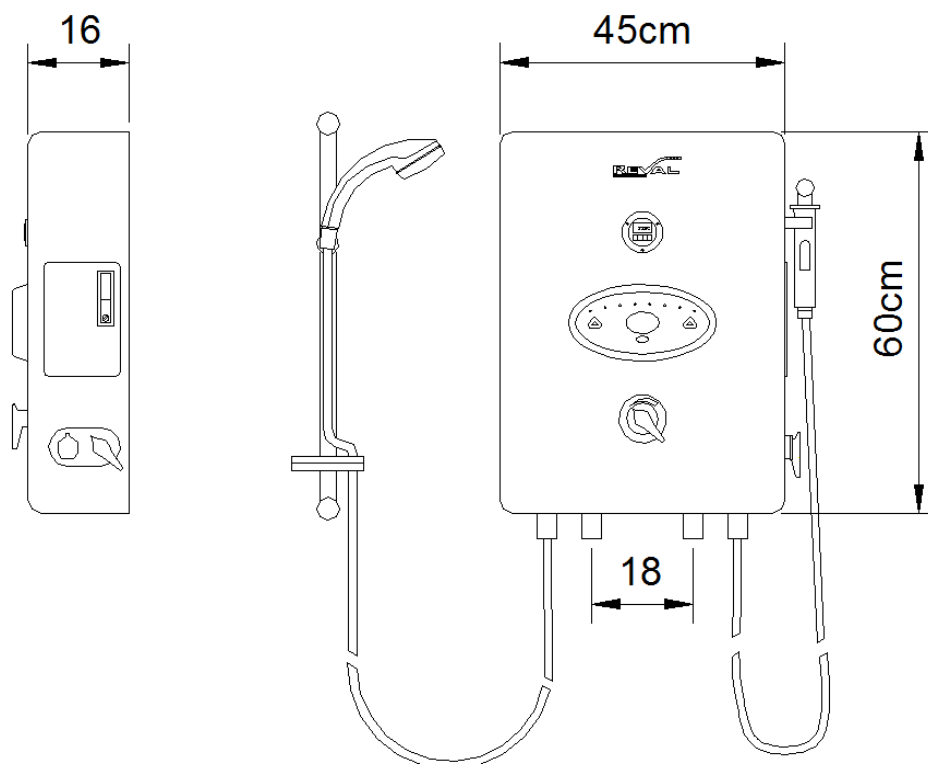

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS:

REF. 3011.01 Pupitre de douche "OPALE SENSE"

GÉNÉRALITÉS:

- Châssis métallique traité anti-corrosion.
- Habillage polyester blanc.
- Rampe de douche chromée avec porte-savon.
- Mitigeur thermostatique digital sensitif "SENSE" incluant la programmation de la température mini, maxi et défaut de la douchette de lavage.
- Mitigeur pourvu de clapets anti-retour et protection anti-brûlures.
- Désinfection thermique des canalisations intégrée.
- Douchette de désinfection avec gâchette. (flexible jaune)
- Douchette de lavage patient.
- Vannes d'arrêt et réglage du débit sur douchettes.
- Vanne de désinfection sécurisée par serrure à clé.
- Trappe d'accès au bidon de désinfectant sécurisée par serrure à clé.
- Système d'aspiration du produit désinfectant avec robinet d'arrêt et réservoir de 1 litre.
- Afficheur digital de la température de la douchette.

CONFORMITE:

- 73/23/CEE (Directive basse tension).
- 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique).
- NF EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques...).
- NF C 15-100 (Installation électronique à basse tension).

DOMAINE D'APPLICATION

Le pupitre mural de service 3011.01 est étudié pour le lavage des patients et la désinfection des appareils.

Toute utilisation du pupitre doit être effectuée par des personnes habilités et qualifiées ayant préalablement pris connaissance du manuel d'utilisation ainsi que des avertissements suivants:

Le pupitre doit être uniquement utiliser pour doucher des patients.


Ne jamais utiliser la douchette de désinfection sur les patients.

! Nous dégageons toute responsabilité si le produit est utilisé, modifié ou assemblé sans respecter les prescriptions du manuel d'utilisation.

UTILISATION

FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR SENSITIF :

Le mitigeur thermostatique digital situé sur le pupitre permet le réglage de la température de l'eau destiné à la douchette de lavage. Il permet d'allumer et d'éteindre la douchette de lavage.

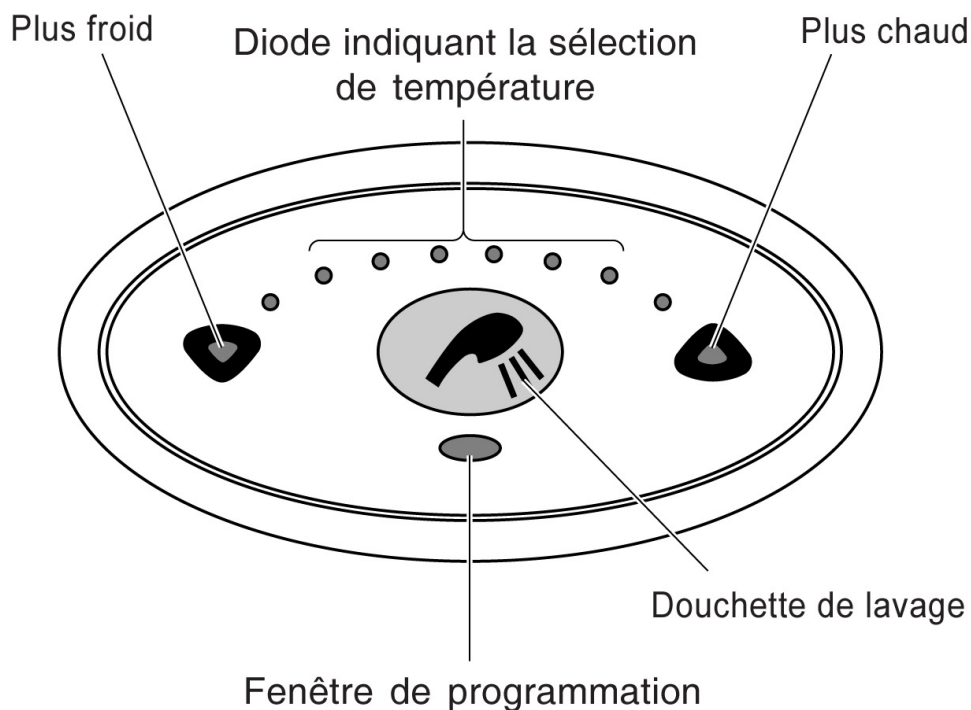

La température maximale de la douchette est pré réglée à 40°C.
La température par défaut de la douchette est pré réglée à 37°C.

Vérifier, avant chaque utilisation de la douchette, la température de l'eau.

DOUCHETTE DE LAVAGE :

La douchette de lavage est située à gauche du mitigeur thermostatique Sense.

Pour utiliser la douchette de lavage, actionnez la touche sensitive



Il est possible de régler la pression de la douchette en fermant ou en ouvrant légèrement la vanne $\frac{1}{4}$ de tour



Après utilisation de la douchette, ne pas oublier de fermer la vanne $\frac{1}{4}$ de tour.


UTILISATION

SECURITE ANTI-BRULURES :

En cas de rupture d'alimentation en eau froide, l'eau chaude est coupée instantanément. Tout risque de brûlure est évité.

DESINFECTION DES APPAREILS :

- Déverrouiller la vanne de désinfection à l'aide de la clé. Pour cela, tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

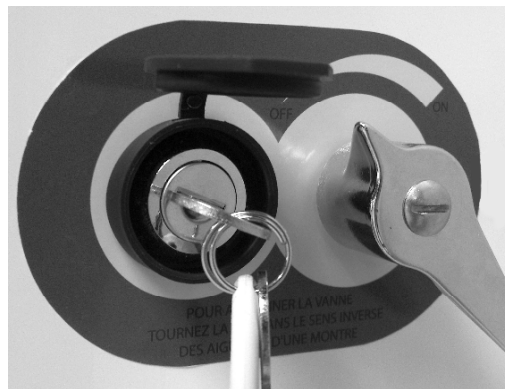

- Saisir la douchette de désinfection (flexible jaune)
- Asperger soigneusement les parties à désinfecter.

Ne pas diriger la douchette de désinfection vers le patient.

Attendre, afin de respecter le temps d'activité prescrit selon le désinfectant utilisé. Temps de contact de 15 minutes pour le produit B.F.R 4.0

- Rincer soigneusement à l'aide de la douchette de lavage, pour éliminer toute trace de bactéricide.

ENTRETIEN

AJOUT DE DESINFECTANT :

Le pupitre est équipé d'un système automatique de dosage du produit désinfectant.

L'ensemble de désinfection comprend :

- 1 bidon de 1 litre destiné à recevoir le produit désinfectant.
- 1 plongeur avec une buse calibrée, situé dans le bidon, et relié par un tuyau traversant le bouchon au venturi (pièce d'aspiration du produit désinfectant).
- 1 douchette de désinfection. (flexible jaune)

Dilution du produit :

Le mélange eau + désinfectant sortant de la douchette de désinfection se fait par une dilution en 2 étapes.

1^{ère} étape :

Dilution manuelle dans le bidon.

2^{ème} étape :

Le système d'aspiration (venturi) assure un dosage de 10% du produit aspiré dans le bidon de désinfectant.

Exemple :

Le désinfectant BFR 4.0 doit être utilisé avec une dilution finale de 0,4%.


- 1) Dilution manuelle dans le bidon à 4% soit 40ml de BFR 4.0 pour 960ml d'eau.
- 2) Dilution complémentaire de cette solution assurée automatiquement avec de **l'eau froide** par le système d'aspiration (venturi) avec un dosage de 10% .

NETTOYAGE DU PUPITRE :

Afin de nettoyer la cuve, désactivez le mitigeur thermostatique digital Rada Sense, utilisez la clé magnétique située sur le coté du pupitre.

Positionnez la clé devant le capteur « fenêtre de programmation ». Cette opération désactivera les capteurs pendant 30minutes ou jusqu'à ce que la clé magnétique soit à nouveau présentée.

Pour le re-activer, recommencez l'opération.

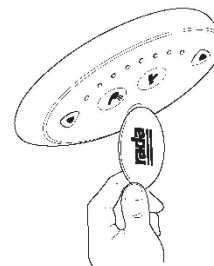

Utiliser uniquement des produits liquides (savon liquide).

Ne pas utiliser de produits abrasifs de type " poudre à récurer ou crème nettoyante " ni de solvants.

CARNET DE BORD

Date du contrôle	Etat de la cartouche du mitigeur	Etat des douchettes	Observations / Compte rendu	Actions correctives / Motif d'intervention / date	Contrôleur (nom et signature)



FRANCE :

Reval®

Z.A. Fief des Prises

Usseau 17220 Sainte Soulle

Tel: (33) 05.46.42.04.16

Fax: (33) 05.46.43.06.38

www.groupe-reval.com

UNITED KINGDOM :

Reval® Continuing Care Limited

Unit 17 Brynmenyn Busines Centre

St Theodore's Way - Brynmenyn

CF32 9TZ BRIDGEND - WALES

Tel: 01656 721 001

Fax: 01656 720 006

www.reval-group.com