

Procédure de chargement de la tubulure



1. Repérer le bouton de démarrage/ arrêt au bas de l'angle droit du panneau de contrôle. Appuyer pour mettre en marche.



2. Confirmer si vous voulez GARDER ou EFFACER les paramètres déjà enregistrés dans la pompe.



3. Avec l'écran de la pompe en face de vous, ouvrir la porte bleue située sur le côté droit de la pompe.



4. Tenir la valve anti-débit libre par la tablette et insérer la valve sur la tige à gauche.



5. Tenir la bague noire, et étendre doucement le tube de silicone pour l'enrouler autour du rotor dans le sens antihoraire. Tracter la bague noire pour la placer dans l'emplacement à droite.



6. Fermer la porte bleue. Vous devez lire sur l'écran, tubulure chargée.


Purge et programmation de la pompe



1. Appuyer sur AMORCER puis sur Amorçage automatique pour purger automatiquement ou TENIR appuyé le bouton de purge manuelle pour purger la tubulure. Appuyer sur TERMINE quand la tubulure est purgée.




2. Appuyer sur AJUSTER ALIMENTATION puis sur DEBIT pour régler le débit horaire.

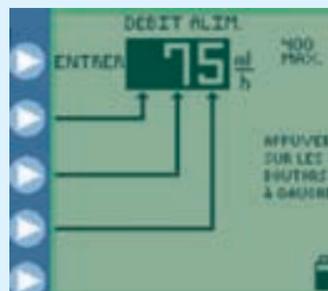


3. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer le débit horaire (unités, dizaines, centaines). Appuyer sur ENTRER pour confirmer.



4. Appuyer sur VOLUME à administrer pour programmer la dose à délivrer si besoin.

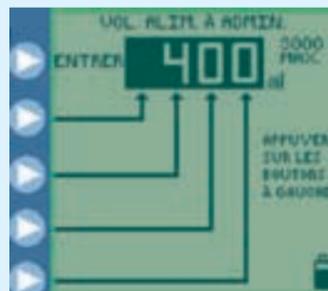

5. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer la dose à délivrer (unités, dizaines, centaines, milliers). Appuyer sur ENTRER pour confirmer.

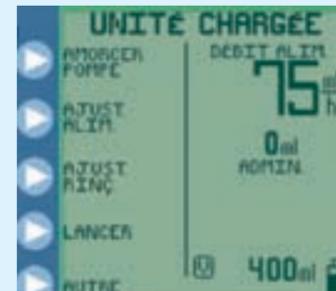

6. Appuyer sur TERMINE pour retourner à l'écran principal et appuyer alors sur LANCER pour commencer l'administration.



7. Pour administrer avec la plus grande précision, le bas de la poche de nutriment doit se situer à une hauteur de 45cm au dessus du haut de la pompe.

Arrêt de la pompe

Repérer le bouton de démarrage / arrêt au bas de l'angle droit du panneau de contrôle. Appuyer et tenir le bouton pendant le décompte, jusqu'à ce que l'écran affiche zéro.

Information code erreur



Erreur attente
Pompe gardée en attente pendant plus de 10 minutes.
Appuyer sur CONTINUER puis sur LANCER pour démarrer l'administration ou arrêter la pompe.



Erreur rotor
Problème provenant du rotor et du silicone enroulé sur le rotor.
S'assurer que le silicone est correctement mis en place sur le rotor.



Erreur débit
Obstruction sur la ligne aval de la pompe.
Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'au malade et rectifier.



Erreur alimentation
La poche de nutriment est vide ou présence d'une obstruction sur la ligne en amont de la pompe, valve mal positionnée.
Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'à la pompe ou changer la poche de nutriment ou, bien enclencher la valve.



Nutrition délivrée
La dose de nutrition a été administrée.
Arrêt de la pompe.



Tubulure délogée
La bague noire (MISTIC) n'est pas correctement mise en place dans son logement.
S'assurer que la tubulure est correctement chargée.



Batterie faible
La batterie doit être rechargée immédiatement.
Connecter le cordon secteur à la prise secteur.



Erreur système
Erreur générale- voir le manuel pompe.
Envoyer la pompe au SAV.