



# Instructions de montage

## Handbike

### Top End® Force™3



Yes, you can.®



# Ce que vous allez recevoir :

- Le carton comprend :
  - 1 – Un plastique de protection entourant le flanc sur lequel sont fixés la toile d'assise et le dossier
  - 2 – Roues arrière
  - 1 – Fourche/pédalier/roue avant
  - 1 – Coussin de dossier
  - 1 – Coussin d'assise
  - 2 – Ensemble de repose-pieds
  - 1 – Barre anti-encastrement
  - 1 – Drapeau de sécurité
  - 1 – Kit de fixation incluant 2 axes de roues arrière, 2 fixation demi noix, 4 vis, 4 rondelles, 4 écrous, 2 sangles de repose-pieds, 2 bouchons d'axe, 1 kit d'adaptateur en largeur du pédalier et les instructions de montage.



# Ce que vous allez avoir besoin :

- Clé Allen de ¼''
- Clés Allen de 4 mm et 5 mm
- Clés plates de 10 mm et 15 mm
- Quelqu'un pour vous aider
- Temps de montage environ 1h à 1h30



**Yes, you can.®**



# Etape 1 : Mise en place

B. Retirez tous les éléments du carton. Effectuez un second contrôle pour être sûr que toutes les pièces ont été retirées du carton.



A. Enlevez le carton et laissez le plastique sur le châssis pour éviter les rayures.



Yes, you can.®



## Etape 2 : Montage des roues arrière

- Insérez un axe dans chacune des deux roues arrière. Les roulements du moyeu doivent se faire face. Le côté plat à l'intérieur.
- Insérez les roues (qui sont identifiées gauche et droite) sur le bon côté du handbike.
- Utilisez une clé Allen de ¼" pour serrer l'axe dans les canons d'axe.
- Mettez les capuchons en caoutchouc sur les axes.






## Etape 3 : Fixation du dossier

- Insérez le tube de support de dossier dans la fixation soudée à la barre de carrossage.
- Utilisez une clé Allen de 5 mm pour serrer fermement.
- Remarque : Il sera plus facile de mettre le coussin si le dossier est monté dans la position la plus inclinée.



**Yes, you can.®**

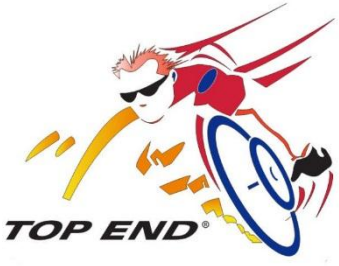

## Etape 4 : Installation de la barre anti-encastrement

- Desserrez les colliers de fixation de la barre anti-encastrement à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.
- Insérez la barre anti-encastrement dans ses fixations .
- Utilisez une clé Allen de 5 mm pour serrer les colliers de fixation.



Yes, you can.®



# Etape 5 : Installation des coussins



- Retirez la bande Velcro du dossier (il y a un film jaune recouvrant la face adhésive).
- Retirez le film de la face adhésive.
- Appliquez la face adhésive au milieu du dossier et appuyez fermement pour s'assurer qu'il soit bien fixé.
- Faites correspondre le Velcro cousu sur le coussin de dossier par rapport au Velcro du dossier.

- Pliez le coussin d'assise en deux pour le fixer sous les sangles du siège.



Yes, you can.®





# Etape 6 : Fixation de la fourche

## A. Pour se preparer à la fixation de la fourche:

1. Utilisez une clé Allen de 4 mm pour retirer les bouchons du tube de direction.
2. Retirez les entretoises en carton et jetez-les.
3. Repositionnez les bouchons du tube de direction, en les laissant desserrer.
4. Relâchez le frein de stationnement.
5. Retirez l'amortisseur en caoutchouc en utilisant une clé Allen de 5mm et mettez-le de côté.
6. Levez la moitié avant du vélo et utilisez une câle ou une boîte pour qu'elle ne touche pas le sol.

1, 2 et 3



4



5



6



Yes, you can.®




# Etape 6 : Fixation de la fourche (suite)

## B. Fixation de la fourche au châssis :

1. Présentez une demi-noix de serrage au bout de chaque côté de l'axe, partie couleur aluminium sur le chassis du vélo.
2. Mettez la vis qui a été retirée de l'amortisseur à travers le 1er trou de forme allongée (sur la partie soudée du tube de direction) dans l'amortisseur.
3. Installez les autres demi-noix de serrage et fixez-les aux demi-noix précédemment installées en utilisant une clé Allen de 5.

(voir la page suivante pour des remarques supplémentaires)

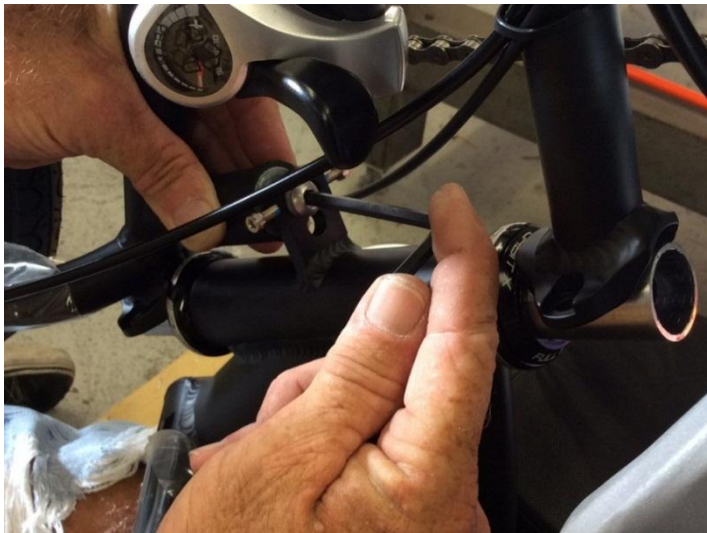

2



3



Yes, you can.®



# Remarques

- Alignez la fourche dans une position droite, puis réglez les deux vis d'ajustement pour s'assurer que votre fourche soit maintenue en position droite.
- Assurez-vous que les vis de la tête de fourche et des noix de serrage sont correctement serrées. Il se peut que vous ayez à serrer en bas, serrer en haut et revenir en bas
- Vous pouvez incliner la fourche de chaque côté pour faciliter l'accès de la clé Allen pour le serrage.



**Yes, you can.®**



# Etape Etape 7 : Installation des repose-pieds

- Retirez le carton situé sous le handbike.
- Serrez le frein de stationnement.
- Desserrez les deux vis des supports de repose-pieds de chaque côté en utilisant la clé Allen de 4 mm.
- Insérez les repose-pieds dans leurs supports.
- Serrez fermement à l'aide des clés Allen de 4mm et de 10 mm.



Yes, you can.®



# Etape 8: Fixation des sangles de repose-pieds

- Prenez les deux sangles et détachez les parties inférieures deux bandes velcro.
- Enveloppez les sangles autour des tubes de repose-pieds afin qu'elles soient solidement fixées à la bande Velcro située sur le bord du repose-pieds .



Yes, you can.®



# Etape 9 : Installation du drapeau de sécurité

- Assemblez les deux tiges du drapeau ensemble puis insérez l'ensemble dans le porte-drapeau à l'arrière du vélo.



**Yes, you can.®**



# Profitez de votre nouveau Handbike Top End® Force™3

- Veillez à enregistrer votre numéro de série et à lire le manuel d'utilisation.
- Si vous avez des questions, veuillez appeler s'il vous plait le service clients Invacare :
  - Par téléphone au : 02 47 62 69 16
  - Par email : [alberactif@invacare.com](mailto:alberactif@invacare.com)

