

AXIRAL



Axiral M300 / M500 Manuel d'Utilisation

User Guide M300/M500 v1.0 French (01/01/2010)

Mode d'emploi:

1. Avant de mettre ce produit en marche, veuillez lire en détail ce Manuel d'Utilisation et les documents joints, et les conserver pour information.
2. Avant d'utiliser le M300/M500 pour la première fois, assurez-vous que la batterie a bien été connectée (*voir p°4 pour les instructions*) et retirez la pellicule de protection de l'écran. Il est recommandé de charger à fond la batterie.
3. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni. Merci de vous adresser à votre distributeur pour tout remplacement de la batterie (ou consultez notre site Internet www.axiral.com).
4. Pour limiter les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas laisser le produit entrer en contact avec l'eau ou l'humidité.


Prise en main

- 1 Allumez le M300/M500 en appuyant sur le bouton marche/arrêt



Bouton marche/arrêt

- 2 Pour ouvrir le support de lecture, abaissez doucement chaque pied

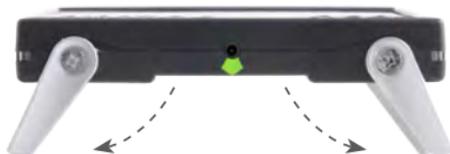

- 3 Ajustez le zoom et le mode couleur en appuyant sur le bouton correspondant

Zoom
x4 x8 x16*



Gel de l'Image 4

Pour geler l'image, appuyez une fois. Pour sortir du mode photo, re-appuyez une fois

Mode Couleur

Couleurs Naturelles

Noir/Blanc

Blanc/Noir

Jaune/Bleu

Bleu/Jaune

Mode de Contraste

Binaire


Contrasté **

*M500 uniquement

** Non disponible en mode TV

Connection TV*

- a** Pour **connecter le M500 à votre télévision**, branchez le câble TV sur votre télévision, et mettez cette dernière en mode auxiliaire vidéo (AV). L'image apparaîtra automatiquement.

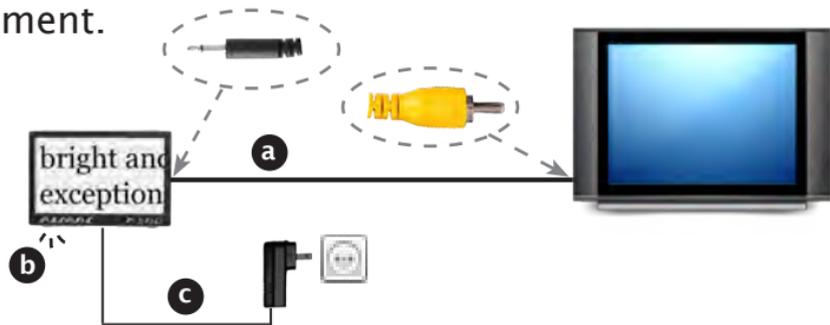

Indicateur de Niveau de Batterie

- b** L'indicateur de niveau de batterie s'allume en:
vert quand la batterie est chargée,
orange quand il reste moins de 30% de la batterie,
rouge quand la batterie a besoin d'être chargée.

Chargement

En fonction de votre lieu de séjour, choisissez l'adaptateur correspondance et glissez le dans le l'emplacement à l'arrière du chargeur. Vous pouvez changer l'adaptateur à tout moment répétant l'opération dans le sens inverse.


- c** Pour **charger le M300/M500**, branchez simplement le chargeur dans une prise murale. L'indicateur de niveau de batterie clignotera en rouge quelques secondes puis passera au rouge fixe. La batterie est chargée dès que le voyant devient vert.

Il n'est pas nécessaire de charger complètement le M300/M500 avant de l'utiliser sur batterie. Vous pouvez continuer à utiliser le M300/M500 pendant la charge.


**M500 uniquement*

Clip de Ceinture

Pour retirer le clip de ceinture, appuyez sur le dessus du clip, et retirez-le en le faisant glisser vers le haut, puis dévissez la molette.

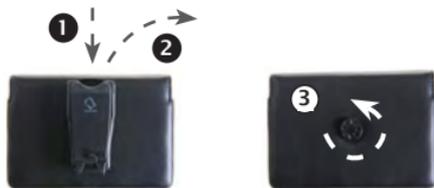

Connexion de la Batterie

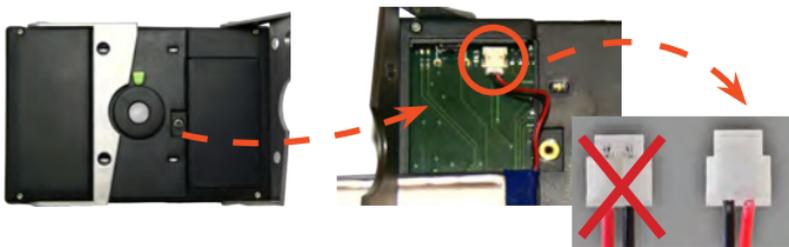

Pour **connecter la batterie**:

- Dévissez la trappe
- Connectez la batterie, côté plat du connecteur vers le haut

Tour-de-cou et Lanière

Le M300/M500 est équipé de passants aux quatre coins de l'appareil.



Spécifications Techniques

Dimensions:	110 x 76 x 17 mm / 4.4" x 3" x 0.7"
Poids:	120g / 4.3 onces
Autonomie:	2h45
Temps de recharge:	2h
Caméra numérique full HD courte distance	
Sorte vidéo TV*	
Zoom:	x4, x8, x16*
Ecran:	diagonale 4"3 (112 mm), format 16:9
Batterie Li-ion polymère	
Charger de voyage livré avec 4 adaptateurs (110V - 240V)	

**M500 uniquement*