

CE 0088

©2010 Roche Diagnostics

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et FASTCLIX sont des marques de Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

06772001001(02) – 2010-11 M_Version03_Rev0
Mise à jour : 2010-06

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Mobile

Roche



Accu-Chek® Mobile

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE

Instructions pour les premiers pas

Mettez le système en marche et découvrez un tout nouveau concept de mesure de glycémie.

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION.

ACCU-CHEK®

Bienvenue dans le tout nouveau concept de mesure de glycémie !

Ces instructions vous permettent de vous familiariser rapidement et simplement avec votre nouveau système Accu-Chek Mobile et de découvrir un tout nouveau concept de mesure de glycémie.

Les présentes instructions vous offrent des informations détaillées sur les thèmes suivants :

1. Mise en marche du système Accu-Chek Mobile
2. Préparation de l'autopiqueur
3. Effectuer une mesure de glycémie
4. Préparation d'une nouvelle lancette
5. Avertissements

⚠ Les présentes instructions ne remplacent pas le manuel d'utilisation détaillé de votre système Accu-Chek Mobile. Conformez-vous impérativement aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation du lecteur.

Bouton coulissant permettant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette



1. Mise en marche du système Accu-Chek Mobile



Ouvrez entièrement le capot de protection **A** jusqu'à la butée. Vous serez ensuite en mesure d'ouvrir le compartiment de la cassette et d'insérer la cassette-test.



Faites glisser le bouton coulissant **B** du couvercle du compartiment de la cassette vers le bas.



Retirez une nouvelle cassette-test de son emballage et insérez-la **C**. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette ainsi que le capot de protection.




Retirez les feuilles de protection **D** de l'écran d'affichage. Retirez la feuille de protection **E** par l'arrière du lecteur pour activer les piles.




Appuyez sur la touche Marche/Arrêt **F** pendant plus de 2 secondes pour mettre le lecteur en marche.



Sélectionnez la langue à l'aide des touches Haut/Bas **G**.

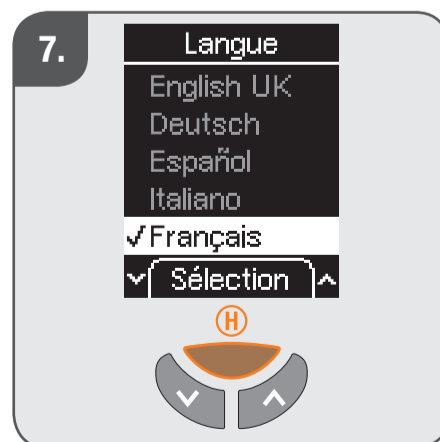

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt **H** pour régler la langue.

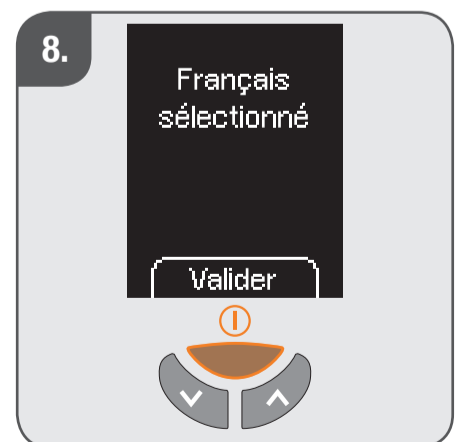


Appuyez sur la touche Marche/Arrêt **I** pour valider la langue réglée. Après le test d'affichage et l'affichage des tests disponibles, le menu principal s'affiche. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant plus de 2 secondes pour éteindre le lecteur.

⚠ Si vous avez réglé par erreur une autre langue que celle que vous souhaitez, il est possible que vous ne soyez plus en mesure de lire les menus. Vous pouvez quand même modifier le réglage de la langue. Pour ce faire, suivez les instructions du chapitre 4.9 du manuel d'utilisation, section « Corriger un réglage incorrect de la langue ».

2. Préparation de l'autopiqueur



Retirez l'embout (A).

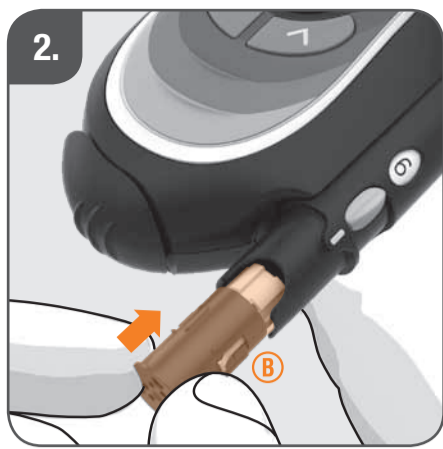

Insérez une nouvelle cartouche de lancettes (B) (en insérant d'abord la partie blanche). 6 lancettes neuves stériles sont à votre disposition.



Remplacez l'embout (C).



Réglez la profondeur de piqûre désirée en tournant l'embout réglable (D) de l'autopiqueur jusqu'à la position correspondante. Commencez par une profondeur moyenne de piqûre, par ex. 3.

3. Effectuer une mesure de glycémie




Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et essuyez-les bien. Cela permet d'éliminer les restes d'aliments ou de boissons pouvant entraîner de résultats erronés. De plus, il favorise l'irrigation sanguine.




Ouvrez le capot de protection (A). Le lecteur s'allume.



Appuyez sur le bouton multifonction (B) jusqu'à la butée pour armer l'autopiqueur. Appuyez une deuxième fois pour obtenir une goutte de sang.

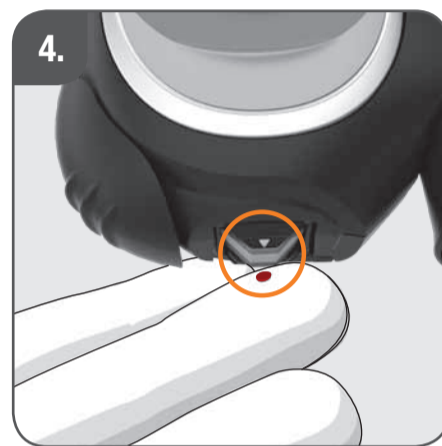

Appliquez la goutte de sang sur la zone réactive. Effleurez légèrement la zone réactive, car le sang est immédiatement absorbé.

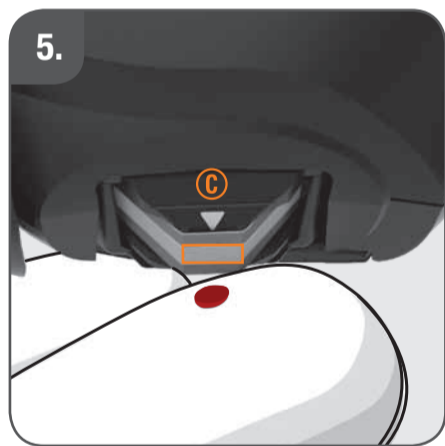


Veillez à appliquer la goutte de sang au centre de la zone réactive (C) et non sur les côtés.




Lisez le résultat et refermez le capot de protection (D). Le lecteur s'éteint automatiquement.

4. Préparation d'une nouvelle lancette

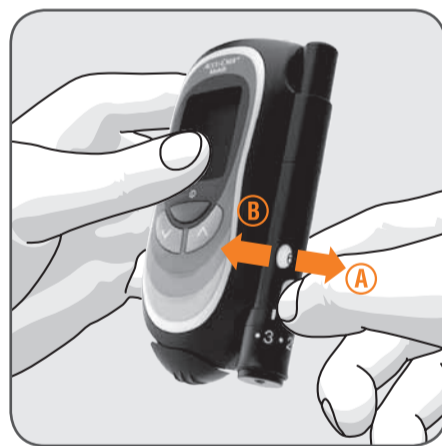

Faites coulisser le bouton-poussoir situé sur le côté de l'autopiqueur vers la droite (A) puis remettez-le en position initiale (B), pour préparer une nouvelle lancette.

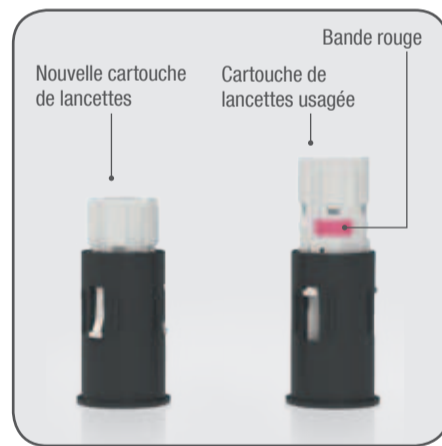

Une cartouche de lancettes usagée fait apparaître une bande rouge sur le cylindre blanc. Une cartouche de lancettes usagée ne doit pas être réutilisée.

5. Avertissements

⚠ Appliquez le sang directement après avoir obtenu la goutte et après vous être assuré que le lecteur indique *Appliquer sang*. N'oubliez pas que la concentration en glucose peut augmenter de plus de 20% si vous attendez trop longtemps (plus de 20 secondes). Une quantité importante de liquide peut s'évaporer pendant ce laps de temps.

⚠ Ne pressez pas la zone réactive sur votre doigt.

⚠ Ne pressez pas la zone réactive sur votre doigt car la goutte de sang pourrait s'étaler.

Pour chaque nouvelle mesure de glycémie, utilisez une petite goutte de sang frais, bien formée, et appliquez-la au centre de la zone réactive.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Diabetes Care
Schaarbeeklei 198
1800 Vilvoorde, Belgique
Tél: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
Fax: 02 247 46 80
www.accu-chek.be

Roche Diagnostics (Suisse) SA
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz, Suisse
Hotline service diabète 0800 803 303
appel gratuit

info@accu-chek.ch
www.accu-chek.ch