


ACCU-CHEK est une marque de Roche.


Roche Diagnostics GmbH
68298 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

0 524 626001 (01) 2008-05

Aperçu du lecteur

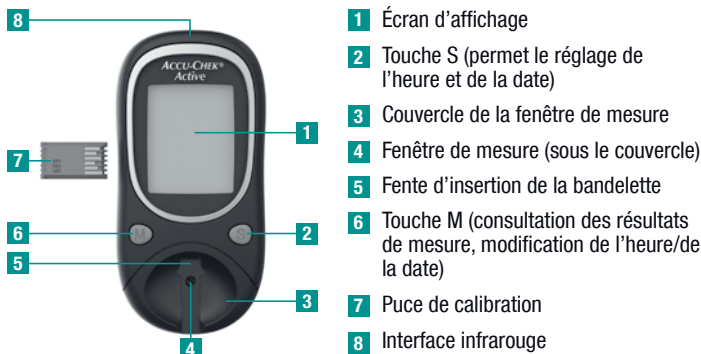

Aperçu des pictogrammes

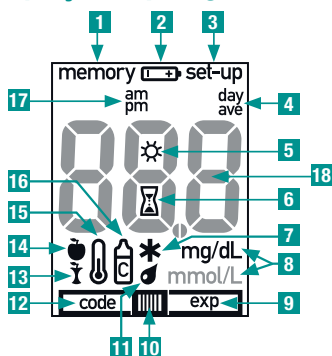

18 Symboles s'affichant dans la zone réservée aux résultats

L Résultat inférieur à 10 mg/dL (0,6 mmol/L)

H Résultat supérieur à 600 mg/dL (33,3 mmol/L)

--- + clignotant code : la puce de calibration n'est pas bien insérée dans le lecteur, ou est absente

--- + memory : le calcul de la moyenne est impossible

Messages d'erreur

£ - 1 Bandelette réactive insérée dans le mauvais sens / de manière incomplète, bandelette retirée du lecteur puis non réinsérée

£ - 2 Puce de calibration d'un autre système de mesure

£ - 3 Puce de calibration non lisible, puce de calibration d'un autre système de mesure

£ - 4 Fenêtre de mesure sale, bandelette réactive pliée / déposée de travers ou pas à plat

£ - 5 La bandelette réactive insérée est usagée, la fenêtre de mesure est sale, la bandelette réactive est insérée dans le mauvais sens ou pas jusqu'au bout

£ - 7 Le sang ou la solution de contrôle a été appliqué trop tôt, la bandelette réactive a été pliée/a bougée, puissants champs électromagnétiques

£ - 8 La puce de calibration a été retirée pendant la mesure

£ - 9 La bandelette réactive a été pliée/a bougée, la bandelette réactive est insérée dans le mauvais sens ou pas jusqu'au bout

£££ Erreur du lecteur

£rr La quantité de sang ou de solution de contrôle appliquée est insuffisante

£££ La température est trop basse ou trop élevée pour la mesure



Ce mémento ne saurait remplacer le manuel d'utilisation détaillé du lecteur de glycémie Accu-Chek Active. Prière de se conformer aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation du lecteur.


Retrait de la feuille de protection de la pile



Calibration




Mesure de la glycémie

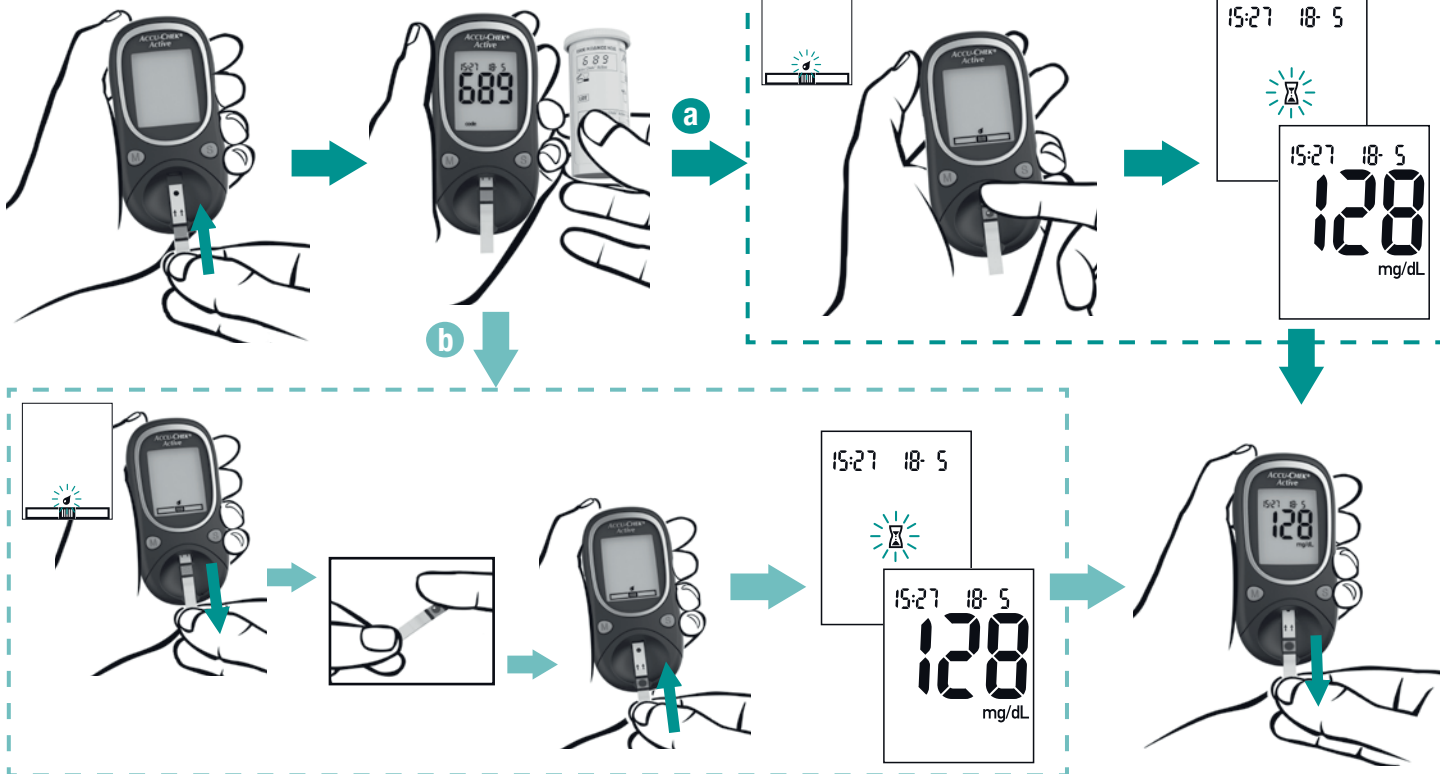

Réglage de l'heure et de la date

Allumer du lecteur :

S appuyer pendant plus de 3 secondes.

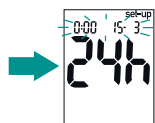

Éteindre le lecteur :

M + **S** appuyer brièvement et simultanément.

Modifier le réglage :

M appuyer ou maintenir appuyé.



Confirmer la modification et passer au réglage suivant :

Ordre des réglages

S appuyer brièvement

Format de l'heure et de la date

Heure (heure, minutes)

Année

Date (mois, jour)

Affichage final