

Logiciel de suivi du diabète

ONETOUCH® v2.3



Guide pratique


Ce guide fournit les instructions étape par étape permettant de :

- » Transférer les résultats de votre lecteur OneTouch®
- » Afficher et transmettre les 11 rapports disponibles
- » Ajouter des informations à un enregistrement de patient
- » Ajouter ou modifier les informations relatives à un résultat de glycémie

Veuillez consulter l'aide du programme ou le Manuel d'utilisation (disponible sur www.LifeScan.fr) pour obtenir la description complète des fonctions du programme.

ONETOUCH®

Le logiciel de suivi du diabète OneTouch® v2.3 fonctionne avec les lecteurs OneTouch® suivants :

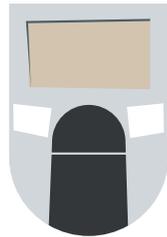

OneTouch® Basic®
OneTouch® Basic® Plus
OneTouch® II
OneTouch® Profile®



OneTouch® SureStep®
OneTouch® SureStep® Plus
OneTouch® GlucoTouch®
OneTouch® GlucoTouch® Plus



OneTouch® Ultra®
OneTouch® Ultra®2
OneTouch® FastTake®
OneTouch® SmartScan™
EuroFlash®
OneTouch® PocketScan®



OneTouch® UltraSmart™



InDuo®

Si votre lecteur n'est pas mentionné dans cette liste, reportez-vous à son Manuel d'utilisation pour savoir s'il est pris en charge par cette version du logiciel OneTouch®.



OneTouch® v2.3 propose 11 rapports permettant de gérer les informations qui peuvent vous aider à mieux contrôler votre taux de glycémie.

- » Effectue le suivi de la glycémie et des données médicales pouvant affecter les résultats de glycémie. Ce rapport vous permet de repérer facilement les tendances relatives à un créneau repas particulier.

Carnet

- » Identifie le comportement des résultats de glycémie selon l'heure de la journée.

Jour standard

- » Classe les patients selon des critères clés de façon à signaler ceux qui nécessitent un suivi plus attentif.

Exception

- » Affiche la synthèse des principaux rapports (rapport Carnet, rapport Camembert et rapport Tendances de la glycémie) pour une période de 14 jours donnée.

Synthèse

- » Affiche toutes les données de la base de données du logiciel (glycémie, médicaments, alimentation, activité physique) en format chronologique.

Liste données

- » Analyse la relation entre les résultats de glycémie, le dosage de l'insuline et l'ingestion de glucides.

Insuline



OneTouch® v2.3 propose 11 rapports permettant de gérer les informations qui peuvent vous aider à mieux contrôler votre taux de glycémie (suite).

- » Affiche le pourcentage des résultats de glycémie étant au-dessus, au-dessous et dans la plage d'objectifs pour chaque créneau repas.

Camembert

- » Surveille facilement l'impact du diabète sur les autres facteurs médicaux (tension artérielle, poids, consultations médicales et HbA1c).

Bilans de santé

- » Effectue le suivi des changements des résultats de glycémie au jour le jour.

Tendance Gly.

- » Identifie les comportements avant et après les repas sur différentes plages de glycémie.

Histogramme

- » Surveille l'impact des repas, de l'activité physique et des activités quotidiennes sur les résultats de glycémie.

Moyenne rés.



Préparer le lecteur OneTouch® au transfert des résultats.

» Pour commencer le transfert de données, le lecteur que vous connectez doit être réglé sur **MARCHE** ou sur **ARRÊT** selon son type. Identifiez votre lecteur dans l'une des listes ci-dessous, puis suivez les instructions relatives à la **MARCHE** ou à l'**ARRÊT**.

» Ces lecteurs doivent être réglés sur **ARRÊT** avant le téléchargement :

- Lecteur OneTouch® *FastTake*®
- Lecteur OneTouch® *PocketScan*®
- Lecteur *EuroFlash*®
- Lecteur OneTouch® *SmartScan*™
- Lecteur OneTouch® *Ultra*®
- Lecteur OneTouch® *Ultra*®2
- Lecteur *InDuo*®

» Ces lecteurs doivent être réglés sur **MARCHE** avant le téléchargement :

- Lecteur OneTouch® *Basic*®
- Lecteur OneTouch® *Basic*® *Plus*
- Lecteur OneTouch® *Profile*®
- Lecteur OneTouch® *II*
- Lecteur OneTouch® *SureStep*®
- Lecteur OneTouch® *SureStep*® *Plus*
- Lecteur OneTouch® *GlucoTouch*®
- Lecteur OneTouch® *GlucoTouch*® *Plus*
- Lecteur OneTouch® *UltraSmart*™

Si votre lecteur n'est pas mentionné dans cette liste, reportez-vous à son Manuel d'utilisation pour savoir si vous devez le régler sur **MARCHE** ou sur **ARRÊT** avant d'établir la communication.

Remarque : les lecteurs devant être réglés sur **MARCHE** pour les transferts de données peuvent s'arrêter en cas de délai de connexion trop long. Dans ce cas, il vous suffit de remettre le lecteur sur **MARCHE**.



Transférer les résultats d'un lecteur OneTouch® pour les afficher.

Le logiciel OneTouch® permet de transférer et d'afficher facilement les résultats glycémiques d'un lecteur OneTouch®.

Étape 1

Double-cliquez sur l'icône du bureau pour ouvrir le logiciel.



Étape 2


Cliquez sur l'icône **Télécharger les résultats du lecteur** de l'écran d'accueil.



Étape 3

Connectez le lecteur à l'ordinateur.

- » Branchez le câble d'interface OneTouch™ sur le port COM ou le port USB de l'ordinateur.
- » Branchez l'autre extrémité du câble d'interface OneTouch™ sur votre lecteur de glycémie.
- » Si vous utilisez le lecteur OneTouch® *FastTake*® / *PocketScan*® / *EuroFlash*® / *SmartScan*™, vous devez brancher le câble d'interface OneTouch™ sur l'adaptateur du lecteur. Insérez ensuite la bande de l'adaptateur dans le port de bandelette du lecteur.

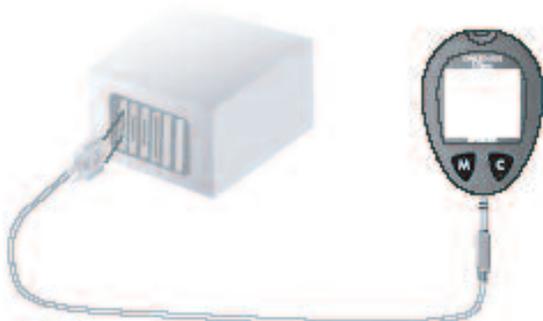

Transférer les résultats d'un lecteur OneTouch® pour les afficher (suite).

Étape 4

Pour commencer le transfert de données, vérifiez que le lecteur que vous connectez est réglé sur **MARCHE** ou sur **ARRÊT** selon son type. Voir la section *Préparer le lecteur OneTouch® au transfert des résultats*.


Étape 5

Cliquez sur le bouton **Télécharger rés. lect.**

Étape 6

Votre rapport favori va s'ouvrir automatiquement.

- » Personnalisez votre rapport favori en sélectionnant **Préférences / Options de rapport** dans la barre de menus.

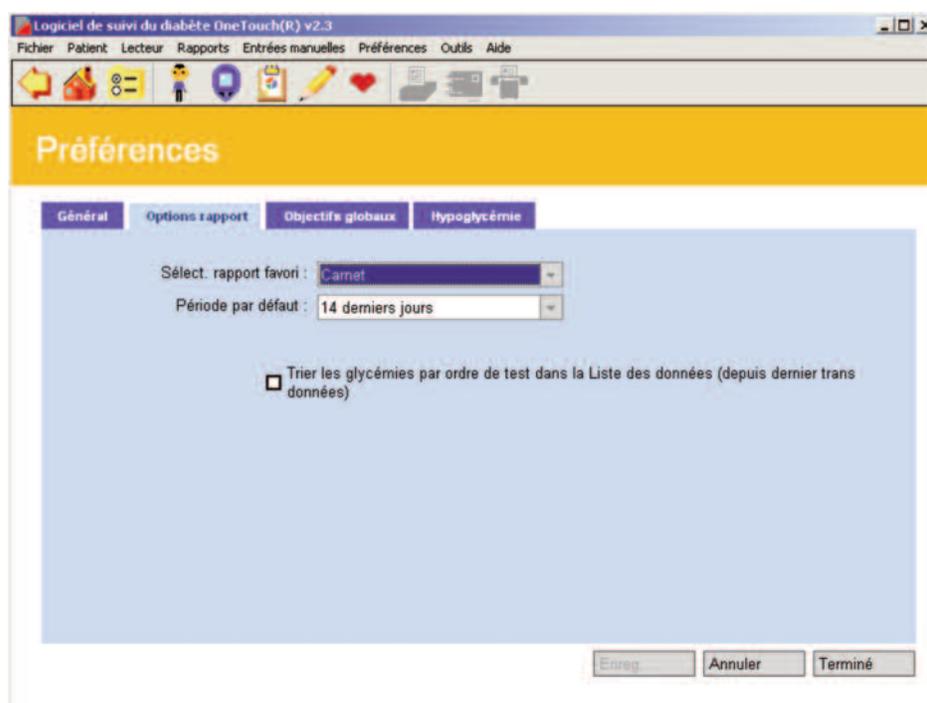

Afficher et transférer les rapports.

Quelques clics de souris suffisent pour afficher et transmettre les rapports.

Étape 1

Double-cliquez sur l'icône du bureau pour ouvrir le logiciel.



Étape 2

Cliquez sur l'icône **Afficher les rapports** de l'écran d'accueil.



Afficher les rapports

Étape 3


Cliquez sur le rapport que vous désirez voir.

Carnet <input type="checkbox"/> Sélect.	Synthèse <input type="checkbox"/> Sélect.	Camembert <input type="checkbox"/> Sélect.	Tendance Gly. <input type="checkbox"/> Sélect.
Jour standard <input type="checkbox"/> Sélect.	Liste données <input type="checkbox"/> Sélect.	Bilans de santé <input type="checkbox"/> Sélect.	Moyenne rés. <input type="checkbox"/> Sélect.
Exception <input type="checkbox"/> Sélect.	Insuline <input type="checkbox"/> Sélect.	Histogramme <input type="checkbox"/> Sélect.	

Étape 4

Partagez le rapport avec une autre personne.

Cliquez sur l'icône **Imprimer**, **E-mail** ou **Fax** de la barre d'outils, puis suivez les instructions.

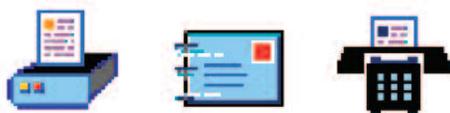



Ajouter des informations à un enregistrement de patient.

Personnalisez votre profil de diabète personnel.

- » Informations générales
- » Horaires
- » Médicaments
- » Posologies d'insuline
- » Complications

Étape 1

Double-cliquez sur l'icône du bureau pour ouvrir le logiciel.



Étape 2

Cliquez sur l'icône **Paramètres** de l'écran d'accueil.



Paramètres

Étape 3

Cliquez sur l'icône **Profil du patient** de l'écran Paramètres.



Profil du patient



Ajouter des informations à un enregistrement de patient (suite).


Étape 4

Sélectionnez le nom désiré dans le menu déroulant.

Patient : ▼

Étape 5

Utilisez les onglets bleus pour ajouter des informations pertinentes.

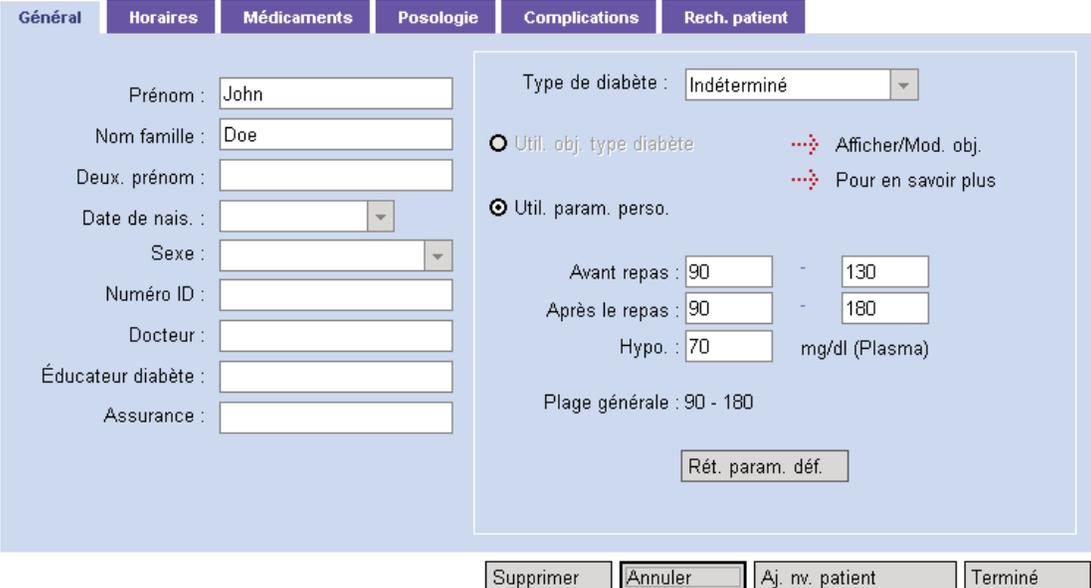

Général | Horaires | Médicaments | Posologie | Complications | **Rech. patient**

Prénom :
Nom famille :
Deux. prénom :
Date de nais. : ▼
Sexe : ▼
Numéro ID :
Docteur :
Éducateur diabète :
Assurance :

Type de diabète : ▼

Util. obj. type diabète Afficher/Mod. obj.
Pour en savoir plus

Util. param. perso.

Avant repas : -
Après le repas : -
Hypo. : mg/dl (Plasma)

Plage générale : 90 - 180

Étape 6

Cliquez sur le bouton **Terminé** pour enregistrer les changements.



Ajouter ou modifier des informations complémentaires aux résultats de glycémie.

Étape 1

Double-cliquez sur l'icône du bureau pour ouvrir le logiciel.



Étape 2

Cliquez sur l'icône **Afficher les rapports** de l'écran d'accueil.



Afficher les
rapports

Étape 3

Cliquez sur le bouton **Carnet** de l'écran Choix du rapport.



Étape 4

Cliquez sur le résultat de rapport que vous désirez modifier.

122
175

Ajouter ou modifier des informations complémentaires aux résultats de glycémie (suite).

Étape 5

Ajoutez ou modifiez les données appropriées dans les onglets bleus. Utilisez les onglets pour passer d'une section à l'autre.

Glycémie | Insuline | Méd. or. | Acti. p. | Ali. | Aller Enreg. Santé

Date : 22/10/2001
Heure : 12:00
Créneau : Avant le petit-déjeuner
Type : Autre site
Glycémie : Ou HAUT mg/dl
 Plasma
 Sang total

Comment. sur glycémie

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Alimentation	<input checked="" type="checkbox"/> Acti. phys.	<input type="checkbox"/> Activité physique
<input type="checkbox"/> Vacances	<input type="radio"/> Ali. diff.	<input checked="" type="radio"/> Avant	<input type="radio"/> Légère
<input checked="" type="checkbox"/> Stress	<input type="radio"/> Jeûne	<input type="radio"/> Pendant	<input type="radio"/> Intense
<input type="checkbox"/> Signes hypo.	<input type="radio"/> Alimentation excessive	<input type="radio"/> Après	<input type="checkbox"/> Médicaments
<input type="checkbox"/> Menstruation	<input type="radio"/> Alimentation insuffisante		<input checked="" type="checkbox"/> Autre

Comment. :

Omettre | Annuler | Aj. nv. enreg. | Terminé

Étape 6

Cliquez sur le bouton **Terminé** pour enregistrer les changements.

Terminé



Dépannage en général.

Si vous rencontrez des difficultés en utilisant le logiciel OneTouch[®], veuillez consulter la section appropriée du Manuel d'utilisation et du fichier Aide. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, veuillez contacter LifeScan, par téléphone ou par e-mail, pour obtenir le service d'assistance technique du logiciel OneTouch[®].

» België:	service@lifescanbenelux.com	0800-15325
» Belgique:	service@lifescanbenelux.com	0800-14660
» Canada:	CustomerService@LifeScanCanada.com Servicealaclientele@LifeScanCanada.com	1 800 663-5521
» Deutschland:	service@lifescan.de	0800-72 55 007
» España:	info@lifescan.es	900 100 228
» France:	info@LifeScanFrance.com	0800 459 459
» Grand-Duché de Luxembourg:	service@lifescanbenelux.com	0800-25749
» Ireland:	technicalsupport@lifescan.co.uk	1800 535676
» Nederland:	service@lifescanbenelux.com	0800-0222445
» Österreich:	kundenservice@lifescan.at	0800 244 245
» Schweiz/ Suisse/ Svizzera:	info@LifeScan.ch	0800-850 905
» United Kingdom:	technicalsupport@lifescan.co.uk	0800 028 0616
» United States:	CustomerService@LifeScan.com	1 800 382-7226

Pour tous les autres pays : contactez votre bureau LifeScan local ou visitez la section Around the World (autour du monde) du site Web de LifeScan à l'adresse www.lifescan.fr pour obtenir le numéro de téléphone du service d'assistance technique de votre région.

Utilisez-le conjointement avec votre professionnel de santé.

Le logiciel OneTouch[®] est conçu pour aider les patients diabétiques et les professionnels de santé à repérer, examiner et surveiller les principales données relatives au suivi du diabète. Le logiciel OneTouch[®] n'est pas destiné à fournir des conseils médicaux. Si vous êtes diabétique, consultez votre professionnel de santé avant d'instaurer des changements dans vos habitudes ou de modifier vos médicaments, votre régime alimentaire ou votre programme d'activité physique.



LifeScan, Inc.,
Milpitas, CA
95035 USA

LifeScan Regulatory Affairs Europe
Division of Ortho-Clinical Diagnostics France
1, rue Camille Desmoulins – TSA 40007
92787 Issy-les-Moulineaux, Cedex 09
France