

Analyser un spécimen patient

1. Lire code à barres cassette
2. Insérer cassette
3. Insérer la sonde d'aspiration
4. Homogénéiser et placer spécimen
5. Lire résultats

Effectuer une mesure de contrôle

1. Sélectionner gestion CQ
2. Sélectionner type CQ (contrôle)
3. Sélectionner niveau CQ (1, 2 ou 3)
4. Lire code à barres cassette
5. Essuyer et insérer cassette
6. Insérer la sonde d'aspiration
7. Homogénéiser et présenter contrôle
8. Lire résultats
9. Accepter ou refuser résultats

Effectuer une mesure C. Réf.

1. Sélectionner gestion CQ
2. Sélectionner type CQ (C. Réf.)
3. Insérer C. Réf.
4. Confirmer niveau C. Réf.
5. Lire résultats

Entretien



Reportez-vous au manuel d'utilisation pour des instructions détaillées.

Hebdomadaire - nettoyer chambre de mesure spécimens

Trimestriel - effectuer calibrage à l'aide du calibrateur

Annuel - remplacer cartouche pompe péristaltique

Lorsque nécessaire - nettoyer surfaces extérieures et remplacer papier imprimante

