




La technologie
pour les personnes
en situation
de handicap

FONDATION SUISSE POUR LES TELETHESES
STIFTUNG FÜR ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL
FONDAZIONE SVIZZERA PER LE TELETESI

The Grid 2 pour Grid Player

Manuel d'utilisation

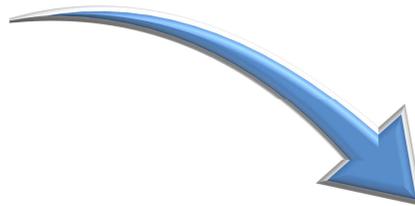

 **Internet**
Online Grids



www.fst.ch

FST Nottwil
Tél +41 41 939 62 80
flueckiger@fst.ch

FST Bâle
Tél +41 61 325 07 08
mueggler@fst.ch

FST Zurich
Tél +41 44 310 59 51
kemp@fst.ch

FST Lugano
p.a. Electrasim SA
Tél +41 91 923 39 46

FST Siège principal | Charmettes 10b - CP | CH - 2006 Neuchâtel 6 | Tél +41 32 732 97 77 | Fax +41 32 730 58 63 | info@fst.ch



Bienvenue dans The Grid 2

Merci d'avoir choisi The Grid 2 ! Ce guide va vous apprendre tout ce que vous devez savoir à propos de The Grid 2. Il vous guidera pas à pas pour réaliser des actions de base telles qu'éditer et changer les paramètres d'utilisateur.

Sommaire

Bienvenue dans The Grid 2	2
À quoi sert The Grid 2 ?	4
Les grilles, qu'est-ce que c'est ?	4
L'accès pour tous	4
L'espace de travail	4
Installation de The Grid 2	5
Période d'essai de votre logiciel	5
Activer une licence de The Grid 2	5
Contrat de licence	5
Prise en main : 'Explorateur des grilles' et votre 'utilisateur'	6
Qu'est-ce qu'un utilisateur ?	6
Qu'est-ce qu'une grille ?	6
Mini glossaire à apprendre	6
Charger un 'utilisateur'	6
Créer un nouvel 'utilisateur'	7
L'explorateur de grilles sur iPad	7
Utilisation de Grid Player sur iPad	8
Connexion du Grid Player au compte Internet	9
Connexion du logiciel The Grid 2 au compte Internet	9
Transférer un 'utilisateur' depuis The Grid 2 vers Grid Player sur iPad	10
Limitation de Grid Player sur iPad et Papoo touch	10
L'installation de la voix	11
Paramétrages vocaux	11
Edition: Introduction du mode édition	13
Edition d'une cellule	14
Créer une cellule de vocabulaire	15
Changer une image	15

Le bouton de capture d'écran.....	16
L'éditeur d'image	16
Modification d'un grille.....	18
Déplacer et redimensionner des cellules.....	18
Modifier le nombre de lignes et de colonnes	18
Paramétrages de la grille	19
Créer des nouvelles grilles et des cellules de jonction entre grilles	20
Créer une nouvelle grille.....	20
Accueil et Revenir	20
Grilles à retour automatique	20
Style de cellule	20
Ajouter une commande dans une cellule	22
Insertion Auto: cellules indépendantes	23
Cellule d'insertion auto prédictive.....	23
Cellule d'insertion auto d'une liste de mots	24
Sauvegarder votre 'utilisateur'	25
Configuration de l'accès pour l'utilisateur	25
Installation du pointeur (souris, écran tactile, pointeur frontal).....	25
Réglages des contacteurs.....	27
Connexion de contacteur.....	27
Méthode de balayage	28
Actions des contacteurs.....	28
Temporisation.....	29

à quoi sert The Grid 2 ?

The Grid 2 permet aux personnes qui sont physiquement et/ou sensoriellement handicapées d'accéder à leur ordinateur sans clavier ni souris. Votre ordinateur peut être utilisé pour communiquer avec une synthèse vocale ou pour des tâches informatisées comme écrire un email ou naviguer sur internet.

Les grilles, qu'est-ce que c'est ?

Les grilles sont des pages de boutons, appelés cellules. La plupart des cellules sont utilisées pour parler, écrire des phrases ou accéder à d'autres grilles.

L'accès pour tous

The Grid 2 a été conçu pour une utilisation universelle. L'accessibilité de ce logiciel est assurée grâce à une large gamme d'adaptations et vous permet de prendre le contrôle de votre ordinateur à l'aide d'une souris, d'un écran tactile, d'un joystick, d'un pointeur frontal, d'un oculomètre ou d'un contacteur.


L'espace de travail

The Grid 2 a de nombreux espaces de travail, qui sont comme des mini-programmes ou applications à l'intérieur de vos grilles. L'espace le plus utilisé est celui qui permet de composer des phrases pour la communication vocale, bien qu'il y ait aussi des espaces pour écrire un e-mail, naviguer sur Internet, utiliser Skype, écouter de la musique ou regarder un DVD et bien plus encore.

Il y a également un espace permettant d'utiliser The Grid 2 pour accéder à d'autres logiciels de votre ordinateur.

Installation de The Grid 2

L'installation de The Grid 2 est très simple : il suffit d'insérer le CD ou DVD dans votre lecteur et de suivre les instructions affichées à l'écran.

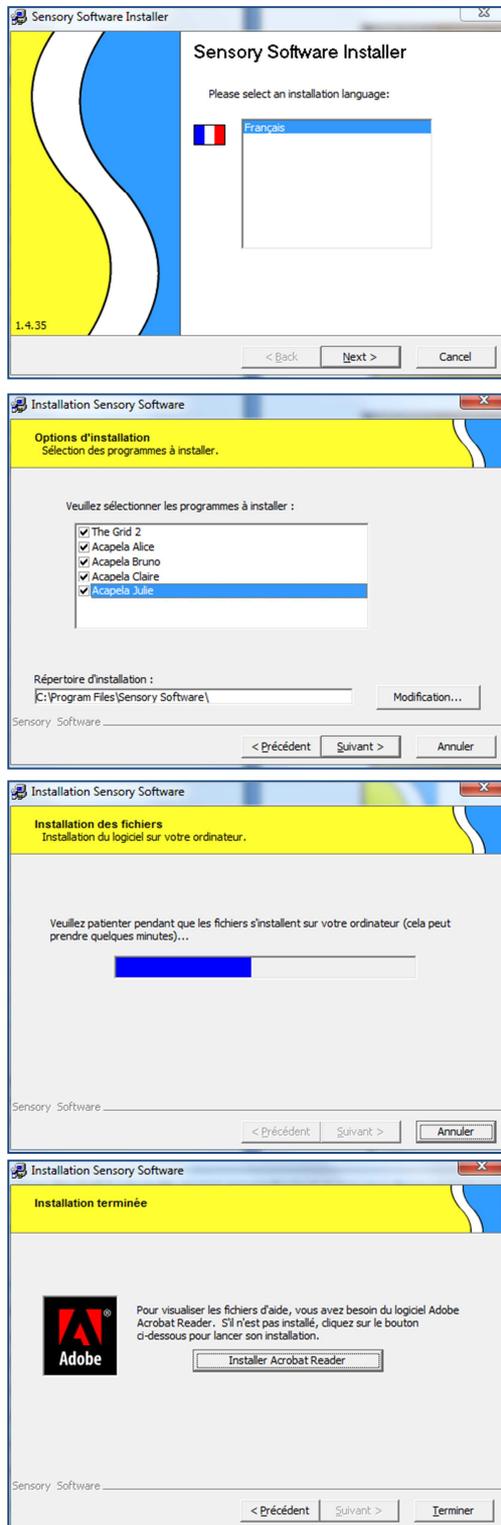

Période d'essai de votre logiciel

Vous pouvez tester une version complète de The Grid 2 sur une durée de **60 jours**. Votre période d'essai commence à partir du moment où vous installez le logiciel sur votre ordinateur. Vous pourrez alors utiliser toutes les fonctions du logiciel pendant ce laps de temps.

Une fois que la période sera terminée, vous aurez besoin d'**activer une licence** pour continuer d'utiliser le logiciel. Quelques parties du logiciel, comme des bibliothèques de symboles supplémentaires, des voix ou des grilles en plus, exigent de nouvelles licences qui doivent être achetées séparément.

Activer une licence de The Grid 2

Dès lors que vous êtes prêt à activer votre licence de The Grid 2, ou un composant comme une bibliothèque de symboles, des voix ou des grilles en plus, lancez **Licence Manager** dans le Menu de Démarrage de Windows. Suivez les instructions affichées à l'écran pour activer votre licence.


Contrat de licence

Veillez-vous assurer que vous avez bien lu le contrat de licence qui gère l'utilisation de The Grid 2. L'installation du logiciel implique que vous acceptiez de respecter le contrat de licence.

Remarque : vous devrez être connecté à internet, ou téléphoner à votre revendeur pour enregistrer votre logiciel.

Prise en main : 'Explorateur des grilles' et votre 'utilisateur'

Lorsque vous démarrez The Grid 2, la fenêtre **Explorateur des grilles** s'ouvre. Cette fenêtre vous permet de choisir l'utilisateur que vous voulez activer, et vous fournit également les outils pour gérer les utilisateurs.

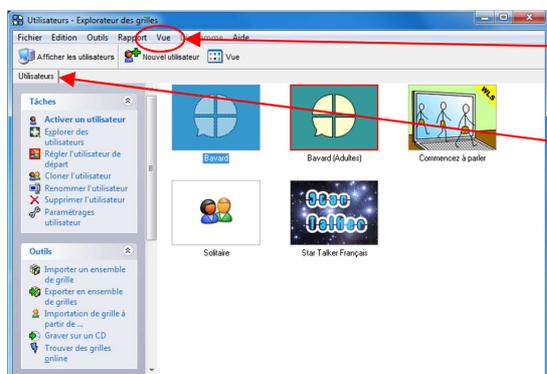

ASTUCE : essayer en cliquant sur le bouton de visualisation de voir différentes mises en page.

Les utilisateurs sont regroupés par onglets, dans le but de faciliter l'utilisation. A l'intérieur d'un onglet, il peut y avoir un seul ou plusieurs utilisateurs.

Qu'est-ce qu'un utilisateur ?

Chaque élément dans l'explorateur des grilles représente un **utilisateur**. Chaque 'utilisateur' est une combinaison d'un nombre de grilles réunies avec des réglages spécifiques à l'utilisateur, comme par exemple la voix utilisée pour la lecture et les options d'accessibilité comme les contacteurs périphériques. Pour faciliter votre compréhension, vous pouvez remplacer le terme d' 'utilisateur' par 'classeur de communication'. En effet, dans The Grid 2 et Grid player, on peut simplement gérer plusieurs **classeurs de communications**, avec des contenus, des mises en pages et des manières d'y accéder différentes, en fonction de chaque usager. Comme vous pourriez trouver une étagère de logopédiste avec différents classeurs de communication en fonction de chaque patient.

Qu'est-ce qu'une grille ?

Les grilles sont des **pages** de boutons. Les boutons sont appelés **cellules**. La plupart des cellules sont utilisées pour parler, écrire des phrases, ouvrir d'autres grilles ou effectuer des tâches spéciales.

Mini glossaire à apprendre

- The Grid 2 => logiciel complet, fonctionnant uniquement sous Windows, permettant les modifications et la programmation
- Grid Player => App pour iPad ou iPhone, gratuite, ne permettant que la lecture et non la programmation des grilles.
- Utilisateur => équivalent d'un classeur de communication spécifique à un usager/utilisateur
- Grille => Page du classeur de communication
- Cellule => Case ou bouton d'une grille/page

Charger un 'utilisateur'

Avant tout, essayez différents utilisateurs prédéfinis pour avoir un aperçu des possibilités offertes par The Grid 2. Pour démarrer un utilisateur, il suffit d'un simple double-clic, depuis l'explorateur de grilles, sur l'icône de l'utilisateur choisi. La grille de démarrage va s'ouvrir et vous serez prêt à commencer.

Créer un nouvel 'utilisateur'


Pour créer un nouvel 'utilisateur', cliquer sur le bouton **Nouvel Utilisateur** dans la barre d'outils de l'explorateur des grilles.

Autrement, vous pouvez copier un 'utilisateur' existant qui peut être alors modifié pour une utilisation personnelle. Pour cela, cliquez une fois sur l' 'utilisateur' que vous voulez copier, et cliquez sur **Cloner l' 'utilisateur'** dans la barre de recherche (sur le côté gauche de la fenêtre de l'explorateur des grilles).

ASTUCE : Nous vous recommandons fortement de commencer en copiant un 'utilisateur' préexistant car créer un réseau de grille à partir de rien risque d'être un travail fastidieux.

L'explorateur de grilles sur iPad


Lorsqu'on lance l'application Grid Player sur iPad, l'application s'ouvre sur le dernier écran qu'on a utilisé. Lorsqu'une grille est affichée, pour accéder à l'explorateur de grilles, il faut faire glisser de droite à gauche la petite pastille rouge qui dépasse en bas à droite de l'écran.

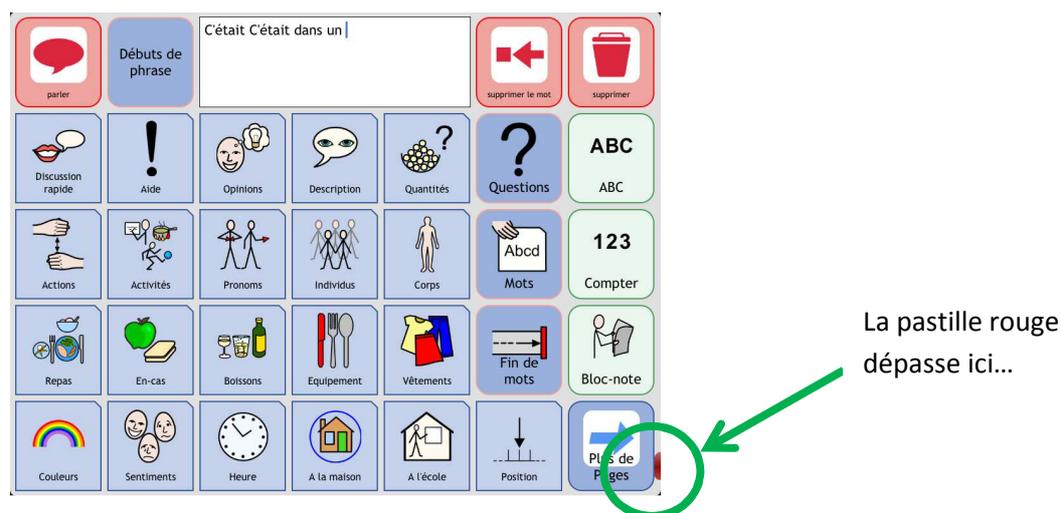

L'explorateur de grille sur iPad vous affiche en-haut à gauche une icône de flèche circulaire qui permet de mettre à jour vos 'utilisateurs' (l'iPad va aller rechercher les versions les plus à jour de vos 'utilisateurs' sur le compte Internet indiqué au Grid Player (c.f. chapitre suivant).

Utilisation de Grid Player sur iPad

Grid Player est une 'app' disponible pour iPad et iPhone. Celle-ci permet de synchroniser votre appareil mobile avec un compte internet sur lequel vous aurez expédié vos fichiers depuis le logiciel The Grid 2. Ainsi, vous pouvez créer ou modifier à votre guise des fichiers sur un ordinateur équipé de Windows, puis les utiliser avec l'iPad ou l'iPhone.

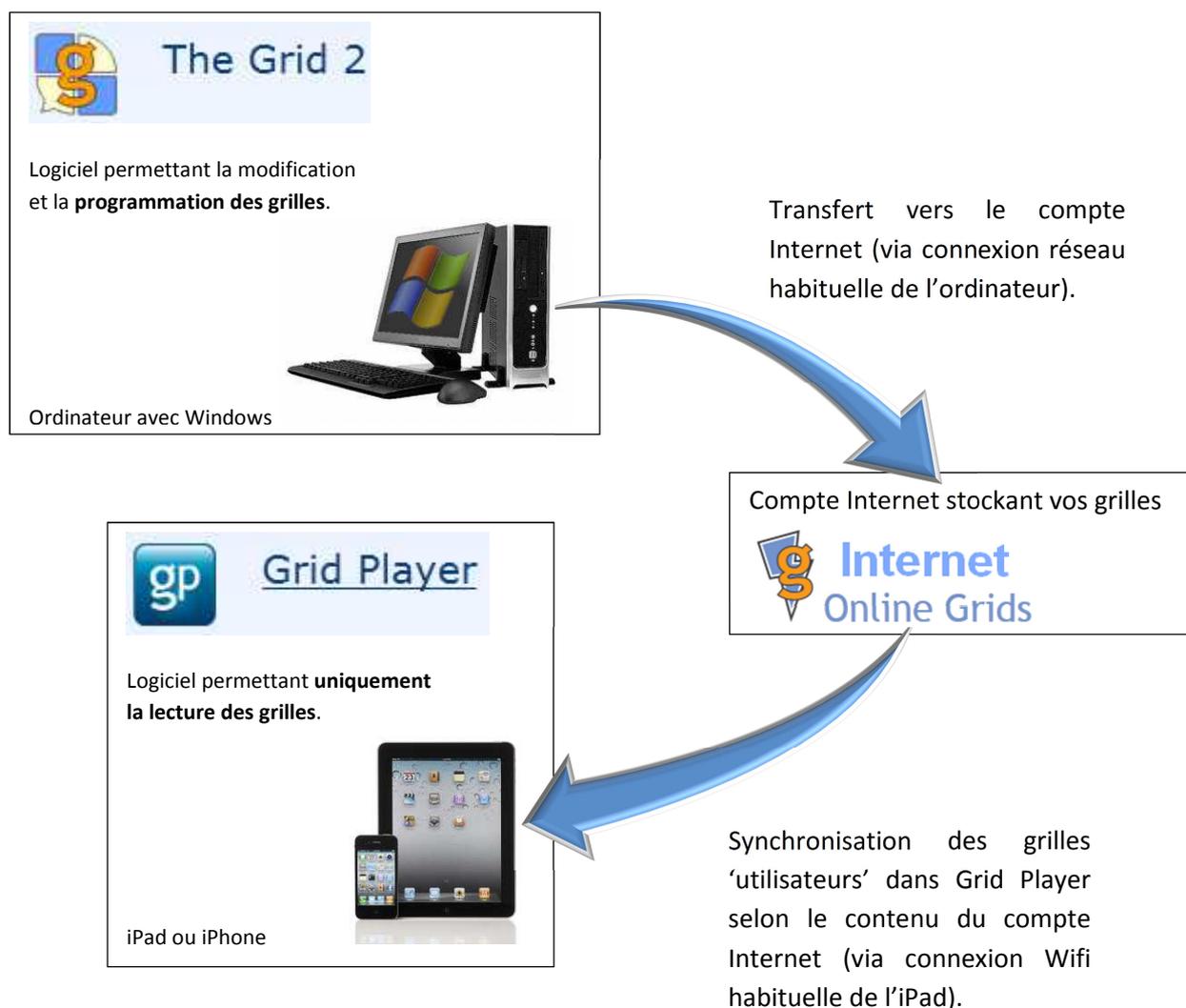


Le plus simple pour créer un compte Internet pour Grid Player est d'installer Grid Player depuis l'App Store sur votre iPad. Au démarrage l'appareil vous demandera de vous connecter ou de créer un nouveau compte. Pour les iPads fournis par la FST avec le Grid Player, nous installons Grid Player et créons d'office un compte. Les données de celui-ci figurent en principe sur le bulletin de livraison.

Connexion du Grid Player au compte Internet

Si Grid Player est déjà installé sur votre iPad, et que vous souhaitez changer de connexion, ou simplement vous assurer de la connexion faite sur votre iPad :

- Allez dans l'explorateur de grilles sur iPad (glissez la pastille rouge de droite à gauche...)
- Cliquez sur petite roue dentée en-haut à droite de l'écran
- Choisissez ensuite [Supprimer l'autorisation]
- Et appuyez ensuite sur [Connexion].

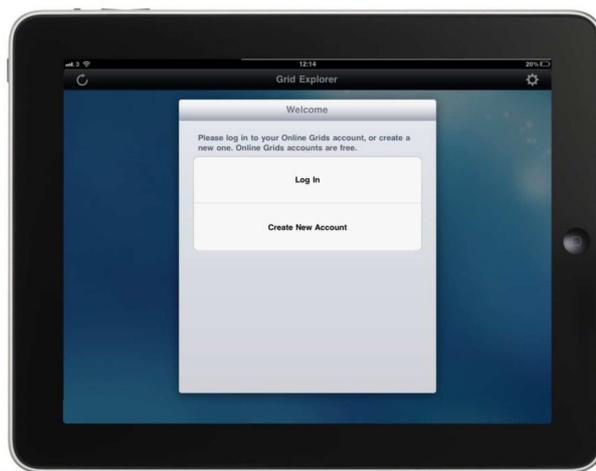

Connexion du logiciel The Grid 2 au compte Internet




Dans l'explorateur de grilles du logiciel The Grid 2 sous Windows, une icône vous indique si vous êtes connecté à un compte Online Grid ou pas :

Un clic sur l'icône 'Non connecté' vous permettra de demander la [Connexion] puis affichera l'image ci-contre. Tapez vos données d'accès (selon bulletin de livraison FST), puis [OK].




Transférer un 'utilisateur' depuis The Grid 2 vers Grid Player sur iPad

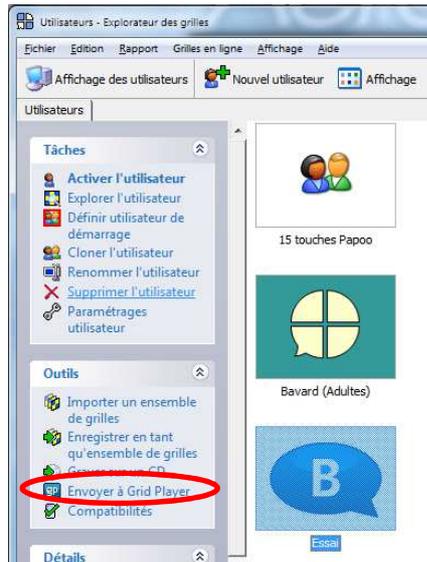

Il faut tout d'abord s'assurer d'avoir un accès Internet pour chacun des appareils, et s'assurer qu'ils soient tous deux connectés au compte Online Grid identique (voir les 2 sous-chapitres précédents).

Depuis The Grid 2 sur Windows, sélectionner l'utilisateur qu'on souhaite transférer. Si The Grid 2 est connecté à un compte Online Grid, on peut faire un clic-droit sur l'utilisateur voulu, et prendre l'option 'Envoyer à Grid Player'. Autre possibilité, en ayant sélectionné l'utilisateur voulu, cliquer sur 'Envoyer à Grid Player' figurant à gauche de l'écran comme ci-dessous :

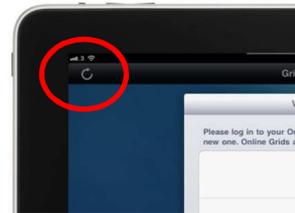



Il suffit ensuite d'aller dans l'explorateur de grilles sur l'iPad ou l'iPhone (glissez la pastille rouge de droite à gauche...) et cliquez sur la petite flèche circulaire en-haut à gauche de l'écran pour synchroniser.

Limitation de Grid Player sur iPad et Papoo touch

Malheureusement les fonctions du Grid Player sont nettement plus limitées que celles de The Grid. A la base le logiciel The Grid est prévu pour fonctionner à 100% sur Windows. Le Grid Player est une astuce développée pour rendre les fonctions de base du logiciel exploitables sur iPad.

Pour éviter de programmer quelque-chose qui ne sera pas fonctionnel sur l'appareil mobile, nous vous suggérons d'utiliser le mode de compatibilité :

Pour cela, dans l'explorateur de grilles, allez sur 'Compatibilités'

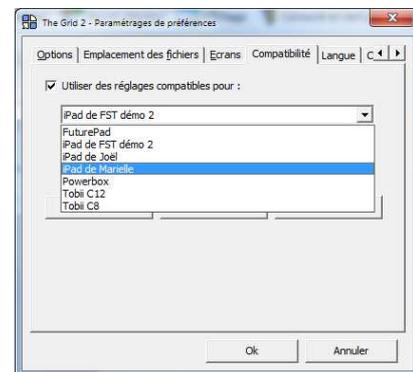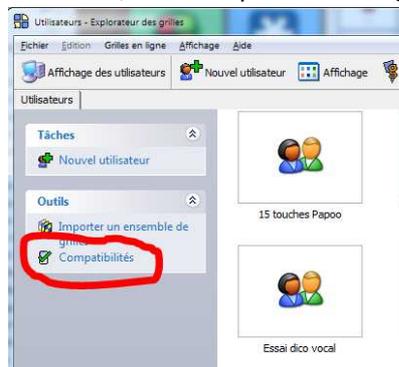

Puis réglez l'onglet 'Compatibilité' sur l'iPad que vous allez utiliser.

L'installation de la voix



Dans Grid Player :

Lorsqu'on utilise The Grid 2 pour envoyer des grilles (utilisateurs) à Grid Player, se sont les réglages du Grid Player qui prévalent sur ceux du Grid 2 pour la voix. Pour choisir la voix dans Grid Player, aller dans la petite roue dentée en haut à droite de l'explorateur de grilles, puis [Choisir la Voix].

Dans The Grid 2 sur Windows :

Avant de commencer l'utilisation de The Grid 2, vous avez besoin de choisir une voix.

Ces options peuvent être trouvées dans les paramètres d'utilisateur - **Modifier > Paramétrages d'utilisateur** dans le menu. Si vous êtes dans l'explorateur des grilles, sélectionnez un utilisateur puis choisissez **Paramétrages d'utilisateur** dans les options disponibles dans la partie de gauche de votre écran.

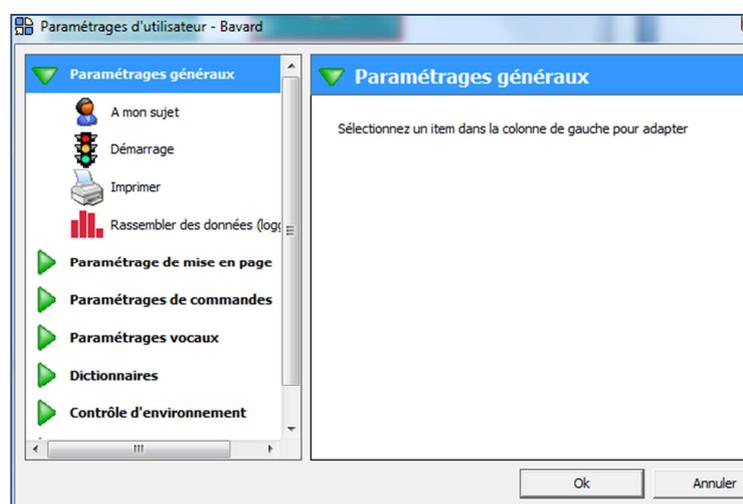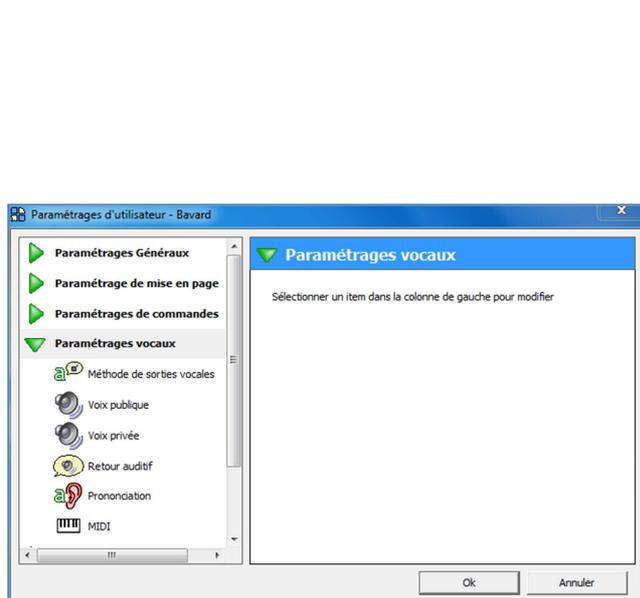

Dans la fenêtre de **Paramétrages d'utilisateur**, les options sont disposées en pages que vous pouvez sélectionner dans les différentes catégories dans la partie gauche de la fenêtre. Quelques un des paramètres les plus utiles sont expliqués ci-dessous.

Paramétrages vocaux

Vous pouvez choisir parmi un grand nombre de voix et modifier la vitesse et le volume de la lecture. Malheureusement à ce jour, ces paramètres sont sans effets dans le Grid Player sur iPad.


La **voix publique** est utilisée pour parler fort dans une discussion, alors que la **voix privée** est utilisée pour le balayage auditif et la lecture de documents.

ASTUCE:

- *Quand vous écrivez des phrases, The Grid 2 peut prononcer chaque mot ou phrase une fois qu'ils sont rédigés. Vous pouvez aussi utiliser des cellules Parler pour lire tout ce que vous avez écrit.*
- *Il arrive que le logiciel ne prononce pas correctement certains mots comme les noms de lieux. Vous pouvez épeler phonétiquement ces mots de façon à améliorer la manière dont ils sont prononcés.*

Edition: Introduction du mode édition

Une fois que vous avez chargé un utilisateur, vous pouvez commencer à faire des modifications sur une grille. La première chose à faire est de démarrer le Mode Edition. Pour cela vous pouvez appuyer sur la touche **F11**, ou sélectionner Modifier > Mode Edition dans le menu (**le retour au mode utilisation se fait en appuyant à nouveau sur F11**)

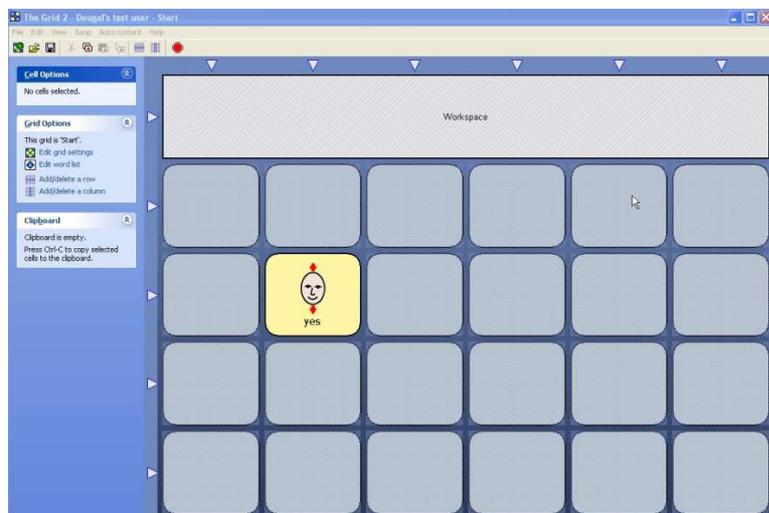

Lorsque vous êtes dans le Mode Edition, vous pouvez voir la barre d'outils en haut de la fenêtre, ainsi qu'une barre avec toutes les actions les plus utiles sur la gauche de la fenêtre.

Vous pouvez cliquer sur une cellule pour la sélectionner. A partir du moment où la fenêtre est sélectionnée, vous pouvez voir une croix bleue à l'intérieur et les options de la cellule (sur la gauche) vous montreront comment vous pouvez modifier cette cellule.


Les tâches les plus utilisées lorsque l'on modifie une grille sont :

- Modifier une cellule, comme par exemple créer une cellule de vocabulaire ou changer l'image
- Déplacer et redimensionner des cellules
- Modifier le nombre de lignes et de colonnes qui composent une grille
- Modifier les paramètres d'une grille
- Créer de nouvelles grilles et créer de nouvelles passerelles entre des grilles.

Cela sera expliqué plus en détail dans les pages suivantes.

Edition d'une cellule

Pour éditer une cellule, double-cliquez dessus. Suite à cela, la fenêtre **Modifier la cellule** va s'ouvrir.

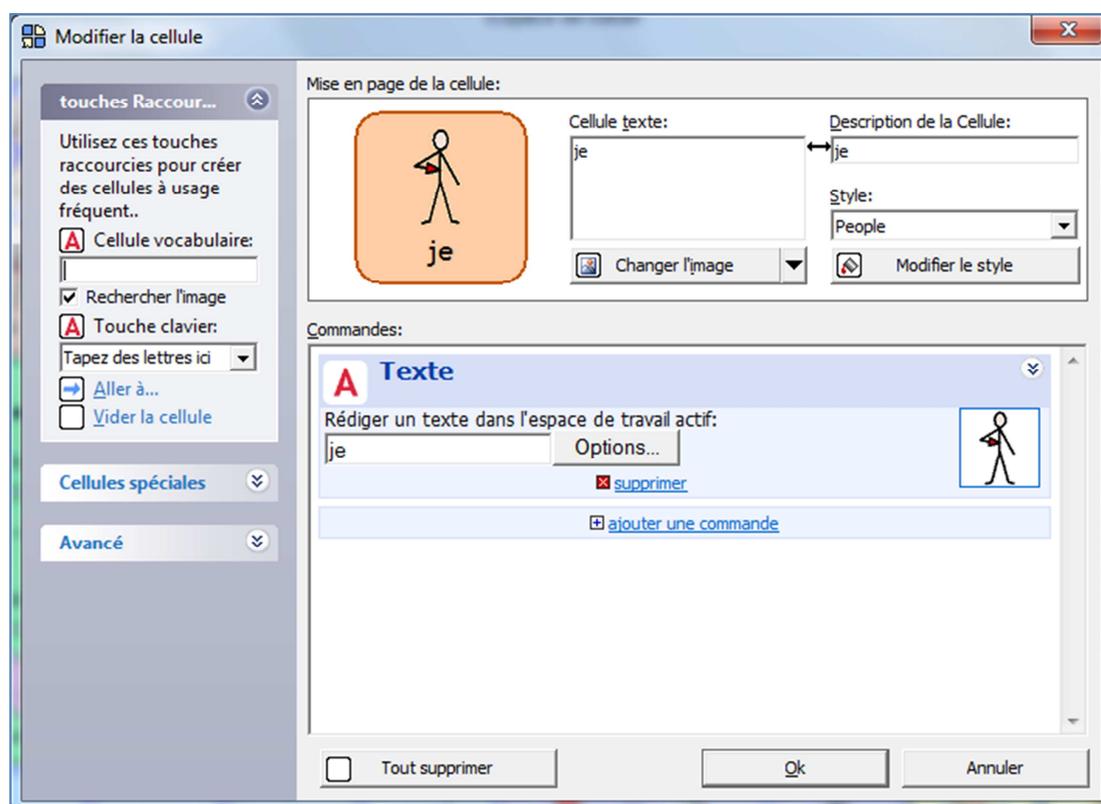


La fenêtre **Modifier la cellule** est divisée en trois parties.

- Sur la partie gauche, vous trouverez les raccourcis – ces outils sont un moyen rapide de créer des cellules courantes.
- Dans la partie en haut à droite, il y a la Mise en page de la cellule. Ici, vous pouvez modifier l'apparence de la cellule.
- Dans la partie en bas à droite vous trouverez la liste d'action – les commandes sont activées lorsque l'on sélectionne la cellule.

Créer une cellule de vocabulaire


Une cellule de vocabulaire est une cellule qui permet d'écrire un texte grâce à des symboles introduits dans votre phrase.

Créer une cellule de vocabulaire est très rapide. Il suffit de taper un ou plusieurs mot(s) dans l'espace **cellule vocabulaire** en haut à gauche de la fenêtre d'édition et de cliquer sur ok.

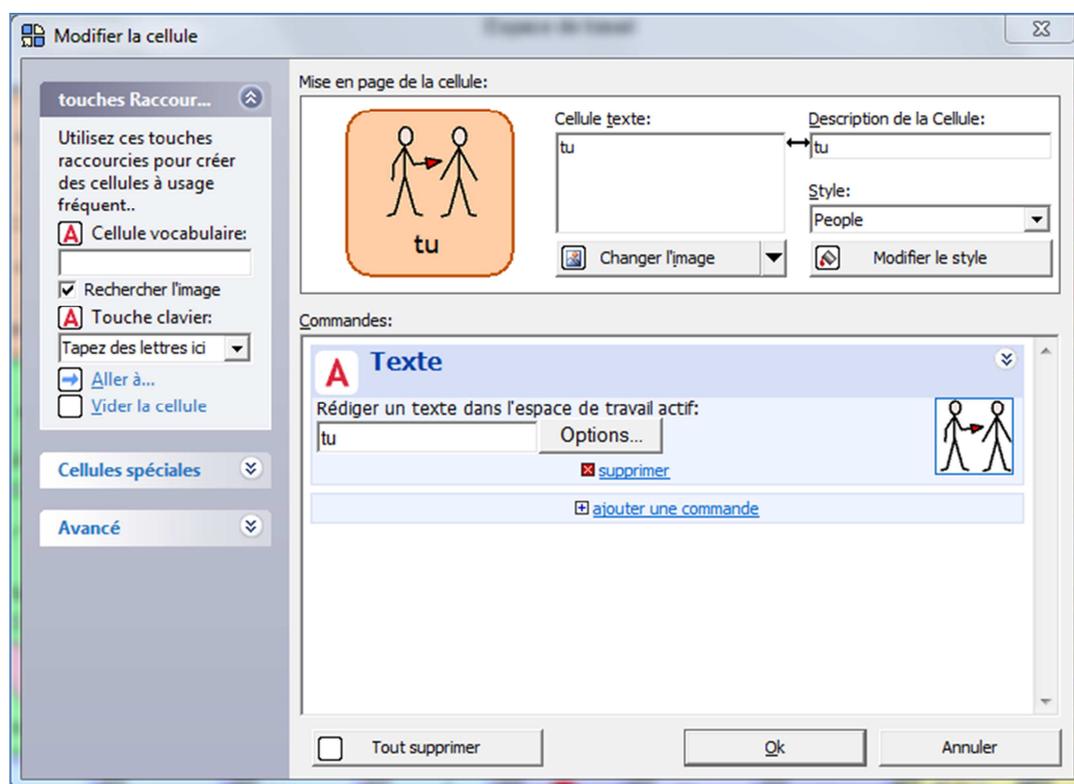

Changer une image

Si vous voulez changer une image d'une cellule, cliquer sur **Changer l'image** dans la fenêtre d'édition de cellule.

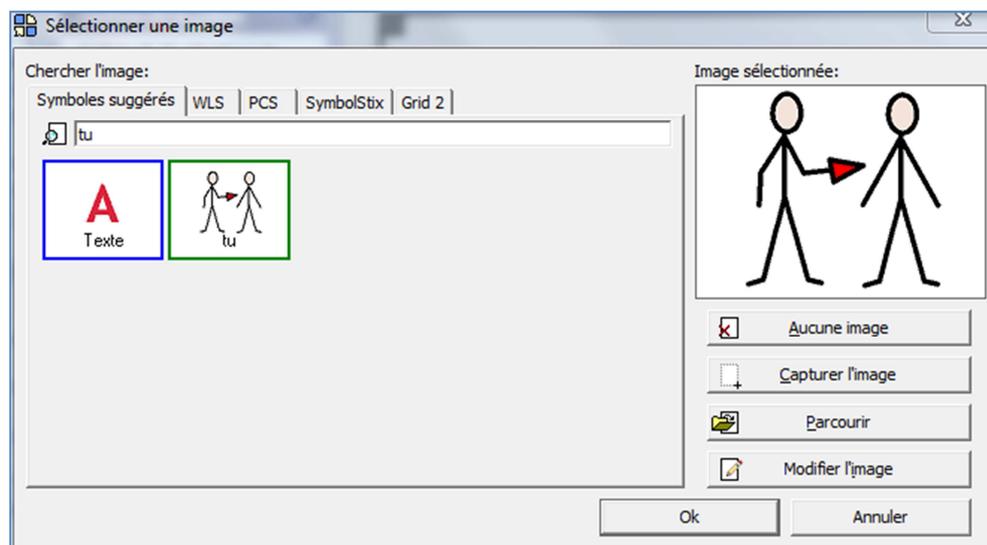

Vous pouvez rechercher une image provenant de la bibliothèque de symboles en tapant un mot clef dans la barre de recherche. Vous pouvez également naviguer dans des bibliothèques individuelles en utilisant les onglets en haut de la fenêtre.


ATTENTION : pour le Grid Player sur iPad et Papoo, les icônes PCS ne sont pas autorisées. Si vous sélectionnez une icône PCS, lors du transfert de votre 'utilisateur' sur le compte Internet, un message vous avisera que l'utilisateur risque de ne pas être utilisable. Même s'il est ensuite transféré convenablement, il ne sera pas repris sur iPad.

Le bouton de capture d'écran

C'est le moyen le plus simple pour apporter des images de sources différentes, comme une image provenant d'un appareil photo numérique, une page internet ou une image enregistrée sur votre ordinateur. Affichez l'image souhaitée sur votre écran, puis cliquez tout simplement sur le bouton **Capturer l'image**. Faites ensuite glisser un cadre au tour de l'image que vous souhaitez afficher dans la cellule.

L'éditeur d'image


L'éditeur d'image vous permet de modifier des images en changeant les couleurs ou en ajoutant un détail supplémentaire

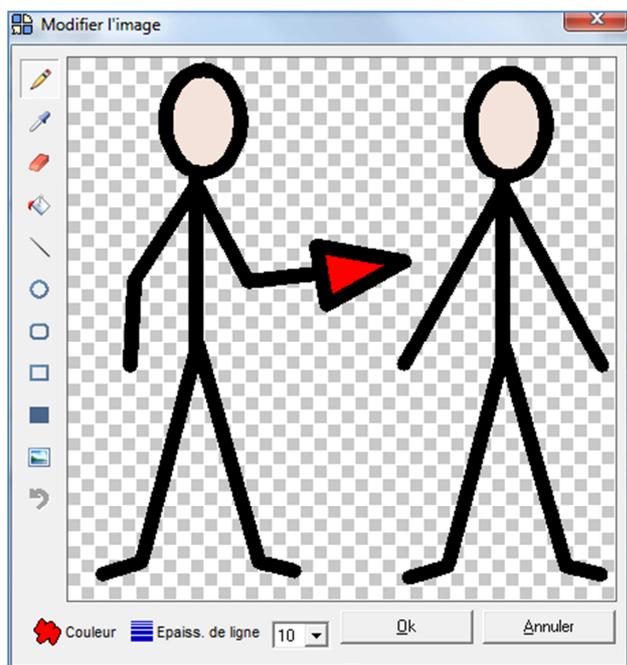

Modification d'une grille

Déplacer et redimensionner des cellules

Pour déplacer une cellule à un endroit différent d'une grille, il suffit de la faire glisser jusqu'à l'emplacement désiré. Attention : si vous faites glisser une cellule sur une autre cellule, cette dernière sera supprimée !

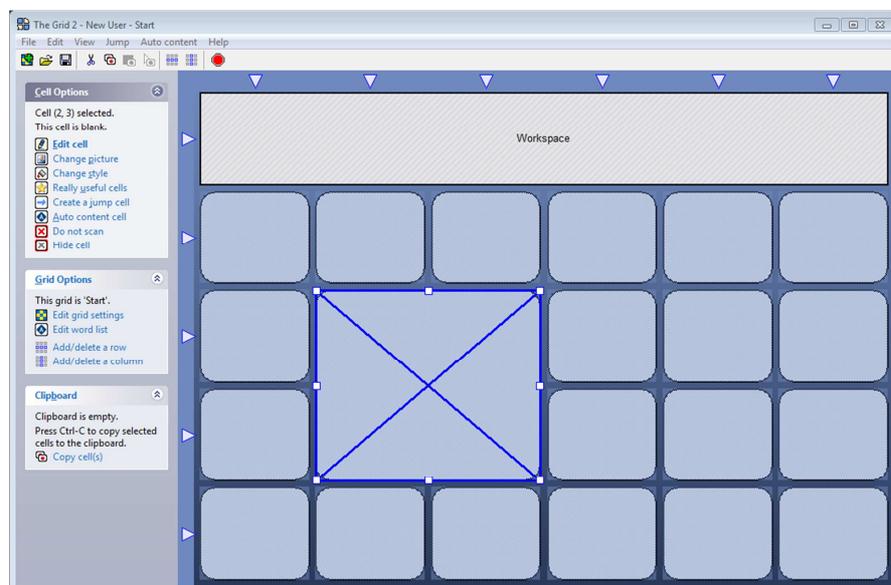

Vous pouvez également redimensionner une cellule en cliquant une fois pour la sélectionner, puis faire glisser les carrés blancs qui apparaissent dans les coins.

Vous pouvez sélectionner plus d'une cellule à la fois en utilisant les outils des raccourcis :

- Maintenir la touche shift pendant que vous cliquez sur les cellules pour sélectionner plusieurs à la fois.
- Maintenir la touche Ctrl et faites glisser le cadre pour sélectionner un groupe de cellules.


Modifier le nombre de lignes et de colonnes

Le repère triangulaire qui apparaît à l'extrémité de chaque ligne et de chaque colonne offre la possibilité de modifier les lignes et les colonnes.

Lorsque vous cliquez sur ce repère, vous avez la possibilité d'insérer une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne d'un côté ou d'un autre, ou supprimer la ligne ou la colonne sélectionnée.




Si vous voulez faire plusieurs modifications en une seule fois, essayer l'outil **Ajouter/supprimer une ligne** et **Ajouter/supprimer une colonne**. Cela vous permet de cliquer sur une ligne ou une colonne pour la supprimer et de cliquer entre deux lignes ou deux colonnes pour en ajouter une nouvelle.

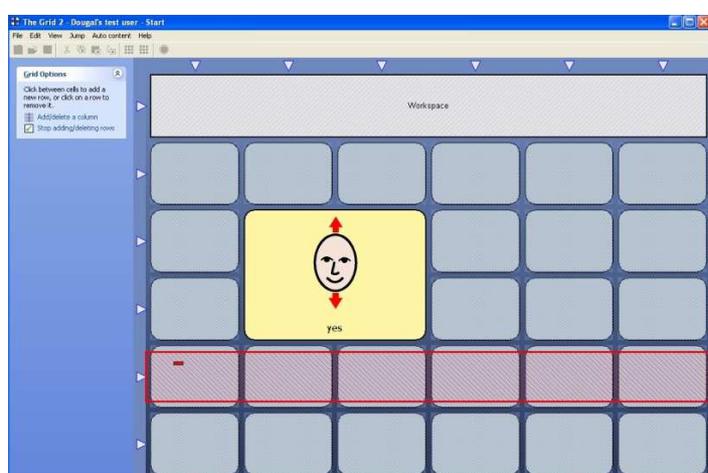


Paramétrages de la grille

Dans les **paramétrages de la grille** vous pouvez changer les options, tel que le fond de la grille. Vous pouvez ouvrir l'écran des **paramétrages de la grille** à partir des options à gauche de la fenêtre d'édition.

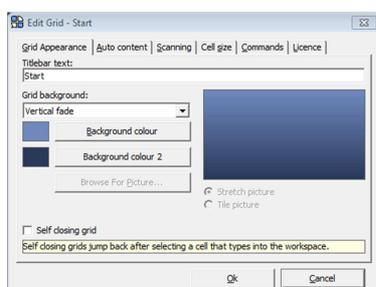

Créer des nouvelles grilles et des cellules de jonction entre grilles

Une cellule de jonction est une cellule qui permet d'accéder à une autre grille. Pour créer une cellule de jonction, utilisez le raccourci **Créer une cellule de jonction**. Suite à ça, une fenêtre répertoriant toutes les grilles disponibles pour l'utilisateur actif s'affiche. Si la grille à laquelle vous souhaitez accéder existe déjà, sélectionnez la, puis cliquez sur ouvrir.

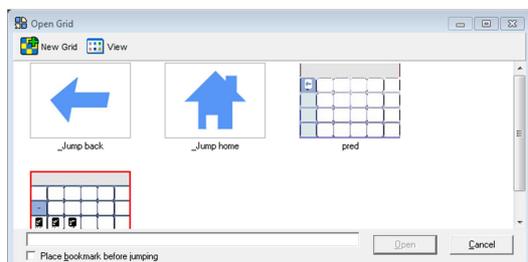

Créer une nouvelle grille

Au lieu d'accéder à une grille existante, vous souhaitez peut être en créer une nouvelle. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton **Nouvelle grille** dans la barre d'outils. Entrez ensuite un nom pour votre nouvelle grille.

Accueil et Revenir

Il existe deux types particuliers de cellules de jonction que vous pouvez créer. **Accueil** vous ramènera toujours à la première page de l'utilisateur actif.

Revenir vous ramènera à la page précédemment visitée. Il existe des boutons similaires dans le navigateur internet.


Grilles à retour automatique

Les grilles à retour automatique sont des grilles qui se ferment automatiquement et vous ramène à la page précédente dès lors qu'une cellule a été sélectionnée. C'est utile si vous avez seulement besoin de choisir un item de la grille, car de cette manière vous n'avez pas besoin ensuite de sélectionner la cellule de Retour.

Pour créer une grille à retour automatique, dans le volet de gauche de l'éditeur de grilles, cliquez sur 'Adapter les paramètres de la grille' et, dans le premier onglet 'mise en page de la grille', cochez l'option **Grille à retour automatique**.

Style de cellule

The Grid 2 utilise des styles pour être sûr d'avoir une mise en page régulière. Il est très important que les utilisateurs soient capables d'identifier rapidement quel genre de cellule ils sont sur le point de sélectionner. Si vous êtes familier des différents styles de Microsoft Word, le principe est le même.

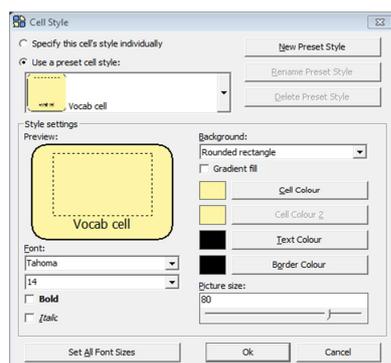

Lorsque vous modifiez une cellule, vous pouvez choisir de donner un style pré-défini qui est toujours disponible, comme celui des cellules de vocabulaire ou celui des cellules de jonctions, ou vous pouvez aussi ajouter vos propres styles pré-définis.

Lorsque vous modifiez le style d'une cellule, vous allez modifier toutes les cellules auxquelles est assigné le même style. Par exemple, si vous décidez de changer la couleur du fond du style pré-défini de la cellule de vocabulaire, la couleur de fond sera modifiée dans toutes les cellules de vocabulaire.

Autrement, vous pouvez choisir de spécifier le style pour une seule et unique cellule. Ainsi aucune autre cellule ne sera affectée.

Ajouter une commande dans une cellule

Chaque cellule de votre grille possède une ou plusieurs commandes. Cela dicte à The Grid 2 ce qu'il doit faire lorsque la cellule est sélectionnée. Par exemple, la commande **Parler** va lire votre phrase, et la commande **supprimer** effacera toute votre phrase.



La liste de commande est utilisée pour l'arrangement des commandes dans une cellule. Pour ajouter une commande, cliquer sur le lien **ajouter une commande** ou appuyez sur la touche Inser sur le clavier.



Cette action ouvre la fenêtre de commandes, où vous pouvez voir toutes les commandes disponibles dans The Grid 2. Il y a beaucoup de commandes, mais vous pouvez les rechercher en tapant dans le moteur de recherche. Autrement, vous pouvez apercevoir les commandes propres à une activité particulière, comme par exemple envoyer un email, en sélectionnant une catégorie de la liste.

Les commandes suivantes sont fréquemment utilisées :



Parler



Arrêter de parler



Supprimer : Supprimer le contenu de la barre de phrases



Supprimer le mot: Supprimer le dernier mot écrit.



Annuler la suppression : Annuler la commande 'supprimer' ou 'supprimer le mot'



Imprimer : Imprimer l'espace de travail

Insertion Auto: cellules indépendantes


The Grid 2 possède des cellules créées dynamiquement pour vous, appelées cellules insertion auto. Cela peut modifier la manière dont vous vous servez de votre grille : par exemple, les cellules de prédiction vous suggèrent des mots pendant que vous écrivez.

Pour créer des cellules d'insertion auto, sélectionnez une ou plusieurs cellule(s) puis cliquez sur insertion Auto dans les options de la cellule (sur le côté gauche de la fenêtre d'édition de grille)

Il existe plusieurs types de cellule à insertion auto. Les plus courantes sont celles de prédiction et celles de liste de mots.

Cellule d'insertion auto prédictive

La prédiction offre des suggestions pour compléter le mot que vous êtes en train d'écrire. Par exemple, si vous tapez 'bon' la prédiction vous proposera 'bonjour' ou encore 'bonbon'. Si c'est le mot que vous voulez, vous pouvez sélectionner cette cellule pour compléter la fin du mot.

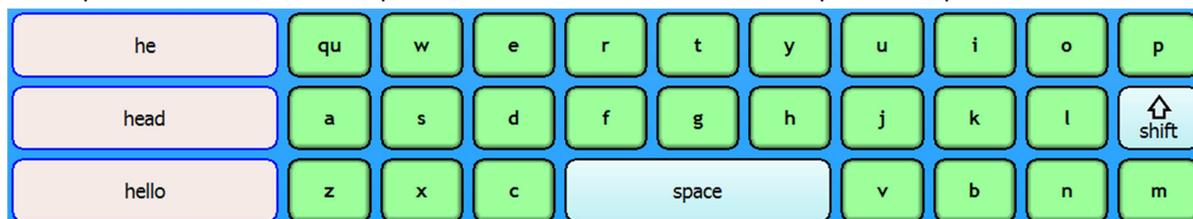

Après avoir complété votre mot, la prédiction vous suggérera un mot susceptible d'être celui que vous recherchez pour la suite de votre phrase.

The Grid 2 apprend à vous connaître lorsque vous écrivez, de telle sorte qu'il puisse à l'avenir faire plus de suggestions pertinentes.


The Grid 2 peut également afficher des symboles tout au long des suggestions pour vous aider à identifier lorsque vous avez le bon mot.

En plus de compléter vos mots, vous verrez également des cellules de prédictions utilisées pour:


- La Suggestion de prononciation similaire – les mots sonnante comme celui qui est en train d'être écrit (c'est un très bon outil pour aider à apprendre à épeler).
- La Suggestion d'épellation similaire – les mots qui ont une écriture similaire au mot écrit. Par exemple il sera proposé 'école' lorsqu'il sera écrit 'ékole'.
- Morphologie verbale – elle affiche les différentes formes d'un verbe pour aider l'utilisateur à trouver la conjugaison correcte.

Cellule d'insertion auto d'une liste de mots

Les cellules d'insertion auto d'une liste de mots affichent les mots composant une liste. Gérer une liste de mots indépendamment des cellules d'une grille permet de modifier très facilement les mots de votre grille, en ajouter des nouveaux, ou même en supprimer.

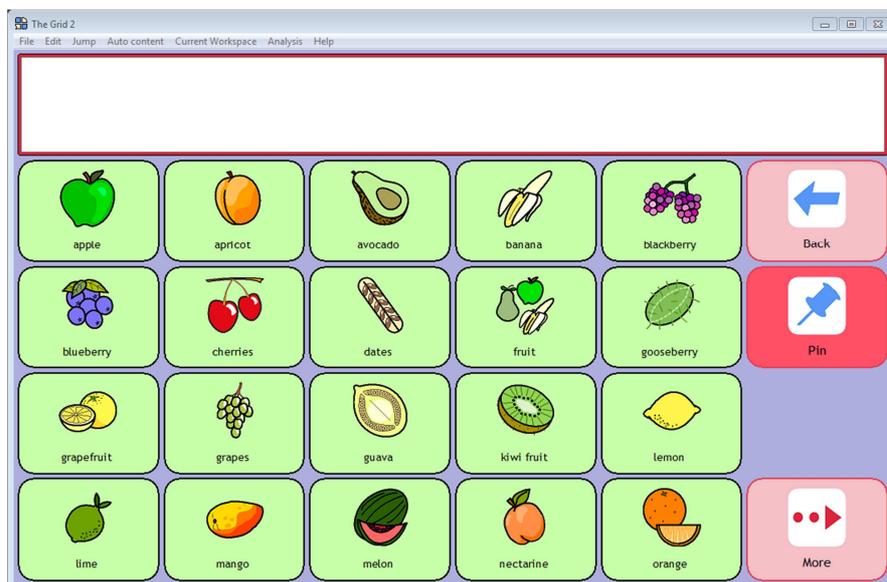

Chaque grille possède sa propre liste de mots. Vous pouvez modifier une liste de mots en sélectionnant Insertion Auto> Liste de mots de cette grille dans le menu.

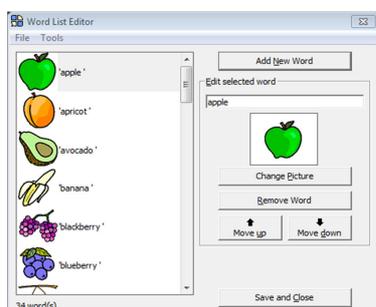

L'éditeur de liste de mots affiche la liste de mots sur la gauche. Vous pouvez ajouter un nouveau mot en cliquant sur le bouton 'Ajouter nouveau mot' puis en écrivant le mot. Vous pouvez apporter des modifications à un mot déjà dans la liste, comme par exemple changer l'image, en sélectionnant le mot dans la liste.

Sauvegarder votre 'utilisateur'

Un ensemble de grilles est un seul dossier qui contient à la fois les grilles et les paramètres d'utilisateur.

Pour créer un ensemble de grille, sélectionner votre utilisateur dans l'explorateur des grilles et cliquez sur 'Exporter un ensemble de grille'. L'ensemble peut être enregistré sur une clef USB ou un disque de sauvegarde.

Pour ouvrir un ensemble de grilles dans The Grid 2, faites glisser le dossier de l'ensemble dans l'explorateur des grilles, ou cliquez sur 'Importation de grilles à partir de ' dans l'explorateur des grilles.

Les ensembles de grilles sont un moyen facile pour copier un utilisateur d'un ordinateur à un autre.


Configuration de l'accès pour l'usager

Vous avez maintenant besoin de choisir comment vous allez accéder à The Grid 2. Il y a différentes options pour cela et qui assurent à chacun d'obtenir un maximum d'efficacité d'accès, tout en réduisant les frustrations.

Installation du pointeur (souris, écran tactile, pointeur frontal)

Cela inclut tous les dispositifs informatiques d'entrée qui déplacent le pointeur de la souris, comme une souris conventionnelle, un trackball, un écran tactile ou un pointeur frontal.

Pour trouver les paramètres des pointeurs, cliquez sur **Paramètres de commandes > Pointeur** dans la fenêtre de **Paramètres d'utilisateur**.

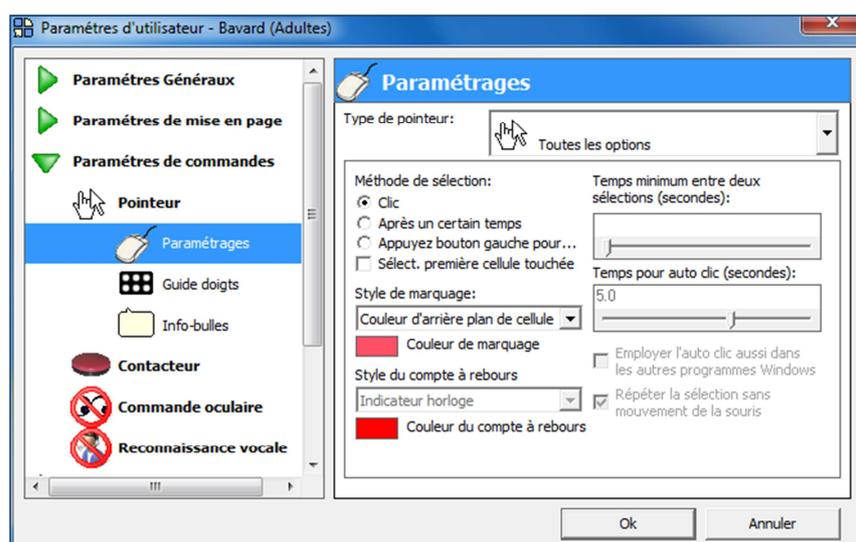

Assurez-vous que la case souris active soit cochée, puis cliquez sur la page de paramétrages. Si vous pouvez sélectionner le type de pointeur que vous êtes en train de configurer (souris, écran tactile, ou pointeur frontal), The Grid 2 affichera uniquement les réglages les plus pertinents. Vous pouvez

également choisir d'afficher « Tous les réglages » pour voir toutes les options.

Voici quelques options clés:

- **Méthode de sélection** – les cellules sont sélectionnées par un clic, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, ou en laissant le pointeur au-dessus de la cellule (il n'est pas nécessaire de cliquer- on appelle cela un « clic automatique»).
- **Style de marquage et couleur** – options pour l'indicateur visuel pour montrer qu'une cellule est mise en évidence.
- **Clic automatique dans d'autres programmes** – cela permet d'utiliser le clic automatique pour le contrôle de l'ordinateur.
- **Guide doigts** – définir une taille fixe de grille pour l'utilisation avec un guide doigts.


Réglages des contacteurs

Les contacteurs sont des boutons utilisés par les personnes à mobilité réduite pour interagir avec The Grid 2. Les cellules sont sur-colorées à leur tour, et dès lors que la cellule désirée est sur-colorée, elle peut être activée en pressant le contacteur. Il existe un large éventail de contacteurs périphériques dans The Grid 2. Il y a beaucoup d'options pour augmenter leur efficacité et réduire les frustrations de travailler avec un contacteur.

Il est préférable de suivre l'ordre d'apparition des options afin de ne pas perdre le fil de vos réglages. Sélectionnez dans un premier temps **Paramétrage de commandes > Contacteur**, et assurez-vous que le balayage soit activé.

Connexion de contacteur

Ensuite, allez sur la page de connexion, et sélectionnez la manière dont votre contacteur est raccordé. Vous pourrez voir le test lumineux changé de couleur dans la partie en bas à gauche de votre fenêtre.

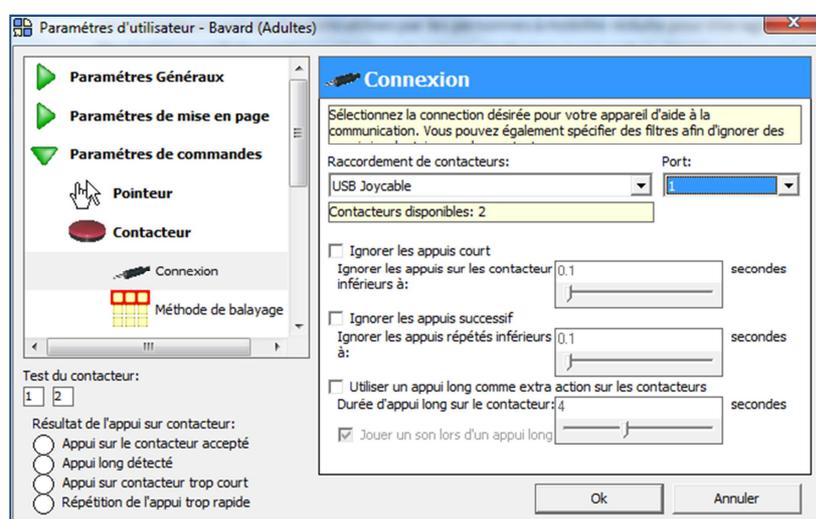


Si vous n'avez aucun contacteur de connecté, vous pouvez utiliser les touches de votre clavier ou les boutons de votre souris comme des contacteurs.

Vous pouvez ajuster le filtre pour ne pas répondre à des pressions accidentelles. Vous pouvez également mettre en place une extra action grâce à un appui long sur le contacteur. L'appui long sera alors différencié d'un appui court.

Méthode de balayage


La page de **méthode de balayage** vous permet de configurer la procédure de défilement.

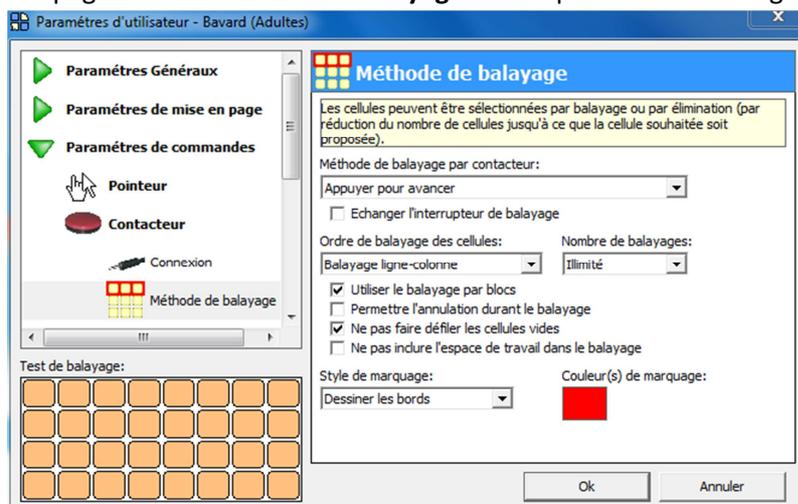

La méthode de balayage est une méthode de défilement. En complément des systèmes connus comme le défilement simple et le défilement ligne-colonne, The Grid 2 possède de nombreuses options uniques et adaptées à chaque contacteur. Il est intéressant d'explorer toutes les méthodes telles que le défilement par bloc pour des grilles larges, ou le défilement par élimination peuvent être plus adaptés pour certaines personnes.

Actions des contacteurs

Sur la page **d'action des contacteurs** vous pouvez définir ce qu'il se passera lorsqu'un contacteur sera pressé.

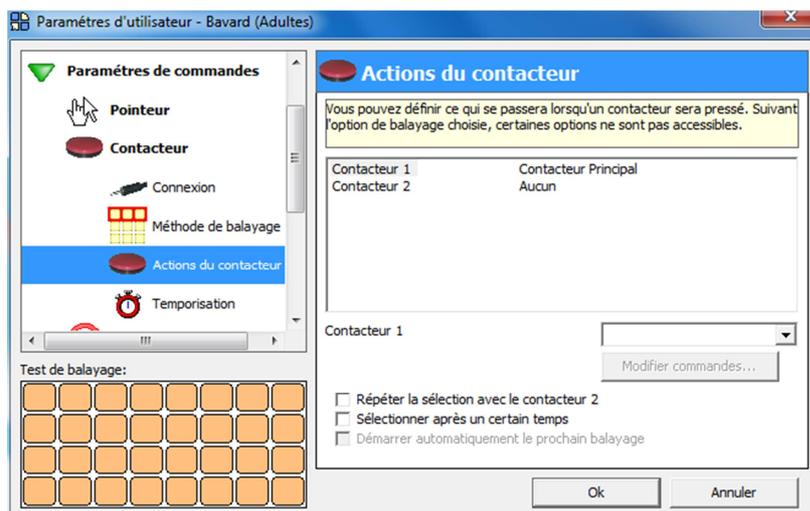

Normalement, le contacteur numéro 1 est le contacteur principal, il est utilisé pour démarrer le défilement, et sélectionner avec le défilement automatique. D'autres contacteurs peuvent être programmés pour améliorer la gamme des différentes fonctions.

Temporisation

Enfin, la page de temporisation vous permet de régler la vitesse de balayage et autres durées de temps importantes pour le balayage.

