

## Manuel d'utilisation

### Pilulier Electronique 8 Alarmes 8 Cases avec led rouge (réf. 111208)



Le pilulier électronique vous permet de régler 8 alarmes à des heures exactes. Il a 8 compartiments pour ranger vos médicaments.

Il a aussi un compteur que vous pouvez utiliser si vous avez des prises régulières (par exemple, toutes les heures). Si le pilulier est fermé, une LED rouge clignote en même temps que l'alarme jusqu'à ce que vous ouvriez le pilulier pour prendre vos pilules. Si la LED continue de clignoter après la fin de l'alarme sonore (boîtier fermé),

cela signifie que vous n'avez pas pris vos médicaments.

#### Prise en main de l'appareil

L'appareil est livré avec une pile protégée par un film plastique afin de ne pas l'user inutilement.

Avant la première utilisation de l'appareil, il faut retirer le film plastique, l'appareil émet un bip et l'écran LCD affiche l'heure. Si le film plastique n'est pas présent et que l'appareil est déjà en fonctionnement, c'est que l'appareil a été vérifié par un technicien et qu'un test de mise en service a été effectué juste avant l'expédition.

#### Réglage de l'heure

Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer sans relâcher sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'affichage clignote.

Appuyer sur le bouton HOUR (heure) pour régler l'heure.

Appuyer sur le bouton MINUTE pour régler les minutes.

L'heure s'affiche au format 24H.

#### Réglage des alarmes

Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer une fois sur le bouton MODE, l'écran affiche - :- avec un chiffre 1 en haut à gauche (pour l'alarme 1)

Appuyer sans relâcher sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'affichage clignote.

Appuyer sur le bouton HOUR (heure) pour régler l'heure.

Appuyer sur le bouton MINUTE pour régler les minutes.

Appuyer sur le bouton MODE pour confirmer l'alarme.

Appuyer sur le bouton MODE pour passer aux autres alarmes.

L'affichage de l'heure s'effectue après l'affichage du compteur qui fait suite à la dernière alarme.

#### Annulation d'une alarme

Pour annuler une alarme, appuyer le bouton MODE jusqu'à alarme souhaitée.

Appuyer sur le bouton MINUTE.

L'écran affiche - :- ce qui signifie que l'alarme est annulée.

#### Réglage du niveau sonore des alarmes

A droite de l'écran, il y a un curseur avec deux positions :

- Hi : le niveau sonore est en haut
- Lo : le niveau sonore est bas



### **Utilisation du compte à rebours**

Le compte est utile lorsque vous avez des prises de médicament à intervalle fixe (par exemple toutes les deux heures).

Dans ce cas, au lieu de définir plusieurs alarmes, vous pouvez régler une valeur de compte à rebours (par exemple 2 heures) et ensuite, il suffit de démarrer le compte. Une fois le compte à rebours à 0, le pilulier va sonner, et il faudra le redémarrer afin qu'il décompte à nouveau le temps.

#### Régler la valeur du compte à rebours :

Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à visualiser un écran avec le sablier en haut à gauche (cet écran apparaît après l'alarme 8).

Appuyer sans relâcher MODE jusqu'à ce que l'affichage clignote.

Appuyer sur HOUR pour régler l'heure et MINUTE pour régler les minutes.

(la valeur maximum est de 99h59min.)

Appuyer sur le bouton MODE pour valider le réglage.

#### Démarrer le compte à rebours

Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à visualiser un écran avec le sablier en haut à gauche.

Appuyer sur le bouton Minute pour démarrer le compte à rebours.

Le sablier va clignoter ce qui veut dire que le compte à rebours est activé, le temps va s'écouler jusqu'à atteindre la valeur 0. Le pilulier va alors sonner et si le pilulier est fermé, vous allez voir également la lampe LED clignoter.

Si vous êtes toujours sur l'écran qui affiche le mode Compte à rebours, il suffit alors d'Appuyer à nouveau sur le bouton MINUTE pour relancer le compte à rebours.

Sinon, il faut retourner dans le mode Compte à rebours et appuyer sur le bouton MINUTE.

(Le pilulier bascule automatiquement sur l'affichage de l'heure au bout de quelques secondes une fois que le temps est écoulé et le symbole du sablier ne s'affiche plus).

### **Remplacement de la pile**

Le pilulier utilise une pile CR2032. Elle se change facilement grâce à une tirette située sur la face avant de l'appareil. Vous n'avez pas besoin de tournevis pour la changer. Quand vous replacer la pile sur le support et que vous allez replacer le support à pile dans la fente, il faut faire attention que la pile ne glisse pas à l'intérieur en dehors du support. La durée de vie de la pile est variable en fonction du nombre d'alarmes quotidiennes. Pour limiter l'usure des piles, évitez de laisser sonner le pilulier systématiquement toute la durée de l'alarme.

### **Garantie**

Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).



## Dépannage

### **Le pilulier ne sonne pas**

- avez-vous effectué un changement de pile ?
- l'alarme est elle active ?

Remarque : le son du pilulier n'est pas amplifié, si vous avez des difficultés d'audition ou si l'environnement est bruyant, il est possible que vous n'entendiez pas la sonnerie.

### **La lumière rouge ne clignote pas**

- est ce que la lumière rouge clignote lorsque l'alarme se déclenche et que le boitier est fermé ?
- avez-vous effectué un changement de pile ?

### **La durée de vie de la pile est faible (inférieure à 1 mois)**

Le fabricant ne précise pas la durée de vie moyenne de la pile. Cependant, il faut prendre en compte que la durée de vie de la pile va varier en fonction du nombre d'alarmes quotidiennes, du temps que vous laissez sonner le pilulier, de la pile.

Nous vous invitons à vérifier les points suivants :

- Est ce que la lumière rouge clignote lorsque l'alarme se déclenche et que le boitier est fermé ?
- Est-ce que vous avez utilisé une pile de neuve de grande marque (nous conseillons Energizer) ?
- Est-ce que vous utilisez bien une pile de référence CR2032 ?

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service client Deaco.