



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le pansement TIELLE® Talon est indiqué pour la prise en charge des plaies exsudatives situées au niveau du talon. TIELLE® Talon est également indiqué pour les plaies situées au niveau du coude ou de toute autre partie du corps pour laquelle la forme anatomique est appropriée. Le pansement TIELLE® Talon constitue un système dynamique de gestion de l'exsudat renforcé par une couche interne très absorbante permettant le contrôle de l'humidité des plaies modérément à fortement exsudatives.

INDICATIONS

Le pansement adhésif Hydrocellulaire TIELLE® Talon est anatomiquement conçu pour la prise en charge des plaies situées au niveau du talon.
Le pansement TIELLE® Talon doit être utilisé sous la surveillance d'un professionnel de santé pour les indications suivantes:

- Escarres
- Ulcères veineux, artériels, mixtes ou diabétiques

MODE D'EMPLOI

Préparation de la plaie

1. Préparer la plaie conformément au protocole habituel
2. S'assurer que les bords de la plaie sont bien secs

Application du pansement

- La taille du pansement choisi doit permettre à l'îlot absorbant de recouvrir approximativement de 1 cm le bord de la plaie
1. Ouvrir la pochette pelable et retirer le pansement
 2. Oter le papier central. Positionner et appliquer soigneusement l'îlot absorbant sur le site de la plaie.
 3. Retirer un papier anti-adhésif latéral du bras adhésif et appliquer la bordure adhésive sur la peau intacte avant d'appliquer le second bras adhésif. S'assurer que le bras latéral épouse bien la forme du pansement à la surface du corps à recouvrir, en faisant chevaucher la bordure adhésive sur le pansement, si besoin.

Changement et retrait du pansement

- Pour bien traiter une plaie, il est indispensable d'éviter de traumatiser la peau intacte.
1. Changer le pansement lorsque le fluide apparaît sur les bords de la mousse. Ne pas laisser accumuler l'exsudat sous le support. Le pansement peut rester en place pendant 7 jours au maximum, en fonction de la quantité d'exsudat.
 2. Lors du retrait du pansement, soulever et ôter le coin soigneusement. Si la peau périlésionnelle est fragile, de l'eau ou du sérum physiologique peuvent être appliqués pour dissoudre les résidus d'adhésif.



1, rue Camille Desmoulins - TSA 10 004
92787 Issy les Moulineaux
Tél. : 01 55 00 25 13 - Fax : 01 55 00 28 60



En association et/ou en relais...

Tielle® Absorbe les exsudats	Actisorb® plus 25 Lutte contre l'infection/détersion	Effidia® Activation de la cicatrisation
--	--	---



Remboursés sécurité sociale 65 % *

TIELLE®

Pour s'assurer d'un excellent maintien

TIELLE® S

Pour les peaux qui ne supportent aucun adhésif

TIELLE® Lite

Pour qu'une plaie aiguë ne devienne jamais chronique

Conditionnements
pharmacies d'offices

taille (cm)	cond. (nb pans.)
7x9	16
11x11	16
15x15	10
15x20	10
18x18	10
forme Sacrum	10
Talon	10
20x26,5	10
▶ ACL : 434 180 9	

taille (cm)	cond. (nb pans.)
11x11	16
15x20	10

taille (cm)	cond. (nb pans.)
11x11	16
7x9	16
	4 (N.R.)
8x20	10

Conditionnements
hospitaliers

taille (cm)	cond. (nb pans.)
7x9	64
11x11	64
15x15	50
15x20	30
18x18	30
forme Sacrum	30
Talon	30
20x26,5	30
▶ J&J : MTP 508 FH	

taille (cm)	cond. (nb pans.)
11x11	64
15x20	30

taille (cm)	cond. (nb pans.)
7x9	64
11x11	64
8x20	50



Pansement Hydrocellulaire pour les plaies du Talon

NOUVEAU

Spécialement conçu pour les plaies du talon (du coude et du genou)

Efficace

Confortable

Ergonomique





Parfaite ergonomie

Spécialement conçu pour les plaies du talon (du genou et du coude), TIELLE® Talon enveloppe et protège efficacement. Le patient peut, ainsi, porter des chaussures, avoir une plus grande mobilité : sa **qualité de vie** (1) s'en trouve **améliorée**.



TIELLE® TALON




Meilleure absorption

La technologie hydrocellulaire de TIELLE® Talon garantit le contrôle et l'absorption des exsudats (faibles, modérés ou forts) des plaies du talon, tout en maintenant le milieu humide propice au bourgeonnement et à la cicatrisation (3).



Facilité d'utilisation inégalée

L'application de TIELLE® Talon est intuitive et son retrait très facile et non douloureux, grâce à son adhésif miscible à l'eau.

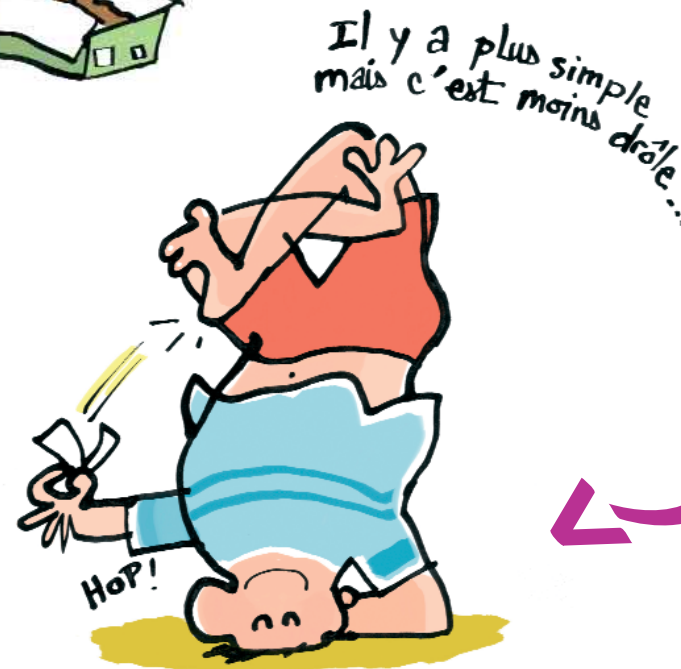

Confort maximal

TIELLE® Talon est souple, protège la peau contre les frottements (prévention et réduction des escarres de 76,7 % (4)), est étanche à l'eau (le patient peut se doucher) et garantit le contrôle des odeurs pendant l'utilisation. L'adhésif est respectueux de la peau et évite la "macération".



Barrière antibactérienne longue durée

TIELLE® Talon peut rester jusqu'à 7 jours sur la plaie, quelle que soit la quantité des exsudats, sans baisse d'efficacité de sa **barrière antibactérienne** (2).



(1) 'Clinical evaluation of TIELLE® Plus dressings in the management of exuding chronic wounds', HJ Schulze Poster presented on the WUWHS Congress, Paris, July 2004.

(2) Boothman S. et al. Testing of the Bacterial Barrier properties of TIELLE® dressings using a modified version of the Draft CEN test method (PREN 13726-5). R&D Department. Johnson & Johnson Advanced Wound Care, Gargrave, North Yorkshire.

(3) Boothman S. et al. Comparison of the fluid handling properties of wound care dressings. JJWM R&D Report 460.

(4) Th. C.M.Bots, B.F.G.Apotheker. The prevention of heel pressure ulcers using a hydropolymer dressing in surgical patients. Journal of Wound Care ; Vol 13, N9 : October 2004.