


Bruksanvisning

SVENSKA

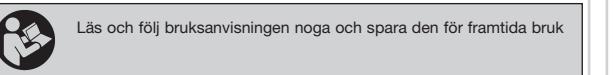

Läs och följ bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk
Säkerhetsinformation
Syftet med användningen: HEINE anoskop/proktoskop och rektoskop med glasfiberbelysning är utslutande avsedda att användas för undersökning och behandling av ändtarmen.

För en säker användning: För belysningen får utslutande apparater användas, som är avsedda för medicinskt bruk. Instrumenten får bara föras in med obturator.

1. Anoskop

Sätt instrument på ljuskällans handtag. Obturatoren läses fast i slangen, genom att vrida den medurs. Lås upp genom att vrida moturs. Applicera gjärmidel på slangen och obturatorspetsen.

2. Proktoskop och rektoskop

Sätt instrument på ljuskällans handtag. Kontrollera att ändhylsan (5) sitter ordentligt. Anslut i förekommande fall en fläkt till flönstret (4).

Lössä läskrullen (2) och fäll upp fönstret (1) helt och hållt. Om du inte behöver fönstret under undersökningen, drar du det uppåt från instrumenthuvudet.

Skjut in obturatoren. Förs slangen och obturatorspetsen med ett gjärmidell.

Läsfönstret (1), som är försedd med en planskiva kan här när helst öppnas eller stängas på ett bekvämt sätt. Det räcker med att dra åt skruven (2) lätt för att instrumentet skall vara tätt. Om du använder en fläkt utan en ventil, kan du reglera luftflödet med denna skruv.

För att arbeta med optisk förstorning sitter du på luppen (markering R för rektoskop, P för proktoskop) i en av de båda öppningsarna (3). Luppen kan svängas åt sidan när du vill öppna eller stänga förstärket Teleskopet används i båda öppningar (3) och fästs med klämskrut. Vid instrumentering kan det tipps nedat.

Utsugsröret (tilbehör) kan också fästs i öppningarna (3) med sin hållare. Det kan då frösiktas och arresteras i önskad position i slangen.

Användningen av en lupp begränsas då inte.

⚠️ Användning av gummi-dubbelfläkten:

Använd altid HEINES hygienerfilter (8) när du ansluter gummi-dubbelfläkten (9) till HEINES protoskop/rektoskop (6). Dessa filter är avsedda för engångsbruk och förhindrar att gummi-dubbelfläkten kontaminereras. Anslut den transparenta slangen (7) till luftslutningarna på HEINES protoskop/rektoskop. Kontrollera anslutningen mellan den transparenta slangen och HEINES hygienerfilter. Om denna inte skulle sättas fast, sätter du på den fastare. Anslut därefter hygienerfilter till gummi-dubbelfläkten.

Warning: Infektion! Om instrumentet används utan HEINES hygienerfilter kan gummi-dubbelfläkten förorenas genom att kroppsätskotortränger in. Då är risken för korskontaminerings. Använd därför alltid hygienerfilter. Om du skulle glömma hygienerfilter vid en användning skall gummidubbelfläkten bytas ut.

LÄTEK Risk för allergisk chock: Dubbelfläkten i gummi innehåller naturlig gummidäck. Använd den därför inte på patienter med latexallergi.

Varning: Infektion! Hygienerfilter är en engångsprodukt. Om det används flera gånger ökar risken för att efterföljande patienter skall infekteras. Hygienerfilter är inte lämpligt att rengöras, desinficeras och steriliseras.

Rengöring/desinfektion och sterilisering

Behandling efter användning: Stark nedsmutsning ska avlägsnas direkt efter användningen för att undvika avläggningar.

Demontering: Vid behandling avlägsnas instrumentet från ljuskällan. För att få ett bra rengöringsresultat ska artikeln tas isär (se bild / anvisning ovan)

TUBER OCH OBTRATOR

Manuell rengöring/desinfektion

Endast sådana behandlingsmedel som tillverkaren frisläppt för ädelstål, glasfiber och konstmaterial får användas för manuell rengöring/desinfektion. Tillverkarens uppiförer när det gäller koncentration/verkningsstid ska iakttas. Efter behandlingen ska instrumenten spolas ren med hela avsaltat vatten.

Maskinell rengöring/desinfektion

Artikeln är lämpad för maskinell behandling / termisk desinfektion (< 93 °C). För detta ändamål ska behandlingsmedel användas som är tillätna för ädelstål, glasfiber och konstmaterial. Inga rester får förekomma efter spolningsförloppen. Vi rekommenderar att helt avsaltat vatten används till sista spolningen.

Ultraljud som stöd för rengöringen är inte tillåtet!

Sterilisering
Sterilisering kan ske vid tillämpning av ångsterilisering (mättad ånga/134 °C/ 5 minuter). En steriliseringstid på 18 minuter är möjlig ur materialhänseende. Ljustransmissionen kan reduceras vid frekvent och tidsmässigt utdragrar ångsterilisering, i synnerhet vid otillräcklig ångkvalitet. Funktionskontrollen ska avståndas i enlighet med ovanstående.

Teleskop/dubbelfläkt av gummi
Teleskopet behandlas med desinficerande rengöring / torkdesinfektion. Som steriliseringssmetod kan låg-temperatur-steriliseringssmetoder (gasplasma) tillämpas. Dubbelfläkten av gummi kan genomgå desinficerande rengöring/torkdesinfektion.

Observera: Olämpliga eller felaktigt tillämpade behandlingsmedel eller behandlingsmetoder kan leda till irreparabla skador på artikeln.

②: För engångsbruk

Garanti

Instället för vanliga 2-års garanti, lämnar vi 5 års garanti för detta instrument gällande från det datum

det lämnat fabrik. (exkluderar förbrukningsartiklar såsom glödlampor, engångs artiklar trötta och laddningsbara batterier mm).

Vi garanterar en funktionell produkt under förutsättning att den används på det sätt som tillverkare och instruktionsblad föreskriver. Fel som uppstår under garantitiden kommer att åtgärdas utan att kunden debiteras, under förutsättning att felet uppkommit på grund av fel i material, design eller produktion. Vid åberopande av defekt produkt under garantitiden skall köparen bevisa att defekten harställd inden detta antafta sin utställning. Garantitiden är dock beroende av om defekten är uppkommit från försäljningskedjan.

Garantitiden är dock beroende av om defekten är uppkommit från försäljningskedjan.

Ett förtidigt uttagen garanti är inte tillåtet.

Ett förtidigt uttagen garanti är inte tillåtet.