

TM

La performance et la simplicité au service de la microdermabrasion

BIO-PEEL



Possibilité de travailler avec des micro-cristaux ou de la poudre organique

- Pas de maintenance
- Nettoyage automatique du filtre
- Pièce à main autoclavable
- Pédale de surcompression pour une abrasion plus rapide
- Nouvelle technologie et nouveau design



MEDICAMAT

Les principes et avantages de la microdermabrasion : du peeling à la dermabrasion

Le **Bio-Peel**, dernier né de la gamme d'appareils de microdermabrasion après le Skin 100, 51 et 20, est l'aboutissement technologique pour la mise en œuvre d'une technique simple et éprouvée pour traiter le vieillissement et les imperfections cutanées.

Le **Bio-peel** fonctionne avec des micro-cristaux d'alumine ou de la poudre organique qui est projeté sur la peau par l'intermédiaire d'une pièce à main courbe. Dès que cette pièce à main est en contact avec la peau et que se forme un vacuum, les cristaux viennent abraser la peau de façon uniforme et progressive. En agissant sur la puissance choisie et la vitesse de balayage on abrasera simplement l'épiderme ou plus profondément jusqu'au derme. C'est la seule technique qui par une action mécanique épidermique va agir sur le derme en favorisant la production de fibres d'élastine et de collagène. Aussi ce traitement sera-t-il efficace sur les vergetures et d'une façon plus générale sur les reconstructions dermiques.

Pour les net-face ou peeling superficiels l'invalidation sociale ne sera que de quelques heures en fonction de l'hyperémie conjointe à l'abrasion épidermique. Il est naturellement possible de combiner des peeling chimiques superficiels afin d'optimiser les résultats puisque les couches cornées auront été abrasées.

Cette technique est quasiment indolore et ne réclame jamais d'anesthésie locale même pour des abrasions au derme. Toutefois certaines zones comme la lèvre supérieure ou les vergetures pourront être anesthésiées pour le confort du patient.

Le **Bio-Peel** est équipé pour ne réclamer aucune maintenance quotidienne : nettoyage automatique des filtres, tige de pré-chauffage de cristaux afin d'éliminer l'humidité, remplissage et vidange aisé, accessibilité des bouches etc..

INDICATIONS du BIO-PEEL

PROFONDEUR 1

ABRASION AVANT
PIQUETE HEMORRAGIQUE
Nombre moyen de séances :
1 à 5

- Effacement des ridules
- Peeling faciaux
- Correction des rides

PROFONDEUR 2

ABRASION AU PIQUETE
HEMORRAGIQUE
Nombre moyen de séances :
3 à 15

- Correction des rides
- Effacement ou correction des cicatrices
- Effacement des taches pigmentaires
- Effacement des Tâches séniles
- Correction des stries atrophiques ou vergetures
- Correction des cicatrices hypotrophiques
- Correction des cicatrices de brûlure
- Correction des cicatrices post-traumatiques
- Correction des cicatrices d'acné

PROFONDEUR 3

ABRASION AU DERME
Nombre moyen de séances :
3 à 15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220 V - 50 Hz
monophasé avec prise de terre

Dimensions :
L x l x H = 410 x 560 x 330 mm

Poids : 30 kg

Tension : 2,5 ampères


Livré avec :

- 1 pièce à main
- 1 capuchon inox
- 1 manuel d'utilisation
- 4 kg de poudre
- 5 embouts plastique
- 1 filtre cuivre

Option :

quadripode mobile

ICONOGRAPHIE

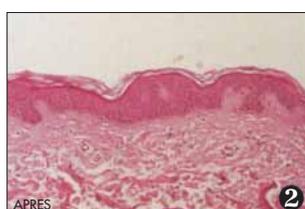

1 Photo 1 Vergetures

2 Photo 2 Biopsies

3 Photo 3 Cicatrices

- Garantie 2 ans
- Formation assurée
- Information patient



MEDICAMAT

59, avenue Augustin-Dumont 92240 Malakoff - France
Tél. : 01 46 56 24 04 - Fax : 01 40 92 95 12

E-mail : medicam@wanadoo.fr - Site Web : <http://www.medicamat.com>