




Guide de réglages

- 1 Présentation
- 2 Procédure de déverrouillage
- 3 Configuration du circuit
- 4 Configuration de la ventilation

1

Présentation

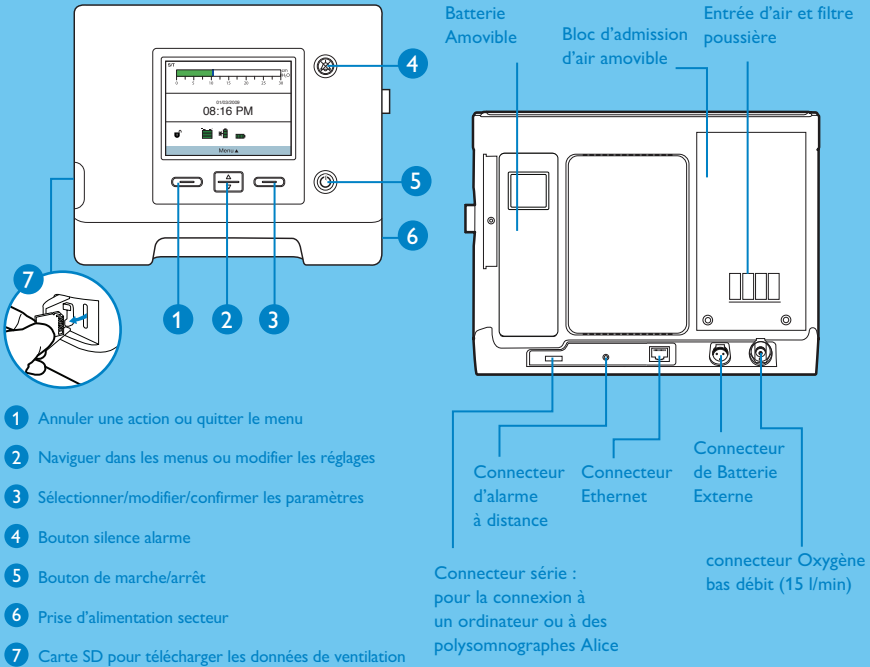

Symboles et icônes



mode configuration, accès complet



Carte SD insérée dans le ventilateur



Activation silence alarme



Activation rampe



Etat de la batterie amovible



Etat de la batterie interne



Etat de la batterie externe




Batterie en charge


2

Procédure de déverrouillage

Pour accéder au menu complet et modifier les réglages

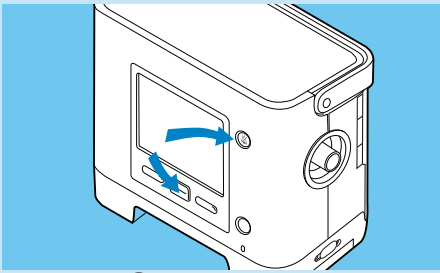


Appuyez sur et et maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour accéder à la page Configuration

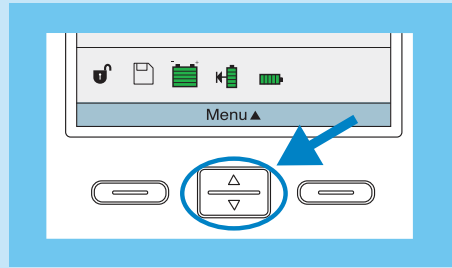

Si s'affiche sur l'écran principal, l'accès complet au menu est déjà autorisé. Appuyez sur pour accéder au menu


Pour bénéficier d'un accès complet aux réglages

A

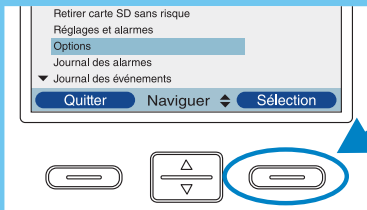


Naviguez jusqu'à **Options** et appuyez sur **Sélection**

B

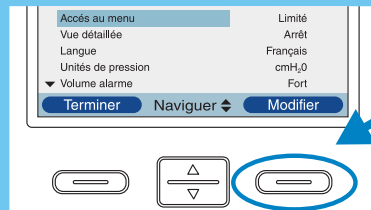


Appuyez sur **Modifier** pour l'accès au menu

C

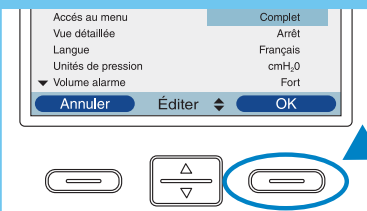

Sélectionnez **complet** avec , puis appuyez sur **OK** pour confirmer

D

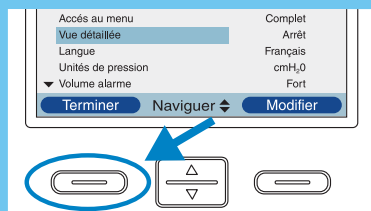


Appuyez sur **Terminer** et **Quitter** pour revenir à l'écran initial

3


Configuration du circuit

Avant d'utiliser le **Trilogy100**, vous devez configurer le type de circuit

Configuration en circuit à valve

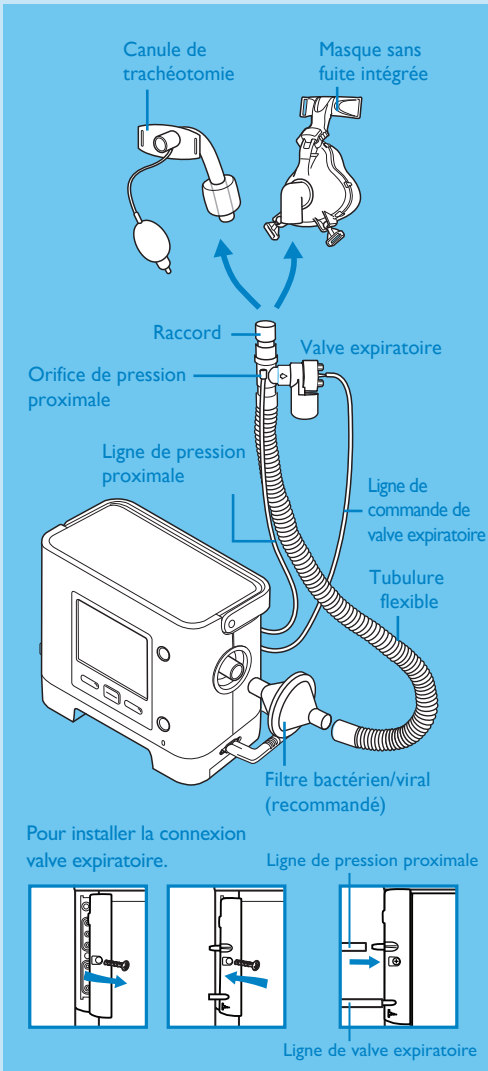

Configuration en circuit à fuite

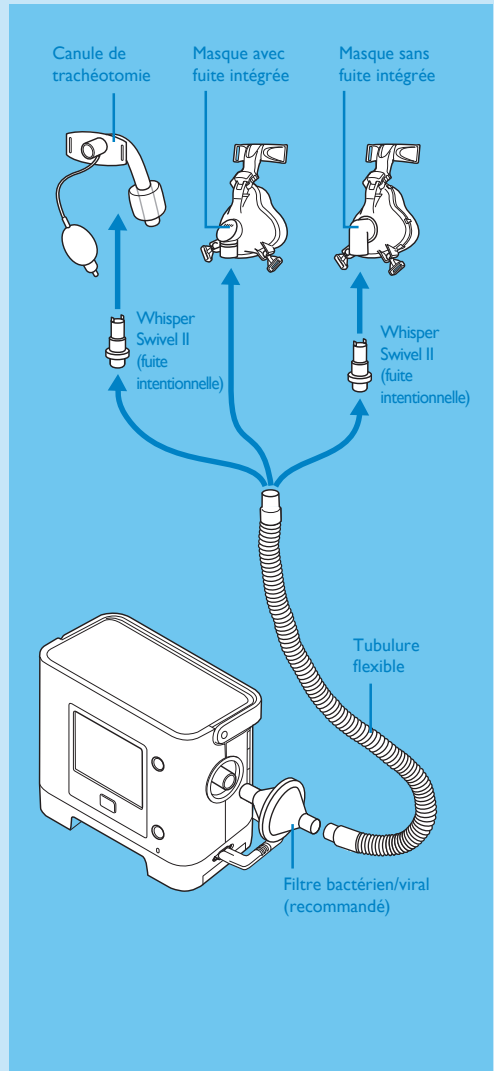




Veuillez vérifier la configuration correcte du type de circuit.

it.


Assurez-vous que le **Trilogy100** est mis hors tension avant de procéder comme suit

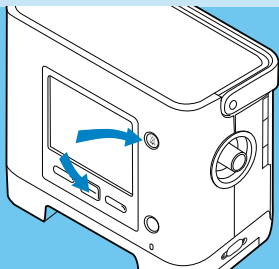A




Appuyez sur  et  et maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour accéder à la page Configuration

B

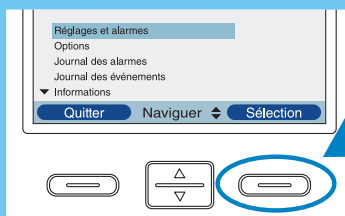


Sélectionnez **Réglages et alarmes**


C

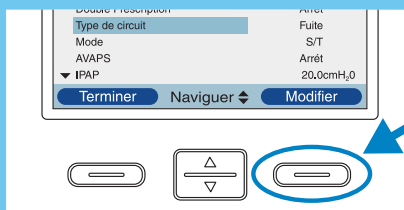


Naviguez jusqu'à **Type de circuit** et appuyez sur **Modifier**

E

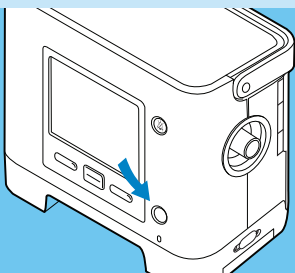

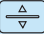
Utilisez  pour choisir **Valve** (configuration avec valve expiratoire) ou **Fuite** (configuration avec fuite intentionnelle), puis appuyez sur **OK** à deux reprises afin de confirmer

Appuyez sur  pour faire fonctionner l'appareil ou continuer la navigation dans le menu afin de configurer les paramètres de ventilation

4


Configuration de la vent

A

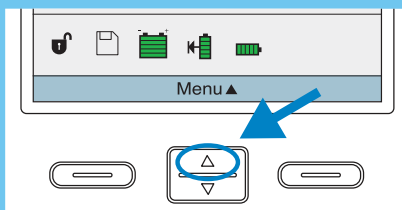


Dans l'écran principal, appuyez sur **Menu**


B

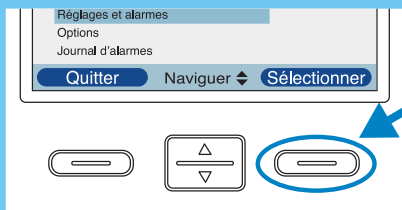


Sélectionnez **Réglages et alarmes**

E

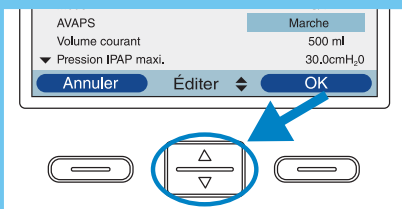

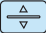
Utilisez  pour modifier la valeur ou l'état du réglage

F

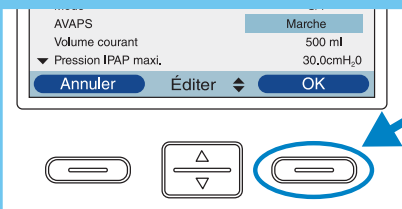


Appuyez sur **OK** pour valider le nouveau réglage

Prescription double

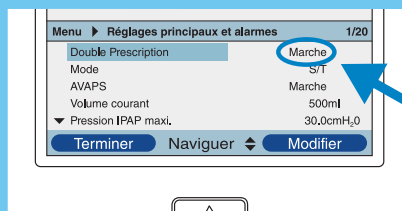


Si la **Prescription double** est activée, les deux prescriptions doivent être réglées comme expliqué précédemment

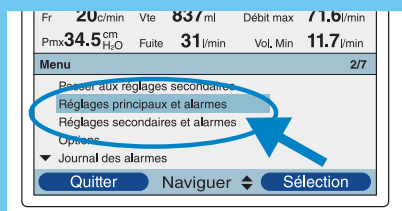


Deux prescriptions à régler


ilation

C

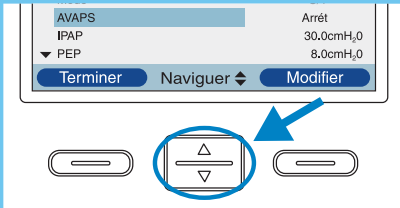


Faites défiler vers le haut ou le bas avec  pour naviguer entre les différents réglages et alarmes

D

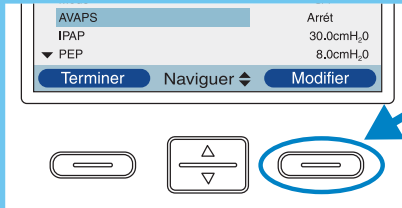

Appuyez sur **Modifier** pour modifier le paramètre surligné en bleu

G

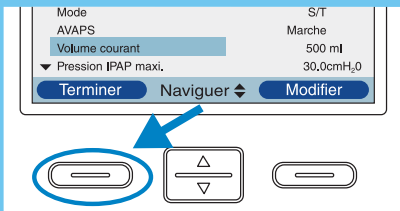

Appuyez sur **Terminer** et **Quitter** pour revenir à l'écran principal

**Philips Healthcare appartient
à Royal Philips**

Comment nous contacter

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asie

+49 7031 463 2254

Europe, Moyen-Orient, Afrique

+49 7031 463 2254

Amérique latine

+55 11 2125 0744

Amérique du nord

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respireonics 

1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 États-Unis

Service Clients

+1 724 387 4000

Philips Respireonics Benelux

+33 1 47 28 30 83



Philips Respireonics Allemagne

+49 8152 93 06 0

Philips Respireonics France

+33 2 51 89 36 00

Philips Respireonics Italie

+39 039 203 1

Philips Respireonics Suisse

+41 6 27 45 17 50

www.philips.com/respironics

Mentions légales:

Ce document est à l'usage des professionnels.

Trilogy 100 est destiné à fournir une assistance ventilatoire continue ou intermittente aux personnes nécessitant une ventilation mécanique. Le Trilogy100 est conçu pour être utilisé sur les nouveaux-nés ou sur les patients pesant au moins 5 kg, pour une utilisation à domicile, dans un hôpital/établissement sanitaire et de façon portative avec les fauteuils roulants et les brancards ; il peut être utilisé pour la réalisation d'une ventilation aussi bien invasive que non invasive. Ce DM fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez la LPPR. Ce DM de classe IIb est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Veuillez lire très attentivement le manuel d'utilisation accompagnant le dispositif médical, pour toute information relative à son usage préconisé et à son utilisation.

© 2013 Koninklijke Philip N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et/ou d'interrompre la fourniture de tout produit à tout moment sans préavis ou obligation, et décline toute responsabilité inhérente aux conséquences de l'usage de cette publication.

Broudy NB 10/14/13 MCI 4105892 PN 1057585

