Réalisation d'un cycle d'auto-désinfection thermique dans le laveur-désinfecteur AdaptaScope (ASP, Johnson & Johnson)

Une auto-désinfection du laveur-désinfecteur doit être effectuée 1x par semaine

1. Préparation de la cuve



Cuve à la fin d'un cycle de désinfection



Enlever toutes les connexions de la machine



Mettre le bouchon au niveau du 7ème canal

2. Nettoyage de la cuve



Utiliser le produit PS 20 pour laver l'intérieur de la cuve



Laver l'intérieur de la cuve et l'intérieur du couvercle

Rinçage de la cuve :

Choisir le menu « FONCTIONS D'AIDE »

Choisir la cuve : « DROITE » ou « GAUCHE »

Choisir la fonction : « REMPLIR EAU »

Appuyer sur le bouton « DEMARRER » à la hauteur de « EAU NON-FILTREE »

Le bouton change en « ARRET »

Ne rien toucher tant que le bouton « DEMARRER » n'est pas réapparu

Utiliser l'eau de la cuve pour rincer manuellement le couvercle et l'intérieur de la cuve qui n'est pas en contact avec l'eau

Une fois le rinçage terminé, appuyer sur « RETOUR »

Choisir la fonction : « EVACUATION »

Appuyer sur: « DEMARRAGE »

Le bouton change en « ARRET »

Ne rien toucher tant que le bouton « DEMARRER » n'est pas réapparu

Une fois l'évacuation terminée (bouton de retour à « DEMARRER »), appuyer sur « RETOUR »

Refaire le rinçage 2 nouvelles fois

3. Changement des branchements



Changer la connexion du filtre de A à B en clipant l'embout



Avant de démarrer le cycle, faire une coche sur le filtre pour numéroter le nombre de cycle de stérilisation et revisser la purge Remplir la fiche de traçabilité du filtre

4. Cycle de désinfection thermique



Fermer la cuve où le cycle aura lieu

Appuyer sur « FONCTIONS D'AIDE »

Choisir la cuve : « DROITE » ou « GAUCHE » Choisir la fonction : « AUTODES. THERMIQUE »

Lire les recommandations puis appuyer sur « ACCEPTER »

Appuyer sur « DEMARRER »



Entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « ACTIVER », entrer le numéro, appuyer sur « ENTRER »)

A la fin du cycle:

Appuyer sur « FONCTION »
Entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du code barre
Appuyer sur « FONCTION » pour arriver dans le menu « RUN »
Ouvrir la porte



Changer la connexion du filtre de B à A en clipant l'embout

4/6

5. Refroidissement de la cuve (nécessaire si la cuve et le couvercle sont encore chauds et qu'un endoscope doit être désinfecté immédiatement dans la machine)

Aller dans le menu « RUN »

Fermer la cuve

Choisir le menu « FONCTIONS D'AIDE »

Choisir la cuve « DROITE » ou « GAUCHE »

Choisir la fonction « REMPLIR EAU »

Appuyer sur le bouton « DEMARRER » à la hauteur de « EAU NON- FILTREE » Le bouton change en « ARRET »

Une fois le remplissage terminé (bouton de retour à « DEMARRER »), appuyer sur « RETOUR »

Choisir la fonction « CIRCULATION »

Appuyer sur « DEMARRAGE »

Laisser la circulation pendant 3 minutes

Appuyer sur « RETOUR »

Choisir la fonction « EVACUATION »

Appuyer sur « DEMARRAGE »

Le bouton change en « ARRET »

Ne rien toucher tant que le bouton « DEMARRER » n'est pas réapparu

Une fois l'évacuation terminée (bouton de retour à « DEMARRER »), appuyer sur « RETOUR »

CHUV Centre d'Endoscopie - Protocole pour le cycle de désinfection thermique dans le Laveur Désinfecteur AdaptaScope de Wassenburg

Document établi en collaboration avec :





Endoscopie et Hôpital de jour Rue du Bugnon - BH-07.501 1011 Lausanne

Service de Médecine Préventive Hospitalière Rue du Bugnon - BH 19 1011 Lausanne

Rotzenbuehlstrasse 55 8957 Spreitenbach Tél: 056 417 33 33