

Carte d'instruction

Reflex

Consignes de sécurité


- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.
- Charge maximum 135 kg
- Le frein doit toujours être activé lors des transferts depuis le siège ou vers le siège.
- Réglez le repose-jambes/pieds à la bonne hauteur.
- Réglez bien l'appuie-tête (surtout en cas d'inclinaison).
- Verrouillez les accoudoirs pour montée/descente, inclinaison et déplacement.

1a Commande

Monter		
Descendre		
Incliner arrière		
Incliner avant		
Activer	 + 	1 sec. simultanément
Arrêt d'urgence		
Activer	 + 	4 sec. simultanément

Important!


Cette carte d'instruction ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation.

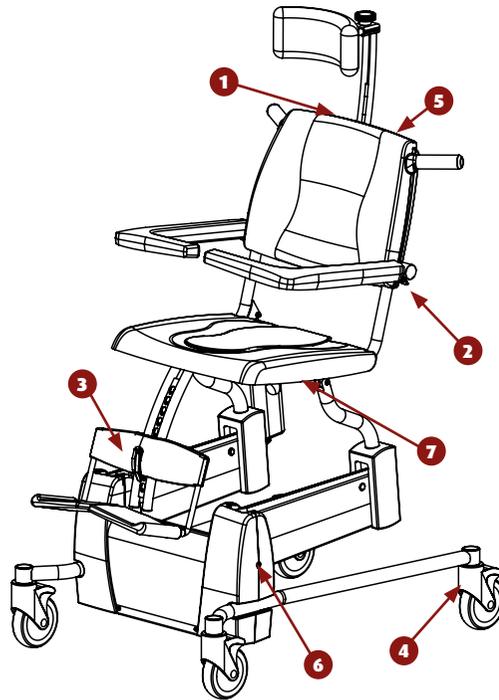

1b Commande


1. Activez le Reflex en appuyant simultanément sur les 2 boutons de montée pendant 1 seconde.
ATTENTION: S'il est inutilisé pendant 60 minutes, le Reflex passe automatiquement en mode veille. Activer, voir étape 1
2. Mettez le siège dans la bonne position, ainsi que l'appuie-tête/jambes (ou rabattez-les)
3. Enfoncez le frein!
4. Ouvrez les accoudoirs et remontez-les si nécessaire.
5. Soutenez la personne lorsqu'elle s'assoit.
6. Fermez les accoudoirs.
Pour la station debout, procédez à l'envers.
En cas d'urgence, toutes les fonctions du siège Reflex peuvent être désactivées en appuyant sur le bouton stop. Pour réutiliser le siège, appuyez simultanément sur les 2 boutons de montée pendant 4 secondes.

2 Verrouillage accoudoirs

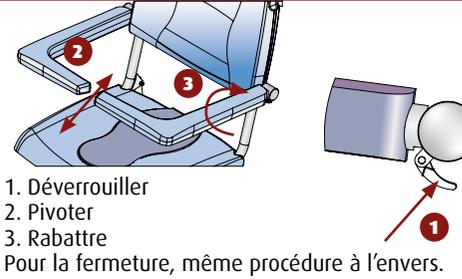


1. Déverrouiller
 2. Pivoter
 3. Rabattre
- Pour la fermeture, même procédure à l'envers.

3 Appuie-jambe

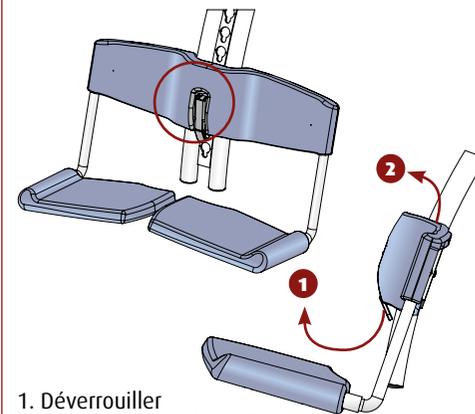

1. Déverrouiller
2. Retirer l'ensemble de l'appuie-jambe
3. Choisir la bonne position
4. Accrocher et verrouiller

4 Freinage

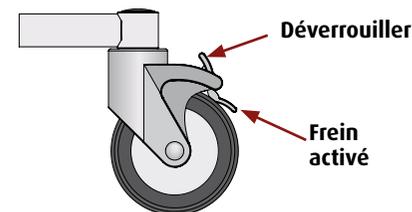

5 Rechargement


Pour préserver les batteries rechargez le siège après utilisation.



Arrêt
Vert
Rouge clignote
Rouge


Mode veille
Siège prêt à l'emploi
Batterie presque épuisée
Batterie épuisée, recharger immédiatement

Pas d'utilisation possible pendant le chargement de la batterie.

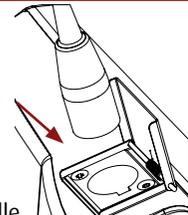

6 Descente d'urgence

Si toutes les fonctions sont désactivées, faites redescendre le siège à l'aide de la clé fournie.

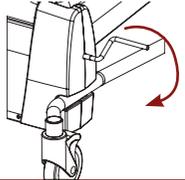

7 Rail pour seau ou bassin de toilette

Pour l'utilisation d'un seau ou d'un bassin de toilette, retirez le couvercle de l'assise. Faites coulisser le seau ou le bassin de toilette sous le siège, par l'arrière, dans le rail spécialement prévu à cet effet. Installez ensuite la personne dans le siège.

Nettoyage

Le Reflex doit être nettoyé après utilisation avec de l'eau chaude et des produits nettoyants domestiques. N'utilisez pas de produits récurants ni de solvants agressifs. Nettoyez régulièrement les roues (cheveux, poussière, restes de savon etc.).

En cas de panne, contacter votre revendeur.