


MANUEL UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre TEO Duo

Le TEO Duo est un casque TV sans-fil doublé d'un amplificateur d'écoute pour les conversations.

Le système TEO Duo est composé d'un émetteur sans-fil et d'un boîtier récepteur. La technologie utilisée vous garantit un son hifi sur une portée de 30 m dans un bâtiment et de 100 m à l'extérieur.

Le TEO Duo possède un traitement du signal qui permet de rendre les voix plus intelligibles. Il est automatiquement activé.

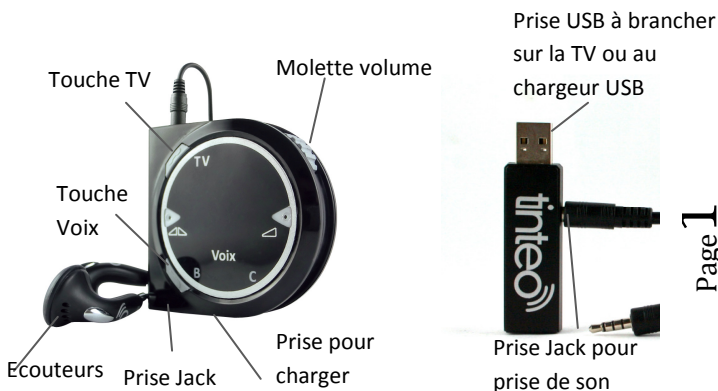

Quelques jours à quelques semaines sont nécessaires pour s'habituer au TEO Duo et profiter pleinement des sons amplifiés.

Vous pouvez connecter 1 à 4 TEO Duo sur le même émetteur sans-fil.

Vous pouvez brancher tout type de casque audio sur votre TEO Duo. Vous pouvez aussi brancher un collier boucle d'induction, ainsi le Casque TV sans fil TEO DUO vous permet de recevoir le son de la télévision directement dans vos prothèses auditives (équipées d'une position T).

Éléments fournis

1 boîtier électronique

TEO Duo

1 paire d'écouteur

1 émetteur sans-fil

1 connecteur RCA TV

1 câble connecteur
jack-jack 3.5 mm

1 housse de transport

1 chargeur USB et son
câble USB

1 paire de coussinets

Garantie du casque TV sans fil et amplificateur

Votre casque TV TEO Duo est garanti 2 ans. Les accessoires sont garantis un an. Une utilisation anormale (humidité, choc) de votre appareil est susceptible de provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par votre garantie.

Utilisation de votre TEO Duo

Pour faire fonctionner votre casque TEO Duo, 3 étapes sont nécessaires :



Etape 1 :
**Faire
fonctionner**
l'émetteur
sans-fil



Etape 2 :
Connecter
vosre TEO
Duo à
l'émetteur
sans-fil



Etape 3 :
Utiliser
vosre
TEO Duo

Etape 3 : Utiliser votre TEO Duo

Il y a 4 possibilités :

1^{ère} possibilité : En connectant l'émetteur à la sortie USB de votre télévision et à la sortie audio de votre TV

Branchez directement l'émetteur sans-fil à la sortie USB de votre télévision.

Branchez le câble jack 3.5 mm à la prise jack de votre émetteur sans-fil et reliez-le la sortie casque de votre télévision.

Le son de votre télévision sera coupé.



2^{ème} possibilité : En connectant l'émetteur à la sortie USB de votre télévision et à la sortie RCA de votre TV

Branchez directement l'émetteur sans-fil à la sortie USB de votre télévision.

Reliez le câble Jack 3.5 mm au connecteur RCA.



Connectez le câble Jack 3.5 mm à l'émetteur sans-fil.

Branchez le jack RCA rouge de votre connecteur RCA sur la prise RCA rouge de votre télévision.

Branchez le jack RCA blanc de votre connecteur RCA sur la prise RCA blanche de votre télévision.

3^{ème} possibilité : En connectant l'émetteur sans-fil sur une prise secteur et à la sortie audio de votre TV Connectez l'émetteur sans-fil au chargeur USB fourni puis branchez l'ensemble à la

prise secteur la plus proche de votre télévision.



Branchez le câble jack 3.5 mm à la prise jack de votre émetteur sans-fil et reliez-le la sortie casque de votre télévision.

Le son de votre télévision sera coupé.

4^{ème} possibilité : En connectant l'émetteur sur une prise secteur et à la sortie RCA de votre TV

Connectez l'émetteur sans-fil au chargeur USB fourni puis branchez l'ensemble à la prise secteur la plus proche de votre télévision.

Reliez le câble Jack 3.5 mm au connecteur RCA.

Connectez le câble Jack 3.5 mm à l'émetteur sans-fil.



Branchez le jack RCA rouge de votre connecteur RCA sur la prise RCA rouge de votre télévision.

Branchez le jack RCA blanc de votre connecteur RCA sur la prise RCA blanche de votre télévision.

Remarques: *Les prises RCA se trouvent souvent à l'arrière des appareils hifi.*

Utilisez de préférence la prise RCA sortie de votre télévision.

Votre émetteur sans-fil est maintenant branché à votre télévision. Il faut maintenant activer votre casque TV TEO Duo.

Notes:

Vous pouvez aussi écouter votre télévision tout en entendant les sons environnants en activant votre TEO Duo en amplificateur d'écoute. Le son de la télévision sera directement capté par les microphones de votre TEO Duo.

Etape 2 : Connecter votre TEO Duo à l'émetteur

1. Allumer votre TEO Duo

Branchez les écouteurs et appuyer sur n'importe quelle touche de votre TEO Duo.

2. Relier votre TEO Duo à l'émetteur sans-fil

Approchez votre TEO Duo de l'émetteur sans-fil. Vous devez vous trouver à moins de 3 m.

Appuyez sur la touche TV de votre TEO Duo.

Attendez quelques secondes. Vous entendez le son de la télévision directement dans vos oreilles.

Votre TEO Duo est maintenant connecté à votre télévision.

Etape 1 : Faire fonctionner l'émetteur sans-fil



Utiliser votre TEO Duo en casque TV sans-fil

Votre TEO Duo est connecté à la télévision via l'émetteur sans-fil. (Cf Etape 2)

1. Régler le volume

Poussez la molette vers le haut (+ fort) ou tirez-la vers le bas (- fort).

2. Balance

Pour régler la balance entre les deux oreilles, appuyez simultanément sur la molette et sur la touche TV.

Pour entendre plus fort dans l'oreille droite, poussez la molette vers le haut.

Pour entendre plus fort dans l'oreille gauche, tirez la molette vers le bas.



Utiliser votre TEO Duo en amplificateur d'écoute

1. Allumer votre TEO Duo

Branchez les écouteurs, appuyez sur la touche Voix pour activer le mode « Amplificateur d'écoute ».

Vous entendez les sons ambiants.

2. Régler le volume ou la balance

Reportez-vous aux paragraphes 1 et 2 de « Utiliser votre TEO Duo en casque TV ».

3. Régler le son de votre TEO Duo en mode amplificateur de sons

Votre TEO Duo offre 2 fonctions pré-réglées:

Environnement bruyant pour une utilisation dans la rue, le train ou lors d'un repas de famille...

Environnement calme pour avoir une conversation dans un endroit calme ou

regarder la télévision tout en entendant ce qu'il se passe autour.

Passez du mode Environnement Bruyant au mode Environnement Calme en appuyant sur la touche « Voix ».

Le mode d'écoute est indiqué par la lettre allumée « B » pour environnement bruyant ou « C » pour environnement calme

Eteindre votre TEO Duo

Débranchez votre casque ou appuyez 3 secondes sur la molette.

Rechargez votre TEO Duo

Connectez votre TEO Duo au chargeur USB avec le câble USB fourni et branchez-le sur une prise secteur ou à un ordinateur.

Effacer les réglages/ Reset

Votre TEO Duo mémorise les réglages d'une utilisation à une autre quelle que soit son utilisation.

Pour effacer les réglages, restez appuyé 3 secondes sur les touches « **TV** » et « **Voix** » simultanément. Tous les voyants s'allument.

Mettre à jour votre TEO Duo

Branchez le TEO Duo avec le câble USB fourni à votre ordinateur. Rendez-vous sur le site www.tinteo.com, rubrique mon Tinteo et suivez les instructions.

.

Déclaration de conformité CE

Nous,
Personal Sound SAS
100, route des houillères
13590 Meyreuil
France

Déclarons sous notre responsabilité que le produit TEO Duo est conforme aux normes harmonisées suivantes:

- EN 60065 : 2002, A1 : 2006, A11 : 2008
- EN 55022 : 2006, A1 : 2007
- EN 61000-3-2 : 2006, A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2008
- EN 55024 : 1998, A1 : 2001, A2 : 2003
- RTTE – Norme radio Européenne

Conformément aux exigences essentielles de:

- 2006/95/CE – Directive Basse Tension
- 2004/108/CE – Directive CEM
- 2005/32/CE – Directive Ecoconception
- 2009/125/CE – Directive Ecoconception

Meyreuil, le 20 février 2013
Alexandre Desroches
Président