

CEFAR PRIMO PRO

La technologie au service
du traitement de la douleur !





|| Médecin en Centre d'Etude et de Traitement de la Douleur,
je prescris quotidiennement l'utilisation de TENS satisfaisant
aux exigences réglementaires. Le CEFAR PRIMO PRO s'est
naturellement imposé par sa technologie et son ergonomie. ||

TECHNOLOGIE

■ CEFAR EASY TOUCH™ : RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'INTENSITÉ

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'intensité soit réglée et ajustée automatiquement en fonction des résultats de l'analyse Auto test. La fonction CEFAR EASY TOUCH™ facilite l'application du traitement et permet d'effectuer la séance de stimulation à un niveau optimal et efficace.

■ 2 CANAUX INDÉPENDANTS

Vous pouvez effectuer un traitement en utilisant simultanément deux programmes différents.

■ FONCTION DE PROGRAMMATION

Le CEFAR PRIMO PRO comprend 3 emplacements libres qui vous permettent de créer des programmes personnalisés.

■ ÉCRAN RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Plus grand, l'écran rétro-éclairé du CEFAR PRIMO PRO rend la lecture beaucoup plus facile, même lorsque la lumière ambiante est insuffisante.

Autres avantages : fonction de pause, verrouillage du programme, verrouillage des touches, surveillance, auto-contrôle.

INDICATIONS

Le CEFAR PRIMO PRO comprend des programmes TENS pour le traitement de différents types de douleurs. Il propose 7 programmes de traitement prédéfinis, notamment TENS conventionnel, Burst, Modulé sur largeur d'impulsion, Fréquence mixte, CEFAR Flow TENS et Traitement des nausées. Il existe également 3 emplacements libres qui vous permettent de créer vos propres programmes.

P1 – TENS CONVENTIONNEL

- Douleurs musculaires et articulaires
- Douleurs aiguës ou chroniques
- Cicatrisation
- Douleurs menstruelles/angine de poitrine

P2 – BUST/ENDORPHINIQUE

- Douleurs irradiantes/rhizopathie
- Sensibilité réduite
- Résultats de P1 insuffisant
- Douleurs musculaires profondes

P3 – STIMULATION À DURÉE D'IMPULSION MODULÉE

- Douleurs musculaires et articulaires
- Relaxation musculaire
- Effet de massage
- Douleurs cervicales et lombaires

P4 – TRAITEMENT DES ZONES SENSIBLES

- Traitement facial
- Douleurs cervicales
- Algies post-zostériennes

P5 – TENS À FRÉQUENCE MIXTE

- Soulagement combiné de la douleur par libération d'endorphines et Gate Control
- Douleurs post-opératoires
- Douleurs lombaires

P6 – TRAITEMENT DES NAUSÉES

- Point d'acupuncture

P7 – CEFAR FLOW TENS - 4 électrodes

- Douleurs musculaires et articulaires
- Relaxation musculaire
- Effet de massage

P8-10 – PROGRAMME PERSONNALISÉ

AVANTAGES

■ CEFAR FLOW TENS

Un programme prédéfini offrant un nouveau procédé de stimulation très agréable. L'utilisation simultanée des deux canaux vous permet d'associer au soulagement de la douleur une sensation agréable de massage.

■ GUIDE DES PROGRAMMES

Des informations détaillées précisant le programme à utiliser dans chaque indication sont désormais disponibles dans le manuel d'utilisation. Vous pourrez y trouver des informations sur les différentes formes de stimulation, des exemples d'indications ainsi que des illustrations présentant le positionnement des électrodes pour chacun des traitements proposés.

■ TOUR DE COU

Le stimulateur est fourni avec un tour de cou et un clip ceinture amovibles pour une utilisation pratique à domicile.

LIVRÉ AVEC :

- 2 câbles
- 1 clip
- 1 tour de cou
- 1 mallette de transport
- 1 manuel d'utilisation contenant le guide des programmes
- 2 piles alcalines de 1,5 V
- 4 électrodes
- En option : piles rechargeables et chargeur

Toutes les informations techniques complémentaires sur ce produit sont à votre disposition dans le cahier spécial **renseignements techniques** p 42.



Il est conseillé de traiter les douleurs cervicales à l'aide du programme CEFAR FLOW TENS.



Traitement d'une arthrose du genou.

