



SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS®

La position basse et latérale des grandes électrodes facilite le recrutement musculaire tout en améliorant le confort de stimulation. La collerette assure le maintien à la bonne profondeur de pénétration. La déconnexion des câbles permet une immersion complète dans un bain désinfectant.
Concepteur : Luc Guillaume.

Longueur : 12,8 cm / Diamètre : 2,4 cm.
Connectique 2 fiches bananes 2 mm.

Réf. 6114610

CE 0398



Accessoires :

Câble monopolaire pour sonde SAINT-CLOUD PLUS® - Réf. 7114901

Câble adaptateur Din 3 broches mâle pour sonde SAINT-CLOUD PLUS®

Réf. 7492000

La sonde Saint-Cloud Plus® est remboursée en France au tarif figurant sur la LPPR.

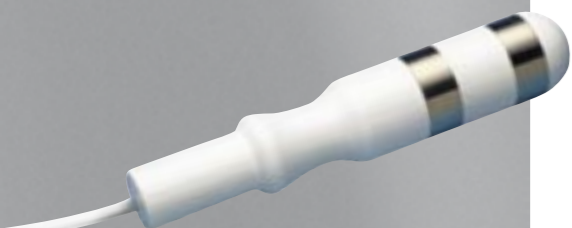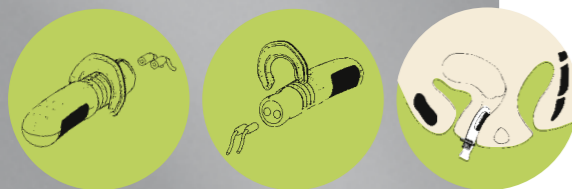

SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD CLASSIC® 2 BAGUES

Les électrodes bagues permettent une stimulation sur tous les côtés de la paroi vaginale. L'extrémité allongée facilite la prise en main. La forme étranglée diminue le risque d'expulsion en cours de traitement.

Longueur : 13 cm / Diamètre : 2,5 cm.

Connectique DIN 3 broches

Réf. 6114502

CE 0398

La sonde Saint-Cloud Classic® est remboursée en France au tarif figurant sur la LPPR.



SONDE ANALE SAINT-CLOUD®


La bague 110° permet un double recrutement pubo-rectal et sphincter strié anal. La languette de maintien facilite la tenue de la sonde et évite les risques d'expulsion en cours de traitement.
Concepteur : Luc Guillaume.

Longueur : 11 cm / Diamètre : 1,3 cm.

Connectique Sonde Anale Saint-Cloud® Din 3 broches – Réf. 6424038
CE 0398.

Sonde Anale Saint-Cloud®, 2 fiches bananes 2 mm – Réf. 6424238
CE 0398.

La sonde anale Saint-Cloud® est remboursée en France au tarif figurant sur la LPPR.

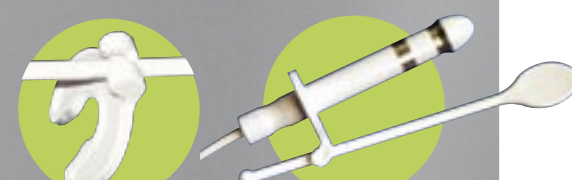

CEFAR PERISTIM PRO

L'électrostimulation pour le traitement de l'incontinence

TECHNOLOGIE

■ STIMULATION PAR SONDE VAGINALE ET/OU ANALE, OU PAR ÉLECTRODES DE SURFACE

■ FONCTION DE PROGRAMMATION

Le CEFAR PERISTIM PRO vous permet d'ajouter 3 programmes personnalisés.

■ ÉCRAN RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Plus grand, l'écran rétro-éclairé du CEFAR PERISTIM PRO rend la lecture beaucoup plus facile, même lorsque la lumière ambiante est insuffisante.

Autres avantages : fonction de pause, verrouillage du programme, verrouillage des touches, surveillance, auto-contrôle.

INDICATIONS

Le CEFAR PERISTIM PRO comporte 9 programmes prédéfinis pour le traitement de l'incontinence d'effort, de l'incontinence mixte, de l'instabilité vésicale et de la douleur liée aux troubles urinaires (la cystite par exemple), mais aussi pour la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation de points d'acupuncture dans le traitement de l'instabilité vésicale.

AVANTAGES

■ GUIDE DES PROGRAMMES

Des informations détaillées précisant le programme à utiliser dans telle ou telle situation sont désormais disponibles dans le manuel d'utilisation. Vous pourrez y trouver des informations sur les différentes formes de stimulation, des exemples d'indications ainsi que des illustrations présentant le positionnement des électrodes pour chacun des traitements proposés.

LIVRÉ AVEC :

- 2 câbles
- 1 clip
- 1 tour de cou
- 1 mallette de transport
- 1 manuel d'utilisation contenant le guide des programmes
- 2 piles alcalines de 1,5 V
- 4 électrodes
- En option : piles rechargeables et chargeur

Toutes les informations techniques complémentaires sur ce produit sont à votre disposition dans le cahier spécial **renseignements techniques** p 43.



Lorsque l'électrothérapie est utilisée pour les indications urologiques les plus courantes telles que l'incontinence d'effort, l'instabilité vésicale ou l'incontinence d'urgence, le CEFAR PERISTIM PRO donne la possibilité d'aborder l'essentiel des protocoles de rééducation par électrostimulation et biofeedback. On peut aussi bien choisir de traiter soit avec sondes périnéo-sphinctériennes mais aussi par électrodes de surface.



SONDES DE RÉÉDUCATION PÉRINÉO-SPHINCTERIENNES

Une gamme adaptée pour un traitement de qualité !

Il était avant parfois délicat de maintenir la sonde à la bonne profondeur de pénétration pendant toute la durée du traitement. La sonde Saint-Cloud Plus® avec la collerette de maintien ajustable a totalement éliminé ce souci. Il suffit de demander à la patiente de maintenir la collerette ce qui est très facile à comprendre et à exécuter.

Rééducation des incontinences urinaires et rectales chez l'homme et chez la femme par électrostimulation et biofeedback.

TECHNOLOGIE

■ ADAPTATIONS MORPHOLOGIQUES :

Les sondes Saint-Cloud® sont adaptées à la morpho-physiologie vaginale ou rectale, elles permettent une stimulation optimale des points moteurs tout en respectant le confort du patient.

■ HYGIÈNE :

Les matériaux de contact biocompatibles ABS et INOX 316L ainsi que le traitement des surfaces de contact préviennent les risques d'accrochage de matières tout en autorisant la décontamination par nettoyage ou trempage dans des bains.

■ LE CONDITIONNEMENT :

En pochette thermosoudée garantit la première utilisation.

■ FACILITÉ D'UTILISATION :

Le design des sondes Saint-Cloud® est étudié pour faciliter la mise en place et la tenue de la sonde pendant la séance par le patient ou le thérapeute.

■ QUALITÉ DU TRAITEMENT :

Le blindage des câbles limite les risques d'artefacts pour l'enregistrement EMG et le biofeedback.

AVANTAGES

Les sondes Saint-Cloud® sont proposées en différents modèles de connectique permettant une adaptabilité à tous les appareils de rééducation.

Se reporter à la page accessoires pour les adaptateurs aux différentes connectiques.

		2 fiches bananes 2 mm	Din 3 broches
A	- Sonde vaginale Saint-Cloud Plus®	6114610	
B	- Sonde vaginale Classic, 2 bagues		6114502
C	- Sonde anale Saint-Cloud®	6424238	
D	- Sonde anale Saint-Cloud®		6424038
E	- Doigtier – Permet la recherche manuelle des points de stimulation et le testing manuel		6412100



Consultation pour une rééducation périnéale à l'aide du Péristim Pro.

