


FR Manuel d'utilisation

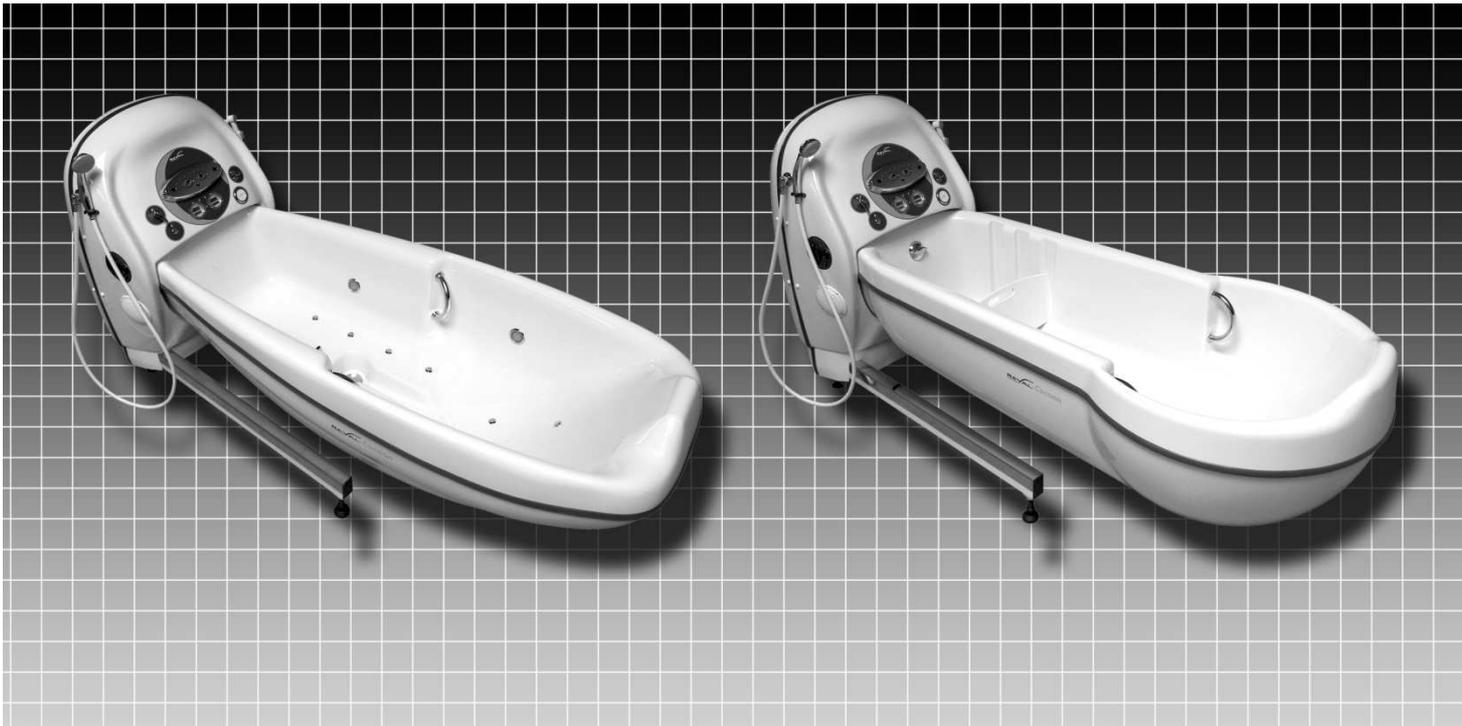

BAIGNOIRE à hauteur variable électrique

## Cocoon

7800.00

7801.00

7802.00

7803.00



# SOMMAIRE

## TABLE DES MATIERES




## PAGES

PLANS D'ENSEMBLE	2
-----	
DIMENSIONS	3
-----	
VERSIONS ET OPTIONS	4
-----	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	5
-----	
FONCTIONNEMENT	6
-----	
CONSIGNES DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS	7
-----	
UTILISATION	
MONTEE/DESCENTE DE LA CUVE	8
OUVERTURE/FERMETURE DE LA VIDANGE	8
FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR RADA SENSE	9
FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR WATTS	9
REPLISSAGE DE LA BAIGNOIRE	10
DOUCHETTE DE LAVAGE	10
DOUCHETTE DE DESINFECTION	10
BAIN BOUILLONNANT A AIR (OPTION)	11
AROMATHERAPIE (OPTION)	11
CHROMOTHERAPIE (OPTION)	12
MUSICOTHERAPIE (OPTION)	12
ARRET AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE SIMPLE POUR 7801.00 ET 7803.00	13
ARRET AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE SIMPLE POUR 7800.00 ET 7802.00	13
ARRET AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE 2 NIVEAUX	14
-----	
SYSTEME DE DESINFECTION	
COMPOSITION	15
DESINFECTION MANUELLE	15
AJOUT DE DESINFECTANT	15
-----	
ENTRETIEN	
NETTOYAGE DE LA CUVE ET DU PUPITRE	16
NETTOYAGE DES FILTRES EAU CHAUDE ET EAU FROIDE	16
NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE DU MITIGEUR (WATTS)	16
NETTOYAGE DU FILTRE DE LA BUSE DE REMPLISSAGE	17
NETTOYAGE DES BUSES DE BAIN BOUILLONNANT A AIR	17
-----	
CONTROLE PERIODIQUE	18
-----	
CARNET DE BORD	19
-----	

## PLAN D'ENSEMBLE



# DIMENSIONS

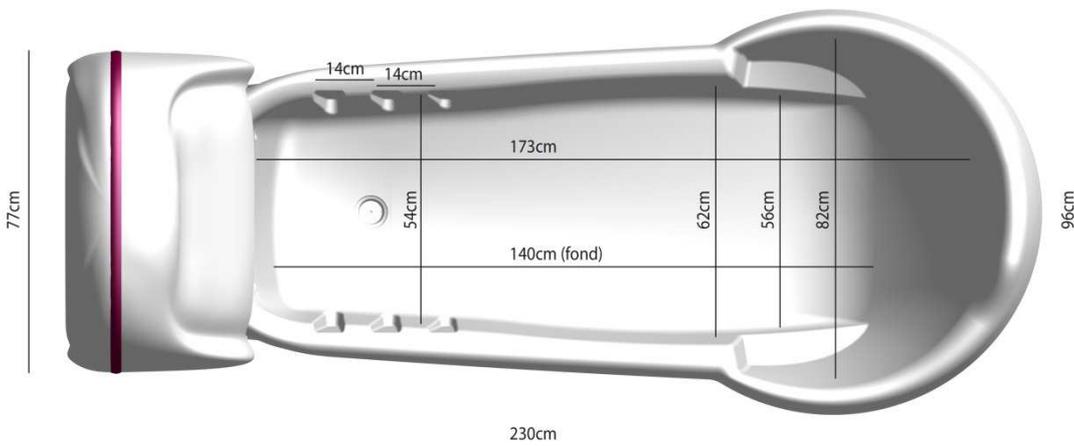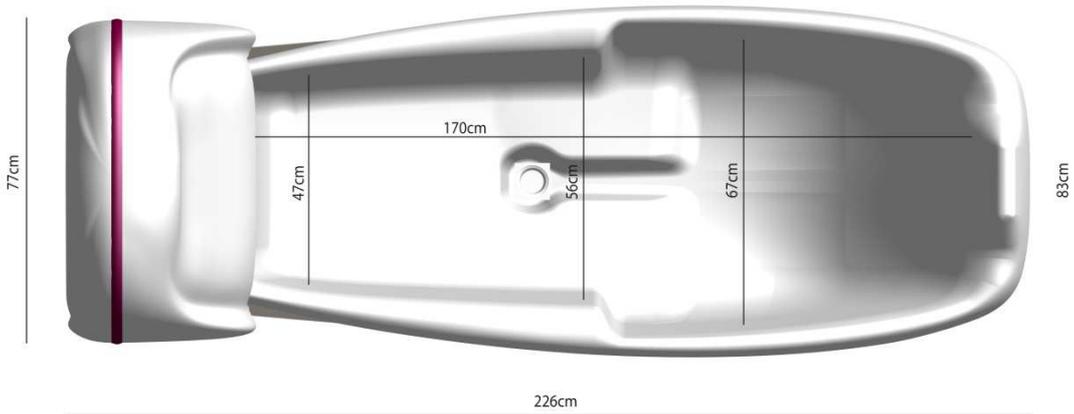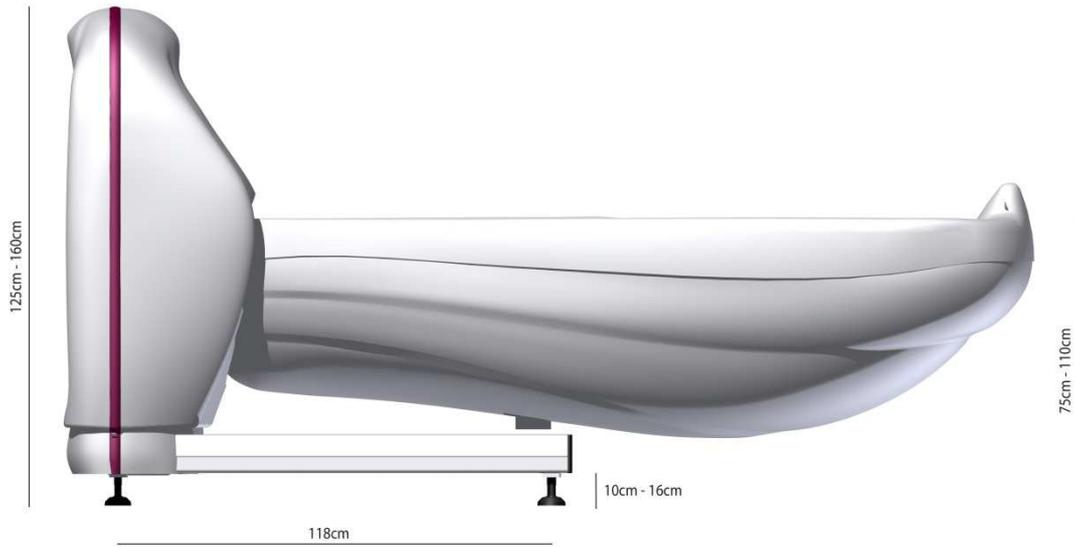

## VERSIONS ET OPTIONS

### VERSIONS:

- REF. 7800.00** Baignoire à hauteur variable électrique COCOON, cuve R'GO, mitigeur thermostatique Watts Eurotherm  
**REF. 7801.00** Baignoire à hauteur variable électrique COCOON, cuve R'GO, mitigeur thermostatique digital Sense  
**REF. 7802.00** Baignoire à hauteur variable électrique COCOON, cuve TS, mitigeur thermostatique Watts Eurotherm  
**REF. 7803.00** Baignoire à hauteur variable électrique COCOON, cuve TS, mitigeur thermostatique digital Sense

### OPTIONS :

- REF. 7800.10** Option douche de désinfection avec réglage du débit, système d'aspiration du produit désinfectant et réservoir de 2 litres sous trappe sécurisée par clé.  
**REF. 7800.20** Option bain bouillonnant à air 12 buses à vitesse variable et purge en fin de cycle.  
**REF. 7800.30** Option arrêt automatique de remplissage simple pour modèles 7800.00 et 7802.00 (niveau d'eau réglable)  
**REF. 7800.40** Option arrêt automatique de remplissage 2 niveaux. (niveaux d'eaux réglables)  
**REF. 7800.60** Option chromothérapie 4 lampes à Leds, 6 couleurs avec arrêt sur couleur.  
**REF. 7800.70** Option aromathérapie.  
**REF. 7800.80** Option musicothérapie avec lecteur MP3 fourni.  
**REF. 7110.99** Option oreiller amovible gris en PVC.  
**REF. 7111.99** Option oreiller amovible rond en polyuréthane coloris prune.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTIF

- Baignoire en polyester armé à double cuvelage.
- Poignées de maintien intégrées en acier inoxydable.
- Hauteur variable par vérin électrique et vérin à gaz.
- Boutons de commande inox à LED anti-vandale IP67.
- Douchette de lavage avec réglage de débit.
- Vidange manuelle Grohe avec trop plein.
- Modèles 7800.00 et 7802.00 mitigeur thermostatique Watts Eurotherm 54 l/min avec clapets anti-retour et protection anti-brûlures.
- Modèles 7801.00 et 7803.00 : mitigeur thermostatique digital Rada Sense 48 l/min avec clapets anti-retour, protection anti-brûlures, programmation de la température mini, maxi et défaut de la douchette de lavage et la désinfection thermique des canalisations.
- Afficheurs de température solaires.
- Compatible avec chariots de transfert assis ou couchés.
- Bonde d'évacuation avec siphon Ø 40mm.

### CARACTERISTIQUES

- Poids maximale du patient : 160kg
- Poids à vide baignoire Cocoon R'GO : 130kg
- Poids à vide baignoire Cocoon TS : 140kg
- Hauteur variable de 75 à 110cm

### CARACTERISTIQUES CUVE COCOON R'GO

- Cuve ergonomique avec concept «antigliss» et surélévation des jambes.
- Volume d'eau pour 20cm de hauteur d'eau: 101 litres
- Volume d'eau pour 29cm de hauteur d'eau: 175 litres
- Volume d'eau maxi jusqu'au trop-plein: 228 litres
- Temps de vidange: 4 min

### CARACTERISTIQUES CUVE COCOON TS

- Cuve à fond plat avec cale-pieds en forme de trou de serrure.
- Volume d'eau pour 20cm de hauteur d'eau: 161 litres
- Volume d'eau pour 29cm de hauteur d'eau (maxi) : 253 litres
- Temps de vidange: 5 min 30

### COMFORMITE

- Marquage CE
- 73/23/CEE (Directive basse tension).
- 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique).

## FONCTIONNEMENT

La hauteur variable de la baignoire « Cocoon » s'obtient à l'aide d'un vérin électrique 24V à commande électrique associé à un vérin à gaz.

Le remplissage de la baignoire ainsi que l'alimentation en eau mitigée de la douchette de lavage se fait par un mitigeur thermostatique.

Suivant modèle, un ou deux afficheurs digitaux permettent de surveiller avec facilité la température de l'eau.

La douchette de désinfection est alimentée en eau froide pour une meilleure efficacité du produit de désinfectant.

Le bain bouillonnant à air (en option) est assuré par un compresseur avec un réchauffeur intégré.

Son principe est d'injecter de l'air sous pression à débit variable au travers de 12 buses munies de clapets anti-retour et disposées au fond de la cuve.

La commande du bain bouillonnant est située sur le pupitre de commande.

Le système de désinfection (en option) est composé d'un bidon de 2 litres destiné à recevoir le produit désinfectant dilué (cf dosage), d'un plongeur avec buse calibrée et d'une douchette de désinfection avec gâchette.

L'ensemble du système de désinfection est situé derrière la trappe arrière de la baignoire.

Cette trappe est munie d'un système de verrouillage par clef pour une meilleure sécurité.

## CONSIGNES DE SECURITE ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser la baignoire si vous ne comprenez pas ce guide !

Pour assurer l'utilisation sécuritaire de la baignoire, veuillez lire attentivement ce guide, et plus particulièrement les consignes de sécurité ci-dessous, avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de cet équipement.

Si les informations de ce guide ne sont pas complètement comprises, contactez Reval pour plus de détails. Si vous ne respectez pas les avertissements de ce guide, des blessures pourraient s'ensuivre.

Gardez ce manuel avec la baignoire et s'y référer au besoin. Le contenu de ce manuel est sujet à des modifications sans préavis aux usagers.

- La baignoire Cocoon doit être installée par un entrepreneur ou un technicien en installation autorisé.
- NE PAS essayer de soulever la baignoire.
- NE PAS rester sous la baignoire lors de sa descente.
- NE PAS faire fonctionner le bain bouillonnant sans eau.
- NE PAS tirer brusquement sur les douchettes.
- NE PAS laisser immergées les douchettes dans le bain.
- NE PAS laisser d'objet sous la baignoire.
- NE PAS régler la température de l'eau à plus de 43°C en présence d'un patient.
- **NE PAS faire fonctionner d'appareil électrique près du bain.**
- **NE PAS utiliser d'objet électrique (séchoir ou rasoir électrique) dans le bain.**
- NE PAS forcer sur les commandes et les robinets.
- **NE PAS utiliser ou diriger la douchette de désinfection en présence du patient.**
- TOUJOURS faire une vérification quotidienne avant l'utilisation de la baignoire.
- TOUJOURS s'assurer de la sécurité du patient au moment où il entre où il sort de la baignoire. (Utiliser des barres d'appui, régler la hauteur de la baignoire, etc...)
- TOUJOURS être préparé avant le transfert d'un patient.
- **TOUJOURS vérifier la température de l'eau avant que le patient n'entre dans la baignoire ou pendant l'utilisation de la douchette de lavage.**
- Nettoyer la baignoire après chaque utilisation.
- Désinfecter la baignoire entre chaque utilisation.
- Toutes les vannes doivent être fermées après avoir rempli la cuve.
- **Lorsqu'il faut utiliser un produit désinfectant, il faut porter des gants en caoutchouc, un tablier et un dispositif de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau suivre les procédures indiquées sur le bidon de désinfectant et la fiche signalétique.**
- Un contrôle de sécurité doit être effectuée chaque semaine pour s'assurer que tous les tuyaux, conduits, raccords et dispositifs de fixation sont en bon état.
- Vérifier l'état des tuyaux de douchette et plus particulièrement celui de la désinfection.
- Garder tous les composants de la baignoire propres et secs.

## UTILISATION

### MONTÉE/DESCENTE DE LA CUVE

Afin de procéder au changement de hauteur, utiliser les boutons poussoirs situés sur le plastron sur le pupitre :



### OUVERTURE ET FERMETURE DE LA VIDANGE

Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fermeture de la vidange et dans le sens inverse pour l'ouverture de la vidange.




## UTILISATION

### FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR RADA SENSE (MODELES 7801.00 et 7803.00)

Le mitigeur thermostatique digital situé sur le pupitre permet le réglage de la température de l'eau destiné au remplissage de la cuve ainsi qu'à la douchette de lavage.

Il permet d'allumer et d'éteindre le remplissage ainsi que la douchette de lavage.

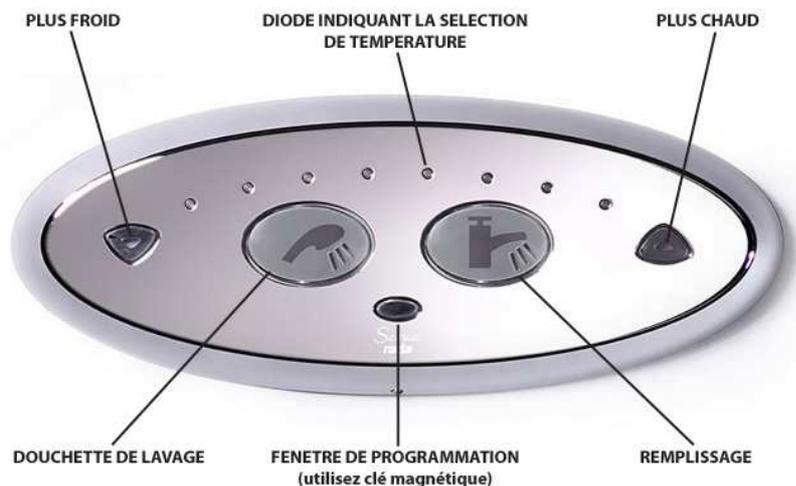

La température maximale du bain est pré réglée à 40°C.

La température maximale de la douchette de lavage est pré réglée à 38°C.

Le remplissage s'éteint automatiquement après 5 minutes correspondant à une hauteur d'eau d'environ 27cm.

La douchette de lavage s'éteint automatiquement après 30 secondes.

**Vérifier, avant chaque immersion, la température de l'eau.**

**Si la baignoire est équipée de l'option arrêt automatique de remplissage,  
Il est conseillé d'effectuer un test du capteur avant le remplissage.  
(voir procédure dans ce manuel d'utilisation)**

### FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR WATTS (MODELES 7800.00 et 7803.00)

Le mitigeur thermostatique situé sur le pupitre permet le réglage de la température de l'eau destiné au remplissage de la cuve ainsi qu'à la douchette de lavage. Lors de l'utilisation, si l'on désire une eau supérieure à 40°C, enfoncer l'index « rouge » et tourner le bouton vers la gauche. Pour régler la température de l'eau, tourner le bouton du mitigeur thermostatique vers la gauche ou vers la droite selon la température souhaitée.



**Vérifier, avant chaque immersion, la température de l'eau.**

## UTILISATION

### REPLISSAGE DE LA BAIGNOIRE (MODELES 7800.00 et 7803.00)

Le remplissage se fait à l'aide du robinet situé sous le mitigeur. Tourner le robinet vers la gauche pour le remplissage.



### DOUCHETTE DE LAVAGE

Sélectionner la température désirée en réglant le mitigeur thermostatique. L'afficheur numérique affichera la température de l'eau de la douche.



Il est possible de régler la pression de la douchette en fermant ou en ouvrant légèrement la vanne  $\frac{1}{4}$  de tour.



### DOUCHETTE DE DESINFECTION


La douchette de désinfection est repérée à l'aide d'une étiquette rouge "désinfection" et son flexible jaune. La douchette de désinfection sert à la désinfection de la baignoire après chaque usage et est connectée à un bidon de désinfectant (cf. système de désinfection). Le produit est aspiré automatiquement par simple pression sur la gâchette. La douchette de désinfection est elle alimentée en eau froide pour une meilleure efficacité du produit de désinfectant. Une vanne  $\frac{1}{4}$  de tour permet de régler le débit et de couper l'alimentation de la douchette.

**Après utilisation de la douchette, ne pas oublier de fermer la vanne  $\frac{1}{4}$  de tour.  
(Une douchette sous pression étant beaucoup plus fragile).**

## UTILISATION

### BAIN BOUILLONNANT A AIR (OPTION)

Il s'agit d'injection d'air sous pression à débit variable au travers de 12 buses munies de clapets anti-retour et disposées au fond de la cuve.

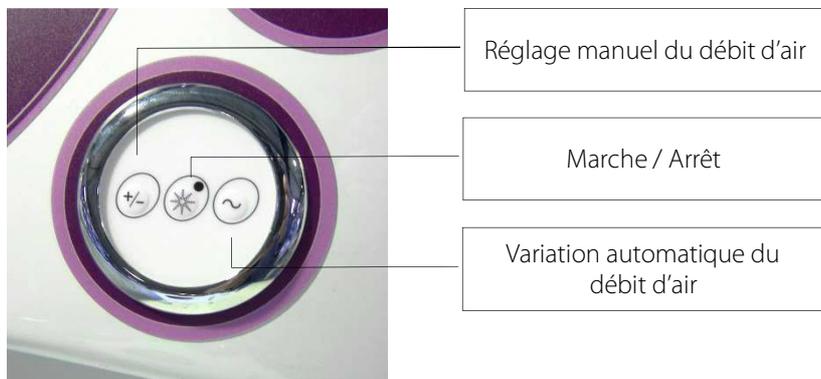

**Arrêt automatique** : le compresseur s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation d'un des boutons.

**Cycle de purge** : 30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le compresseur démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes. Ensuite il passe en Vitesse Basse avant d'accélérer progressivement pour atteindre dans une demi-minute la Vitesse Haute. Il reste sur ce palier pendant 4 à 5 minutes.

### AROMATHERAPIE (OPTION)

L'option Aromathérapie est composée d'un diffuseur permettant de diffuser les parfums des huiles essentielles via le circuit du bain bouillonnant à air de la baignoire. L'air parfumé sera libéré par conséquent par les 12 buses situées dans la cuve.



Mettre quelques gouttes d'huiles essentielles sur le bâtonnet en bois. (Deux à trois gouttes suffisent)  
Insérer le bâtonnet en bois dans le diffuseur puis l'ensemble dans le réceptacle du diffuseur.  
Visser légèrement le couvercle en Inox sur le réceptacle.

Le joint assure une parfaite étanchéité et de plus la pression dans le circuit du bain bouillonnant est relativement faible donc **NE PAS VISSER FORTEMENT LE COUVERCLE**.  
Le filetage du réceptacle risquerait de s'abîmer.

## UTILISATION

### CHROMOTHERAPIE (OPTION)

L'option Chromothérapie est composée de 4 spots à LEDs et d'un bouton de commande 3 fonctions.



Le bouton de commande comprend les fonctions : Marche/Arrêt / Défilement des 7 couleurs / Arrêt sur couleur.

Appuyer une fois sur le bouton afin d'allumer les spots.

Les lampes vont alors changer de couleurs automatiquement après 30 secondes.

Appuyer une nouvelle fois sur le bouton permet de figer la couleur en cours.

Appuyez une nouvelle fois permet d'éteindre les lampes.

### MUSICOTHERAPIE (OPTION)

L'option Musicothérapie est composée de deux haut-parleurs, d'un amplificateur étanche, d'un lecteur MP3 et d'un pupitre de commande regroupant les commandes « On/Off » et « volume » ainsi qu'un coffret encastré avec panneau amovible permettant de recevoir et de connecter le lecteur MP3.



Mode opératoire :

- Munissez-vous du lecteur MP3.
- Configurez-le et ajoutez-y les musiques de votre choix.

Respectez la législation en vigueur.

- Connectez le lecteur (sortie casque) à la fiche DIN située à l'intérieur du logement prévu à cet effet.
- Mettez votre lecteur MP3 en mode lecture.
- Appuyez sur le bouton 0/1 situé sur le pupitre de commande.
- Réglez le volume à l'aide du potentiomètre prévu à cet effet.
- Dans le cas où la sonorité ne serait pas suffisante, augmentez le volume à partir du lecteur MP3.

Afin de garantir la longévité de l'amplificateur, pensez à l'éteindre en appuyant sur le bouton « On/off ».

## UTILISATION

### ARRÊT AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE SIMPLE POUR MODELES 7801.00 ET 7803.00 (DE SERIE)

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Sur les baignoires Cocoon 7801.00 et 7803.00 équipées du mitigeur thermostatique Rada Sense, l'arrêt automatique de remplissage est obtenu par le réglage d'un temps de remplissage.

Pour le modèle 7801.00 (cuve R'GO), le temps est réglé d'usine à 5 minutes correspondant à 27cm de hauteur d'eau.

Pour le modèle 7803.00 (cuve TS), le temps est réglé d'usine à 7 minutes 15s correspondant à 27cm de hauteur d'eau.

**Le temps de remplissage peut être ajusté selon besoins.**

### ARRÊT AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE SIMPLE POUR MODELES 7800.00 ET 7802.00 (OPTION)

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un capteur capacitif assure la fermeture de l'électrovanne de remplissage de la baignoire, et ainsi le niveau d'eau lors de l'arrêt automatique.

Le capteur émet un champ magnétique qui se modifie lorsque l'eau l'atteint.

#### TEST DE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR

1- Mettre en marche le remplissage de la baignoire.

2- Avec la douchette de lavage arroser la paroi intérieure de la baignoire côté pupitre.

**Pour tester un capteur capacitif, il faut toujours utiliser la douchette et non la main afin de se placer dans les conditions d'utilisation.**

3- Lorsque l'eau de la douchette va s'écouler devant le capteur, l'électrovanne de remplissage doit se refermer (temps de contact : 2 secondes minimum).

4- Mettre à nouveau en marche le remplissage de la baignoire.

5- Répéter l'opération de vérification plusieurs fois en contrôlant :

- La fermeture de l'électrovanne
- L'ouverture de l'électrovanne

6- Laisser maintenant la baignoire à hauteur variable se remplir jusqu'à l'arrêt automatique.

7- Contrôler le niveau

8- Procéder à la vidange de la baignoire. Lorsque le niveau aura baissé de quelques centimètres arrêter la vidange et mettre en marche le remplissage.

#### REGLAGE DE LA HAUTEUR DU NIVEAU D'EAU

Il est possible de régler la hauteur de niveau d'eau en déplaçant la sonde de niveau d'eau.

Contactez notre service technique pour plus ample information.

## UTILISATION

### ARRÊT AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE 2 NIVEAUX (OPTION)

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

2 capteurs capacitifs assurent la fermeture de l'électrovanne de remplissage de la baignoire, et ainsi le niveau d'eau lors de l'arrêt automatique.

Le capteur émet un champ magnétique qui se modifie lorsque l'eau l'atteint.

L'un ou l'autre des capteurs capacitifs peuvent être actionnés par l'intermédiaire d'un pupitre de commande.



Pour activer le niveau de remplissage numéro 1, activer le bouton 1 et désactiver le bouton 2.

Pour activer le niveau de remplissage numéro 2, activer le bouton 2 et désactiver le bouton 1.

Dans le cas où aucun des boutons n'est activé, l'arrêt automatique ne fonctionne pas et la baignoire se remplira jusqu'au trop-plein situé au niveau de la commande de vidange.

Dans le cas où les 2 boutons sont activés, l'arrêt automatique de remplissage se fera au niveau 1.

Le niveau d'eau 1 correspond à une hauteur d'eau de 20cm.

Le niveau d'eau 2 correspond à une hauteur d'eau de 27cm.

**Sur les baignoires Cocoon 7801.00 et 7803.00 équipées du mitigeur thermostatique Rada Sense, il est possible d'obtenir un troisième niveau de remplissage en paramétrant correctement le temps de remplissage dans la programmation du rada Sense.**

#### REGLAGE DES NIVEAUX D'EAUX

Il est possible de régler les hauteurs des niveaux d'eaux en déplaçant les sondes de niveaux d'eaux.

Contactez notre service technique pour plus ample information.

## SYSTEME DE DESINFECTION (OPTION)



### COMPOSITION

La baignoire est équipée d'un système automatique de dosage du produit désinfectant.

L'ensemble de désinfection comprend :

- 1 bidon de 2 litres destiné à recevoir le produit désinfectant (accès au bidon par la trappe).
- 1 plongeur avec une buse calibrée, situé dans le bidon, et relié par un tuyau traversant le bouchon au venturi (pièce d'aspiration du produit désinfectant).
- 1 douchette de désinfection.

### DÉSINFECTION MANUELLE

La désinfection s'effectue après le nettoyage de la cuve.

Utiliser la douchette de désinfection située à gauche (flexible jaune) du pupitre et asperger la cuve.

**Ne pas diriger la douchette de désinfection vers le patient.**

**Attendre, afin de respecter le temps d'activité prescrit selon le désinfectant utilisé.  
Temps de contact de 2 minutes pour le produit B.F.R 4.0**

Rincer avec la douchette de lavage.

La baignoire est maintenant prête pour un autre bain.

### AJOUT DE DÉSINFECTANT

#### Dilution du produit :

Le mélange eau + désinfectant sortant de la douchette de désinfection se fait par une dilution en 2 étapes.

#### 1<sup>ère</sup> étape :

Dilution manuelle dans le bidon.

#### 2<sup>ème</sup> étape :

Le système d'aspiration (venturi) assure un dosage de 10% du produit aspiré dans le bidon de désinfectant.

#### Exemple :


Le désinfectant BFR 4.0 doit être utilisé avec une dilution finale de 0,4%.

- 1) Dilution manuelle dans le bidon à 4% soit 80ml de BFR 4.0 pour 1920 ml d'eau.
- 2) Dilution complémentaire de cette solution assurée automatiquement avec de **l'eau froide** par le système d'aspiration (venturi) avec un dosage de 10%.

## ENTRETIEN

### NETTOYAGE DE LA CUVE ET DU PUPITRE

Afin de nettoyer la cuve, **désactivez le mitigeur thermostatique digital Rada Sense**, Utiliser la clé magnétique située sur le coté du pupitre. Positionner la clé devant le capteur « fenêtre de programmation ». Pour le réactiver, recommencer l'opération.

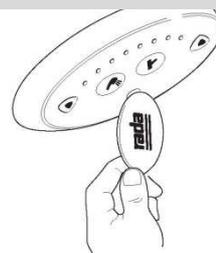

Utiliser uniquement des produits liquides (savon liquide).

Afin de ne pas rayer le revêtement « Gelcoat » de la cuve, il est interdit d'utiliser des produits abrasifs de type « poudres à récurer ou crèmes nettoyantes ».

De plus, afin d'éliminer toutes les traces de calcaires déposés par la circulation d'eau, Reval recommande d'utiliser le détartrant (Gel Servex).

**Ne pas laver l'extérieur de la cuve à grande eau.**

### NETTOYAGE DES FILTRES EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

Ces 2 filtres ont une filtration de 300µ tandis que le mitigeur possède une cartouche filtrante de 500µ. Par conséquent, ces 2 filtres doivent être nettoyés régulièrement (une fois par mois).

**Un nettoyage régulier de ces 2 filtres est impératif afin de réduire les dépôts de calcaire dans les canalisations de la baignoire.**

Un mauvais entretien de ces filtres engendre des temps de remplissage long et une eau à mauvaise température. (Eau trop froide)

Ces filtres sont situés sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide.


- 1) Coupez l'alimentation en eau de la baignoire.
- 2) Démontez le carter arrière bas de la baignoire.
- 3) Démontez le réservoir du filtre avec une clé à griffe.
- 4) Sortez le filtre.
- 5) Nettoyez le filtre (en cas de dépôt calcaire, utiliser un détartrant approprié et rincer à l'eau claire).
- 6) Remontez l'ensemble.

### NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE DU MITIGEUR (MITIGEUR WATTS)

Démonter étape par étape les éléments du mitigeur en commençant par le croisillon (repère n°12) jusqu'à la cartouche filtrante (repère n°2).

En cas de dépôt de calcaire trop important, contacter Reval.

N° REF.	DESIGNATIONS	N° REF.	DESIGNATIONS	N° REF.	DESIGNATIONS	N° REF.	DESIGNATIONS
1	Corps complet	4	Axe	7	Tube carré	10	Douille
2	Cartouche	5	Vis de tampon	8	Rosace	11	Chapeau
3	Tampon	6	Tube fileté	9	Cadran	12	Croisillon

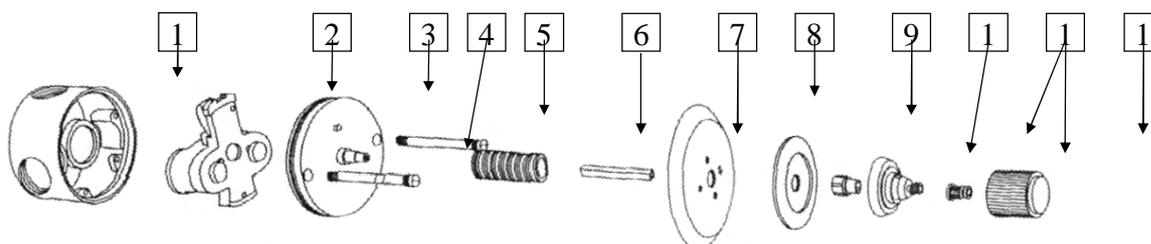

## ENTRETIEN

### NETTOYAGE DU FILTRE DE LA BUSE DE REMPLISSAGE

L'orifice de remplissage possède un aérateur orientable avec filtre. Celui-ci est démontable et nettoyable. Une clé de démontage livrée avec la baignoire permet de démonter facilement l'aérateur.


Il est conseillé de nettoyer et de détartrer l'aérateur au minimum 2 fois par an.



### NETTOYAGE DES BUSES DE BAIN BOUILLONNANT A AIR

- Les buses sont à nettoyer régulièrement (**au moins une fois par an**) pour le bon fonctionnement du bain bouillonnant.

Schéma de fonctionnement d'une buse de bain bouillonnant. L'air passe dans la buse et sort sous la capsule chromée.

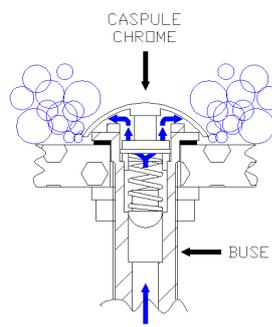

-Un risque d'échauffement de la capsule chromée peut survenir si les buses ne sont pas régulièrement nettoyées. En effet des dépôts de savon ou de calcaire peuvent empêcher la circulation de l'air. Il convient de suivre les étapes suivantes :

#### 1<sup>ère</sup> étape :

Mettre hors service le bain bouillonnant et vider la baignoire.

#### 2<sup>ème</sup> étape :

Se munir d'un tournevis plat afin d'ôter la capsule.


#### 3<sup>ème</sup> étape :

Nettoyer la capsule chromée, la buse ainsi que la bille.  
Repositionner la capsule chromée sur la buse.

#### 4<sup>ème</sup> étape :

Vérifier que la pastille soit bien emboîtée sur la buse.

Enfin, remettre en service la baignoire ainsi que le bain bouillonnant afin de contrôler le bon fonctionnement

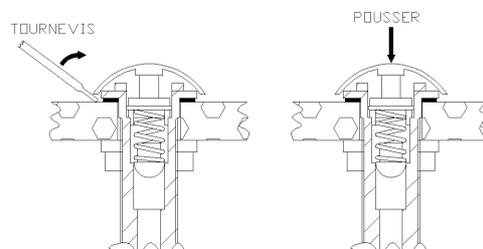

## CONTROLE PERIODIQUE

1) Il convient d'effectuer un contrôle périodique de la baignoire au moins une fois par an. Le contrôle périodique consiste à pratiquer un examen visuel sur toutes les fonctionnalités de la baignoire ainsi et surtout sur les systèmes de sécurité.

2) Il convient que le contrôle périodique soit effectué par une personne possédant les qualifications requises et connaissant bien le modèle, l'utilisation, et l'entretien de la baignoire. Il convient de spécifier l'étendue du contrôle périodique dans le manuel d'utilisation.

3) Il convient de consigner toute observation importante concernant la sécurité de la baignoire, de préférence dans le carnet de bord du manuel dont il convient de confier la mise à jour à la ou aux personne(s) responsable(s) de l'assistance / de l'entretien de la baignoire.

Il convient également de mentionner dans le carnet de bord la date des actions correctives, en réponse aux observations notées.

4) Il convient de noter dans le carnet de bord la date du contrôle de la baignoire et le résultat du contrôle, accompagnés de la signature du contrôleur.

5) Si le contrôle périodique met à jour la présence de défauts, de pièces usagées, ou de tout type de détérioration, remettant en cause la sécurité de la baignoire, il convient d'en avertir immédiatement le propriétaire. Si le danger en matière de sécurité est immédiat, il convient que la baignoire soit immédiatement retirée du service. Elle ne peut alors être utilisée qu'après l'élimination des défauts.

6) Il convient de noter dans le carnet de bord les défauts et les dommages déterminants pour la sécurité de la baignoire, survenus entre les contrôles et ayant déjà fait l'objet d'actions correctives.

7) Il convient que Reval soit informé en retour des défauts et détériorations importants, afin qu'il prenne les mesures nécessaires. Il convient de faire état de ce retour d'informations dans le carnet de bord.

# CARNET DE BORD

Date du contrôle	Éléments de sécurité	Commentaire de prestataire de service	Observations / Compte rendu	Actions correctives / Motif d'intervention / date	Contrôleur (nom et signature)



**FRANCE :**

Reval®

Z.A. Fief des Prises

Usseau 17220 Sainte Soulle

Tel: (33) 05.46.42.04.16

Fax: (33) 05.46.43.06.38

[www.groupe-reval.com](http://www.groupe-reval.com)

**UNITED KINGDOM :**

Reval® Continuing Care Limited

Unit 17 Brynmenyn Busines Centre

St Theodore's Way - Brynmenyn

CF32 9TZ BRIDGEND - WALES

Tel: 01656 721 001

Fax: 01656 720 006

[www.reval-group.com](http://www.reval-group.com)