

Chargement et déchargement des endoscopes souples dans les armoires de stockage / séchage Dry 300 (ASP, Johnson & Johnson)

1. Chargement d'un endoscope dans l'armoire



Avant d'entrer dans la salle de stockage, se désinfecter les mains à l'aide de la bouteille de Sterilium à l'extérieur de la salle



Prendre l'endoscope dans le bac de transport
1 main saisi l'extrémité de la partie d'insertion
1 main saisi la poignée de contrôle



Sélectionner le numéro de la position dans l'armoire en appuyant sur l'écran tactile



Appuyer sur « CHARGER » à la référence voulue

CHUV Centre d'Endoscopie - Protocole pour le chargement et déchargement des endoscopes souples dans les armoires de stockage / Séchage Dry 300 de Wassenburg



Ouvrir la porte en appuyant aux 2/3 supérieurs de l'armoire



Positionner l'endoscope sur le support



Brancher le connecteur à chaque canal



Mettre les valves, boutons et embouts dans le bac intégré au support

Fermer les portes de l'armoire (ATTENTION : si les lumières dans l'armoire ne sont pas éteintes, les portes ne sont pas correctement fermées)

2/7

*Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document officiel.*

ATTENTION

Vérifiez qu'aucun tuyau ne soit pincé



Manipulation si un tuyau de connexion est pincé

ATTENTION : les manipulations dans cette partie ne doivent JAMAIS être utilisées pour le chargement ou le déchargement d'un endoscope. Elles peuvent être utilisées uniquement si un tuyau de connexion est pincé, si une connexion est débranchée ou si les valves, bouchons ou embouts ne sont pas dans le rangement intégré au support.

Appuyer sur la fonction « MENU »
Appuyer sur la fonction « COMMANDE »
Appuyer sur la fonction « OUVRIR / FERMER PORTE »

Ouvrir la porte

Repositionner les tuyaux des connexions, mettre les valves dans le support, rebrancher une connexion.

Fermer les portes de l'armoire (ATTENTION : si les lumières dans l'armoire ne sont pas éteintes, les portes ne sont pas correctement fermées)

Appuyer sur « MENU »
Appuyer sur « ETAT »

2. Déchargement d'un endoscope de l'armoire



Avant d'entrer dans la salle de stockage, se désinfecter les mains à l'aide de la bouteille de Sterilium à l'extérieur de la salle



Préparer un bac de transport
Film transparent dans le fond
Film d'indication de l'état de l'endoscope (propre ou contaminé)



Choisir la position de l'endoscope à décharger
Appuyer sur « DECHARGER » à la référence correspondante



Débrancher l'ensemble des connexions de l'endoscope



Saisir l'endoscope déconnecté
1 main saisi l'extrémité de la partie d'insertion
1 main saisi la poignée de contrôle

CHUV Centre d'Endoscopie - Protocole pour le chargement et déchargement des endoscopes
souples dans les armoires de stockage / Séchage Dry 300 de Wassenburg



Positionner l'endoscope dans le bac
Mettre les valves, bouchons et embouts dans le bac



Fermer les portes de l'armoire (ATTENTION : si les
lumières dans l'armoire ne sont pas éteintes, les portes
ne sont pas correctement fermées)

3. Préparation d'un endoscope avant examen



Enduire les joints des valves de silicone

Positionner les valves sur l'endoscope



Remonter les bouchons

Positionner les bouchons sur l'endoscope

Une fois que toutes les valves, bouchons et embouts sont repositionnés sur l'endoscope, mettre le plastique de protection



Positionner le plastique avec l'inscription « CLEAN SCOPE » visible. (Les inscriptions sur la partie orange doivent être orientées à l'intérieur du bac)

Après ces étapes, l'endoscope est prêt et peut être amené en salle d'examen.

CHUV Centre d'Endoscopie - Protocole pour le chargement et déchargement des endoscopes
souples dans les armories de stockage / Séchage Dry 300 de Wassenburg

Document établi en collaboration avec :



Endoscopie et Hôpital de jour
Rue du Bugnon BH-07.501
1011 Lausanne

Rotzenbuehlstrasse 55
8957 Spreitenbach
Tél: 056 417 33 33

Service de Médecine
Préventive Hospitalière
Rue du Bugnon - BH 19
1011 Lausanne