


# MANUEL D'UTILISATION

Version R1013

## POSTE DE PHLÉBOTOMISTE ÉLECTRIQUE 3500E

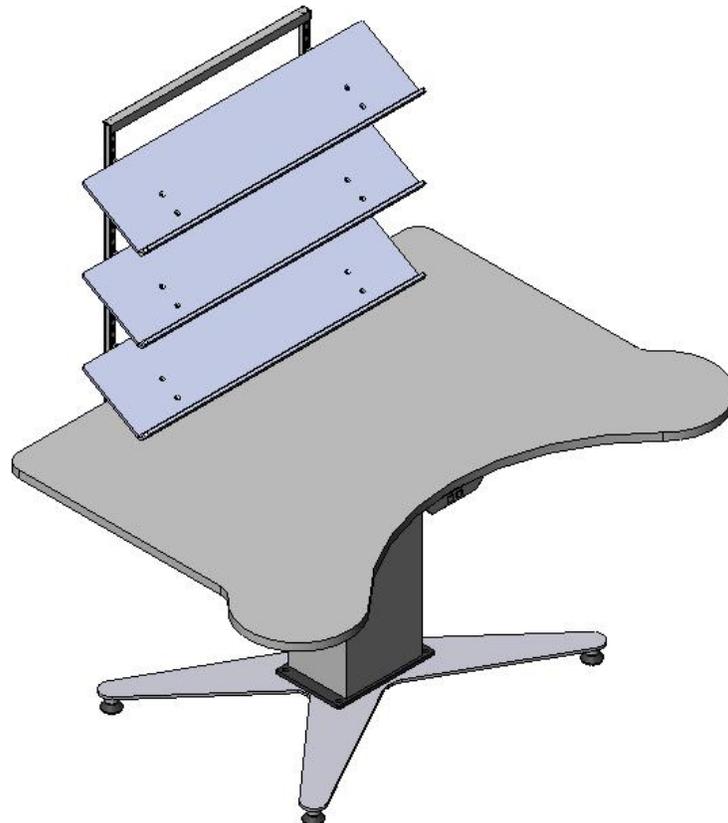

## TABLE DES MATIÈRES

<b>GÉNÉRAL</b>	1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
	2	GARANTIE.....	4
	3	LICENCE D'ÉTABLISSEMENT.....	5
	4	POUR NOUS REJOINDRE.....	6
<b>UTILISATION</b>	5	UTILISATION.....	7
	5.1	Hauteur ajustable.....	7
	5.2	Tablettes.....	7
	5.3	Batterie rechargeable.....	7
	6	SPÉCIFICATIONS DU POSTE DE PHLÉBOTOMISTE.....	8
<b>ENTRETIEN</b>	7	ENTRETIEN SUGGÉRÉ.....	9
	8	LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE.....	10

## 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Bien lire les consignes de sécurité avant d'utiliser les produits IBIOM. Toute personne qui travaille avec les produits IBIOM doit avoir accès à cette information.



### **AVERTISSEMENT – NE JAMAIS S'ASSEOIR SUR LA SURFACE DE TRAVAIL**

**S'ASSEOIR SUR LA SURFACE DE TRAVAIL PEUT FAIRE BASCULER LE POSTE.**



### **AVERTISSEMENT - ENTRETIEN**

Toujours débrancher la colonne électrique avant d'effectuer les tâches de nettoyage et d'entretien.

## 2 GARANTIE

IBIOM Instruments Ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période **d'un an** à partir de la date d'achat. En cas de défaut, toute réparation sera effectuée sans frais. Toutes réparations sur un produit dont la période de garantie est terminée seront facturées selon la politique de l'entreprise. La garantie s'applique seulement aux produits utilisés dans des conditions normales, sans abus et sans modification.



### 3 LICENCE D'ÉTABLISSEMENT



Health Canada / Santé Canada

Health Products and Food Branch Inspectorate

Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments

 Licence Number **3055** Numéro de la licence

**Medical Device Establishment Licence**
**Licence d'établissement pour les instruments médicaux**
**IBIOM INSTRUMENTS LTEE**

 1065 RUE DU PACIFIQUE  
 SUITE 403  
 SHERBROOKE, QUEBEC  
 CANADA  
 J1H 2G3

This licence is issued in accordance with the Medical Devices Regulations of the Food and Drugs Act for the following activities:

Cette licence est délivrée conformément à la Loi sur les aliments et drogues, règlement sur les instruments médicaux pour les activités qui suivent:

	Distributor / Distributeur	Importer / Importateur	Manufacture Devices for Distribution / Fabricant d'instruments médicaux pour distribution
Class I / Classe I	No / Non	No / Non	Yes / Oui
Class II / Classe II	No / Non	No / Non	
Class III / Classe III	No / Non	No / Non	
Class IV / Classe IV	No / Non	No / Non	

**Attestation made :**
**Attestations faites :**

The establishment has documented procedures in place in respect of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• distribution records</li> <li>• complaint handling</li> <li>• recalls</li> <li>• mandatory problem reporting</li> <li>• handling, storage, delivery</li> <li>• installation</li> <li>• corrective action</li> <li>• servicing</li> </ul>	[ Y ] [ Y ] [ Y ] [ N ] [ N ] [ N ] [ N ] [ N ]	L'établissement a mis en oeuvre une procédure écrite concernant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• les registres de distribution</li> <li>• les plaintes</li> <li>• les rappels</li> <li>• rapports d'incident obligatoires</li> <li>• la manutention, le stockage, la livraison</li> <li>• l'installation,</li> <li>• les mesures correctives</li> <li>• l'entretien</li> </ul>
---	--	---

**Site listing begins on the back of this page**
**Liste des sites commence au verso de cette page**

Issue Date, date de délivrance: 2013-06-07

Minister of Health Ministre de la santé	Countersigned: Director General, Health Products & Food Branch Inspectorate or delegated authority Contresigné par: Directeur Général, Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments ou autorité déléguée	<b>JUN 11 2013</b>	<b>Director Compliance Coordination &amp; Licensing Division</b>
Basanti Ghosh			

This licence is the property of the Health Products & Food Branch Inspectorate and must be returned upon demand. Cette licence appartient au programme d'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments et doit être retournée sur demande.


## 4 POUR NOUS REJOINDRE

Avant de nous rejoindre, veuillez avoir en main l'information suivante.

- **Numéro de série** du poste de phlébotomiste (l'étiquette du numéro de série se trouve sous la surface de travail).

### Pour nous rejoindre :



Téléphone 450-678-5468




Fax 450-445-9837



Courriel [info@ibiom.com](mailto:info@ibiom.com)

Site Internet [www.ibiom.com](http://www.ibiom.com)

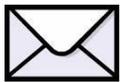

Adresse  
 IBIOM Intruments Ltée  
 1065, rue du Pacifique, suite 403  
 Sherbrooke, Québec  
 J1H 2G3  
 Canada

## 5 UTILISATION


### 5.1 Hauteur ajustable

- Utilisez les boutons de contrôle pour ajuster la hauteur du poste.



### 5.2 Tablettes

- L'angle des tablettes peut être ajusté de 45° to 90° et l'espacement des tablettes peut être ajusté selon vos besoins.

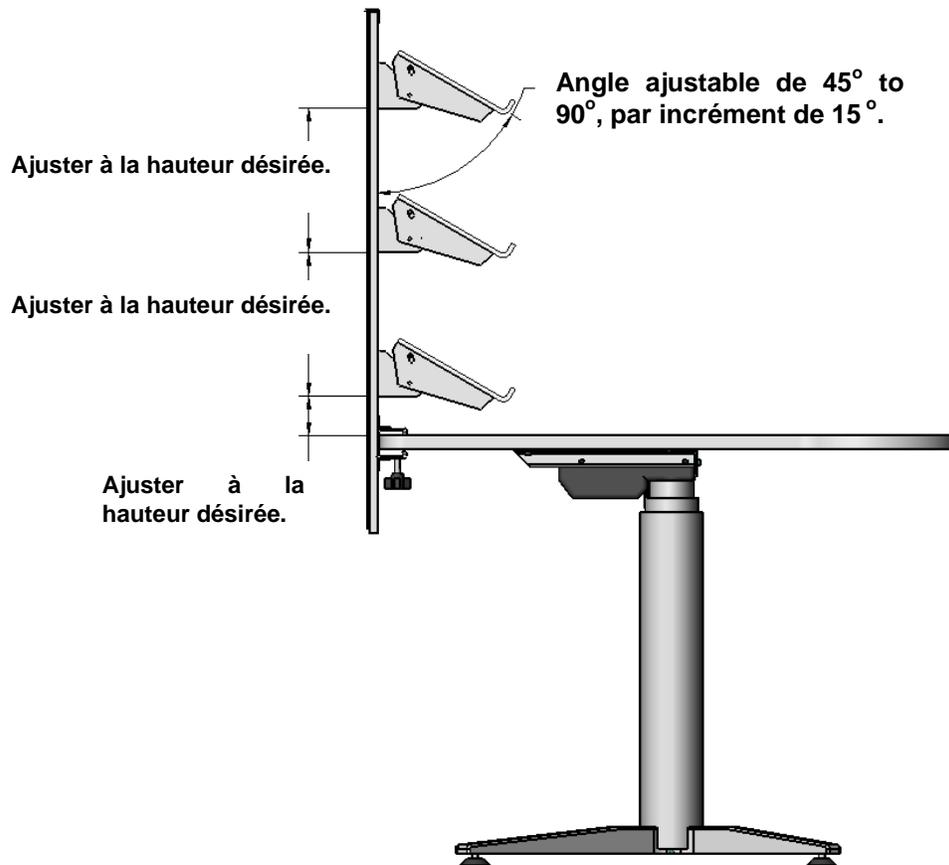

### 5.3 Batterie rechargeable

- La batterie est livrée rechargée à pleine capacité.
- Après chaque journée d'utilisation, assurez-vous de recharger la batterie pour une période de 8 heures. Il suffit de brancher l'alimentation électrique au mur.
- Si la batterie n'est pas utilisée à chaque jour, assurez-vous de la recharger selon les besoins.

## 6 SPÉCIFICATIONS DU POSTE DE PHLÉBOTOMISTE

### **Dimensions:**

- Surface de travail : 32" x 44" (81 cm. x 112 cm.). Autres dimensions sur mesure disponibles.
- Hauteur ajustable : 22.5" à 34.5" (57 cm. à 88 cm.), à l'aide d'un moteur silencieux.
- Trois tablettes ajustables (position et angle). Certains modèles ne possèdent pas de tablette.

### **Mouvements:**

- Contrôles: boutons pour ajuster la hauteur.

### **Avantages et autres caractéristiques:**

- Poste de travail pour gaucher ou droitier.
- Design arrondie avec rebord en caoutchouc.
- Espace pour contenant à aiguilles.
- Fabriqué et assemblé au Canada.


## 7 ENTRETIEN SUGGÉRÉ

Il est recommandé d'effectuer certaines tâches d'entretien pour assurer un bon fonctionnement durant plusieurs années. Avant d'effectuer ces tâches, veuillez vous lire les consignes de sécurité présentées au début du présent guide.

Tâche	Description	Fréquence		
		Hebdomadaire	Semi-annuelle	Annuelle
Nettoyage	Le poste de phlébotomiste IBIOM doit être nettoyé régulièrement afin d'enlever la poussière et les débris.	<b>X</b>		
Inspection des pièces mobiles.	Toutes les pièces mobiles doivent être inspectées pour détecter les possibles bris ou l'usure de ces pièces. Par exemple, il faut inspecter le produit pour détecter des fissures, des composantes manquantes ou tout dommage visible.		<b>X</b>	
Inspection des composantes électriques.	Les composantes électriques doivent être inspectées aux points d'attachement des câbles, des fils et des prises pour y détecter tout dommage.		<b>X</b>	
Test d'opération.	Effectuez un test d'opération en faisant monter et descendre complètement le poste de phlébotomiste pour détecter tout dommage (bruit, pièces brisées, pièces manquantes...).			<b>X</b>

En cas de problème ou pour toutes questions sur l'utilisation du poste de phlébotomiste, veuillez communiquer avec nous.

## 8 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

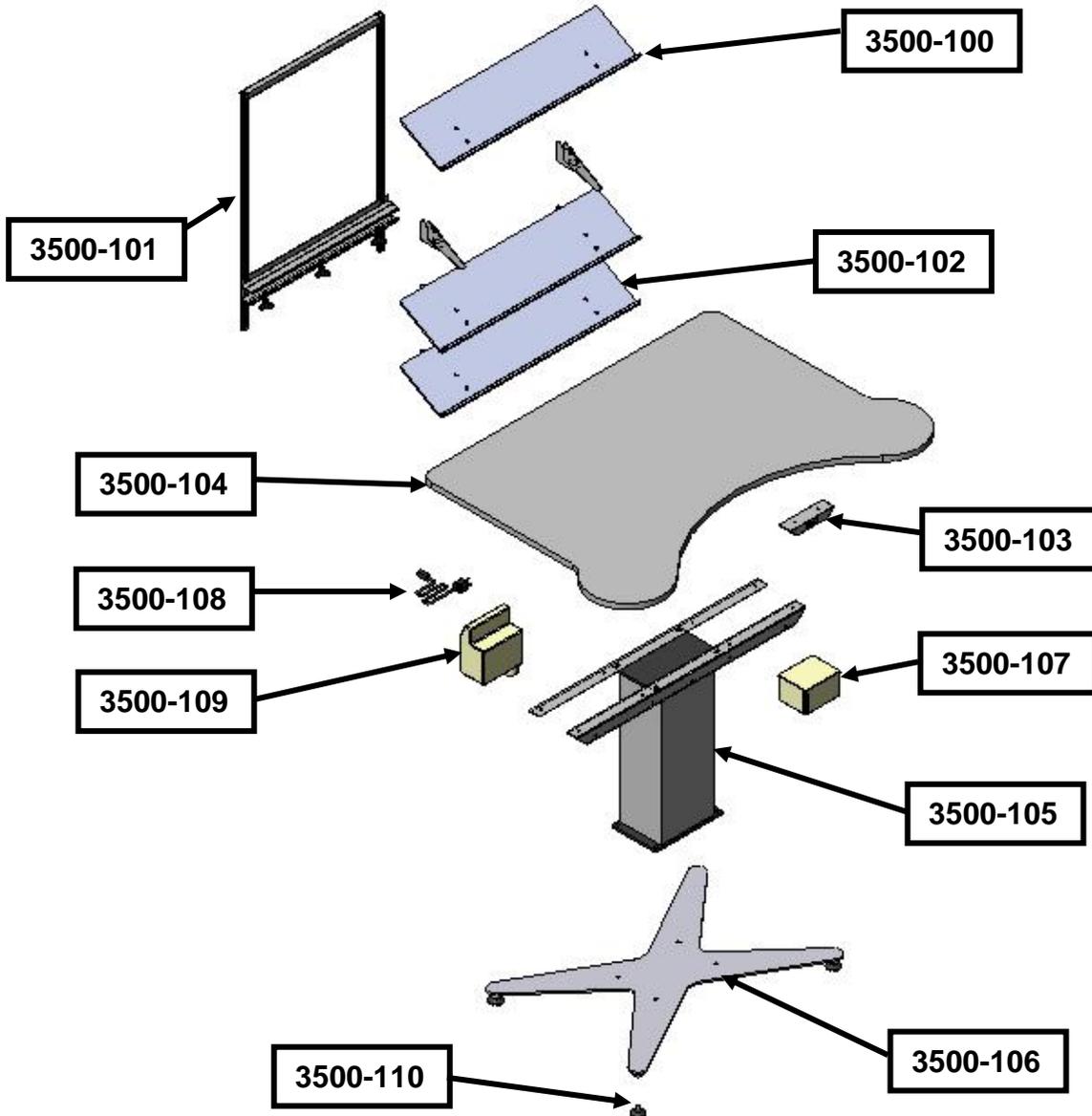

#	DESCRIPTION
3500-100	Tablette en plastique transparent
3500-101	Support à tablettes
3500-102	Tablette complète (tablette et équerres ajustables)
3500-103	Boutons de contrôle et fil
3500-104	Surface de travail
3500-105	Colonne électrique DL2
3500-106	Base métallique noire
3500-107	Batterie rechargeable
3500-108	Câble d'alimentation électrique 110V
3500-109	Boîte de contrôle avec chargeur intégré
3500-110	Patte de nivellement 3/8"