

embrace™ verniss

5% de Fluorure de Sodium et CXP™

PULPDENT®
INNOVATION DENTAIRE DEPUIS 1947



EMBRACE™ Vernis

Biodisponibilité de Calcium, Xylitol et Phosphate • Existe en doses et en tube • Hydrophile
Ne contient pas de Bisphénol A, ni de Bis-GMA, ni de dérivés de BPA

SOMMAIRE

1. Description du produit
2. Indications
3. Contre-indications
4. Précautions
5. Utilisation
6. Mise en garde
7. Note
8. Stockage

DESCRIPTION

Le vernis EMBRACE™ est un vernis à base de résine qui adhère bien à la surface de la dent et contient du xylitol, du fluorure de sodium et de l'éthanol. Il libère durablement et à intervalles réguliers d'ions de fluorure, de calcium et de phosphate sur une période de 4 heures ou plus.

Par une technique brevetée, Pulpdent a nano-enrobé de xylitol les sels de calcium et phosphate. Par conséquent, le calcium, le phosphate et le fluorure sont biodisponibles. L'exposition à la salive dissout le xylitol et libère les ions de calcium et de phosphate. Ces ions réagissent continuellement dans la salive avec les ions de fluorure pour former une fluorapatite protectrice sur les dents. Le vernis EMBRACE™ contient 5 % de fluorure de sodium, l'équivalent de 22 600 ppm (22,6 mg de fluorure par ml).

Le matériel ne se sépare pas durant le transport ou le stockage ce qui permet d'avoir des doses prédéfinies et uniformes. Aucun malaxage requis. Le vernis s'étend également en une fine pellicule et est doux pour la langue.

Il n'est pas grumeleux et ne s'agglomère pas. Il s'étend facilement de la surface buccale à la surface linguale. Le vernis EMBRACE est transparent et sèche rapidement sur les dents sans coller sur les joues.

2 - INDICATIONS

Le vernis EMBRACE™ traite l'hypersensibilité par la libération d'ions de fluorure, de calcium et de phosphate qui se précipitent sur les tubuli et comblent superficiellement les lésions de l'émail non-cariés.

3 - CONTRE-INDICATIONS

Les gingivites ulcéreuses et les stomatites.

4 - PRÉCAUTIONS

Les praticiens doivent limiter l'ingestion en appliquant seulement la quantité nécessaire de vernis pour couvrir les surfaces de la dent d'une mince pellicule. Les patients adultes doivent cesser de prendre des suppléments de fluorure pour une période de 24 heures suivant le traitement et les enfants doivent cesser pour 2 à 3 jours.

5 - UTILISATION

Bien l'emballage unitaire contient 0,4 mL de vernis, il n'est pas nécessaire de l'utiliser en entier. Utiliser seulement la quantité nécessaire pour appliquer une mince pellicule sur la région à traiter, en prenant en considération le poids du patient et le nombre de dents à traiter.

1. Identifier les dents à traiter.
2. Assécher les dents à l'aide d'une compresse de gaze. Ces dents doivent être minimalement propres, mais il n'est pas nécessaire de procéder à une prophylaxie.
3. Ouvrir la pochette et sortir le pack comprenant le vernis et une brosse. Déchirer le contenant du vernis et disposer ce dernier sur un gant ou une compresse.
4. Le vernis EMBRACE est pré-mélangé et ne requiert aucun mélange, ce qui assure d'un dosage uniforme constant.
5. Utiliser la brossette pour appliquer une mince pellicule de vernis sur toutes les surfaces des dents. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tout le vernis. Jeter la quantité inutilisée.
6. Il est préférable que le patient s'abstienne de manger des aliments solides ou de boire des liquides chauds ou de l'alcool durant 3 à 4 heures après le traitement. Manger de la nourriture molle pour le reste de la journée est un avantage. Dire au patient de ne pas se brosser les dents durant les quatre heures suivantes.
7. Le vernis EMBRACE peut être enlevé par le brossage ou de la soie dentaire.

6 - MISE EN GARDE

- Les lois fédérales restreignent l'utilisation de ce produit à un dentiste ou à un médecin.
- Le vernis EMBRACE peut irriter les voies respiratoires si inhaler, ou les yeux ou la peau s'il y a contact. Peut être un sensibilisant s'il y a contact répété ou prolongé. Consultez la fiche de sécurité pour obtenir plus de renseignements.
- Les praticiens dentaires doivent porter des verres protecteurs et des gants. Se laver les mains après utilisation. Une station de rinçage d'urgence des yeux doit être disponible dans la clinique.
- Le vernis EMBRACE ne contient pas de produits de soja et est sans gluten. Il contient un extrait de pin traité et non pas un extrait de noix de pin. Les patients présentant des allergies doivent consulter leur médecin.

7 - NOTE

Le vernis Embrace est conditionné en mono-dose dans le but d'être délivré à un seul patient. Réutiliser une dose peut donner lieu à une contamination ou à une moindre protection.

8 - STOCKAGE

Stocker dans le conditionnement d'origine dans une pièce entre 5 et 25°C.

PULPDENT®
INNOVATION DENTAIRE DEPUIS 1947

Les produits de la marque Pulpdent sont des dispositifs médicaux de classe I et IIa, selon la réglementation EC - Directive MDD 93/42/EEC. Ces produits sont réservés à l'usage exclusif des dentistes. Lire attentivement les informations figurant sur la notice.

Importateur : OPSYSE

1480, avenue d'Arménie - Pôle d'activité Yvon Morandat - 13120 GARDANNE - Tél: 04 42 04 32 68 / Fax: 04 85 25 26 61

www.pulpdent.fr - contact@pulpdent.fr

CE
0459