

My

Laboratoires
Mercurochrome[®]

Stress Control

Capteur Cardiobalance[®]



Manuel d'utilisation

1. Introduction

Nous vous remercions de lire attentivement ce manuel d'instructions et de respecter les conseils d'utilisation et de sécurité qu'il contient.

Ce produit est utilisable dans le cadre de vos loisirs, il ne peut remplacer en aucun cas un appareil médical.

Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

2. Contenu de la boîte

- Pince capteur de fréquence cardiaque Cardiobalance®
- Boîtier récepteur de fréquence cardiaque pour Smartphone
- 1 pile CR1632
- 1 pochette de rangement

Description du produit :

Le design actuel de votre produit peut légèrement différer de celui décrit dans cette notice en raison des améliorations apportées en permanence à nos produits



3. Fonctions du produit

Pince capteur de fréquence cardiaque Cardiobalance[®] :


- Mesure de la fréquence cardiaque instantanée en continu à l'oreille.

Boitier récepteur pour Smartphone :


- Reçoit les données de fréquence cardiaque en provenance du capteur Cardiobalance[®] et les transfère simultanément au smartphone.

4. Pour commencer

1) Positionner le bouton Off/On sur On.

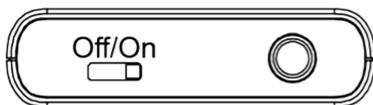

2) Connecter le capteur Cardiobalance[®] au boitier récepteur et le boitier récepteur à la prise écouteurs de votre smartphone.

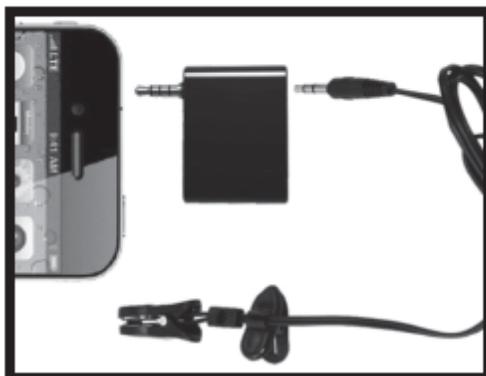

3) Télécharger l'Application My Mercurochrome à partir de l'App Store (pour téléphones compatibles iOS) ou de Play Store (pour téléphones Android).

4) Vérifier que le boîtier récepteur est bien connecté au smartphone et que le capteur Cardiobalance® est connecté au boîtier récepteur, avant de lancer l'application.


5) Le tutoriel présenté au démarrage de l'application explique le fonctionnement de l'application.

5. Stress Control

Comment le Stress Control va-t-il m'aider à abaisser mon niveau de stress ?

Grâce au Capteur Cardiobalance®, le stress control calcule votre Variabilité du Rythme Cardiaque (VRC). Cette VRC est reconnue par les scientifiques comme étant un indicateur clé de votre état de santé, et est représentée par une courbe d'amplitude et de régularité variables. Avec la méthode de cohérence, le Stress Control vous propose des exercices de respiration adaptés afin d'optimiser votre VRC.

En quelques minutes, votre VRC est ample et régulière, vous diminuez votre stress et vous vous sentez calme et apaisé.

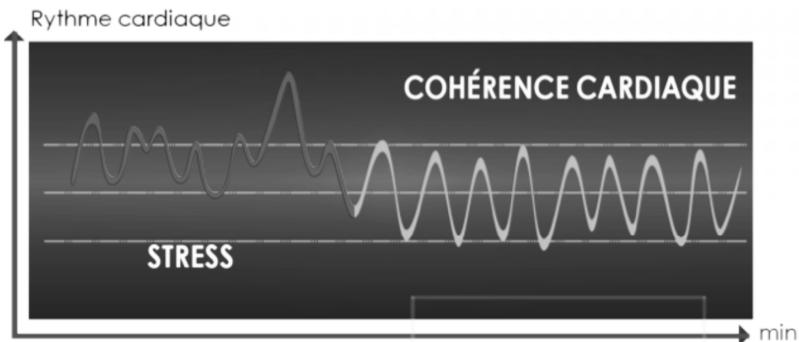

Avec un usage régulier, la METHODE DE COHERENCE deviendra un réflexe naturel.

6. Changement de la pile

1) Utiliser un tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment de la pile situé au dos du boîtier récepteur.



2) Remplacer la pile usagée CR1632 par une nouvelle pile CR1632 et vérifier que le pôle positif (+) de la pile soit bien positionné vers le haut.



3) Repositionner le capot de la pile et visser à l'aide de votre tournevis.

7. Résolution des problèmes

Si la fréquence cardiaque ne s'affiche pas sur votre Application ou est incohérente :

- Vérifier que le capteur et le boîtier récepteur sont connectés correctement et fermement
- Vérifier la pile et la changer si nécessaire
- Ne pas utiliser le capteur sous une lumière vive ou trop intense

8. Caractéristiques techniques

Pile	CR1632 x 1
Plage de mesure de la Fréquence cardiaque	30~240 BPM
Utilisation du produit :	0°C~40°C
Températures et niveau d'humidité limites	35~85% HR
Conditions de stockage :	-40°C~60°C
Températures et niveau d'humidité limites	10~95% HR
Pression barométrique de fonctionnement	860 hPa~1060 hPa
Pression barométrique de stockage	500 hPa~1060 hPa
Dimensions	40 x 28 x 10.5 mm
Tension maximale du cordon	1.5 Kg
Longueur d'onde de la lumière infrarouge	940 nm +/- 45 nm

9. Compatibilité

- Système d'exploitation iOS :

Iphone 4S, Iphone 5, Iphone 5C, iPhone 6 et les appareils utilisant iOS à partir de la version iOS7.

- Système d'exploitation Android :

Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S5 mini, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S3, Samsung Note 3, Samsung Tab 3, Nexus 5, Sony Xperia Z3 compact, Motorola Moto G, HTC M8, Wiko Getaway, à partir de la version Android 4.3.

10. Garantie et Service

Votre appareil My Mercurochrome est garanti contre les défauts survenant lors d'une utilisation normale de l'appareil pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat. Si votre produit présente un défaut matériel ou de fabrication, il sera remplacé. Veuillez consulter les conditions générales de vente sur

www.urgotech.fr .

Notice Version 1 du 25/09/2015.

Fabricant : Trackers

53, boulevard de la Reine – 78000 Versailles

Distributeur : URGOTECH

8, rue Christophe Colomb – 75008 Paris

