

## Effacer les réglages et revenir aux réglages d'usine



Pour revenir aux réglages d'usine, appuyez simultanément sur les touches B et C pendant 3 secondes, toutes les lumières s'allument puis s'éteignent.

## TEO First avec un smartphone

(accessoire vendu séparément).

Connectez votre smartphone avec un câble jack Tinteo quatre points avec votre TEO First à l'emplacement prévu. Une fois le câble branché vous n'entendez plus les sons ambiants. Pour revenir en mode microphone, débranchez le câble jack.



**Pour décrocher ou raccrocher**  
appuyez sur la molette

## Recharger votre TEO First

Comment savoir si l'appareil est déchargé :

- Votre produit s'éteint.
- Le son semble anormal.
- Si vous essayez de le rallumer toutes les lumières clignotent.



Pour recharger votre TEO First, connectez-le au chargeur USB avec le câble USB fourni et branchez-le sur une prise secteur ou bien sur un ordinateur.

- En charge les lumières clignotent l'une après l'autre.
- Quand le produit est chargé toutes les lumières sont allumées.
- Le temps de charge est de 1h30 (pour une autonomie de 8h)

## Besoin d'aide

Téléphonez à notre service client au **04 42 61 27 84**

ou visitez notre site internet **www.tinteo.com**

Vous y trouverez le guide d'utilisation complet et la mise à jour.

## Garantie

**Votre TEO First (boîtier) est garanti 2 ans.**

**Les accessoires sont garantis 1 an.**

Une utilisation anormale (humidité, choc) de votre appareil ou des accessoires est susceptible de provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par votre garantie.

## Déclaration de conformité CE

Nous,

Personal Sound SAS

100, route des houillères 13590 Meyreuil France

Déclarons sous notre responsabilité que le produit TEO first est conforme aux normes harmonisées suivantes :

- EN 60065 : 2002, A1 : 2006, A11 : 2008
- EN 55022 : 2006, A1 : 2007
- EN 61000-3-2 : 2006, A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2008
- EN 55024 : 1998, A1 : 2001, A2 : 2003

Conformément aux exigences essentielles de :

- 2006/95/CE - Directive Basse Tension
- 2004/108/CE - Directive CEM
- 2005/32/CE - Directive Ecoconception
- 2009/125/CE - Directive Ecoconception

Meyreuil, le 20 juillet 2012,  
Alexandre Desroches , Président

# teo first

## Manuel d'utilisation rapide

Fonctionne avec des microphones,  
pas besoin de le brancher à la télévision.



Fabriqué  
en France



## Légende du TEO First



L'appareil possède une mémoire, les réglages (balance, volume) sont mémorisés d'une utilisation à l'autre.

## Mise en garde pour la première utilisation

- Chargez votre appareil avant la première utilisation
- Lorsque les écouteurs sont proches du boîtier, un sifflement Larsen apparaît. Il suffit d'éloigner les écouteurs.
- Lorsque vous manipulez le produit, les quatre microphones captent les frottements. Une fois les réglages mémorisés vous aurez moins ce désagrément.
- Branchez votre paire d'écouteurs, n'hésitez pas à bien l'enfoncer dans son emplacement.
- Pensez à éteindre votre appareil quand vous ne l'utilisez pas. Un voyant allumé indique que l'appareil fonctionne.

## Allumer et Eteindre votre TEO first



Pour allumer l'appareil, appuyez sur la molette, les voyants volume et C s'éclairent. Attendez deux secondes le son arrivera dans vos écouteurs



Pour éteindre l'appareil, enfoncez la molette pendant trois secondes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent. Un son grave dans les écouteurs, vous confirmera l'extinction du TEO first.

## Régler le volume



Poussez la molette vers le haut pour un volume plus fort ou vers le bas pour volume moins fort.

Remarques: La molette ne tourne pas. Une fois relâchée elle revient à sa place initiale. Chaque changement de réglage du volume est indiqué par un bip sonore. Lorsque vous arrivez au maximum ou au minimum du volume, vous entendez trois bips.

## Régler le Mode d'écoute

Votre Teo First offre deux modes d'écoute pré-réglés:

- **Environnement bruyant** pour une utilisation lors d'une réunion de famille, en voiture, lors d'un spectacle ...
- **Environnement calme** pour écouter la télévision, avoir une conversation dans un endroit calme, au théâtre ...



Le mode d'écoute est indiqué par le voyant B ou C allumé.

- Sélectionnez le mode environnement Bruyant en appuyant sur la touche B.
- Sélectionnez le mode environnement Calme en appuyant sur la touche C.

## Régler la balance entre les oreilles



La balance sert à mettre plus de volume dans une des oreilles. Pour la régler, appuyez en même temps sur la molette et sur une des touches C ou B.

Le voyant balance s'allume et vous pouvez régler la balance



- Pour entendre plus fort dans l'oreille droite poussez la molette vers le haut.
- Pour entendre plus fort dans l'oreille gauche poussez la molette vers le bas.

Remarques: Chaque changement de réglage est indiqué par un bip. Un double bip est émis lorsque vous passez l'équilibre entre les deux oreilles. En fin de course, trois bips sont émis. Il y a 10 positions possibles.