


Baar, en juin 2006

Information importante concernant les lecteurs de glycémie FreeStyle Mini™, FreeStyle Freedom™ et FreeStyle™

Madame, Monsieur,

Abbott Diabetes Care souhaite vous tenir régulièrement informé de ses produits. A cet effet, nous vous transmettons les informations suivantes concernant nos lecteurs de glycémie FreeStyle™ illustrés ci-après.

Notamment, lorsque la pile devient faible et que le symbole de pile ($\text{⊖}+\text{⊕}$) apparaît, il faut **immédiatement** remplacer la (les) pile(s). Ceci est décrit dans le Manuel d'utilisation (FreeStyle Mini™ : page 36, FreeStyle Freedom™ : page 32, FreeStyle™ : page 32).

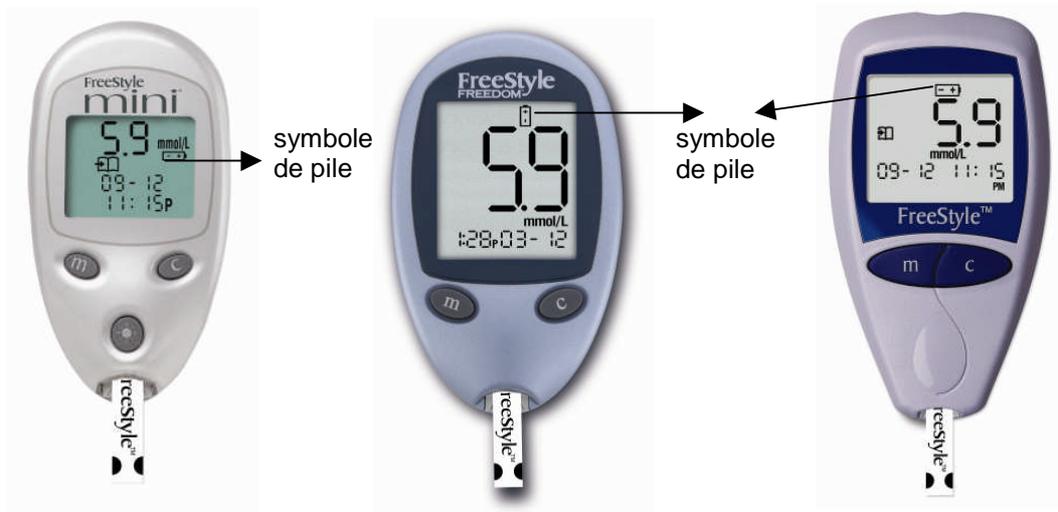

Dans de rares cas, lors d'utilisation prolongée, alors que le symbole de pile ($\text{⊖}+\text{⊕}$) est affiché, il a été rapporté que le lecteur peut devenir inutilisable ou qu'il peut revenir à zéro et afficher l'erreur « Er 4 ». « Er 4 » est décrit dans la section « messages d'erreur » du Manuel d'utilisation.

En cas de suppression de la configuration du lecteur les paramètres de la configuration de base peuvent revenir à zéro. Les réglages suivants de votre lecteur de glycémie peuvent être concernés par la mise à zéro des paramètres :

- Le format de la date peut changer à MM-JJ-AA
- Le format de l'heure peut changer à un affichage de 12 heures
- Le numéro de code peut changer
- **L'unité de mesure mmol/L peut être perdue et le lecteur peut devenir réglable librement (mg/dL ou mmol/L)**



Afin de vous assurer un résultat de glycémie FreeStyle™ correct, nous vous recommandons les mesures suivantes :

- Comme indiqué dans le Manuel d'utilisation (FreeStyle Mini™ : page 36, FreeStyle Freedom™ : page 32, FreeStyle™ : page 32), il faut **immédiatement** remplacer la (les) pile(s) lorsque le symbole de pile (☹️) apparaît sur l'écran.
- Veuillez toujours vous assurer que l'unité de mesure correcte apparaisse sur l'écran (voir images des lecteurs sur la page précédente).
- Veuillez vous assurer que le numéro de code correct apparaisse sur l'écran au début de chaque test.

L'information susmentionnée vous est adressée afin que vous aviez accès à des résultats fiables avec les lecteurs de glycémie FreeStyle™.

Nous tenons à vous informer que nous échangeons votre lecteur FreeStyle™ sur demande contre un nouveau avec un logiciel mis à jour. Merci d'avance de bien vouloir contacter notre service clients d'Abbott Diabetes Care au numéro gratuit 0800 804 404 pour toute question complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

ABBOTT AG

Abbott Diabetes Care

Dr Ingeborg Bertschi
Responsable du service clients
Membre de la direction

Paolo Pollak
Sales & Marketing Manager