

NEW LIFE

corps & visage



MANUEL D'UTILISATION

Manuel d'utilisation

Copyright© 2006 Venus Technologies Ltd.

Tous droits réservés.

Date d'impression : Janvier 2009

Venus Technologies Ltd. se réserve le droit d'apporter des changements ou spécifications différentes à ses produits pour en améliorer les performances, la fiabilité ou la fabrication.

Les informations fournies par Venus Technologies Ltd. sont précises et fiables. Toutefois, Venus Technologies Ltd. n'assume pas la responsabilité de l'utilisation de l'appareil. Aucune licence n'est assurée par son implication, si ce n'est le brevet ou les droits de l'utilisation du brevet de Venus Technologies Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit de Venus Technologies Ltd.

Distributeur exclusif France

Life Sport International

Tel. : 04 92 02 10 00

LE COMMODORE - PORT MARINA BAIE DES ANGES

06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE

Site Web : www.venus-newlife.com

Les données peuvent être modifiées par Venus Technologies Ltd sans être sujettes à notification. L'accès à ce document ne vous donne pas d'autorisation concernant l'utilisation de la marque déposée, les copyrights, ou tout autre droit à la propriété intellectuelle, excepté si vous avez l'autorisation écrite de Venus Technologies Ltd. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Sommaire

1	Introduction	1
	Les applications New Life	1
	Caractéristiques New Life	2
2	Composants New Life	3
	Applicateurs & Panneau de contrôle	3
3	Avant de commencer	4
	Mise en garde	4
	Typographie	4
	Symboles utilisés dans le manuel	4
4	Sécurité	5
	Introduction	5
	Le client	5
	Précautions	5
	Sécurité électrique et mécanique	5
	Risques avec des substances inflammables	5
	Labels	5
5	Installation de l'appareil	6
	Liste d'équipement	6
	Exigences électriques	6
	Exigences environnementales	6
	Déplacer l'appareil	7
6	Système d'exploitation	8
	Panneau de l'opérateur	8
	Menu Options	8
	Critères de contre indications & sécurité	8
	Avant le traitement	9
	Ajuster les paramètres de traitements	9
	Protocoles de traitements	9
	Après le traitement	9
	Maintenance	10
7	Entretien préventif	10
	Conseils de sécurité	10
	Fréquence de la maintenance	10
	Remplacer l'Applicateur	10
8	Maintenance	11
	Nettoyer l'appareil	11
	Remplacer l'applicateur	11
	Dépannage	11
9	Spécifications	13
	Tableau des traitements par programmes	14-15
	Accessoires New Life	16
	Les 8 principaux programmes de soins	16
	Les répéteurs et les pads	17
	Les Electro-Gants	17
	La paire de sondes à 2 têtes	17
	La paire de sondes à tête unique	17
	La sonde ronde pontuelle	17
	Effet lifting poitrine	18
	Effet lifting taille et abdomen	19
	Effet lifting fesses & cuisses	19
	Soin peau grasse, à tendance acnéique	20-21
	Relaxation Plantaire	22
	Effet lifting visage & cou	23

1. Introduction

New Life de Venus Technologies est un système sûr et non invasif qui utilise le B.E.A.M™ (Bio Electrical Acceleration Management), la toute dernière technologie esthétique offrant la possibilité d'imiter le processus bioélectrique du corps en envoyant des pulsations à travers le système nerveux.

La technologie du B.E.A.M™ utilise un système de gestion unique qui vous donne un contrôle total. Il vous permet de combiner, synchroniser et ajuster précisément tous les micros paramètres.

New Life vous permet de stimuler et d'activer des muscles spécifiques ou des groupes musculaires, d'augmenter la circulation sanguine, d'améliorer le métabolisme et de tonifier le corps exactement selon le désir de vos clients !

Les applications New Life

- Amincissement (*réduction du tour de taille et des hanches*)
- Sculpture du corps
- Tonification
- Effet lifting visage
- Soins spécifiques pour peaux grasses et à tendance acnéique
- Modelage
- Modelage drainant
- Traitement poitrine et fesses

Idéal pour les personnes désirant sculpter leur corps sans efforts physiques.

Après une séance, les clients perdent en moyenne 2 cm de tour de taille.

Caractéristiques New Life

New Life grâce à la puissance de la technologie du B.E.A.M.™ :
Plus de contrôle, plus d'options et de meilleurs résultats en moins de temps.

Haute Energie : Résultats immédiatement visibles et possibilité de traitements simultanés (**pose jusqu'à 24 pads**). Capacité de réaliser 3 traitements en même temps (pose de 24 pads sur le corps combinée aux Electro-Gants) et sur 2 clients différents (pose de 12 pads sur chaque client).

Efficacité du système de gestion : Il vous permet de synchroniser et d'optimiser les paramètres pour de meilleurs résultats.

Réglage précis : La possibilité de régler avec précision et à tout instant les micro-paramètres pour assurer un maximum de confort.

Electro-Gants : Les gants en micro fibres distribuent équitablement l'énergie et créent un réel moment de détente.

Sûr et précis : Aucun risque ni dommage pour la peau, aucune douleur, proche du fonctionnement naturel de l'organisme.

Facile à utiliser : L'interface avec le schéma du corps humain (**Human Machine Interface - HMI**) équipée d'un écran tactile couleur de 10.4", vous guidera très simplement à travers chaque étape de traitement.



Composants New Life

Accessoires

New Life possède une unité de puissance principale qui diffuse un courant électrique non invasif vers des muscles prédéfinis grâce à 3 groupes d'accessoires principaux, laissant aux professionnels le choix de les adapter en fonction des désirs du client.

Les différents accessoires sont : des pads adhésifs hypoallergéniques, des Electro-Gants, et les diverses sondes. Tous ces accessoires vont stimuler des muscles qui ne sont pas forcément actifs au quotidien.



Figure 1.2 Accessoires

Panneau de Contrôle

Le panneau de contrôle est situé au dessus du système. Ce panneau possède 8 programmes à boutons tactiles comme le montre le dessin ci-dessous.



Figure 1.3 Panneau de contrôle

2. Avant de commencer

Attention

Lisez ce manuel afin de vous familiariser avec les normes de sécurité et les procédures avant d'utiliser New Life. Les interventions et réparations sur le système New Life doivent être effectuées uniquement par des personnes autorisées et qualifiées par Venus Technologies Ltd ou Life Sport International.

Typographie

Style de texte	Signification
Texte	Descriptif
Texte	Focus
Texte	A noter
Texte	Chapitre
<i>Texte</i>	Sous-chapitre
○ Texte	Paragraphe

Symboles utilisés dans ce manuel et l'appareil :

 Note	Information générale importante à retenir
	Information spécifique sur le texte qui suit
	ATTENTION

Symbole	Description
	Important à noter
	Normes CE
	Fusible
P #	Fabricant
S #	Représentation autorisée dans la Communauté Européenne

3. Sécurité

Ce chapitre décrit les normes de sécurité concernant l'utilisation et la maintenance du système, spécialement la sécurité électrique.



Note

New Life ne doit pas être utilisé pour un usage non adéquat.
Le câble électrique doit être déconnecté en cas de manipulation de l'appareil.

Introduction

New Life est conçu pour des traitements sûrs et fiables, lorsqu'il est utilisé en accord avec les opérations et procédures de maintenance. Seules des personnes formées et qualifiées peuvent utiliser New Life. L'utilisateur et le personnel utilisant New Life doivent se familiariser avec les normes de sécurité de ce chapitre. La première considération doit être de maximiser la sécurité de l'employé et du client.



Lisez ce chapitre afin de vous familiariser avec les exigences de sécurité et les procédures avant d'utiliser New Life.

Le client

Pour la sécurité du client le traitement doit être assuré par un personnel formé à New Life. Un bilan de chaque client doit être complété avant de proposer ou de commencer une cure. Les clients doivent être complètement informés sur les protocoles du traitement, les objectifs ainsi que les contre-indications.

L'utilisateur

Le personnel ne doit pas pratiquer s'il n'a pas été formé à l'utilisation de New Life.

Précautions

Seul le personnel autorisé peut utiliser New Life.


Sécurité Electrique et Mécanique

- Ne pas ouvrir les couvercles et panneaux de l'appareil. Retirer les couvercles peut être dangereux.
- Eteindre et déconnecter le système pour la procédure d'entretien.
- Déplacer l'appareil doucement et avec soin (**le déplacer sans précaution peut causer des dégâts**).
- Poids de l'appareil : environ 15 kg.
- L'appareil doit être obligatoirement relié à la terre par une prise électrique adéquate lors de son utilisation.

Risques avec des substances inflammables

- Ne pas utiliser de substances inflammables lorsque vous préparez la peau pour le traitement.
- Si vous utiliser de l'alcool pour nettoyer et désinfecter l'appareil, vous devez le sécher soigneusement avant son utilisation.

Labels

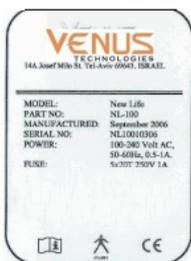

4. Installation de l'appareil

New Life est destiné à une utilisation professionnelle, dans un environnement professionnel. La personne qui installe l'appareil doit procéder comme suit :

- Retirer New Life de son emballage
- Vérifier que l'appareil et tous ses composants sont en bon état
- Connecter les applicateurs internes. Vérifier la connection de chaque câble
- Connecter le câble électrique à l'appareil
- Brancher au courant dans une prise électrique adéquate

Liste d'Équipement

New Life comprend les accessoires suivants :

Description	Unité
New Life 100 - 240 V	1
Paire de répéteurs 12 sorties	1
Paire de sondes à tête unique	1
Paire de sondes à double tête	1
Sonde ponctuelle + câble	1
Paire d'Electro-Gants + câble	2
24 pads rectangles (50x90 mm)	10
8 pads carrés (40x40mm)	2
Câble électrique	1
Manuel d'utilisation	1

Exigences Electriques

L'appareil a été conçu afin d'être adapté au voltage local en accord avec la réglementation du pays. C'est-à-dire que le système s'ajustera automatiquement à : Phase 100-230 Vac ; 15A; 50-60Hz



Afin de maintenir la protection contre le feu, remplacer le fusible uniquement avec le même type et classement de fusible.

Un sol adéquat est indispensable à une bonne utilisation.

Exigences environnementales

Le matériel corrosif peut endommager les pièces électroniques, le système doit donc être utilisé dans une atmosphère non corrosive.

Pour une opération optimale, maintenir la température de la pièce à 20°-25°C et à une humidité relative de moins de 80%.

Déplacer l'appareil

Afin de déplacer l'appareil sans difficulté :

- Eteindre l'appareil
- Débrancher le câble électrique
- Placer les applicateurs dans le casier de rangement
- Avec une main, sécuriser l'appareil et doucement pousser ou tirer en utilisant les poignées

Pour déplacer le système dans un autre lieu :

- Eteindre l'appareil
- Débrancher le câble électrique
- Déconnecter les applicateurs et les ranger dans le casier de rangement
- Tirer ou pousser l'appareil avec précaution
- Soulever l'appareil pour le placer avec soin, couché dans la voiture, en vous aidant des poignées

En arrivant à destination :

- Déplacer l'appareil grâce aux poignées et avec précaution jusqu'à l'endroit prévu
- Reconnecter les accessoires
- Reconnecter le câble électrique
- Allumer l'appareil



NE JAMAIS soulever, tirer ou pousser l'appareil en utilisant le panneau d'opération.
Toujours utiliser les poignées lorsque vous déplacez l'appareil.

5. Système d'Exploitation

Allumer - Eteindre - ON/OFF

Avant de mettre l'appareil sur ON (**position allumé**) vérifier que le câble soit branché à l'appareil et à la prise murale.

Allumer le Système sur ON

Basculer l'interrupteur à l'arrière de l'appareil sur ON :



Figure 5.1 Emplacement de l'interrupteur

Panneau de l'opérateur

Le panneau de contrôle est sur le haut du système.
Le panneau de l'opérateur est un écran tactile de 10".4»



Fig. 6.1

Menu Options

L'écran de menu principal permet à l'utilisateur de choisir 1 des 8 programmes de base :

1. Soins Esthétiques Tonifiants Visage & Corps
2. Modelage Manuel – Electro-Gants
3. Prévention - Détente et Bien Etre : Phase Préparation
4. Soins Energies Circulatoires de Base
5. Amincissement et Tonification
6. Soins Energies Circulatoires Avancés
7. Prévention - Détente et Bien Etre : Phases Avancées
8. Sculpt & Lift – Électropuncture

Pour utiliser ces programmes, il suffit de toucher l'écran sur le bouton correspondant.

Critères de contre-indications et sécurité

New Life est un système fiable et sûr pour l'utilisation sur n'importe quelle zone du corps ou du visage. Il y a toutefois des contre-indications :

- Femme enceinte
- Mélanome-cancer de la peau
- Plaque en Métal & Broches (**ex: pacemaker**)
- Epilepsie
- Attention particulière demandée dans les cas suivants:
 - Diabète
 - Cicatrices d'acné

Avant le traitement

- Lire le manuel d'utilisation avec attention et avoir suivi une formation pour l'utilisation de New Life.
- Vérifier que le client n'a pas de contre indications figurant dans la liste.
- Rappeler au client de n'avoir rien mangé, dans l'heure qui précède le traitement.
- Aucune activité physique ne doit être effectuée dans l'heure qui précède le traitement.
- Revoir avec le client la procédure du traitement, c'est à dire: les sensations, les attentes espérées et la durée de la cure pour un résultat optimal.
- Assurez-vous que la zone à traiter est propre.
- Installer le client confortablement.
- Vérifier que le client ait bu 1ou 2 verres d'eau et qu'il ait enlevé tous bijoux métalliques.
- Ne jamais placer de pads sur : les os, les cicatrices, les tatouages ou grains de beauté.
- Faites en sorte que les pads ne se touchent pas, ni ne se chevauchent.

Ajuster les paramètres de traitement

Les paramètres suivants apparaissent sur l'écran de traitement et peuvent être modifiés par l'utilisateur :

- Temps du traitement (1-99 minutes)
- Niveau du traitement (3 niveaux)
- Pourcentage d'énergie par sortie (Entre 0-100%)
- Temps de montée (temps nécessaire pour atteindre le pic culminant de la contraction)
- Temps de repos (temps entre chaque pulsation)
- Temps de contraction (durée pendant laquelle le muscle se contracte)
- Forme d'ondes (12 types d'ondes différentes)
- Fréquence (pulsations par seconde)



Note

Protocoles de Traitement – Voir annexe A

Après le Traitement

Vérifier que le client soit informé des procédures après traitement: boire de l'eau, s'hydrater la peau avec des crèmes ou lotions et éviter de manger dans l'heure suivante (**selon le traitement**).
Eteindre l'appareil et effectuer les différentes phases de nettoyage comme suit :

Nettoyer : Ne pas utiliser de détergents qui pourrait endommager ou détruire certaines parties extérieures en plastique comme l'ammoniaque, l'acétone, l'acide chlorhydrique, de l'eau de javel, etc...

Nettoyer les Électro-Gants : Après utilisation, plonger les gants dans de l'eau minérale pendant quelques minutes et les frotter doucement l'un contre l'autre (**ne pas utiliser de brosse**). Nettoyer dans de l'eau chaude pendant 15 minutes supplémentaires. Ensuite mettre les gants dans une serviette sèche et si possible dans un stérilisateur pendant 15 minutes.

Nettoyer les pads : Passer sur les pads un coton chaud et mouillé, puis sécher les pads. Si possible les mettre dans un stérilisateur pendant 15 minutes.

Nettoyer les parties métalliques des sondes : Les nettoyer avec du savon et de l'eau chaude.

Maintenance

Eteindre l'appareil et suivre les instructions d'entretien suivantes :

Nettoyage : NE pas utiliser un détergent pouvant endommager le plastique, comme l'ammoniaque, l'acétone, l'acide chlorhydrique, etc.

Laver les Electro-Gants : Après chaque usage tremper les gants dans de l'eau chaude légèrement savonneuse et les laver délicatement à la main. Bien rincer à l'eau chaude. Tamponner pour sécher dans une serviette éponge. Si possible mettre 15 mn à stériliser dans une machine UV.

Nettoyer les pads : Utiliser une rondelle de coton tiède et mouillée, le passer sur le pad, puis sécher. Si possible mettre 15 mn à stériliser dans une machine UV.

Nettoyer les accessoires en métal : Utiliser de l'eau chaude et du savon.

6. Entretien Préventif

Ce chapitre décrit les procédures d'entretien nécessaires au service, ainsi que les instructions de maintenance.

Conseils de sécurité

Avant d'effectuer les procédures de maintenance préventives, lire le passage suivant :

	Ce sigle placé près de l'interrupteur indique que le câble doit être débranché avant utilisation afin d'éviter un choc électrique.
	Pour la protection contre le feu, remplacer le fusible uniquement par un fusible du même type et même référence.
 Note	Pour des performances optimales du système, il est recommandé de faire une maintenance préventive.

Fréquence de la Maintenance

Accessoires & gants : Après chaque traitement

Ecran Tactile : Une fois par semaine

L'appareil : Deux fois par mois

Remplacer l'Applicateur

Mettre le système sur OFF.

Dévisser l'applicateur et tirer pour le déconnecter.

Tenir le nouvel applicateur en face du connecteur et aligner en vous guidant par rapport au sens de la prise.

Placer l'applicateur dans la prise correspondante et revisser.

	Les applicateurs ont été créés et calibrés afin de donner un usage d'énergie de sortie (output) le plus précis possible, en fonction du niveau d'énergie sélectionné.
---	---

7. Maintenance

Ce chapitre décrit la maintenance ordinaire à respecter : Nettoyer les applicateurs, les remplacer, nettoyer le filtre à air et le refroidisseur d'eau.

Tous les autres services sont pratiqués par un personnel autorisé par la société. L'applicateur a un composant de calibrage automatique avec une puissance interne. L'applicateur doit être remplacé ou re-calibré à l'usine au moins une fois par an.

	Ce symbole situé près de l'interrupteur signifie : "ATTENTION ! DEBRANCHER LE CABLE ELECTRIQUE AVANT UTILISATION AFIN D'EVITER UN CHOC ELECTRIQUE".
	Afin de continuer la protection contre le feu, remplacer le fusible par un fusible du même type et même puissance.
✓ Note	Pour une performance optimale du système, nettoyer la vitre externe du système en utilisant un nettoyant adapté et un chiffon non abrasif.
	Pour une performance optimale de l'appareil, la maintenance préventive est recommandée.

Nettoyer l'appareil

Nettoyer New Life au moins une fois par semaine. Eteindre l'appareil (OFF) et essuyer toutes les surfaces, spécialement la vitre avec un chiffon doux et non abrasif. Attention de ne pas renverser de liquide sur le système.

Remplacer l'Applicateur

Une fois par an (ou si l'applicateur devient inutilisable) remplacer l'applicateur comme suit :

- Eteindre l'appareil (**OFF**)
- Déconnecter l'applicateur en le tenant par la poignée et tirer.
- Tenir le connecteur du nouvel applicateur face au branchement et faire descendre jusqu'à la position de fermeture.
- Glisser le connecteur le long du guide et le clipper.

Dépannage

Power supply : L'unité « power supply » NFS110-7901PF reçoit sa puissance grâce à l'unité principale power protection (**fusible + interrupteur + filtre principal**). Le voltage $\pm 12V$, $\pm 5V$ DC est généré en sortie.

LCD & écran tactile : Permet de sélectionner et contrôler le cycle du soin en cours et d'en modifier les paramètres, informe également l'utilisateur sur les réglages du programme en cours (**paramètres machine, cycle sélectionné etc...**)

Module principal : Contrôle et examine les informations qui apparaissent à l'écran. Transmet les données de l'écran tactile à l'unité principale et actualise les informations lisibles sur l'écran.

Output Module : Produit et amplifie le courant avec milliampère et microampère. Gère également les ondes de type sinusoïdal, trapézoïdal, carré, à impulsion symétrique ou asymétrique, en forme d'échelle, en forme de « H », en dents de scie et ondes galvaniques.

Type de problème	Cause	Solution
Rien n'apparaît sur l'écran (sauf une luminosité)	Le port 31P n'est pas bien connecté ou l'écran a un problème	Enfoncer la fiche du cordon d'alimentation ou le remplacer, si le problème persiste, changer l'écran principal
Disfonctionnement de l'écran avec un bip sonore tout de même	Un poids repose sur une des touches de l'écran	Retirer le poids
Disfonctionnement de l'écran en cours d'utilisation d'un programme	Le film de protection couvre l'écran de façon non uniforme	Retirer le film et le jeter
Panne des accessoires	Le DB9 et le DB25 sont raccordés aux mauvaises fiches ou sont mal vissés	Rectifier les raccordements et s'assurer qu'ils sont correctement vissés
Le répétiteur ne fonctionne pas	Le cordon est coupé ou endommagé	Inverser les répétiteurs, si le répétiteur défectueux ne fonctionne toujours pas, remplacer le
Une des sorties des gants ne répond pas	Le cordon ou la connexion sont endommagés	Inverser les câbles des gants, si le gant ne fonctionne toujours pas, vérifier les connexions
L'appareil ne s'allume pas et il n'y a aucun son	Le fusible est endommagé ou le cordon n'est pas branché ou l'interrupteur n'est pas en position ON	Vérifier tout d'abord l'interrupteur ensuite le cordon et enfin le fusible

Si vous n'avez pas trouvé de solution à votre panne, contactez un technicien.

9. Spécifications

Formes d'ondes	De type sinusoïdal, trapézoïdal, carré, à impulsion symétrique ou asymétrique, en forme d'échelle, en forme de «H», en dents de scie et ondes galvaniques
Temps de traitement	1-99 min
Fréquence micro courant	0-999 Hz
Fréquence du courant « puissant »	40 Hz. - 2.5K Hz
Micro courant	20 uA - 990 uA
Intensité « courant puissant »	0-25 mA
Tension de sortie du micro courant	0±32 v
Tension de sortie du « courant puissant »	0±180 v
Puissance principale	90-240 V AC
Alimentation maximale	80 W
Poids net	15 Kg

Tableau des traitements par programme

1 - SOINS ESTHÉTIQUES TONIFIANTS - VISAGE ET CORPS
1.1 - Soin tonifiant du visage
1.2 - Soin contour des yeux
1.3 - Soin du buste et du décolleté
1.4 - Soin cuisses et fesses
1.5 - Soin mains et bras
1.6 - Soin hydratant
1.7 - Soin peau sensible
1.8 - Soin peau à tendance problématique pigmentaire
1.9 - Soin peau grasse et à tendance acnéique
1.10 - Soin zone abdominale
2 - MODELAGE MANUEL - ÉLECTRO-GANTS
2.1 - Réflexologie plantaire
2.2 - Mains
2.3 - Auriculo-stimulation
2.4 - Modelage corps entier
2.5 - Effet lifting visage & cou
2.6 - Modelage buste, bras, mains
2.7 - Modelage dos, taille, abdomen, jambes
2.8 - Détente crânienne, visage
3 - PRÉVENTION - DÉTENTE & BIEN ETRE : PHASE PRÉPARATION
3.1 - Soin préventif rides visage & cou
3.2 - Soin préventif chute des cheveux
3.3 - Relaxation corps & esprit
3.4 - Soulagement cycle féminin
3.5 - Menstruations irrégulières
3.6 - Détente zone cervicale
3.7 - Détente zones combinées : bas du dos, fesses & cuisses
3.8 - Détente zone bas du dos
3.9 - Confort intestinal
4 - SOINS ÉNERGIES CIRCULATOIRES DE BASE
4.1 - Soin énergie corps entier
4.2 - Soin énergie visage, cou & buste
4.3 - Soin énergie buste, bras & ventre
4.4 - Soin énergie abdomen & jambes
4.5 - Soin énergie abdomen, fesses & cuisses
4.6 - Point énergétique : surcharge pondérale
4.7 - Point énergétique : bas du dos, fesses & cuisses
4.8 - Point énergétique : bas du dos

5 - AMINCISSEMENT ET TONIFICATION

- 5.1 - Amincissement buste, taille & abdomen
- 5.2 - Amincissement bras, poitrine & abdomen
- 5.3 - Amincissement buste, taille & cuisses
- 5.4 - Amincissement taille, abdomen & cuisses
- 5.5 - Amincissement dos, taille & fesses
- 5.6 - Tonification corps entier
- 5.7 - Tonification taille & cuisses
- 5.8 - Tonification nuque, épaules & dos
- 5.9 - Tonification zone bas du dos
- 5.10 - Tonification fesses

6 - SOINS ÉNERGIES CIRCULATOIRES AVANCÉS

- 6.1 - Soins énergie corps entier
- 6.2 - Soins énergie visage, cou & buste
- 6.3 - Soins énergie buste, bras & ventre
- 6.4 - Soins énergie abdomen & jambes
- 6.5 - Soins énergie abdomen, fesses & cuisses
- 6.6 - Point énergétique : surcharge pondérale
- 6.7 - Point énergétique : bas du dos, fesses & cuisses
- 6.8 - Point énergétique : bas du dos

7 - PRÉVENTION - DÉTENTE & BIEN ÊTRE : PHASES AVANCÉES

- 7.1 - Soins préventifs rides visage & cou
- 7.2 - Soins préventifs chute des cheveux
- 7.3 - Relaxation corps & esprit
- 7.4 - Soulagement cycle féminin
- 7.5 - Menstruations irrégulières
- 7.6 - Détente zone cervicale
- 7.7 - Détente zones combinées : bas du dos, fesses & cuisses
- 7.8 - Détente zone bas du dos
- 7.9 - Confort intestinal

8 - SCULP & LIFT - ÉLECTROPUNCTURE

- 8.1 - Effet lifting poitrine
- 8.2 - Effet lifting taille & abdomen
- 8.3 - Effet lifting fesses & cuisses
- 8.4 - Électropuncture motivation nuque
- 8.5 - Électropuncture motivation dos
- 8.6 - Électropuncture bas du dos, fesses & cuisses
- 8.7 - Relaxation plantaire
- 8.8 - Électropuncture plantaire

ACCESSOIRES New Life



- 1 - Répétiteur
- 2 - Pads «carré» (10 x 24 pads)
- 3 - Pads «rectangle» (2 x 8 pads)
- 4 - Electro-Gants
- 5 - Sonde
- 6 - Sonde double tête

Les 8 principaux programmes de soins

Programmes 1 :

Les soins corps et visage peuvent être exécutés à l'aide des sondes à tête double et des Électro Gants en utilisant le micro courant. Ce programme est conçu pour les soins du visage, des oreilles, du contour des yeux, du cou, des mains (**En émettant du micro courant dans les différentes couches de la peau, l'A.T.P (Adénosine Tri Phosphate) est augmentée de 500 %, l'activité fibroblastique de 60 %, la synthèse des protéines de 73 % et le métabolisme de 30 à 40 %**). En utilisant la basse puissance, le programme stimulera les nerfs et les muscles, soulagera les tensions, accélérera la circulation sanguine et normalisera la balance sel/eau dans le corps.

Programmes 2 :

Ces soins sont effectués à l'aide des Électro-Gants en utilisant le micro courant. Ces programmes permettent une série de traitements qui peut être choisie selon les désirs et les objectifs du client.

(Augmentation de l'élasticité et de la fermeté de la peau, diminution des rides, une peau plus lisse).

Un modelage corporel augmentera la circulation lymphatique et améliorera le fonctionnement du système digestif.

Programmes 3 :

Ces soins sont effectués à l'aide de pads avec une puissance douce.

En stimulant tous les points du corps ou du visage, ils amélioreront la circulation lymphatique, re-pulperont les muscles du visage et stimuleront l'activité cellulaire.

Programmes 4 :

Ces programmes utilisent une puissance inférieure à 1000 micro Ampères.

En plaçant les pads « carrés » sur les glandes lymphatiques, on augmentera les circulations sanguine et lymphatique.

Programmes 5 :

Ces programmes utilisent une puissance supérieure à 1000 micro Ampères. Vous utiliserez ces programmes avec les pads pour la réduction du tour de taille et la tonification de la peau, cela va aussi diminuer les volumes graisseux, reconstituer l'élasticité, tonifier les muscles et éliminer l'eau en excès.

Programmes 6 :

Ces programmes utilisent une puissance supérieure à 1000 micro Ampères.

En utilisant cette puissance et les pads « rectangles », on assure une meilleure pénétration dans la peau, ayant pour résultat une meilleure efficacité.

Programme 7 :

Ces programmes utilisent une puissance supérieure à 1000 micro Ampères

Les soins sont effectués à l'aide de pads et sont complémentaires des programmes 3.

Programme 8 :

Ces programmes utilisent une puissance supérieure à 1000 micro Ampères. A l'aide de la sonde à tête unique ou de la sonde ponctuelle le mode lifting va tonifier et raffermir les fesses, la poitrine, et le ventre.

Ces programmes permettent de prévenir et de retarder le relâchement du ventre et de la poitrine.

A l'aide de la sonde ponctuelle le mode Électropuncture permet d'améliorer la circulation sanguine et le métabolisme cellulaire, de soulager les tensions, d'augmenter le tonus musculaire.

Les répéteurs et les pads :

Dans les programmes 3 à 7 vous utiliserez les pads. La connexion noire correspond au pôle négatif, et la connexion rouge correspond au pôle positif. Sur l'écran, le rouge est représenté en bleu pour une vision plus rapide. Positionner les pads correspondants au guide « corps humain » sur l'écran.

Notez que dans les programmes 3 et 7 les pads sont positionnés selon les points d'acupuncture, alors que dans le programme 5 les pads sont localisés selon les muscles.

Dans les programmes 4 et 6 les pads sont positionnés selon les points lymphatiques.

Veillez à ce que les pads soient placés dans la bonne direction (**verticale ou horizontale**) en vous basant sur l'écran, et veillez à utiliser la bonne taille de pads. (**45x80mm ou 40x40mm**)

Les Electro-Gants :

Avant d'enfiler les Electro-Gants, mettre des gants en latex ou en nylon jetable.
(pour une meilleure isolation)

Le client doit enlever ses bijoux et doit être démaquillé.

Pour commencer, vous devez connecter les clips oranges (+) aux Electro-Gants et les clips blancs (-) aux pads que vous fixerez au dessus de l'os de la poitrine (**à l'endroit des glandes lymphatiques**) afin de travailler en circuit fermé. Ensuite, trempez les gants dans de l'eau minérale. Les gants doivent être imbibés tout au long du soin, il est recommandé de garder un bol d'eau à proximité afin d'y replonger les gants régulièrement.

Il est recommandé de suivre les positions suggérées dans le manuel afin d'obtenir d'excellents résultats. Les positions sont en accord avec les mouvements d'un modelage classique, c'est-à-dire vers le haut, l'extérieur et couvrant tous les muscles.

Le client va ressentir un doux modelage qui aura pour effet de remonter les traits et atténuer les rides d'expressions.

La paire de sondes à 2 têtes :

Placez des cotons tiges dans chaque embout et les tremper les dans l'eau minérale. Assurez-vous qu'ils soient toujours mouillés. Suivez les mouvements indiqués dans ce guide.

La paire de sondes à tête unique :


La sonde à tête unique le bouton rose augmente l'intensité, et le bouton violet fixe l'intensité. Utilisez un gel conducteur et en rajouter si nécessaire afin d'obtenir à tout moment une bonne conductivité.

La sonde ronde ponctuelle :

Placez le pad (négatif) avec la connexion noire aussi près que possible de la zone de traitement. Le système nécessite un circuit fermé, donc plus on le placera près de la zone, plus le soin sera efficace.
(par exemple : si vous utilisez le prog. 8 .7, placez le pad sur le tendon d'Achille).

Effet Lifting Poitrine

- Le bouton rose augmente l'intensité
- Le bouton violet fixe l'intensité

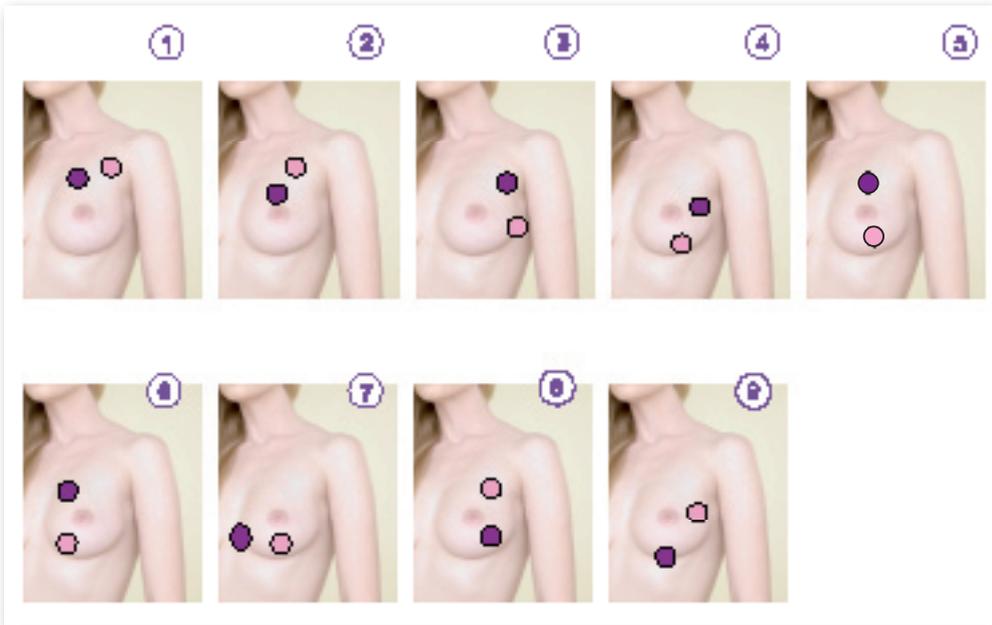

Avant le soin, assurez-vous d'avoir couvert les disques de métal avec suffisamment de gel conducteur et si nécessaire en rajouter en cours de soin. Pour le confort du client et le succès du traitement.


(Gel type ultrason ou échographie ou un gel conducteur aqueux)

Un soin dure 30 mn. Durant le soin vous suivrez les positions comme indiquées ci-dessus. Vous placerez les embouts comme montré sur le schéma et vous les maintiendrez 8 secondes minimum avant de passer au schéma suivant, et répétez deux fois de suite chaque position.

On fera donc deux sessions de 8 secondes minimum chacune avant de passer au schéma suivant. Lorsque vous aurez fait les 9 positions sur les deux seins, vous pourrez refaire tous les mouvements durant 30 minutes.

Effet Lifting Taille et Abdomen

- Le bouton rose augmente l'intensité
- Le bouton violet fixe l'intensité

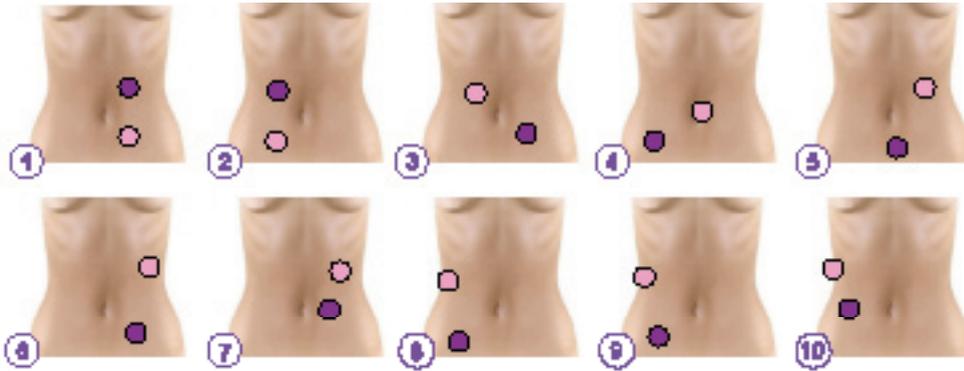


Avant le soin, assurez-vous d'avoir couvert les disques de métal avec suffisamment de gel conducteur et si nécessaire en rajouter en cours de soin. Pour le confort du client et le succès du traitement (*gel type ultrason ou échographie ou un gel conducteur aqueux*)

Un soin dure 30 mn. Durant le soin vous suivrez les positions comme indiquées ci-dessus. Vous placerez les embouts comme montré sur le schéma et vous les maintiendrez 8 secondes minimum avant de passer au schéma suivant, et répétez deux fois de suite chaque position.

On fera donc deux sessions de 8 secondes minimum chacune avant de passer au schéma suivant. Lorsque vous aurez fait les 10 positions, vous pourrez refaire tous les mouvements durant 30 minutes.

Effet Lifting Fesses & Cuisses

- Le bouton rose augmente l'intensité
- Le bouton violet fixe l'intensité

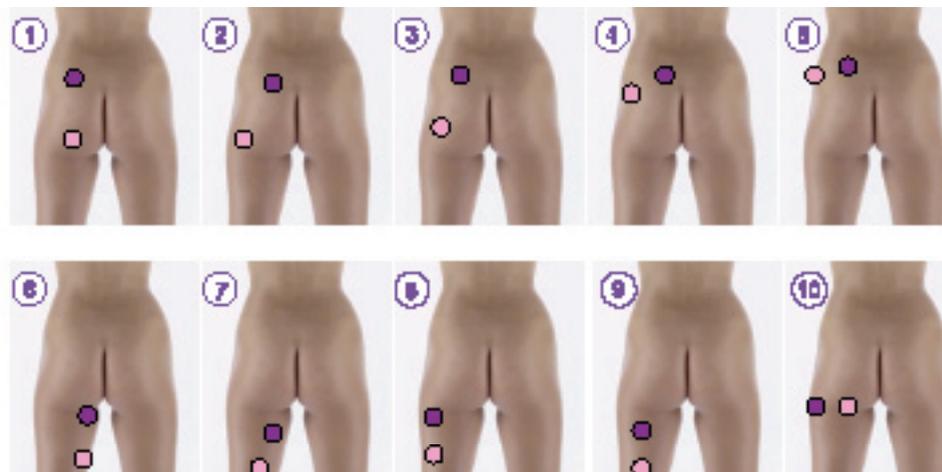


Avant le soin, assurez-vous d'avoir couvert les disques de métal avec suffisamment de gel conducteur et si nécessaire en rajouter en cours de soin. Pour le confort du client et le succès du traitement (**gel type ultrason ou échographie ou un gel conducteur aqueux**)


Un soin dure 30 mn. Durant le soin vous suivrez les positions comme indiquées ci-dessus. Vous placerez les embouts comme montré sur le schéma 1 et vous les maintiendrez 8 secondes minimum avant de passer au schéma suivant, et répétez deux fois de suite chaque position.

On fera donc deux sessions de 8 secondes minimum chacune avant de passer au schéma suivant. Lorsque vous aurez fait les 10 positions, vous pourrez refaire tous les mouvements durant 30 minutes.

Soin peau grasse et à tendance acnéique (sondes à têtes doubles)

MOUVEMENTS	SYMBLES
Se déplacer en direction de la flèche	
Se déplacer en direction de la flèche en effleurage sur la zone non visible (par ex : mouvement 7)	
Déplacer les embouts face à face afin de traiter la zone entre les lignes (ex : 24, 25, 26,39)	
Se déplacer avec les embouts en opposition - l'un vers le haut, l'autre vers le bas (exemple 38) ou l'un vers la droite et l'autre vers la gauche (exemple 23)	
« Point fixe » - on masse 5 secondes avec chaque embout (exemple 11-17). Chaque  représente un embout.	

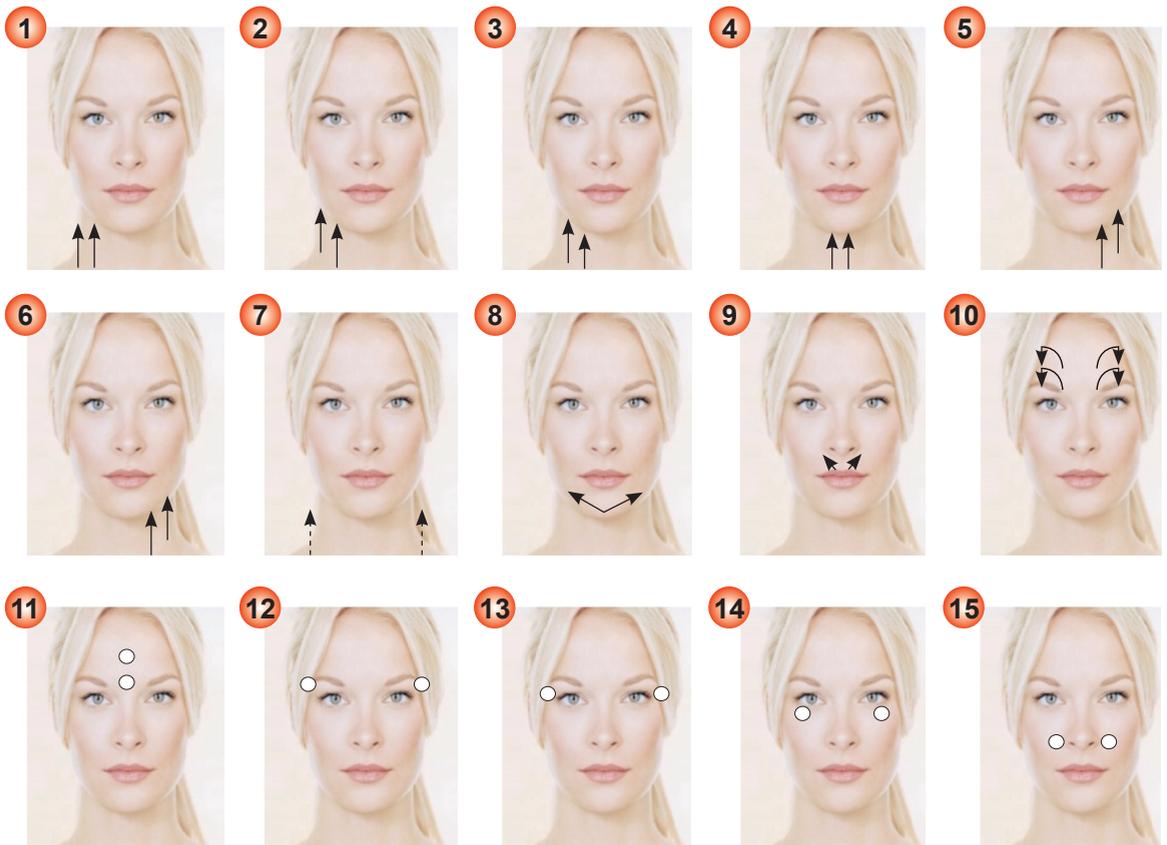

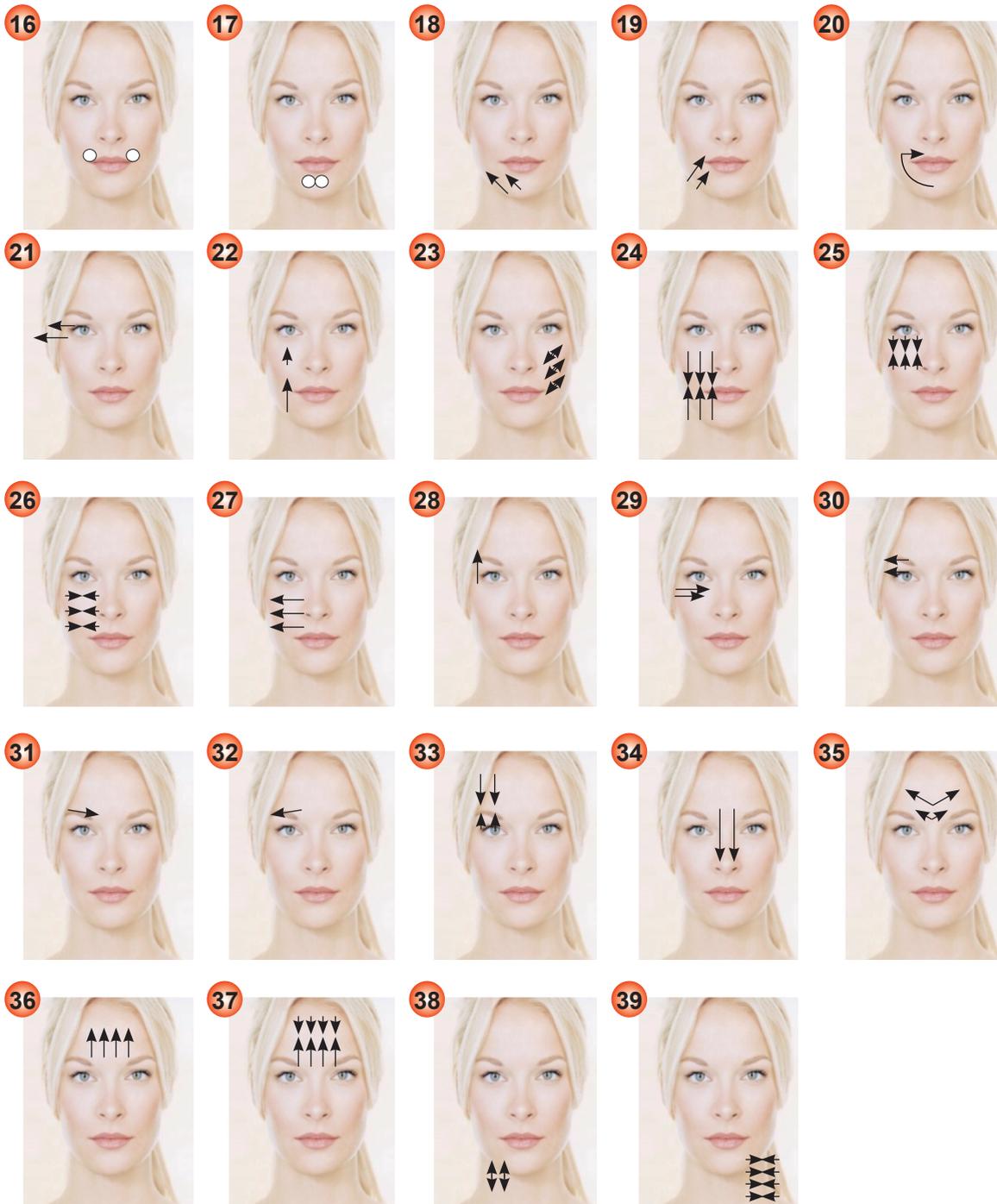

Avant le soin, placer les coton tiges dans les 4 trous et les tremper dans de l'eau minérale. Les cotons tiges doivent être mouillés et en bon état durant tout le soin. Les tremper à nouveau et les changer si nécessaire.

Le traitement complet comprend 5 étapes principales :

Le nettoyage : Pendant les 5 premières minutes, on se concentre sur la préparation de la zone à traiter avec des mouvements aléatoires. Pendant cette étape on nettoie la peau de ses impuretés.


Lent : General Treatment Option : Etape principale. Suivre les mouvements ci dessus (**de façon lente**) durant 20 minutes.

Rapide : Suivre les mouvements ci dessus (**de façon rapide**) durant 10 minutes. Cette étape est différente de la précédente par la forme de son onde et l'objectif est de se concentrer sur le drainage lymphatique et de préparer la peau à recevoir au mieux le traitement suivant.

EMR : «Extra Muscles Reaction» : Suivre les mouvements ci dessus (**de façon rapide**). Durée 10mn. La différence entre cette étape et la précédente est la forme de l'onde et son objectif est de se concentrer sur la tonification musculaire et de préparer la peau à recevoir au mieux le traitement suivant.

Hydratation : Phase finale. Durée 5mn. Durant cette étape, vous utiliserez toutes sortes de produits ou crèmes de type aqueux (**formules à base d'eau**) des vitamines, des sérums avec lesquels vous allez nourrir et hydrater la peau. Les cotons-tiges doivent être trempés dans le produit et vous déplacerez les sondes sur tout le visage (sans mouvements spécifiques).

Relaxation Plantaire

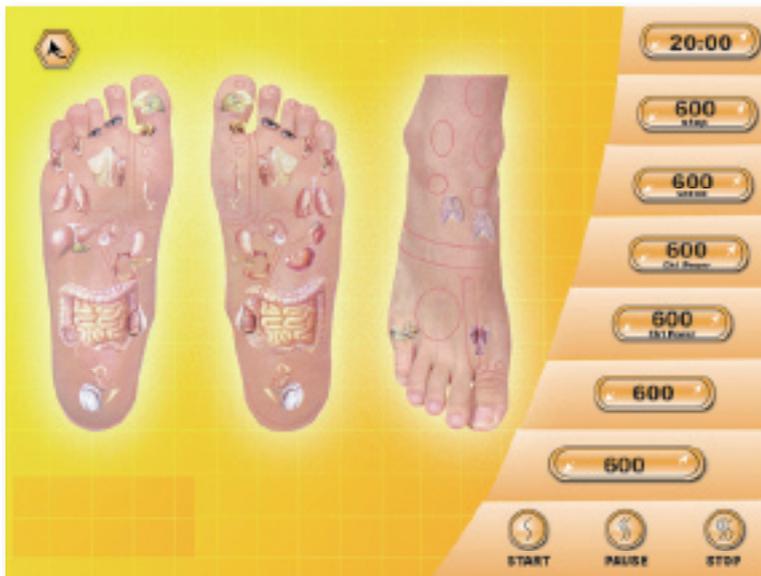

La réflexologie est un traitement qui a pour but de cibler les organes internes par l'intermédiaire des pieds en pressant et en envoyant du micro courant sur les points spécifiques. Le traitement dure 30 mn (**15 mn par pied**).


Pour un résultat optimal, trempez les pieds dans de l'eau chaude avant le traitement. Fixez le clip noir (-) à un pad et le placer à 5 cm au dessus du tendon d'Achille. Vous utiliserez la sonde à tête unique ponctuelle pour masser chaque pied, en vous déplaçant d'un point à l'autre durant quelques minutes et en vous concentrant sur les points d'énergie ou sensibles selon le ressenti de votre client et en vous aidant du guide.





Vous pouvez également utiliser la même sonde sur d'autres endroits du corps en plaçant le pads (-) à 5cm de la zone traitée.


Effet Lifting Visage et Cou (avec les Electro-Gants)

MOUVEMENTS	SYMBOLES
Se déplacer en direction de la flèche	
Se déplacer en direction de la flèche en effleurage sur la zone non visible (ex : mouvement 7)	
Se déplacer face à face afin de traiter la zone entre les lignes (ex : 31,33,44)	
Se déplacer avec les gants en opposition - un vers le haut, l'autre vers le bas (ex : 43,50) ou un vers la droite et l'autre vers la gauche (ex : 46)	
« Point fixe » -Exercer une légère pression pendant 5 secondes (exemple 11-17) Chaque  représente un embout	
Exercer une légère pression en effectuant des mouvements circulaires sur ce point pendant 5 secondes (ex : 8-13)	
Effectuer un effleurage avec les deux mains sur l'ensemble de la zone ciblée (ex : 16 - massage de la nuque jusqu'à la tête avec les gants) (ex : 34 - massage du demi-visage de manière à ce qu'un gant suive l'autre)	

- N'oubliez pas de porter des gants en latex sous les Electro-Gants !
- Vérifiez que la zone soit propre et démaquillée.
- Trempez les Electro-Gants dans l'eau minérale avant de commencer et veillez à ce qu'ils restent humides tout au long du soin. Les mouillez à nouveau si nécessaire.

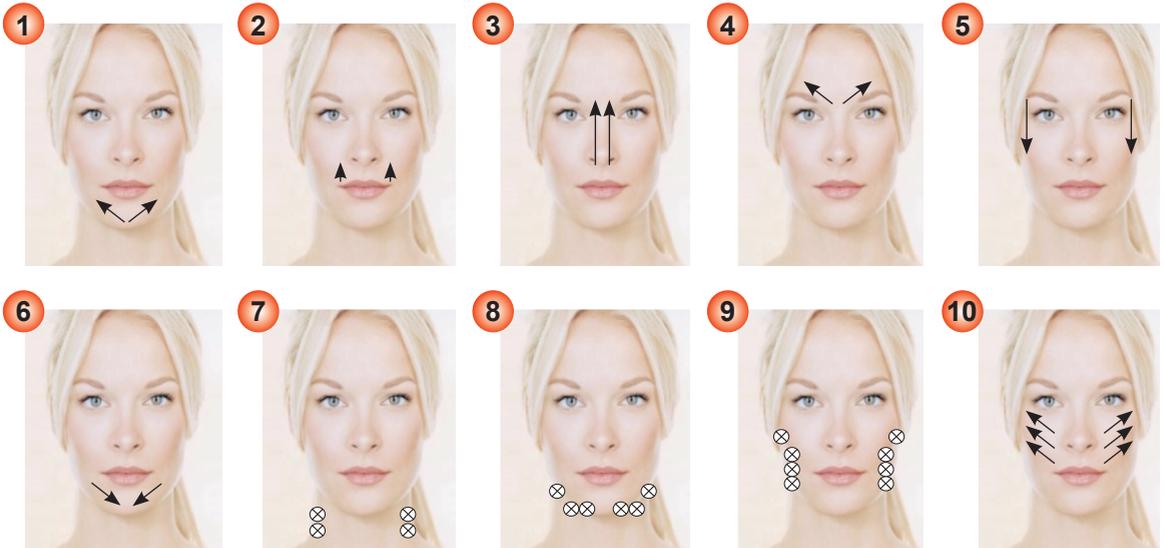

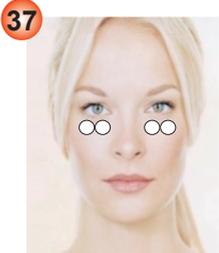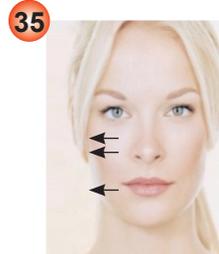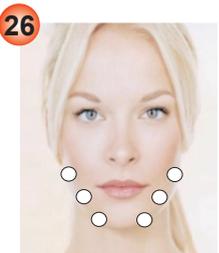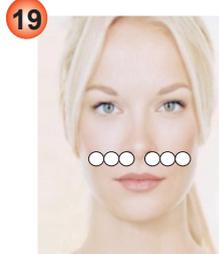

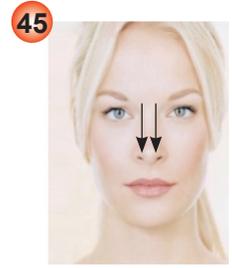

NEW LIFE
corps & visage

Tél. : 0820 303540

Distributeur France exclusif - Life Sport International
Le Ducal - Port Marina Baie des Anges - 06270 Villeneuve Loubet
www.venus-newlife.fr