



84172944_CntrNEXT_QRG_mmoL_FRsw_FpBp_v2

Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT



La bandelette réactive CONTOUR®NEXT

MISE EN GARDE : Utiliser uniquement les bandelettes réactives CONTOUR NEXT de Bayer avec le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT.

Allumer et éteindre le lecteur de glycémie

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **OK** pour allumer ou éteindre le lecteur de glycémie.
- L'insertion d'une bandelette réactive dans le port d'insertion allume le lecteur de glycémie.

Touches de défilement Haut/Bas/OK

- Les touches de défilement ▲ ou ▼ permettent de modifier une par une les valeurs ou les options. Pour faire défiler, il suffit de maintenir la touche ▲ ou ▼ enfoncée.
- Appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner l'option en surbrillance.
- Pour quitter le Journal ou les Tendances et revenir au Menu principal, appuyer sur la touche **OK**.
- Pour quitter le mode Configuration et revenir au Menu principal, faire défiler vers le bas jusqu'à **Menu principal** et appuyer sur la touche **OK**.

Lire le manuel d'utilisation CONTOUR®NEXT ainsi que la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions complètes. Pour un usage de diagnostic in vitro.

Configuration initiale du lecteur de glycémie

Il est nécessaire de paramétrer le lecteur de glycémie avant de réaliser le premier test de glycémie.



1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche **OK** pour allumer le lecteur de glycémie.



2. Si nécessaire, appuyer sur la touche ▼ pour mettre la langue souhaitée en surbrillance. Faire défiler vers le bas pour visualiser d'autres langues. Appuyer sur la touche **OK** pour valider le choix effectué.

Cette capture d'écran montre comment choisir la langue souhaitée. Leur ordre peut varier en fonction du pays d'origine du lecteur.



3. Un écran confirme la langue sélectionnée.

4. Appuyer sur la touche **OK** pour terminer la configuration. Le lecteur est maintenant prêt à réaliser un test de glycémie.

Il est également possible de changer la langue, l'heure et la date dans le **Menu principal** en sélectionnant **Configuration**. Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations.

Pour obtenir de plus amples informations, en France consulter le site www.diabetes.bayer.com ou appeler le Service Clientèle de Bayer France au : 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe) et en Suisse, consulter le site www.diabetes.bayer.ch ou appeler le Service Clientèle de Bayer Diabetes Care au : 044 465 83 55.

Risques biologiques potentiels
Tous les systèmes d'autosurveillance glycémique présentent des risques biologiques potentiels. Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système de surveillance glycémique sur différents patients, doivent respecter les procédures concernant l'hygiène et la prévention des infections, en vigueur dans leur établissement. Tous les produits ou objets qui ont été en contact avec du sang humain, doivent être considérés et manipulés comme source potentielle de maladies infectieuses, même après nettoyage. L'utilisateur doit suivre les recommandations de prévention des maladies transmises par le sang dans les services de soins, telles qu'elles sont établies pour les échantillons humains potentiellement infectieux. Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir des instructions complètes.



SCHAWKI

18211 NE 68th Street, E120
Redmond, WA 98052
T: 425-881-5454

PrePress

Files prepressed on September 29, 2014

<p>DATE: September 15, 2014 CLIENT: Bayer HealthCare DESCRIPTION: Contour Next G3 QRG - French</p> <p>SCHAWK JOB#: 914051 SKU#: Multi ParentBAN# Multi DIMENSIONS: 4.0" (H) x 16.5" (W) PRINTER SPEC: 10000008210 REV 02 FONTS: Helvetica, Helvetica Neue, Skinny Mini, Mini Micra, Zapf Dingbats COLORS: Cyan Magenta Yellow Black 281 Process Build: 100C 79M 10Y 42K</p>	<p>BAN#: 84172944 Rev. 08/14 Contour Next G3 QRG - France, Switzerland Alt#1 - 08/08/14 copy changes Alt#2 - 09/15/14 copy changes</p>
--	---

Clinical Trial/Global Master Template No: XXXX
Regional Master Template No: M-QRG-0256-R0003
NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.
RELEASE: V-2 INTERNAL: R-X LANGUAGE(S): FRENCH

Test de glycémie – Prélèvement capillaire sur le bout du doigt

AVERTISSEMENT


Toujours bien se laver les mains à l'eau savonneuse et bien se les sécher avant et après le test, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.



1. Retirer l'embase réglable de l'autopiqueur.



2. Tourner d'1/4 de tour le capuchon protecteur de la lancette (sans l'enlever).

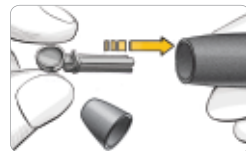

3. Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée.



4. Enlever le capuchon protecteur de la lancette.



5. Replacer l'embase.



6. Régler la molette pour obtenir la profondeur de prélèvement souhaitée.



7. Insérer l'extrémité grise de la bandelette réactive dans le port d'insertion et attendre que le lecteur de glycémie s'allume.

Le lecteur de glycémie s'allume et l'écran **Appliquer le sang** apparaît. Le lecteur est maintenant prêt pour réaliser un test de glycémie.



8. Appuyer fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement et appuyer sur la touche de commande.

Masser la main et le doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.



9. Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang.

Si la première goutte de sang n'est pas suffisante, le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores. L'utilisateur dispose d'environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette réactive. Suivre les instructions affichées sur l'écran du lecteur de glycémie.



10. L'écran AutoLog* apparaît. Sélectionner **À jeun, Avant repas, Après repas** ou **Aucun marqueur**, et appuyer sur la touche **OK**.

Si le résultat est supérieur ou inférieur aux intervalles cibles personnels réglés, le résultat apparaît systématiquement à l'écran sans aucune manipulation nécessaire.



Une fois la sélection réalisée, le résultat du test s'affiche. Le test de glycémie est maintenant terminé et le résultat identifié.

Si le résultat du test est en dehors de l'intervalle cible, il apparaît accompagné d'une annotation et l'écran AutoLog ne s'affiche pas.

11. Pour consulter les Options et ajouter un rappel ou une annotation, appuyer sur la touche **OK** avant de retirer la bandelette réactive.

Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir de plus amples instructions sur l'usage des Options. Pour éteindre le lecteur de glycémie, retirer la bandelette réactive.

* AutoLog est configuré par défaut sur le lecteur de glycémie. Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir de plus amples informations sur la fonction AutoLog. Le lecteur de glycémie est configuré et verrouillé pour afficher les résultats en mmol/L. Si le résultat est exprimé en mg/dL, contacter le service Clientèle de Bayer France au : 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou en Suisse au 044 465 83 55.

MISE EN GARDE:

- L'autopiqueur de Bayer n'est pas destiné aux professionnels de santé. Il ne doit pas être utilisé par plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.
- Pour retirer la lancette de l'autopiqueur, consulter la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées.
- Les dessins représentant l'autopiqueur ne servent que d'illustration.

Écran Menu principal

1. Le **Journal** est mis en surbrillance. Pour consulter le journal, appuyer sur la touche **OK**.



2. Pour visualiser toutes les moyennes et tous les résumés, appuyer sur la touche ▼ pour mettre **Tendances** en surbrillance, puis appuyer sur la touche **OK**.

3. Pour modifier ou régler le lecteur de glycémie, mettre **Configuration** en surbrillance et appuyer sur la touche **OK**.

Pour obtenir de plus amples informations, en France consulter le site www.diabetes.bayer.com ou appeler le Service Clientèle de Bayer France au : 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe) et en Suisse, consulter le site www.diabetes.bayer.ch ou appeler le Service Clientèle de Bayer Diabetes Care au : 044 465 83 55.



Distribué par :
Bayer HealthCare S.A.S.
Division Diabetes Care
13 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
France
Service Clientèle :
0 800 34 22 38
www.diabetes.bayer.com

Distribution pour la Suisse :
Bayer (Schweiz) AG
BHC Medical Care
Diabetes Care
Grubenstrasse 6
CH-8045 Zürich
Hotline: 044 465 83 55
Fax: 044 465 82 82
E-Mail: info@bayerdiabetes.ch
Internet: www.diabetes.bayer.ch

Bayer, la croix Bayer, CONTOUR et le logo No Coding sont des marques déposées de Bayer.

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland



84172944 © 2014 Bayer. Tous droits réservés. Rev. 08/14