

Manuel d'utilisation

Commande | Barrières latérales des modèles S 862-2, S 862-2W, S 860-2, S 861-2W, S 861-1

VÖLKER

Relever les barrières latérales

Pour relever les barrières latérales, tirez la partie supérieure de la barrière latérale vers le haut, d'abord côté tête, puis côté pied : vous devez entendre le "clac" indiquant que les barrières sont bien encliquetées.



Abaisser les barrières latérales

Pour abaisser les barrières latérales, relevez légèrement la partie supérieure de la barrière sur un côté.

De l'autre main, tirez vers l'extérieur le taquet situé sur le côté puis, à l'aide de la main faites lentement coulisser la barrière vers le bas (III. 3).



Procédez d'abord côté pied, puis côté tête.

Pour des raisons de sécurité, les barrières latérales ne peuvent pas être débloquées lorsqu'elles supportent une charge par le dessus.



ATTENTION "Risque de pincement" Les barrières latérales doivent être soit entièrement relevées et verrouillées, soit entièrement abaissées.

Deux configurations sont possibles :

Toutes les barrières abaissées (III. 1) : le lit est accessible par les deux côtés, sans restriction.

Toutes les barrières relevées (III. 2) : le résident bénéficie d'une protection maximale contre une chute accidentelle du lit.



ATTENTION Toute personne chargée de la manipulation des barrières latérales doit avoir lu les instructions suivantes et les respecter :

- Lors de l'activation du réglage du relève-buste, du relève-cuisses ou du repose-jambes, ou de la montée ou bien encore des barrières latérales, il convient impérativement de veiller à ce que le résident n'ait aucun contact avec les barrières latérales, et à ce qu'aucune partie du corps ne dépasse des barrières latérales.
- Si les barrières latérales sont utilisées pour une personne dont l'état psychique rend leur utilisation nécessaire, il convient de veiller à ce que la télécommande se trouve hors de sa portée ou que ses fonctions soient entièrement verrouillées. Il faut veiller dans tous les cas à exclure tout danger éventuel.
- Des housses de protection sont disponibles pour les barrières latérales en tant qu'accessoires ; ces housses représentent une protection supplémentaire contre les blessures au contact des barrières latérales. L'utilisation de ces housses de protection est recommandée pour toutes les personnes chez lesquelles le risque de blessures par contact inévitable avec les barrières latérales est très élevé. Leur utilisation n'exempt toutefois en rien le personnel soignant ou le patient à prendre toutes les précautions nécessaires qui s'imposent lors de l'utilisation du lit.
- Lorsque les barrières latérales sont utilisées, elles doivent toujours être soit entièrement relevées et verrouillées, soit entièrement abaissées jusqu'à la butée. En raison du risque de pincement, elles ne doivent **en aucun cas** ne pas être verrouillées.
- Si les barrières latérales sont endommagées, il existe un risque de chute.