

ACCU-CHEK® Aviva

Roche


Pour commencer

Guide de démarrage

AVERTISSEMENT
Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.


ACCU-CHEK®

Contenu

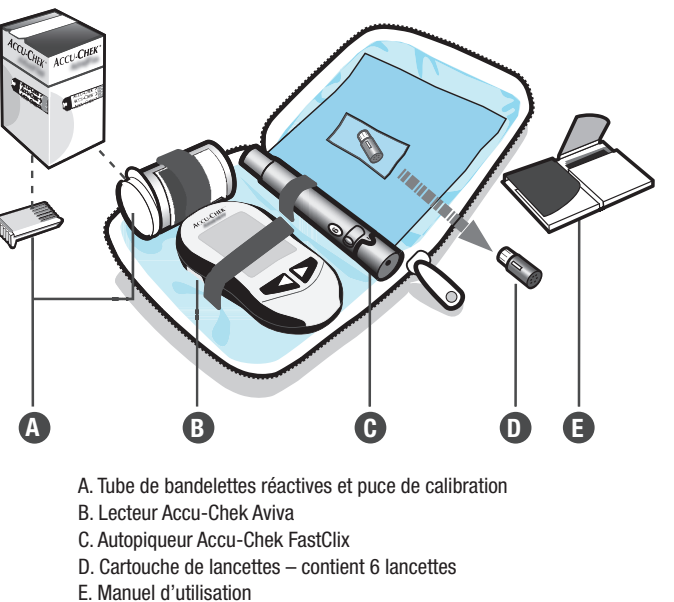



AVERTISSEMENT
L'autopiqueur est conçu exclusivement pour un usage personnel.

Préparation du lecteur pour une mesure ou un test


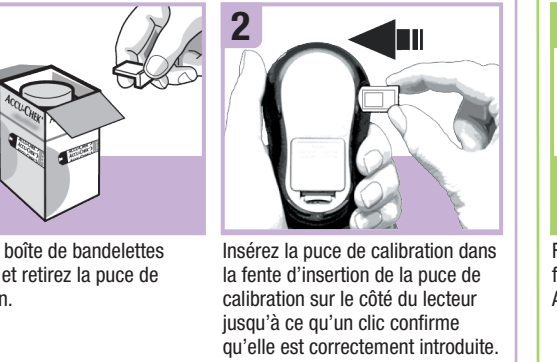


REMARQUE
Les puces de calibration contenues dans les boîtes de bandelettes réactives ont changé leur couleur de blanche à **noire**. Une fois reçue la puce de calibration **noire**, insérez-la dans le lecteur. Continuez à utiliser la puce de calibration **noire** même si les boîtes de bandelettes réactives neuves contiennent des puces de calibration de couleurs différentes ou de codes différents.


Préparation de l'autopiqueur

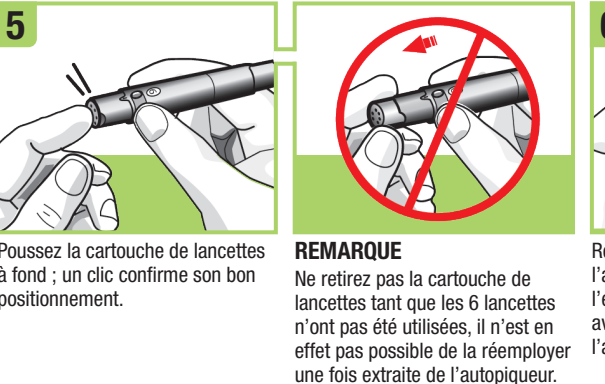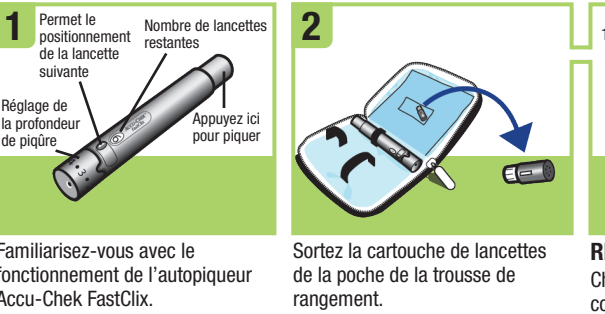

REMARQUE
Ne retirez pas la cartouche de lancettes tant que les 6 lancettes n'ont pas été utilisées, il n'est en effet pas possible de la réemployer une fois extraite de l'autopiqueur.

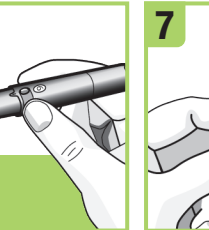
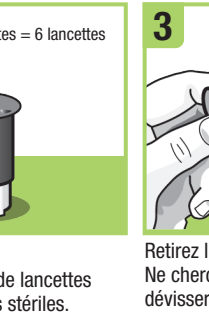


Utilisation de l'autopiqueur : appuyez sur le bouton de déclenchement de l'autopiqueur pour armer et piquer, cela en 1 seul clic.

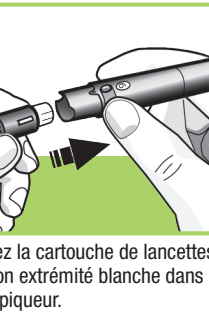



Régalez la profondeur de pénétration de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort éprouvée lors de la piqûre. Commencez sur 2 ou 3. Pour une peau épaisse, réglez sur un chiffre plus élevé.

Réglage de l'heure et de la date sur le lecteur

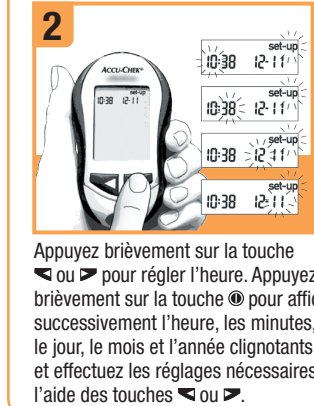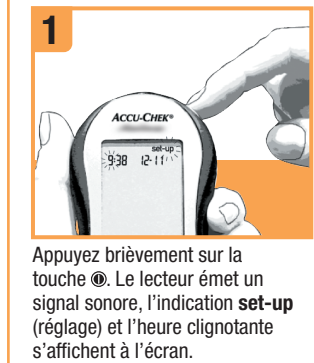

Appuyez brièvement sur la touche ◀ ou ▶ pour régler l'heure. Appuyez brièvement sur la touche ● pour afficher successivement l'heure, les minutes, le jour, le mois et l'année clignotants et effectuez les réglages nécessaires à l'aide des touches ◀ ou ▶.


Réalisation d'une mesure de glycémie

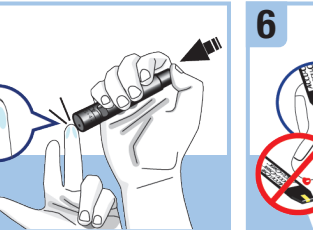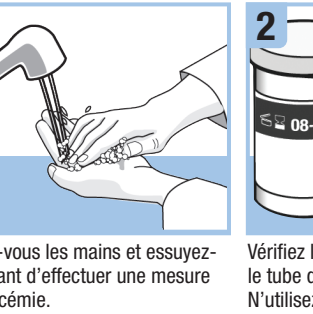

Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'au moment où se fait entendre un "clic" qui confirme la ponction du doigt.





Mettez la goutte de sang obtenue en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.

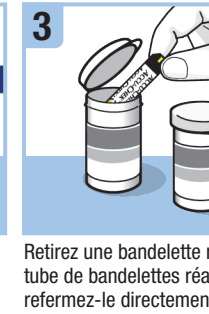


Le lecteur émet un signal sonore et le symbole d'une goutte de sang clignotante s'affiche.



Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

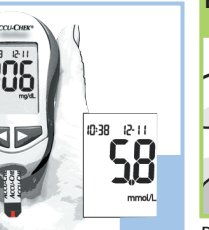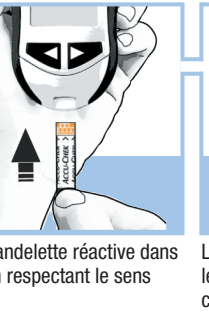

Le lecteur émet un signal sonore et le symbole d'une goutte de sang clignotante s'affiche.

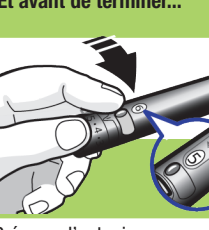

Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

Messages d'erreur

Consultez immédiatement le chapitre 5, Affichages de l'écran et messages d'erreur, du manuel d'utilisation dès lors que le lecteur affiche l'un des messages d'erreur suivants.

E-1 La bandelette réactive est peut-être endommagée ou ce n'est pas la bonne puce de calibration. Retirez la bandelette réactive et réinsérez-la. Si le message s'affiche de nouveau, éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce de calibration.

E-2 Ce n'est pas la bonne puce de calibration. Éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce de calibration.

E-3 Il est possible que votre glycémie soit extrêmement élevée ou qu'une erreur soit survenue au niveau du lecteur ou de la bandelette réactive. Si cela correspond à votre état de santé, contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais. Si le résultat ne correspond pas à votre état de santé, recommencez la mesure et reportez-vous au chapitre 2, Résultats glycémiques inhabituels, du manuel d'utilisation. Si le résultat de la deuxième mesure ne correspond pas à votre état de santé, effectuez un test de contrôle avec la solution de contrôle et une nouvelle bandelette réactive. Si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle acceptable, assurez-vous que vous avez bien suivi les différentes étapes de réalisation de la mesure et recommencez-la avec une nouvelle bandelette réactive. Si le message E-3 s'affiche de nouveau après votre mesure de glycémie, votre résultat glycémique peut être extrêmement élevé et supérieur à l'intervalle de mesure du système. **Contactez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais.** Si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle acceptable, reportez-vous au chapitre 4, Interprétation des résultats de contrôle hors de l'intervalle acceptable, du manuel de l'utilisation.

E-4 La bandelette réactive n'a pas aspiré suffisamment de sang ou de solution de contrôle pour que la mesure de glycémie ou le test de contrôle soit possible ou bien l'aspiration suffisante de sang ou de solution de contrôle s'est produite après le démarrage de la mesure de glycémie ou du test de contrôle. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-5 Ce message pourrait s'afficher à l'écran si vous utilisez une puce de calibration blanche avec le lecteur. La puce de calibration provient d'un lot de bandelettes réactives périmé. Éteignez le lecteur et insérez une nouvelle puce de calibration. Assurez-vous que l'heure et la date du lecteur sont correctes.

E-6 L'aspiration du sang ou de la solution de contrôle par la bandelette réactive a été effectuée avant que ne s'affiche le symbole de la goutte clignotante à l'écran. Éliminez la bandelette réactive et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle.

E-7 Une défaillance électronique s'est produite ou, ce qui est rare, une bandelette réactive usagée a été retirée du lecteur et réinsérée. Éteignez le lecteur puis rallumez-le ou retirez la pile pendant 20 secondes et réinstallez-la. Effectuez une mesure de glycémie ou un test de contrôle.

E-8 La température est supérieure ou inférieure aux températures préconisées pour l'utilisation du système. Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système. Déplacez-vous dans un endroit où la température est conforme à l'intervalle de températures préconisé, attendez 5 minutes et recommencez la mesure de glycémie ou le test de contrôle. N'essayez pas d'accélérer le réchauffement ou le refroidissement du lecteur.

E-9 La pile est presque à plat. Remplacez la pile maintenant.

E-10 Il est possible que les réglages de l'heure et de la date soient erronés. Assurez-vous que l'heure et la date sont correctes et corrigez si nécessaire.

REMARQUE
Si le message d'erreur s'affiche de nouveau, contactez Roche.

MISE À JOUR : 2011-08

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, and FASTCLIX are trademarks of Roche.

©2011 Roche Diagnostics
06527175001(01)-0811

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 50561
V4/1 – 06527175001_01 – Schwarz

Roche USA – 50561
V4/2 – 06527175001_01 – Cyan

Roche USA – 50561
V4/3 – 06527175001_01 – Magenta

Roche USA – 50561
V4/4 – 06527175001_01 – Yellow

CE 0088