

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Remarque : Vérifier l'absence de dommages dus au transport sur TOUTES les pièces. Si des dommages sont constatés, NE PAS utiliser le produit. Contacter le transporteur/distributeur pour connaître la procédure.

AVERTISSEMENT

- N'installez pas et n'utilisez pas cet équipement avant d'avoir lu et compris la présente fiche d'instructions. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez un professionnel des soins de santé, un revendeur ou un technicien avant d'essayer d'utiliser cet équipement, sous peine de dommages ou de blessures.
- Les quatre embouts de pieds **DOIVENT** tous rester en contact, à tout moment, avec le fond de la douche/baignoire, constitué d'une surface plane.
- Inspectez **TOUJOURS** la chaise de douche pour vous assurer qu'elle est positionnée correctement et de manière stable avant toute utilisation. N'utilisez **PAS** la chaise de douche si elle est bancale ou instable.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur des fonds de baignoire de plus de 16 pouces (40 cm) de large.
- Les utilisateurs aux capacités physiques limitées doivent être supervisés ou aidés dans l'utilisation de la chaise de douche.
- La chaise de douche n'est **PAS** destinée à servir de banc de transfert, de dispositif de transfert ou de dispositif de montée.
- Ces chaises de douche (modèles H291 et H296) ont une limite de poids de 143 kg chacune.
- Faites preuve de prudence lors de l'assemblage de la chaise de douche pour éviter de vous pincer.
- Pour le modèle de chaise de douche H296 – Assurez-vous que les boutons pression ressortent entièrement des trous situés dans les brides de support arrière.
- Ce produit doit être utilisé à une température ambiante située entre 10° et 40° C.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont conçus et fabriqués spécialement pour une utilisation en combinaison avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés pour une utilisation par Invacare et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation avec les produits Invacare.

AVERTISSEMENT RELATIF À L'INSTALLATION

- Avant TOUT réglage, TOUTE réparation ou maintenance et AVANT usage, assurez-vous que les pièces soient toutes correctement installées et bien en place.

Généralités

Symboles



Avertissement indique une situation potentiellement dangereuse si elle n'est pas évitée et peut résulter dans la mort ou des blessures graves.



La mention Attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages et/ou des blessures légères.



Ce produit est conforme à la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit, indiquée dans ce manuel, est de cinq ans lorsqu'il est utilisé dans le respect des instructions de sécurité et des intervalles de maintenance stipulés dans le présent manuel. La maintenance et l'inspection doivent être réalisées au moins tous les six mois.

Utilisation conforme

AVERTISSEMENT

Risque de blessure. Évitez tout impact excessif sur la chaise de douche en laissant le poids de l'utilisateur tomber sur la chaise.

Ce produit est destiné uniquement à aider à prendre une douche et à une utilisation dans la salle de bain. Toute autre utilisation est proscrite.

Nettoyage

Remarque : Avant d'utiliser des produits nettoyants, testez-les sur une zone située sur le dessous de la chaise afin de vous assurer que le produit ne provoque pas de décoloration ou de taches.

1. Retirez les pieds et le dossier de la chaise de douche.
2. Utilisez de l'eau et un produit nettoyant doux et non abrasif pour nettoyer la chaise de douche.

Après utilisation

Élimination

Lorsque le produit n'est plus utilisable, le produit, les accessoires et les matériaux d'emballage doivent être triés.

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie.

Réutilisation

AVERTISSEMENT

Risque de blessure. Toujours faire inspecter le produit par un revendeur avant de le céder à un autre utilisateur. Si des dommages sont détectés, NE PAS utiliser le produit. Sinon, il y a un risque de blessure.




Assemblage de la chaise de douche

Pose/Réglage des tubes arrière

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la chaise de douche est à niveau et stable avant utilisation.

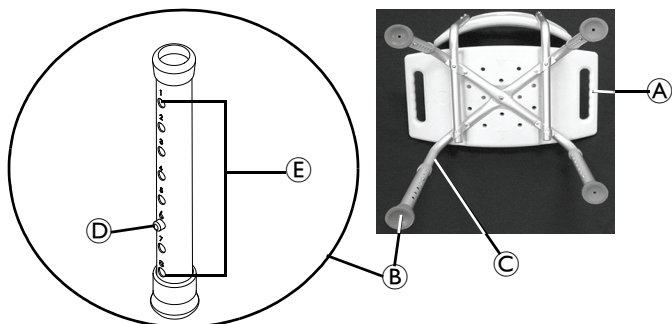


1. Laissez la chaise arriver à température ambiante, si nécessaire.
2. Retournez la chaise ① et placez-la sur une surface plane et stable (sol ou table).
3. Posez le tube arrière ② sur le pied ③.
4. Enfoncez le bouton pression ④ et faites glisser le tube vers le haut ou le bas dans le trou de réglage souhaité ⑤.
5. Assurez-vous que le bouton pression ressorte entièrement des trous de réglage du tube arrière.

Remarque : un clic audible se fait entendre lorsque le bouton pression s'enclenche entièrement.

6. Répétez les opérations 2 à 5 pour les trois pieds restants.

Remarque : assurez-vous que les quatre pieds soient tous réglés à la même hauteur.

Pose du dossier – Modèle H296 uniquement

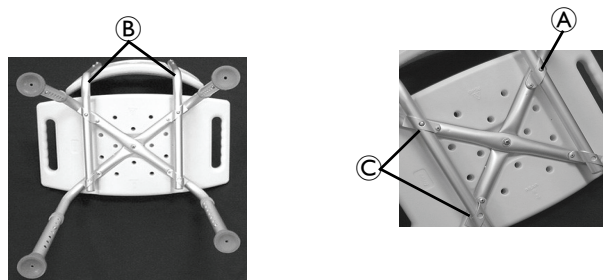

1. Placez la chaise de douche sur son côté, sur une surface plane et stable.
2. Enfoncez les boutons pression ① sur les tubes support arrière ② et faites glisser ceux-ci dans les brides de support arrière ③.
3. Assurez-vous que les deux boutons pression soient entièrement engagés dans les trous des brides de support arrière.

Remarque : deux clics audibles se font entendre lorsque les boutons pression s'enclenchent entièrement.

Utilisation de la chaise de douche

AVERTISSEMENT

Risque de blessure. Ne soulevez PAS la chaise de douche alors que l'utilisateur y est assis. Le dossier risque de se détacher, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages.