

DICOM Anonymizer Pro

Manuale di installazione

Table of Contents

1	ABBREVIATIONS	3
2	INTRODUZIONE	4
3	PROCEDURA D’INSTALLAZIONE	4

1 Abbreviations

Abbreviation	Description
AE	Application Entity
DICOM	Digital Imaging and COmmunications in Medicine
DIMSE	DICOM Message Service Element
DLL	Dynamic Link Library
GUI	Graphical User Interface
LAN	Local Area Network
PC	Personal Computer
RAM	Random Access Memory
SCP	Service Class Provider
SCU	Service Class User
SOP	Service-Object Pair
TCP	Transfer Control Protocol
UID	Unique Identifier
USB	Universal Serial Bus
VR	Value Representation

2 Introduzione


Il presente documento descrive i passi da compiere per la corretta installazione del software DICOM Anonymizer Pro sviluppato da NeoLogica.

Il software può essere installato ed eseguito su diverse piattaforme, tra cui Windows, Mac OS X e Linux. Per installare l'Anonymizer, l'utente dovrà selezionare l'*installer* corretto, in base alla piattaforma utilizzata. Di seguito è riportata la lista degli *Installer* forniti e della loro relativa piattaforma:


- **Windows:** *DICOMAnonymizerPro_win_32bit.exe* o *DICOMAnonymizerPro_win_64bit.exe*
- **Mac OS X:** *DICOMAnonymizerPro_macosx.dmg*
- **Linux:** *DICOMAnonymizerPro_linux_x86.sh* o *DICOMAnonymizerPro_linux_amd64.sh*
- **Altri SO compatibili con Java:** *DICOMAnonymizerPro_install_java.zip*

3 Procedura d'installazione



Per avviare l'installazione di DICOM Anonymizer Pro, è necessario lanciare l'installer appropriato, come spiegato nel capitolo precedente. Fatto questo, si avvierà la procedura guidata dell'installazione. Come prima cosa verrà richiesto di selezionare la lingua da utilizzare (v. figura sotto).

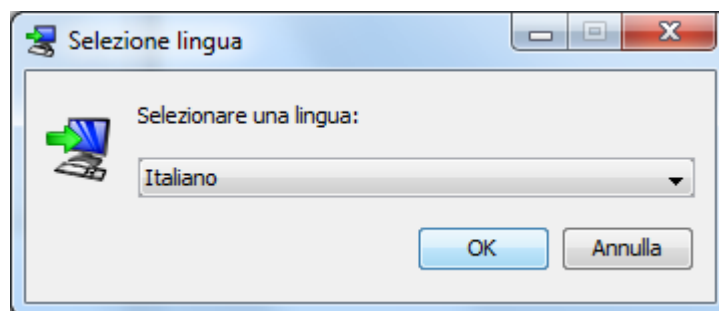


Una volta selezionata la lingua, inizierà la breve procedura di installazione:

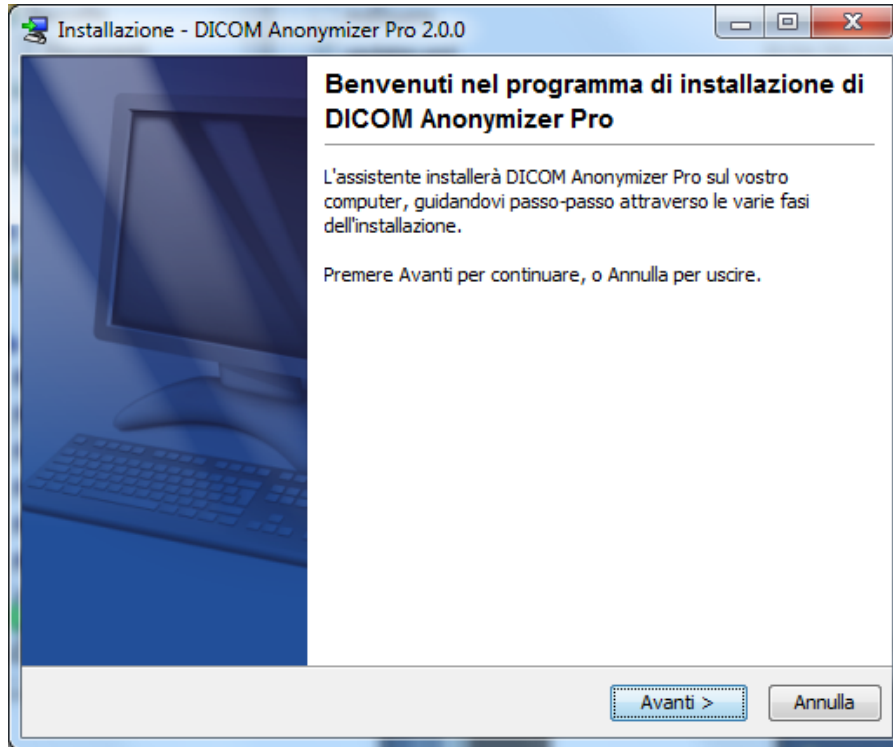

Cliccando sul pulsante *Avanti*, si accederà alla schermata di selezione della directory di installazione e della directory che conterrà i collegamenti del programma.

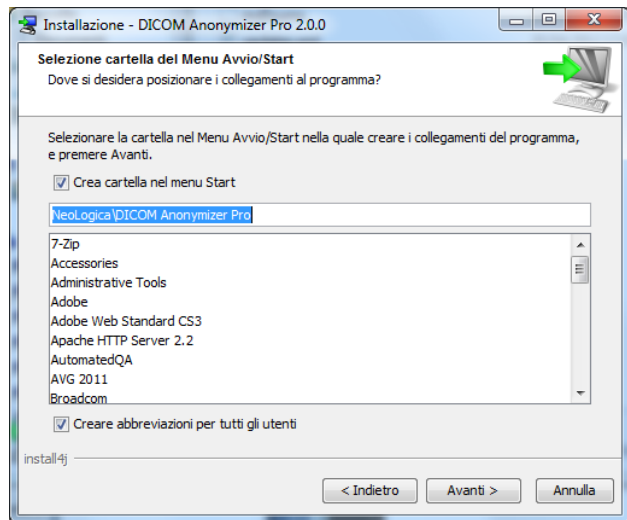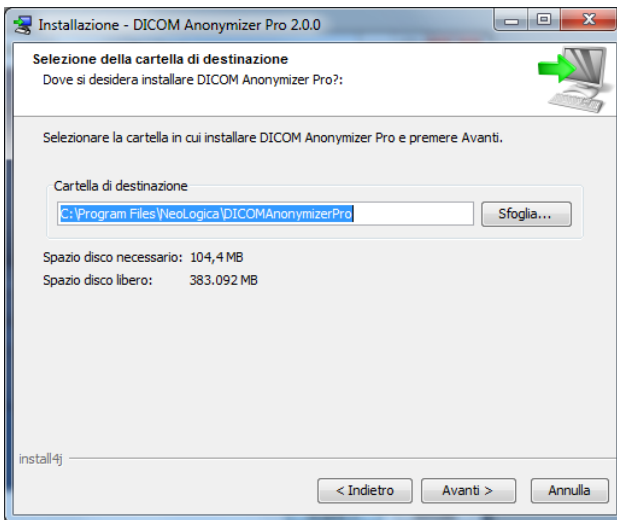

Completata questa procedura, cliccando il pulsante *Avanti* si avvierà l'ultima parte dell'installazione, al termine della quale verrà mostrato la schermata che ne confermerà il completamento. Cliccare il pulsante *Termina* per uscire dal programma di installazione.

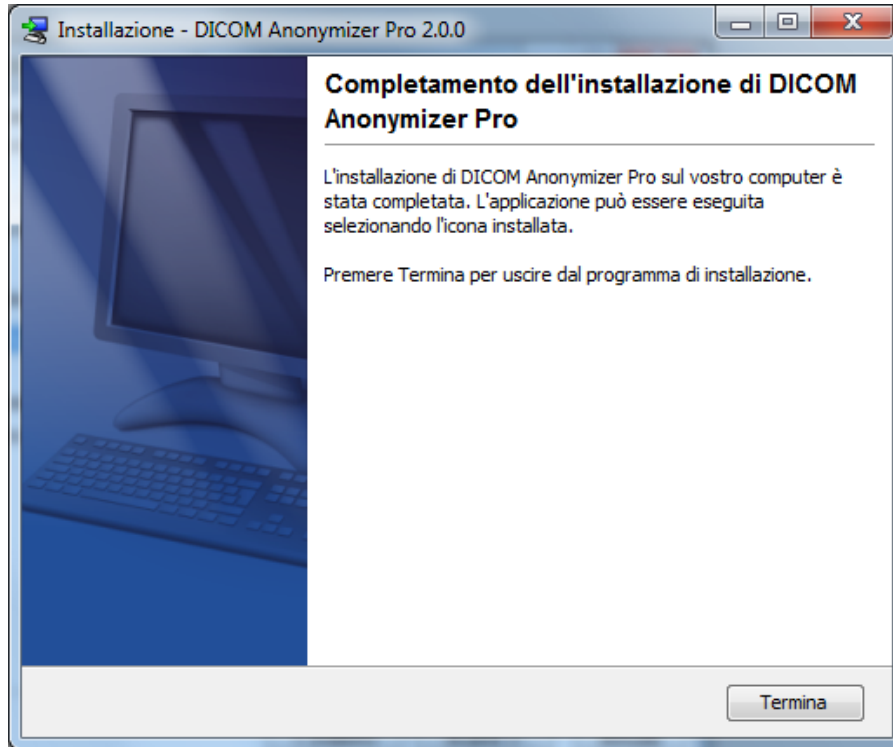

Ora DICOM Anonymizer Pro è installato correttamente. Per informazioni sul suo corretto utilizzo, consultare il *Manuale Utente*.