


Optelec Compact 4 HD



Käyttöohje

WEEE Ilmoitus

EU:n WEEE-direktiivi

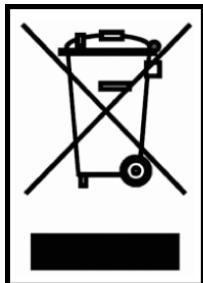

Euroopan unionin WEEE-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) astui voimaan vuonna 2003. Sen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja terveyttä sekä edistää uusiokäyttöä.

Jos tuotteessa tai sen myyntipakkauksessa on oheinen merkintä, sitä ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen.

Tietoa elektroniikka- ja sähkölaitteiden jäte- ja kierrätyspisteistä saat omasta kunnastasi.

Compact 4 HD

Käyttöohje

Version 1.1

© 2012 Optelec, the Netherlands
All rights reserved



www.optelec.com



Itälahdenkatu 23 A, 00210 Helsinki
puh. 09-615 001 22, 09-615 001 23
GSM 0400 885 301, 044 0900 790
info@polarprint.fi

www.polarprint.fi

Sisällys

1. Johdanto	6
Tästä käyttöohjeesta	7
Mitä pakkaus sisältää?	7
2. Aloittaminen	8
Compact 4 HD:n käyttäminen	9
Kameralinssin ja peilin puhdistaminen	11
Näppäimet.....	12
Virta päälle ja pois.....	14
Suurennuksen säätäminen.....	14
Katselutilan valinta	16
Pysäytysnäppäimen käyttö.....	16
3. Akun lataaminen	18
Compact 4 HD:n lataaminen	18
Valmiustila ja automaattinen sammutus.....	19
Akkuvaroitus.....	19
4. Compact 4 HD:n valikko	20
Valikon avaaminen.....	21
Liikkuminen valikossa	21
Poistuminen valikosta	21
Valikko: Information (Tiedot)	22

Valikko: Brightness (Kirkkaus).....	23
Valikko: Power (Virta).....	24
Valikko: Beeps (Ääni).....	26
Valikko: Light (Valo)	27
Valikko: Color (Väri)	28
Valikko: Reset (Alkuasetusten palautus)	29
Liite A: Turvallisuus.....	30
Liite B: Tekniset tiedot.....	31
Liite C: Takuuehdot.....	33

1. Johdanto

Onnittelut kun valitsit Compact 4 HD:n!

Optelecín ainutlaatuisen automaattitarkenteisen elektronisen suurennuslaitteen avulla voit katsella ja suurentaa painettua tekstiä sekä kuvia korkearesoluutioisella HD:lla väritilassa tai jossakin suurikontrastisessa katselutilassa. Compact 4 HD:n 4.3-tuumainen näyttö tarjoaa alhaisen 1,7- kertaisen suurennuksen avulla hyvän yleisnäkymän ja toisaalta jopa 12-kertaisen suurennuksen henkilöille, jotka tarvitsevat enemmän suurennusta.

Compact 4 HD:tä voi monitoimintaisen muotoilun, ainutlaatuisen valaistuksen ja integroidun lukutelineen johdosta käyttää lukemiseen, kuvien ja hintalappujen sekä moneen muuhun katselemiseen kotona ja liikkeellä ollessa

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia tähän tuotteeseen liittyen, ole ystävällinen ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Optelecín pääkonttoriin. Yhteystiedot löytyvät tästä käyttöohjeesta. Olemme kiitollisia palautteestasi. Toivomme, että nautit Compact 4 HD:n käyttämisestä!

Tästä käyttöohjeesta

Tämä käyttöohje tutustuttaa sinut Compact 4 HD:n ominaisuuksiin ja toimintoihin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät laitettasi.

Mitä pakkaus sisältää?


Compact 4 HD pakkaus sisältää:

- Compact 4 HD suurennuslaite
- Compact 4 HD teline
- Suojakotelo Compact 4 HD:lle
- Kantohihna
- Verkkolaite
- Puhdistusliina
- Käyttöohje

Mikäli jokin näistä puuttuu, ota yhteys myyjääsi.

2. Aloitus

Compact 4 HD on sijoitettu oikein eteesi, kun näyttö on ylöspäin ja Optelec-logo on näytön alalaidassa.

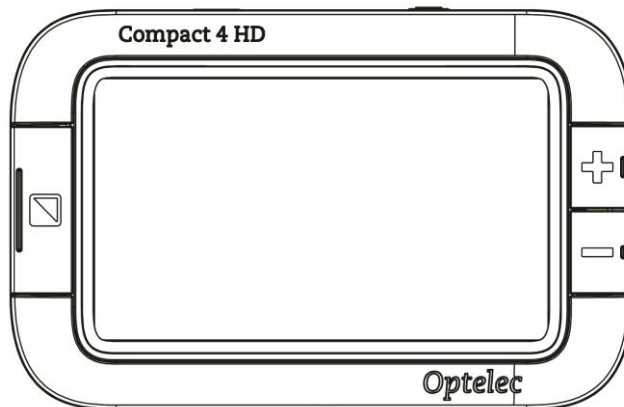

Compact 4 HD:n käyttö

Compact 4 HD:tä voit käyttää kahdella tavalla: telineen kanssa tai ilman telineettä.



Compact 4 HD suurennuslaite (ilman telineettä)



Compact 4 HD suurennuslaite telineen kanssa


Kun käytät Compact 4 HD suurennuslaitetta ilman telineettä, pidä laitetta kädessäsi ja osoita kameralla (sijaitsee laitteen takaosassa) tekstiä tai esinettä, jota haluat katsoa. Etäisyys kameran ja tekstin tai esineen välillä tulee olla 5 cm - 30 cm parhaan kuvanlaadun saamiseksi.

Compact 4 HD suurennuslaite on ihanteellinen, kun haluat nopeasti katsoa tai silmäillä esineitä tai dokumentteja.

Kun Compact 4 HD on telineessään, näyttö asettuu ergonomiseen lukuasentoon. Teline tekee erittäin helpoksi pitää Compact 4 HD:tä kädessäsi ja liikuttaa sitä tekstin päällä mahdollistaen myös pidempien tekstien lukemisen.

Kun asetat Compact 4 HD:n telineeseen, noudata seuraavaa:

1. Aseta teline eteesi
2. Aseta Compact 4 HD telineen päälle niin, että näyttö on ylöspäin ja Optelec logo on näytön alalaidassa. Telineen magneetit kohdistavat laitteen oikeaan asentoon telineeseen.

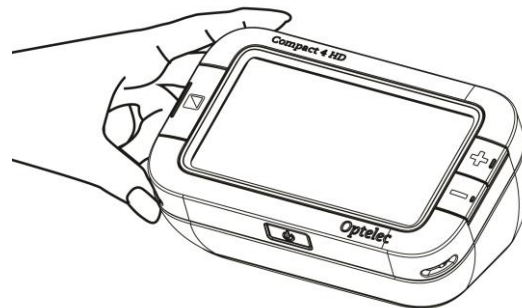

Kameralinssin ja peilin puhdistus

Paras kuvanlaatu saadaan, kun kameran linssi ja valopeili pidetään puhtaina. Likainen linssi näyttää sotkuisen kuvan ja saattaa aiheuttaa sen, että automaattitarkentava kamera tarkentaa väärin. Puhdas valopeili on tärkeä vaaleiden tai tummien tahrojen estämiseksi. Samalla varmistetaan tasaisesti valaistu kuva. Käytä puhdistamiseen mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää linssinpuhdistusliinaa.

Huom! Älä käytä linssin tai peilin puhdistamiseen vettä tai puhdistusainetta.

Näppäimet

Compact 4 HD:ssä on seuraavat näppäimet:

Katselutila



Painamalla Katselutila-näppäintä näytön vasemmalla puolella valitaan katselutila. Kolmen sekunnin painallus samuttaa valot.

Suurennus



Painamalla + tai - näppäintä näytön oikealla puolella kuvaa suurennetaan tai pienennetään. Painamalla + ja - näppäimiä samanaikaisesti avataan ja suljetaan Compact 4 HD:n valikko.

Pysäytys



Pysäytys-näppäin on laitteen päällä oikealla. Sitä painamalla voi ottaa pysäytyskuvan kauempana olevasta kohteesta. Näin voit tuoda kuvan lähemmäksi silmiä.


**Virta
päälle/pois**

Käynnistä tai sammuta laite painamalla yhden sekunnin ajan harmaata näppäintä, jossa on oranssi kuvake. Näppäin sijaitsee laitteen alaosassa keskellä.

**5V DC IN
verkkolaitteen
liitäntä**

Verkkolaitteen liitäntä on laitteen yläosassa pysäytysnäppäimen vasemmalla puolella. Liitä verkkolaite tähän. Käytä ainoastaan Compact 4 HD:n omaan verkkolaitetta.

Compact 4 HD:n kamera on laitteen kääntöpuolella.

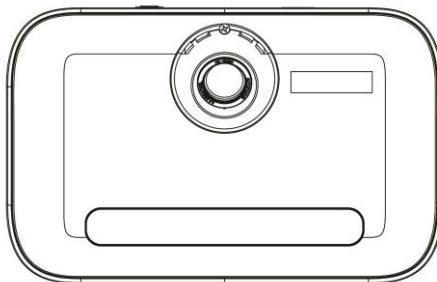

Virta päälle ja pois


Ennen kuin Compact 4 HD käynnistetään ensimmäisen kerran, akku on ladattava. Kun laite on ladattu, paina sekunnin ajan harmaata virtanäppäintä oranssilla kuvakkeella. Näppäin on laitteen etupuolella keskellä. Laite käynnistyy samassa katselutilassa kuin se oli suljettaessa. Sammuta Compact 4 HD painamalla samaa näppäintä uudelleen sekunnin ajan.

Kun käynnistät Compact 4 HD:n, kestää noin kolme sekuntia kunnes kuva näkyy näytöllä.

Suurennuksen muuttaminen

Suurennusta muutetaan painamalla näytön oikeassa reunassa olevaa + or – näppäintä. Paina + näppäintä halutessasi lisätä suurennusta tai – näppäintä vähentääksesi suurennusta. Kun laite on telineessä, suurennus alkaa 1.7 -kertaisesta ja voidaan suurentaa 12 -kertaiseksi. Compact 4 HD:ssä on automaattitarkenteinen kamera. Tämä mahdollistaa Compact 4 HD:n käyttämisen ilman telinettä pitämällä sitä kädessäsi. Näin saat suuremman yleiskuvan mutta vähentää minimi ja maksimi suurennusta riippuen laitteen etäisyydestä esineeseen tai tekstiin.

Huom: pienimmässä 1.7 –kertaisessa suurennuksessa tekstirivit saattavat näkyä hieman kaartuvina. Tämä näkyy eniten luettaessa pienikokoista tekstiä. Tämä ”kalansilmä”-ilmiö johtuu linssin laajakulmasta.

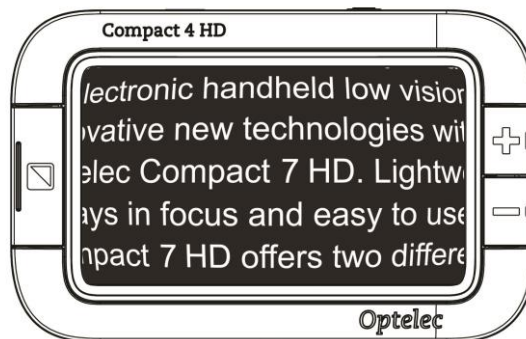

Kalansilmä-ilmiö pienimmillä suurennuksilla.

Katselutilan valinta

Paina Katselutila-näppäintä näytön vasemmassa reunassa. Sinulla on valittavana joku seuraavista katselutiloista:

Kuvatila: näyttää tekstit ja kuvat väreissä

Negatiivitila: suurikontrastinen valkoinen teksti mustalla pohjalla

Positiivitila: suurikontrastinen musta teksti valkoisella pohjalla

Suurikontrastinen **väriyhdistelmä 1**

Suurikontrastinen **väriyhdistelmä 2**

Painamalla Katselutila-näppäintä noin 3 sekuntia kohdevalo syttyy tai sammuu. Katselutilan vaihto sytyttää automaattisesti kohdevalon.

Pysäytysnäppäimen käyttö

Pysäytysnäppäimellä voit pysäyttää kuvan tai tekstin väliaikaisesti näytölle.

- Pidä Compact 4 HD kuvan tai tekstin päällä.
- Paina ja pidä painettuna sinistä pysäytysnäppäintä, joka sijaitsee laitteen päällä oikealla.
 - o Kuulet piippauksen painaessasi näppäintä.
 - o Pidä näppäin painettuna.

- Compact 4 HD:n näytössä näkyy kameran kuva, se ottaa kuvan ja piippaa kaksi kertaa.
- Vapauta pysäytysnäppäin.
- Compact 4 HD näyttää otetun kuvan.
- Kuva tallentuu väliaikaisesti Compact 4 HD:n muistiin. Kun tuot Compact 4 HD:n lähelle silmiäsi, voit tarkastella kuvaa tarkemmin.
- Käytä näytön oikealla puolella olevia suurennusnäppäimiä muuttaaksesi kuvan suurennusta.
- Paina Katselutila-näppäintä muuttaaksesi katselutilaa.
- Paina pysäytysnäppäintä uudelleen vapauttaaksesi kuvan. Voit nyt ottaa uuden pysäytyskuvan.

Huom: jos vapautat pysäytysnäppäimen ennen kuin kuulet kaksi piippausta, kuva ei pysähdy vaan Compact 4 HD palaa takaisin edelliseen suurennus- ja katselutilaan.

3. Akun lataaminen

Compact 4 HD:n lataaminen

Lataa Compact 4 HD liittämällä verkkolaitteen kapea pistoke laitteen vasemmassa reunassa olevaan liitimeen. Yhdistä sitten verkkolaite verkkopistokkeeseen. Liittimen vieressä oleva oranssi LED-valo palaa jatkuvasti, kun Compact 4 HD latautuu. Kun akku on täysin latautunut, valo muuttuu vihreäksi. Jos oranssi LED-valo vilkkuu, latauksessa on ongelma. Irrota tällöin verkkolaite ja yritä uudelleen. *Lämpimässä paikassa tai jos Compact 4 HD laitetaan päälle latauksen aikana, lataaminen voi väliaikaisesti lakata. LED-valo vilkkuu vihreänä. Compact 4 HD:n sulkeminen auttaa alentamaan lämpötilaa akun lataamisen jatkamiseksi.*

Compact 4 HD:n lataaminen kestää noin 3.5 tuntia. Täyteen ladattu Compact 4 HD toimii yhtäjaksoisesti noin 3 tuntia, riippuen virta-asetuksista. Huomioithan, että turvallisuussyistä vain Compact 4 HD:n omaa verkkolaitetta saa käyttää lataamiseen.

Lepotila ja automaattinen sammutus

Compact 4 HD siirtyy automaattisesti lepotilaan ellei mitään näppäintä paineta tai kuvaa vaihdeta. Laite käynnistyy uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä. Neljä minuuttia lepotilaan siirtymisen jälkeen Compact 4 HD sammuu automaattisesti. Painamalla oranssia virta päälle / pois –näppäintä laite käynnistyy uudelleen. Lepotila-aikaa sekä automaattisammutusaikaa voi muuttaa tai ne voi poistaa valikossa. Seuraavassa luvussa kerrotaan miten näitä asetuksia muutetaan.

Akkuvaroitus



Kun akun lataus on alle 5%, näytölle ilmestyy tyhjä akku-kuvake kerran minuutissa 2 sekunnin ajan ja kuuluu piippaus. Aloita lataaminen mahdollisimman nopeasti. Kun akku on tyhjä, laite sammuu automaattisesti.

Jos laite ei käynnisty, tarkista että sen akku on ladattu.

4. Compact 4 HD:n valikko

Information: Näyttää akun latausasteen ja ohjelmaversion



Brightness: Sääda näytön kirkkautta.



Power: Sääda laitteen virta-asetuksia.



Sound: Ääni päälle ja pois.



Light: Kohdevalo päälle ja pois.



Color: Muuta väriyhdistelmiä.



Reset: Alkuasetusten palauttaminen.



Valikon avaaminen



Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.



Liikkuminen valikossa



Käytä + tai – näppäintä liikkuaaksesi valikkojen välillä. Vasemmalla olevalla Katselutilanäppäimellä avaat valitun valikkokohdan ja sen sisällä liikut + tai –



näppäimillä. Katselutilanäppäimellä hyväksyt valitsemasi vaihtoehdon.



Valikosta poistuminen



Poistu valikosta painamalla sekunnin ajan yhtäikaa + ja – näppäimiä.



Valikko: Information

information

Tässä näkyy akun lataustilanne ja nykyinen ohjelmaversio. Tässä kohtaa ei ole mahdollista tehdä muutoksia.

- Valikkoon pääset ja poistut siitä painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Tämä kohta näkyy ensimmäisenä kun valikko avataan.

Valikko: Brightness = Kirkkaus

Tässä kohtaa voidaan muuttaa näytön kirkkautta.

- Siirry valikon Information kohdasta seuraavaan painamalla – näppäintä, jolloin Brightness eli Kirkkaus kohta aukeaa
- Kun haluat muuttaa kirkkautta paina ensin Katselutila-näppäintä.
- Valitse sitten kirkkausaste lisäämällä sitä + näppäimellä ja vähentämällä sitä painamalla – näppäintä. Kirkkausasteita on 5. Oletusarvona on 5.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

Valikko: Power = Virta

Tämän otsakkeen alla on kaksi alivalikkoa:



**Standby
Lepotila**

Asetetaan aika milloin Compact 4 HD siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi. Lepotilasta poistutaan painamalla Katselutila-näppäintä. Oletusarvona lepotila alkaa 2 minuutin kuluttua.



**Power off
Sammutus**

Asetetaan aika milloin Compact 4 HD sammuu automaattisesti. Oletusarvona on 4 minuuttia. Nämä 4 minuuttia käynnistyvät 2 minuutin lepotilan jälkeen. Oletusarvona laite sammuu silloin automaattisesti 6 minuutin jälkeen.


Alivalikko Standby = Lepotila

Lepotilan oletusarvo on 2 minuuttia. Muuta Compact 4 HD:n lepotilan alkamista:

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Paina – näppäintä kunnes olet kohdassa Power=Virta. Hyväksy se painamalla Katselutila-näppäintä.
- Paina – näppäintä jolloin näytölle tulee standby = lepotila. Hyväksy painamalla Katselutila-näppäintä.
- Painamalla + ja – näppäimiä näet nyt vaihtoehdot. Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä. Jos valitset disabled = ei toimintoa, laite ei ollenkaan siirry lepotilaan.

Alivalikko Power off = Sammutus

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku ylöspäin käyttämällä + ja – näppäintä alaspäin. Valitse Power ja hyväksy se painamalla Kuvatila-näppäintä.
- Valitse Power off = Sammutus ja hyväksy painamalla Kuvatila-näppäintä.
- Valitse aika jonka jälkeen laite sammuu painamalla + näppäintä lisäämään aikaa ja – näppäintä vähentämään aikaa. Hyväksy valinta painamalla Katselutila-näppäintä. Valitsemalla disabled = Ei toimintoa hylkää automaattisammutuksen.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutilanäppäintä ja poistu valikosta.

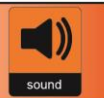Valikko: Sound=Ääni

Oletusarvona on että äänimerkit ovat käytössä. Tässä valikon kohdassa äänimerkit voi myös poistaa käytöstä.

- Avaa valikko painamalla **+** ja **–** näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku ylöspäin käyttämällä **+** ja **–** näppäintä alaspäin. Valitse Sound = Ääni painamalla Katselutila-näppäintä.
- Kun haluat että äänimerkit ovat käytössä liiku **+** and **–** näppäimillä ja valitse ON eli käytössä ja hyväksy se painamalla Katselutila-näppäintä. OFF vaihtoehto tarkoittaa "pois käytöstä".

Valikko: Light = Valo


Oletusarvona kohdevalot ovat käytössä, mutta ne voi myös asettaa pois käytöstä kun käytät laitetta ilman telinettä.

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku valikossa ylöspäin painamalla + näppäintä ja – näppäintä alaspäin. Valitse valikosta kohta Light = valo painamalla Katselutila näppäintä.
- Valitse ON kun haluat että kohdevalot syttyvät ja hyväksy valinta painamalla Katselutila näppäintä, jolloin samalla poistut valikosta. Valitsemalla OFF kohdevalot ovat pois käytöstä.

Valikko: Color = Väri

Compact 4 HD:ssä on valittavana neljä korkeakontrastista keinoväritilaa, joissa voidaan valita tekstin ja taustan väri. Kolme keinoväritilaa voidaan jättää pois käytöstä jos halutaan käyttää vain yhtä vaihtoehtoa.

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku valikossa ylöspäin painamalla + näppäintä ja – näppäintä alaspäin. Valitse valikosta kohta Color eli väri ja hyväksy se painamalla Katselutila näppäintä.
- Painamalla – näppäintä näet näytön alareunassa katselutilan numeron eli 1, 2, 3 tai 4. Yläpuolella näet valitun tekstin ja taustan värit.
- Kun haluat valita uudet värit tekstille ja taustalle paina + tai – näppäintä jolloin näet eri vaihtoehdot. Hyväksy valintasi painamalla Katselutila näppäintä.
- Keinoväritilat 2, 3 ja 4 voidaan valita pois käytöstä. Kun näytössä näkyy iso X ja reunassa lukee disabled, painetaan Katselutila näppäintä niin valittu tila on poistettu käytöstä.

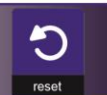Valikko: Reset = Palauta alkuasetukset

Alkuasetukset voidaan palauttaa Compact 4 HD:hen. Kaikki muutetut asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtä aikaa sekunnin ajan.
- Liiku valikossa ylöspäin painamalla + näppäintä ja – näppäintä alaspäin. Valitse valikosta kohta Reset eli Palauta alkuasetukset ja hyväksy se painamalla Katselutila näppäintä.
- Paina + ja – näppäimiä jolloin näet vaihtoehdot YES (KYLLÄ) ja NO (EI). Jos haluat palauttaa alkuasetukset hyväksy YES painamalla Katselutila näppäintä. Valitsemalla NO säilytät olemassaolevat asetukset.

Liite A: Turvallisuus

- Älä altista Compact 4 HD:tä liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle. Näin vältetään tulipalovaara.
- Älä irrota mitään osia Compact 4 HD:sta.
- Pidä Compact 4 HD erossa nesteistä ja kemikaaleista sähkövikojen välttämiseksi.
- Käsittele Compact 4 HD:tä huolellisesti. Kovakourainen käsittely vahingoittaa laitteen sisäosia.
- Älä käytä Compact 4 HD:tä riittämättömästi suojattujen lääkintälaitteiden lähellä.
- Älä yritä avata akkuosastoa tai poistaa akkua.
- Tarvittaessa ota yhteys myyjään jos laite on huollon tarpeessa. **Älä avaa laitetta**, koska takuu raukeaa silloin.
- Irrota aina laite verkosta ennen puhdistamista. Käytä pehmeää, hieman kosteaa (El märkää) liinaa ulkoiseen puhdistukseen. Älä käytä puhdistusaineita tai hankausaineita, koska ne vahingoittavat laitetta.

Jos Compact 4 HD:tä käytetään muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on kerrottu, takuuehdot raukeavat.

Appendix B: Technical information

Suurennus	1.7 – 12 x
Katselutilat	Täysväri Korkeakонтрастinen valkoinen mustalla Korkeakонтрастinen musta valkoisella Korkeakонтрастinen väriyhdistelmä 1 Korkeakонтрастinen väriyhdistelmä 2
Tarkennus	Automaattitarkennus
Näyttö	4.3" TFT, 480 x 270
Korkeakонтрастisuusuhde	800:1
Kirkasvalonäyttö	500 cd/m ²
Mitat ilman telinettä	130 x 82.5 x 27.5 mm
Mitat telineen kanssa	130 x 94 x 73 mm
Akku	noin 3 tuntia yhtäjaksoinen käyttö 3.5 tuntia lataaminen
Li-ion akku	ladattava, 3.7V, 2800 mAh tai 3240mAh
Laitteen paino	230 g
Telineen paino	135 g
Verkkolaite sisäänmeno	100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Verkkolaite ulostulo	DC5V-2A

Käyttöolosuhteet

Lämpötila +10°C - +35°C
Kosteus < 70%, ei kondensaatiota

Säilytys & kuljetusolosuhteet

Lämpötila +10°C - + 40°C
Kosteus < 95%, ei kondensaatiota

Liite C: Takuuehdot

Optelec antaa Compact 4 HD:lle materiaaliin ja työhön liittyvän takuun, joka alkaa toimituspäivästä.

Takuuta ei voi siirtää eikä se koske ryhmiä, ryhmäkäyttäjiä eikä edustajia.

Compact 4 HD on suunniteltu yksityiselle käyttäjälle kotiin ja liikkeellä ollessa. Optelecilla on oikeus korjata tai korvata jokainen Compact 4 HD samantyyppisellä tai parannetulla tuotteella.

Optelec tai sen myyjä ei milloinkaan ole pidettävä vastuullisena mistään välillisestä tai seuraavasta vahingosta. Alkuperäisen käyttäjän korvausvaatimukset on rajoitettu Compact 4 HD:n korvaamiseen samanlaisella. Tämä takuu on voimassa vain kun se on huollettu alkuperäisessä ostomaassa eikä sitä ole avattu. Takuuaikaisesta tai sen jälkeisestä huollosta, ole hyvä ja ota yhteys Optelec myyjääsi.

Optelec ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen käytöstä, paitsi tässä käyttöohjeessa selostetusta. Käyttöohjeen vastainen Compact 4 HD:n käyttö poissulkee sen takuuehdoista.

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

European Union Notice

Products with CE marking comply with the EMC Directive (2004/108/EC), and the Low Voltage Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following international standards:

EMC

EN 55022

EN 55024

FCC

FCC part 15 Class B

Safety

UL 60950-1

WARNING: The use of accessories, transducers and cables, with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of the Compact 4 HD as replacement parts for components, may result in increased emissions or decreased immunity of the Compact 4 HD.



This device bears the CE and FCC approval mark

Federal Communications Commission (FCC) Statement:

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Please dispose of used batteries according to the disposal and recycling regulations that are applicable in your country or region!

www.optelec.com

UDC-02121 Rev. A

