

VENTURI™

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY



VENTURI™ NPWT-system



Brugerhåndbog

Indhold

	Side
Introduktion	2
Komponentliste	2
Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler	3
Sådan anvendes NPWT	
Betjening af vakuumenheden	4
Brugerinformation	5
Batteriinformation	8
Pleje og vedligeholdelse	9
Advarsels- og fejlalarmer	9
Specifikation	11
Producentens overensstemmelseserklæring	12

Introduktion

Tak fordi du har valgt VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT NPWT-systemet (Negative Pressure Wound Therapy) fra Talley Medical. Du har dermed valgt et effektivt produkt til en konkurrencedygtig pris til behandling af mange former for sår, herunder tryksår, bristede operationssår, diabetiske/neuropatiske sår, venøse bensår, postkirurgiske sår, kavitetsdrænage og -behandling, traumatiske sår og præ- og postoperative lapper/grafts.

VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT NPWT-systemet har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande og en alsidig elektrisk letvægtsvakuumenhed med to strømkilder. Der er frit valg mellem el- og batteridrift. Det indbyggede batteri oplades hele tiden optimalt og giver langvarig reservestrøm, når der er behov for det. Batteridriftsmuligheden bevirker, at systemet kan fungere uden strøm fra lysnettet i længere tid, hvilket tillader fuld patientmobilitet under behandlingen, hvis det er nødvendigt (der kan købes en bæretaske med skulderstrop).

NPWT anvendes sammen med VENTURI™-sårlukningssættet, som indeholder gaze (påføres fugtet med saltvand), et silikonedræn og gennemsigtig klæbende film. Der fås flade og runde dræn samt forskellige gazestørrelser, som passer til de forskellige sårtyper, der kan behandles.

VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT NPWT-systemet vil fungere effektivt i lang tid, hvis det installeres og anvendes omhyggeligt. Læs denne brugerhåndbog igennem for at opnå de bedste resultater.

Komponentliste

Talley Medical VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT NPWT-systemet skal bestå af følgende dele – kontroller, at du har alle delene, før apparatet installeres.

- VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT-vakuumenhed
- Lysnetledning med integreret strømforsyning
- 600 ml beholder (leveres monteret på vakuumenhed)
 - kapacitet 600 ml (VENTURI™ AVANTI); 300 ml (VENTURI™ COMPACT)

EKSTRAUDSTYR

- Sæt til lukning af sår – fladt dræn (standard)
- Sæt til lukning af sår – fladt dræn (stort)
- Sæt til lukning af sår – fladt dræn (abdominalt)
- Sæt til lukning af sår – rundt dræn
- 600 ml/300 ml beholder med fortykningsmiddel
- 12 V køretøjsadapter/lader
- Selvklæbende gelplaster
- Y-kobling
- Reservebatteri
- Bæretaske**
- Sengeholder*
- Dropstativ*

* inkluderet som standard med VENTURI™ COMPACT

** kun VENTURI™ AVANTI

Forsigtighedsregler og advarsler

ADVARSEL: Lysnetadapteren skal være jordforbundet.

Før produktet tages i brug, skal du sikre dig, at:

- strømforsyningen er af den type, som er angivet på vakuumenheden
- lysnetledningen ikke er beskadiget, og at den er placeret, så den ikke er i vejen
- systemet ikke anvendes i nærheden af brændbare anæsthesimidler

Vakuumenheden må ikke anbringes på eller i nærheden af en varmekilde.

Brug aldrig lysnetadapteren/laderenheden, mens den er placeret på eller i nærheden af materialer, som er brændbare, eller som kan beskadiges af varme.

Udstyret overholder IEC 60601-1 for elektromagnetisk interferens, men hvis udstyret udsættes for elektromagnetisk interferens uden for dette, skal enheden nulstilles.

Hvis kanisteren ikke er monteret på VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT pumpen, er det vigtigt, at åbningen på enhedens bagside (fig. 1) ikke er blokeret eller tildækket (f.eks. med en mærkat). Se servicemanualen for yderligere oplysninger.



Figuren viser VENTURI™ AVANTI.
VENTURI™ COMPACT ligner denne model

FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår.

Sådan anvendes NPWT

NB! Der skal anvendes et sårlukningssæt sammen med VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT-systemet for at udføre vakuumbehandlingen, også kaldet NPWT (se side 2 for de forskellige muligheder).

FORSIGTIG! Sundhedsmedarbejderen skal anvende sin sundhedsfaglige dømmekraft, når systemet anvendes. Før brug skal den/de sundhedsmedarbejder/-e, som behandler såret, vurdere, hvordan systemet bedst anvendes til det enkelte sår.

1. Fjern al emballage fra vakuumenheden.
2. Medmindre kanisteren allerede er på plads, monteres den på den flade side af pumpen ved at bringe tilretningsstifterne på bagsiden i stilling og dreje

Sådan anvendes NPWT (fortsat)

låsegrebet 1/4 omgang med uret, så den sidder fast. Kontroller, at beholderen sidder korrekt. Ellers vises alarmen INGEN BEHOLDER, og vakuumenheden kan ikke køre.

3. Klargør og forsegl såret som beskrevet i vejledningen til sårlukningssettet.
4. Fastgør rørtilslutningen til kanisteren på VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT pumpen ved at bringe stiften på rørkonnektoren på linje med hakket på kanisterrørsforbindelsen i øverste hjørne af kanisteren, idet der drejes med uret for at låse.
5. **BETJENING AF VAKUUMENHEDEN:** Tænd for vakuumenheden for at starte sugningen, og vælg enten lysnet- eller batteridrift:

- a) Hvis der anvendes lysnet, sættes den lille ende af strømkablet i siden af VENTURI™-vakuumenheden, og den anden ende sættes i en stikkontakt.

NB! Batteriet lader, når enheden er tilsluttet lysnettet (angivet med batteriladestatusikonet på displayet, der ruller fra venstre til højre), og fungerer automatisk som reserve, hvis lysnettet svigter. Det anbefales at bruge lysnettet, når det er muligt, da det vil sikre, at batteriet er fuldt opladet, når der er behov for det.

- b) Tryk på START/STOP-knappen for at starte og vise STAND-BY -tilstanden (pumpen bipper, og terapitilstand, driftstryk og batteriets opladningsstatus vises).
- c) Pumpen skifter automatisk til tilstanden kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem kontinuerlig og intermitterende terapitilstand ved at trykke på og holde knappen TERAPITILSTAND nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden er skiftet. Juster om nødvendigt vakuumniveauet med knapperne pil op og pil ned.
- d) Tryk på START/STOP-knappen igen for at initialisere og køre med vakuumenheden.

NB! Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter, at vakuumenheden starter, ved hjælp af pil OP og NED. Pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et 'L' på displayet. Tryk på knappen LÅS OP og hold den nede, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner. Displayet lyser kun kort tid efter knaptryk, når der køres på batteri.

6. Når vakuumenheden kører, observeres sårstedet. Forbindingen skal trække sig synligt sammen og blive fast og "rosinagtig" ved berøring. Hvis forbindingen ikke trækker sig sammen, er den ikke korrekt forseglet. Forstærk forseglingen af forbindingen, og/eller juster drænet, og aktiver sugningen igen.

Sådan anvendes NPWT (fortsat)

7. Forbindingen skiftes eller fjernes ved at låse op for pumpen (tryk på og hold LÅS OP), indtil pumpen bipper), hvorpå START/STOP -knappen trykkes ned og holdes, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstand. Sæt en klemme på sårlukningssætslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen på beholderen. Kassér det brugte sårlukningssæt ifølge de lokale regler for klinisk affald. Påfør nyt sårplejesæt efter behov og fortsæt NPWT.
8. Beholderen skal udskiftes efter behov eller hver uge. Når beholderen skal skiftes, skal vakuumenheden være i standby (hvis den stadig kører, skal LÅS OP -knappen trykkes ned og holdes efterfulgt af START/STOP -knappen). Sæt en klemme på forbindelsesslangen, og fjern den ved at dreje mod uret og løfte den ud af slangekoblingen (den kan sluttes til en ny beholder, og klemmen tages af, hvis forbindelsen ikke skiftes). Tag tætningsproppen af i det øverste hjørne af kanisteren og brug den til at lukke rørforbindelsen til. Drej låseknappen en kvart omgang mod uret, og fjern beholderen. Kassér beholderen ifølge de lokale regler for klinisk affald. Hvis vakuumbehandlingen skal fortsættes, monteres en ny beholder, og sårlukningssættets slange tilsluttes som tidligere beskrevet.
9. Pumpen stoppes ved at trykke på og holde knappen LÅS OP, indtil pumpen bipper, og 'L' forsvinder fra displayet. Tryk og hold derpå START/STOP -knappen, indtil pumpen bipper tre gange og vender tilbage til standby tilstanden. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten.
10. Anbring brugerhåndbogen et sikkert sted til fremtidig brug.

Brugerinformation

- VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et 'L' på displayet. Tryk på og hold LÅS OP -knappen, indtil elmotoren bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standby tilstand). Elmotoren låser igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt.

Bemærk, at der skal være låst op for VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT pumpen, når den kører, inden den kan bringes tilbage til standby tilstand, dvs. pumpen kan ikke sættes i standby tilstand, når der står 'L' på displayet.

Brugerinformation (fortsat)

- Under operationen bør aggregatet anbringes opret på en vandret flade med displayet øverst. VENTURI™ AVANTI aggregatet kan anbringes i den valgbare metalholder, til brug ved sengesiden eller ophængt på en IV-stang med det valgbare beslag. VENTURI™ COMPACT leveres med et beslag til ophængning på IV-stang. Med henblik på at give patienten fuld mobilitet under behandlingen kan begge aggregater også anbringes i tasken der medfølger. I alle tilfælde skal vakuumenheden/beholderen holdes opret under brug for at sikre korrekt drift. VENTURI™ COMPACT viser en advarsel, hvis aggregatet hælder for meget.

KNAPFUNKTIONER



START/STOP

Tryk på denne knap for at aktivere standbytilstand før kørsel med vakuumenheden. Tryk på den igen for at starte vakuumenheden. Tryk og hold, mens pumpen kører (og er låst op) for at stoppe driften og vende tilbage til standbytilstand. Ved batteridrift slukker vakuumenheden efter et minut uden aktivitet. Ved lysnetdrift slukkes der ved at tage lysnetledningen ud af vakuumenheden eller slukke på stikkontakten.



VAKUUMNIVEAU

Vakuumniveauet kan justeres i standbytilstand og i op til 1 minut efter sidste knaptryk, når vakuumenheden kører, ved hjælp af pil OP og NED. Trykket kan justeres i intervaller på 5 mmHg til værdier på mellem 10 mmHg og 120 mmHg alt efter behandlingsbehovet. Det mest almindelige trykniveau er 60-80 mmHg. Vakuumenheden starter ved et standardtryk på 80 mmHg. Det valgte vakuumniveau vises på displayet.



TERAPITILSTAND

VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT pumpen har både kontinuerlige og intermitterende terapitilstande. Når der tændes for pumpen, vælger den automatisk indstillingen kontinuerlig terapi. Der skiftes mellem terapitilstandene ved at trykke på knappen TERAPITILSTAND og holde den nede, indtil pumpen bipper som bekræftelse på, at tilstanden skifter. Når pumpen er i intermitterende tilstand, giver den kun vakuumerapi i perioder af 5 minutter efterfulgt af en 2 minutters hvileperiode. Den valgte terapitilstand vises på pumpens display og kan ændres i enten standbytilstanden eller i (ulåst) kørselstilstand



FRA

Tryk på denne knap for at fjerne en alarm, både lyd og visning på displayet.



LÅS OP/LYS

VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT pumpen låser automatisk 1 minut efter, at der sidst blev trykket på en knap under kørslen for at undgå utilsigtet aktivering af knapfunktionerne (undtagen FRA), hvilket angives med et 'L' på displayet. Tryk på og hold LÅS OP knappen, indtil pumpen bipper, hvis der er brug for andre knapfunktioner (f.eks. skifte terapitilstand eller vakuumniveau eller bringe pumpen tilbage til standbytilstand). Elmotoren låser

Brugerinformation (fortsat)

igen 1 minut efter, at den sidste knap blev anvendt. Når der trykkes på denne knap, lyser displayet i 10 sekunder, hvis vakuumenheden kører på batteri (displayet lyser altid, når vakuumenheden kører på lysnettet).

FUNKTIONER SOM VÆLGES AF BRUGER (KUN VENTURI™ COMPACT)

Følgende funktioner kan vælges fra en brugermenu:-

- Valg af sprog
- Tippealarm, slå til eller fra
- Intern kontaminationssensor, slå til eller fra
- Alarm for blokeret rør, slå til eller fra
- Batteri inert. **Bemærk, at det er vigtigt, at batteriet sættes i denne tilstand før international transport.**

Menuen åbnes ved at trykke i tre sekunder på oplåsningstasten. Piletasten ruller til funktionerne vist herover, og tasten til valg af tilstand kan bruges til at tænde og slukke for funktionen, så vel som vælge den. Sproget kan vælges ved at holde tilstandstasten trykket ned, indtil det ønskede sprog vises. Når tilstandstasten slippes, indstilles displayet til det valgte sprog.

Hvis man trykker på oplåsningstasten, sættes enheden tilbage i standby.

FASTGØRELSE AF DROPSTATIV (KUN VENTURI™ COMPACT)

VENTURI™ COMPACT leveres med et dropstativbeslag, der giver sikker indsættelse og yderligere mobilitet.

- Dropstativbeslaget monteres ved at skrue de tre skruer på beslaget ind i de tilsvarende tre huller på undersiden af VENTURI™ COMPACT. Skrueerne kan strammes med hånden og kræver ikke et højt moment eller værktøj.
- Brug det sorte håndtag til at montere beslaget med VENTURI™ COMPACT påsat og fastgøre det til det lodrette dropstativ. Beslaget passer til dropstativer på mellem 19 mm og 26 mm i diameter.
- Når dropstativbeslaget afmonteres fra VENTURI™ COMPACT, bemærkes det, at de tre skruer er "fanget" og bliver siddende på beslaget, når de løsnes, så de ikke mister.

Et påmonteringsbeslag til dropstativet er til rådighed som valgfrit tilbehør til VENTURI™ AVANTI. Instruktioner i brugen leveres sammen med delen.

Batteriinformation

- Et fuldt opladet batteri skal kunne drive enheden kontinuerligt i mindst 24 timer.
- Ladestatus vises på vakuumenhedens display, når den er i standby eller kører.
- Da batterierne automatisk lades op efter behov, når systemet kører på lysnettet, skal batterimodulet ikke fjernes eller skiftes ved normal brug.
- Brug kun elkabel eller den valgbare vognadapter, der følger med systemet.
- Det afhænger af, hvor meget de bruges. Når vakuumenhedens driftstider er mærkbart kortere end normalt, skal batteriet udskiftes.
- Brug aldrig et batteri, som er beskadiget eller slidt op. Brug kun batteriet til det formål, det er beregnet til.
- **Kun til VENTURI™ AVANTI:** Da batteripakken kan udtages, er den beskyttet mod kortslutning. Kortslutning kan forekomme, når en metalgenstand (mønt, clips, pen osv.) laver en direkte forbindelse mellem guldkontakterne på siden af batteriet, f.eks. når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis batteriet kortsluttes, forbinder den interne nulstilbare sikring kredsløbet igen efter ca. 30 sekunder.
- **Kun til VENTURI™ AVANTI:** Hvis batteriet efterlades på varme eller kolde steder, f.eks. en lukket bil om sommeren eller om vinteren, mindskes batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet på steder med en temperatur ved mellem 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Kapaciteten bliver især begrænset ved temperaturer på under -10 °C (14 °F).
- Batteriet må ikke kastes på åben ild eller bortskaffes sammen med den almindelige dagrenovation. Det skal genbruges eller bortskaffes korrekt eller indleveres til forhandleren, som skal bortskaffe det i overensstemmelse med WEEE-direktivet.
- Batteriet kan ikke indleveres til service, og det skal udskiftes, hvis der er fejl på det (angives med fejlen "O/C Batt", som vises i stedet for batteriets ladestatusikon).

OPLADNING AF BATTERIET

Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, oplades det automatisk, når vakuumenheden tilsluttes lysnettet. Batteriet lader til optimalt niveau ifølge tidligere lysnetstrømforbrug og opladning i den foregående uge.

UDSKIFTNING AF BATTERIET (Kun til VENTURI™ AVANTI)

Hvis det bliver nødvendigt at udskifte batteriet, skal du løsne skruen til batteridækslet og tage dækslet af. Batterimodulet falder ud. Udskift batteriet. Bemærk, at det kun kan vende i en retning. Sæt dækslet på igen, og skru skruen i igen. Undgå at overspænde skruen.

PS: For VENTURI™ COMPACT monteres batteriet inde i enheden og er ikke tilgængelig for brugere. Udskiftning af batteri må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

Pleje og vedligeholdelse

VAKUUMENHED

Afbryd altid strømforsyningen til VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT NPWT-vakuumenheden helt (hvis relevant) før rengøring. Vakuumenheden kan tørres af med en fugtig klud eller en spritserviet. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. FORSIGTIG! Må ikke nedsænkes i vand.

Enheden indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren, og service må kun udføres af en kompetent elektriker eller tekniker, eller enheden skal indleveres til Talley Medical eller den lokale autoriserede forhandler. Alle Talley Medical-produkter skal regelmæssigt til service hos Talley Medical eller en autoriseret forhandler for at overholde garantibetingelserne.

BEMÆRK: Før udstyret indleveres til service hos Talley Medical, skal det kontrolleres, at det er korrekt rengjort og desinficeret.

BEHOLDERE

Beholderne er kun beregnet til engangsbrug.

Advarsels- og fejlalarmer

Alle hørbare alarmer kan slukkes ved at trykke på FRA-knappen en gang*. Hvis der opstår en fejl, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen.

ADVARSELSALARMER

Ingen beholder – vises, hvis beholderen mangler eller ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan ikke køre, når denne advarsel vises. Kontroller, at beholderen er korrekt placeret og monteret som beskrevet på side 3.

No Battery – vises, hvis batteriet ikke er korrekt monteret. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontroller batteriinstallationen (NB! Batteriet kan kun vende en vej).

Batteri lavt (vises kun under batteridrift) – vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmer. Sæt stikket i en stikkontakt for at oplade batteriet.

Beholder fuld – vises for at advare om, at beholderen er ved at være fyldt og skal skiftes. Vakuumenheden stopper, og den visuelle/hørbare alarm fortsætter, indtil der trykkes på knappen START/STOP, eller beholderen fjernes. Begge dele fjerner alarmer og sætter vakuumenheden på standby. Udskift beholderen som beskrevet på side 5.

Advarsels- og fejlalmer (fortsat)

PS: Lydalarmeren 'kanister fuld' kan slukkes ved at trykke på FRA -knappen. Hvis kanisteren ikke fjernes/udskiftes, vil lydalarmeren imidlertid lyde igen efter 10 minutter.

Lavt vakuum – vises, hvis undertrykket kommer under det tilladte niveau. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Kontroller, at forbindingen er helt forseglet, og at alle slangetilslutninger er tætte. Tryk på FRA-knappen for at slukke/fjerne alarmeren. Bemærk, at alarmeren kommer igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen opstår igen.

FEJLALARMER

O/C Batt (vises i stedet for batteriladestatusikonet) – angiver, at batteriet ikke kan bruges, da det ikke kan modtage en opladning. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical for at bestille et nyt batteri.

CCT Fail (vises i stedet for batteriladestatusikonet) – angiver, at ladefunktionen ikke virker på grund af en PCB-fejl. Vakuumenheden kan kun køre på strøm fra lysnettet, når denne advarsel er vist. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen.

Hvis en af følgende fejl vises, stopper vakuumenheden: PUMP FAULT, TRIAC FAULT, PUMPE ÅBEN, PUMPE KORT, UDLØSERTAST, BATTERY FAULT. Hvis en af disse fejl opstår, trykkes der på FRA-knappen for at nulstille vakuumenheden. Kontakt Talley Medical, hvis fejlen ikke forsvinder, eller hvis den opstår igen.

EMI Fault – angiver, at enheden registrerer, at tryksensorforstærkeren er påvirket negativt af eksterne radiobølger. Vakuumenheden kører videre, når denne advarsel vises. Tryk på FRA-knappen for at slukke for alarmeren. Alarmeren forsvinder, når interferensen forsvinder.

VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT-vakuumenheden viser også følgende oplysninger:

- Tid til service – Kontakt Talley Medical for at arrangere service
- Ukalibreret – Kontakt Talley Medical for rekalkibrering

Vakuumenheden kører videre, når disse advarsler vises.

Kontakt Talley Medical eller din lokale autoriserede forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende systemet.

Specifikation

VAKUUMENHED

Modelref:	Venturi v.II TG600/07	Venturi v.II TG600/08
Konstruktion:	Flammehæmmende ABS	Flammehæmmende ABS
Mål:	210mm x 205mm x 105mm	161mm x 155mm x 90mm
Vægt:	2.2 kg	1.0 kg
Lysnetkabel:	3 meter	3 meter
Lysnetsspænding:	230V +/- 10% 50Hz	230V +/- 10% 50Hz
Driftsspænding:	6V	3.7V
Spidsstrøm:	850mA RMS	450mA RMS
Strømforsbrug ved maks. belastning:	7W	12W
Vakuumanvendelse:	Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende	Kontinuerlig (standard terapi) eller intermitterende
Trykinterval:	10 - 120mmHg	10 - 120mmHg

ENGANGSBEHOLDER

Konstruktion:	ABS gen.sigt., røgfarget grå, med tekstur (inkl. 2 x 1.75 g pose med opløseligt tørremiddel)	
Mål:	212mm x 204mm x 32mm	156mm x 163mm x 45mm
Kapacitet:	600ml	300ml

Talley Medicals produkter fremstilles i overensstemmelse med BSI, IEC, UL og andre europæiske sikkerhedsstandarder. Talley Medical designer og fremstiller produkter i overensstemmelse med kravene i ISO9001:2008, ISO13485:2003 og direktiv (93/42/EØF) bilag II (ekskl. paragraf 4).

Talley Medical forbeholder sig ret til i forbindelse med sin løbende produktudvikling at ændre specifikationen af et produkt uden forudgående varsel. Vores standardbetingelser gælder.

FORKLARING AF SYMBOLER OG UDSAGN PÅ MÆRKATER



BEMÆRK Kig i de medfølgende dokumenter



Må ikke bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation



Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF

ADVARSEL

Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan opstå alvorlige skader eller negative reaktioner ved brug eller misbrug af enheden



Elektrisk beskyttelse type B

Dette udsagn fortæller brugeren, at der kan være et problem med systemet i forbindelse med brug eller misbrug



Klasse II-udstyr (dobbeltisoleret)

FORSIGTIG



Producentens overensstemmelseserklæring

PRODUKTIDENTIFIKATION

PRODUKT:- VENTURI NPWT-SYSTEM (Venturi v.II)

ERKLÆRING

Opfylder direktivet 93/42/EØF bilag II (ekskl. paragraf 4) som ændret 2007/47/EU

Testet af: Hursley EMC Services
Underwriters Laboratories Inc.

Standarder: EN 60601-1-2:2001
UL 60601-1 2003
CAN/CSA C22.2 No 601.1
IEC/EN 60601-1



Testrapport nr.: EMC-arkiv: 07R275
UL-arkiv:: E215705

Producent: Talley Group Limited, Premier Way, Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, Hampshire SO51 9DQ, UK

Bemyndiget organ: Er underlagt proceduren i bilag 2 i direktiv 93/42/EØF under tilsyn af bemyndiget organ nummer 0120
SGS United Kingdom Limited, Unit 202B,
Worle Parkway, Somerset BS22 6WA

Underskrift:  Datum: 12/10/09

Talley Group Limited

Premier Way, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9DQ England
Tel: +44 (0)1794 503500 Fax: +44 (0)1794 503555 Email: sales@talleygroup.com

Directors: C P Evans, J J H Evans, M B Webb, K P Mearns Registered in England No. 520386 Registered Office: Torrington House, 47 Holywell Hill, St Albans, Herts AL1 1HD

USER MANUAL PART NUMBER 50-02-15-108/DA

TALLEY GROUP LIMITED
Premier Way, Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, Hants SO51 9DQ, England
Tel: +44(0)1794 503500
e-mail: sales@talleygroup.com

TALLEY MEDICAL USA
1070 E. Wieland Road, Lansing, MI 48906, USA
USA Tel: 888 259 9994
USA e-mail: talleyamerica@talleygroup.com

www.talleygroup.com

